
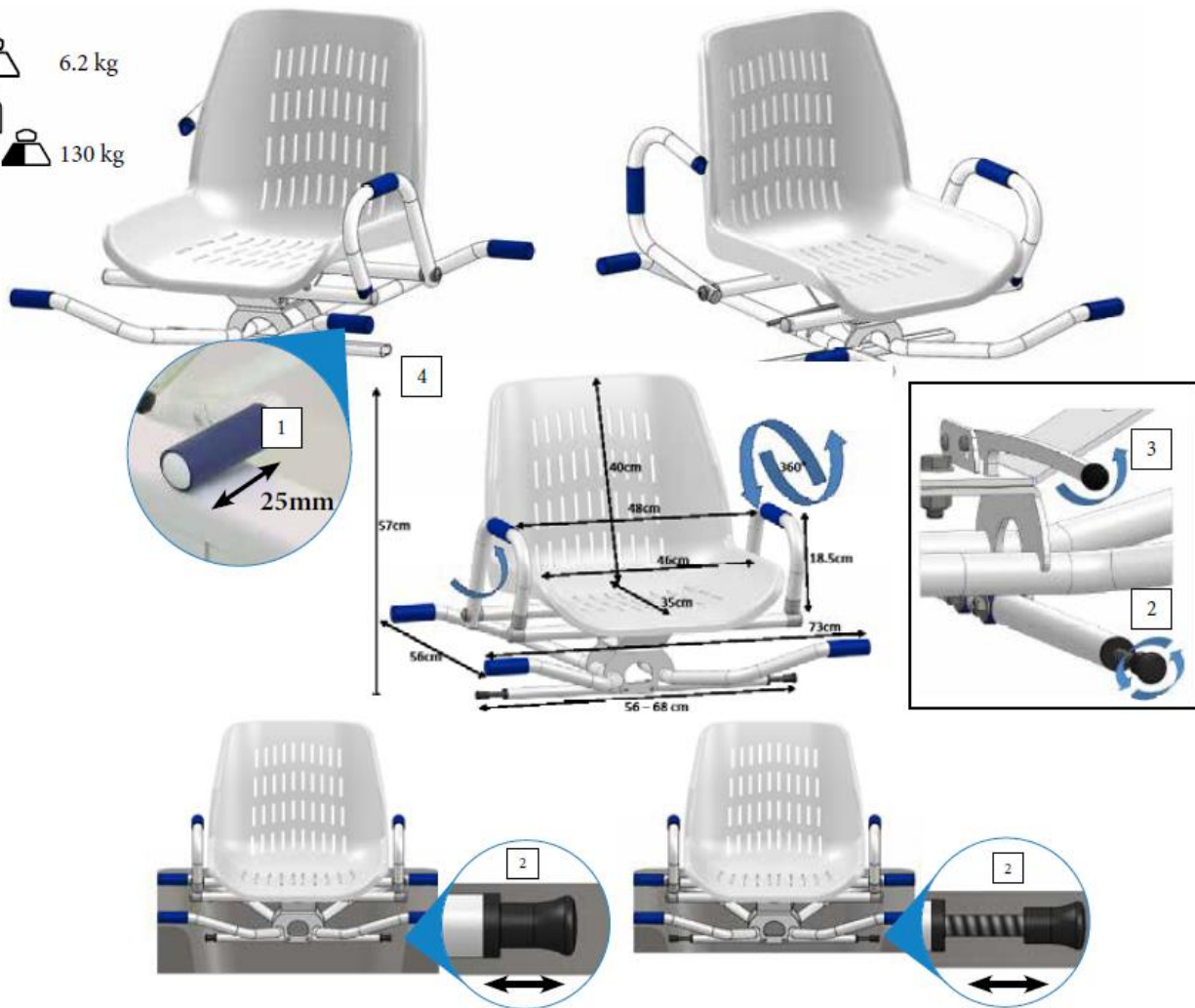


Drejeligt badekarssæde

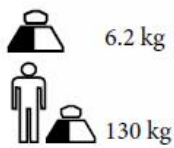

Læs følgende vejledning:

1. Sikkerhedsinstruktioner

- Adviser ALTID med fysioterapeut, plejepersonale eller leverandør for at få rette indstilling og korrekt brug af produktet
- Opbevar ikke underdørs eller i direkte sollys
- Skal ikke bruges under ekstreme temperaturer (over 38° eller under 0°)
- Gennemtjek med grundighed alle dele af produktet inden brug og sørg for at alle skruer er strammet
- Se venligst efter revner og skader, i særdeles ved sæde og rør
- Brug sædet på forsvarlig vis: stå ikke på sædet
- Vær ALTID opmærksom på at max brugervægt overholdes
- Ingen modifikationer må foretages på produktet. Brug kun ægte reservedele ved udskiftning
- Efter installation af sædet: sikr at alt er låst og stabilt
- Sædet skal være låst i rette position og ikke være rotérbart ved badning
- Vær forsigtig når der sidde ned på eller rejses op fra produkt



HMN since 1934

2. Installation

Formålet ved produktet er at yde en støtte, når man skal ind og ud af badekarret. Det er designet til at sidde ovenpå badekarret med mulighed for at rotere 360°. Det drejelige badekarssæde passer til de fleste badekar i standard størrelse.

Opmærksom! Plastiksædet er udstyret med huller, hvor vandet kan løbe fra. I meget få tilfælde kan disse medføre, at genitalier eller rektal prolaps sidder fast i hullerne, hvilket kan føre til seriøse smerter og skader. Hvis i tvivl, kontakt venligst fysioterapeut, plejepersonale eller leverandør for at afgøre, om det er sikkert at bruge. Alternativt kan der placeres materiale på sædet, så skader ikke er muligt.

Installation:

Produktet leveres klar til at installation og brug.

1. Placér sædet i badekarret. Mindst 25mm af hver blå skridsikre arm skal hvile på siderne af badekarret. Tjek stabilitet, sædet skal ikke være ustabil [1].
2. Sikr rammen ved at skrue de to fikseringsskruer [2] indtil de er skruet sikkert fast til begge sider af badekarret. Pas på med ikke at skrue så stramt, at du ødelægger fikseringsskruerne.
3. Løft låsehåndtaget (placeret under sædet) for at rotere sædet [3].
4. Begge armlæn er svingbare [4].

3. Rengøring

Det drejelige badekarssæde skal rengøres regelmæssigt ved mildt rengøringsmiddel og blød klud.

4. Materialer

Produktet er produceret i stål (der ikke ruster), hvor rørene er behandlet mod rust og dækket i epoxymaling. Plastiksædet er produceret i polypropylen samt forskellige plastikkomponenter.

5. Bortskaffelse

Bortskaffelse af produktet skal ske i overensstemmelse med lokale affaldshåndteringsregulativer.

6. Tekniske specifikationer

Varenummer: 610253

Badekarsbredde: 56-68 cm (indvendig) / 73 cm (udvendig). Max belastning: 130 kg

Produktet har en to-årig garanti fra købsdato mod enhver produktionsfejl. Test: DIN-EN-ISO 9999 (08/98): 09 33 03



Dato: 17.08.18



HMN since 1934