

Løft fra siddende stilling:

Sejlet holdes med benstøtterne nedad. Rygstykket skubbes ned bag ryg til det når sædet. Skub det ikke ind under patienten. Benstøtterne føres frem langs benene i begge sider og trækkes ind under hvert lår (skal ligge helt glat). De øverste ophængspunkter på rygstykket fastgøres på åg. Benstøtterne føres under hvert lår og krydses. Ophængspunkterne fastgøres på åg. Når patienten løftes, lukker sejlet automatisk sammen i bunden. Der er dog stadig en tiltrækkelig stor åbning til f.eks. toiletbesøg

Mærkelast: 250 Kg (300 Kg).

Vasketemperatur: 65° anbefales / tåler 80°

Materialer: Grå Bomuld + polyester

Nylon / Polyester

Net nylon bad

Løftestropperne har farvekoder for at lette justeringen af patientens siddevinkel.

Faaborg Rehab Technic

Smedemestervej 9, DK-5600 Faaborg. Tlf. + 45 70 20 55 53

E-mail: fr@faaborg-rehab.dk www.faaborg-rehab.dk




Brugsanvisning sejl.

Løftesejl.



Helsejl

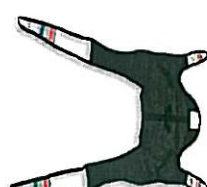

Halvsejl



Toiletsejl

Løft fra liggende stilling:

Sejlet rulles sammen til midt på rygstykket. Patienten rulles om på siden og sejllets rullede rygstykke lægges mod patientens ryg så den nederste kant af rygstykket er ud for midten af patientens haleben. Patienten rulles derefter om på den anden side hen over sejlet, hvis ene halvdel derefter rulles ud. Patienten rulles tilbage på ryggen – på plads i sejlet. Benstøtterne føres under hvert lår og krydses.

Ophængspunkterne fastgøres på åg.

Hvis seng/ leje har eleverbart hovedgærde bør dette benyttes.

Ellers kan hjælpere støtte patienten til siddende stilling.

FABORG REHAB TECHNIC

