

Producent:
Medical Engineering Consultants
Greville Park Avenue,
Ashted, Surrey, KT21 2QS



CerviStøtte



Individuel tilpassning

- 1) Klem sammen eller træk ud i støtten, så den passer til kæbens form.
- 2) Klem sammen eller træk ud i støtten for ønskede extension.
- 3) Bøj støtten, så den ligger op mod brystet og ikke op af nøglebenet.

Rengøringsanvisning

CerviStøtten kan aftørres med en fugtig sæbesvamp og varmt sæbevand.
Skyl efter med kold vand og lad den lufttørre. Rengøres efter behov.

Reserve dele

CerviStøtten og reserve dele hertil leveres af Anatomic SITT A/S.

Kombinationer

For eventuelle kombinationer venligst kontakt Anatomic SITT A/S.

Reklamationsret

2 år mod fabriktionsfejl.

Skrotning

En defekt del eller produkt afmonteres og skottes. Delene skal sorteres efter materialetype.

Cervistøtten tilbydes i seks størrelser. For at bestille den rigtige størrelse, skal man måle fra kæbens start til spidsen af hagen. Se mål A, fig 1.

Varenr.	Størrelse	Målt i cm	HMI-nr.
506	Spædbørn	7,0	30084
505	Børn	7,5	30083
504	Junior	9,0	30082
503	Small	10,0	30081
502	Medium	11,5	30080
501	Large	13,0	30079
511	Nakkepude nr. 1, voksen, (S, M & L)		
5119	Nakkepude nr. 1, børn, (Spædbørn, Børn, Junior)		
512	Nakkepude nr. 2, voksen, (S, M & L)		
5129	Nakkepude nr. 2, børn, (Spædbørn, Børn, Junior)		
541	Stabiliserende afstiver (passer til L & M)		
542	Stabiliserende afstiver (passer til S & Jr.)		
543	Stabiliserende afstiver (passer til Barn & Spædbarn)		

VIGTIGT!


- Tilpasning af CerviStøtten skal udføres af terapeut eller anden faglig person.
- Kontroller at størrelsen passer, se billedet ovenfor.
- Fastgør ikke CerviStøtten til npoget andet udstyr.



Bok 6137, SE-600 06 NORRÅKÖPING
Tel: 011-16 18 00, Fax 011-16 20 05
www.anatomicstt.com



Vilngårvej 4, 8240 RISSAUV
Tel: 86-17 01 74, Fax: 86-17 01 75
www.anatomicstt.com

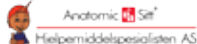

Postboks 92 Nyborg, N-5871 BERGEN
Tel: 55-39 20 80, Fax 55-39 20 90
www.anatomicstt.com



Postboks 626, N-1411 KOLBOTTN
Tel: 66-81 60 70, Fax 66-81 60 71
www.hmi-spets.no

