

## **Denne brugsanvisning bør læses omhyggeligt før ibrugtagning**

### Indledning

Tak fordi De har valgt vort produkt OPTRON PCT III. PCT III betyder *Personlig Computer Tavlelæseapparat – generation 3*. De kan således ikke kun anvende læseapparatet til læsning af tidsskrifter og bøger – men også i skolen, på studiet, på arbejdspladsen eller i husholdningen. Anvendelsesområdet er meget bredt. Prøv alle mulighederne. For at opnå størst glæde og nytte af PCT III bør følgende punkter bemærkes.

### Vedligeholdelse

OPTRON PCT III kræver ingen speciel vedligehold. Den skal kun støves af. Undgå dog enhver kontakt med fugt.

### Fejlsøgning

Mange fejl opstår ved fejlbetjening eller løse kabler. Kontroller at alle stikforbindelser er korrekt isat – før de eventuelt ringer til vor serviceafdeling.

### Service


Vores produkt PCT III er sikkerhedstestet og produceret med stor omhu. Skulle der trods alt forekomme en fejl så ring til os på telefon 43 451 451.

Vi vil glæde os, hvis De som bruger ville hjælpe til med at gøre produktet endnu bedre. Kontakt os telefonisk eller skriftligt om forbedringer eller mangler ved apparatet. Alle OPTRON-produkter bliver bedre i samarbejde med vore brugere.

**Steen Scheffler ApS**, Paul Bergsøes Vej 2, 2600 Glostrup  
**Telefon 43 451 451**, Fax 43 451 199

*[www.svagsyn.dk](http://www.svagsyn.dk)*

## Betjeningspanel

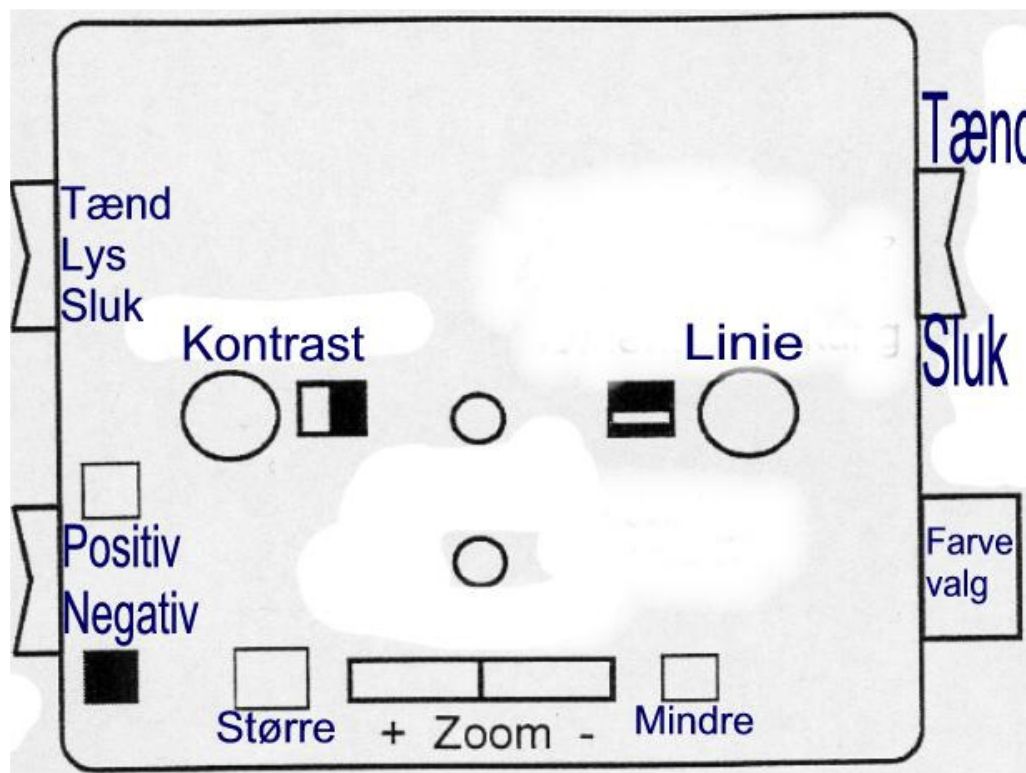

Med lyskontakten kan halogenspot-lampen tændes og slukkes efter behov. PCT III har et meget lysfølsomt kamera som også ved let dagslys gengiver et godt billede.

Med positiv/Negativ-kontakten vælger De om baggrunden skal være hvid og skriften sort – eller om baggrunden skal være sort og skriften hvid. Med ægte farvegengivelse er dette **ikke** muligt.

Med kontrast-drejeknappen indstilles den ønskede kontrast.


Den trinløse "lineal" anvendes til at markere et udsnit til bedre orientering.

Med zoom-vippekontakten indstilles den ønskede forstørrelse. Med tryk ved "stor firkant" bliver billedet større og med tryk ved "lille firkant" bliver billedet mindre.

På højre side af betjeningspanelet sidder farvevælgeren (drejeknap) til de forskellige farvemuligheder. Der kan vælges mellem *grøn*, *cyan*, *margenta*, *gul* eller *sort/hvid* samt ægte farvegengivelse.

Når den røde kontrollampe er tændt er *autofokus* aktiv. Hvis den røde kontakt under lampen aktiveres bliver *autofokus* frakoblet. Til normal brug bør *autofokus* altid være tilkoblet.

## Bagside af Betjeningspanel

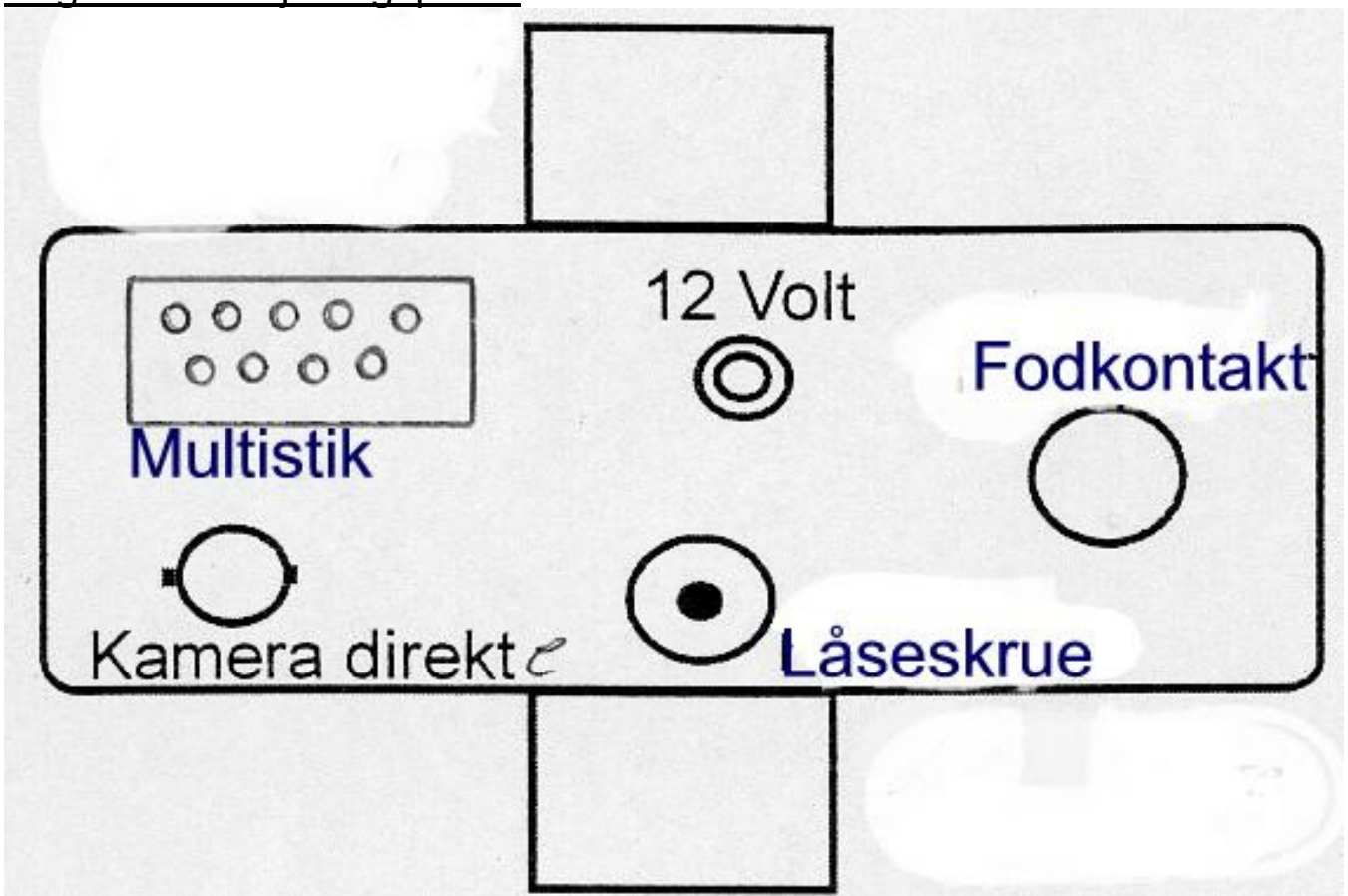

I bøsningen "12 Volt" sættes stikket fra strømforsyningen.

Som ekstratilbehør kan der leveres en fodkontakt til styring af zoom og autofokus. Kablet fra fodkontakten sættes i bøsningen "fodkontakt".


I multistikdåsen "TV / Monitor" monteres kablet med multistikket og scartstikket i den anden ende.

Ved anvendelse af specialtilbehør benyttes i visse tilfælde stikdåsen "kamara direkt". Spørg venligst inden brug.

Med fingerskruen låses bæreamen fast til bordklemmen.

## Kamerahoved

Nærlinse "parkeret"

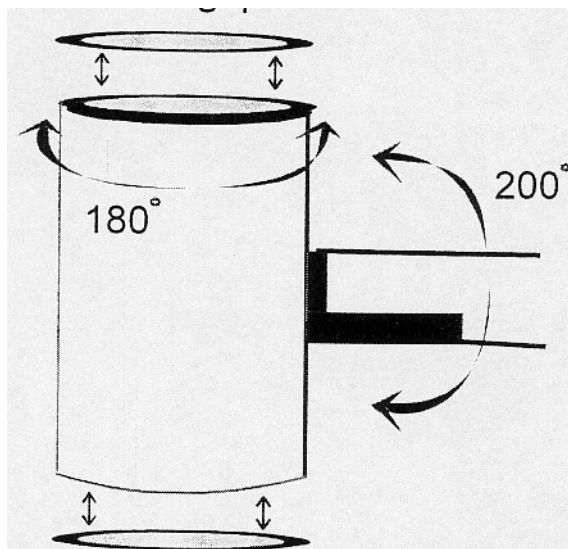

Nærlinse i brug

Kamerahovedet kan drejes 200 grader. Dette er for eksempel nødvendigt hvis De indstiller kameraet på et fjernt objekt og herefter igen skla tilbage til normal klsstilling. Kameraet kan drejes i selve huset med den sorte ring i toppen af huset. De kan således indstille betragtningsvinklen. Nærlinsen "parkeres" på toppen af huset når den ikke anvendes – magneter fastholder den ved drejning af huset.

Deres OPTRON PCT III er leveret af:

**Steen Scheffler ApS**  
Paul Bergsøes Vej 2  
2600 Glostrup

**Telefon 43 451 451**  
Fax 43 451 199

Email: S@scheffler.dk

Internet: [www.svagsyn.dk](http://www.svagsyn.dk)