


## Bruksanvisning

Svensk  
7SV60148  
2009-07-07

### Gäller för följande modeller:

Planlyft Bläckfisken	art. nr. 3156055
Planlyft Bläckfisken	art. nr. 3156056

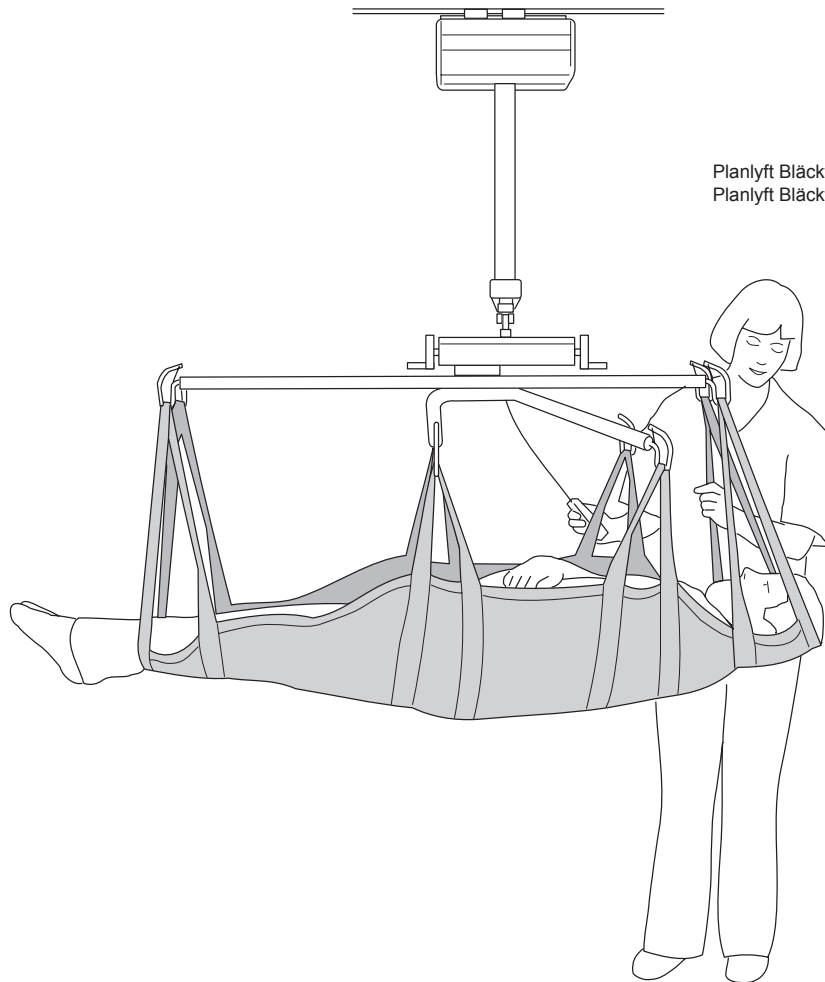

## Produktbeskrivning

Bläckfisken är avsedd för lyft och överflyttning av patienter i plant liggande läge då det inte ställs krav på en utbredd/flat lyftyta. Vanliga användningsområden är på operationsavdelningar men även på intensivvårds- och röntgenavdelningar.

Den personbärande delen består av hel duk alternativt fyra eller fem lyftband.

Bläckfisken är uppskattad för sin användarvänlighet och att den tar relativt lite utrymme, både när den används och när den är undanhängd.

Bläckfisken finns i ett utförande med Balanstillsats vilket möjliggör en enkel reglering av tyngdpunkten under lyftet.

Planlyft Bläckfisken kan användas tillsammans med ett flertal av Likos stationära lyftar; Likorall, Multirall och Liko Vårdlyft. Den rekommenderas även till Likos mobila lyftar Viking och Golvo.

**△** är en varningstriangel för moment där särskild aktsamhet bör iakttas.

### **VIKTIGT!**

Läs Bruksanvisning för både patientlyft och lyfttillbehör före användning.

Lyft och förflyttning av en person medför alltid en viss risk. Det är viktigt att helt och fullt förstå innehållet i bruksanvisningen, och endast den personal som är informerad bör använda utrustningen.

Kontakta Liko vid oklarheter eller om frågor uppstår.

# Innehållsförteckning

Säkerhetsföreskrifter .....	2
Definitioner .....	3
Tillbehör .....	3
Montering.....	4
Lyft med hel duk .....	4-5
Placering av lyftduk med hjälp av vändning/draglakan.....	4
Placering av lyftduk med hjälp av glidlakan.....	5
Placering av lyftband .....	6
Lyftkryss .....	7
Lyft efter applicering av duk/band.....	7
Bläckfisk med Balanstillsats .....	7

**△OBS!** Denna bruksanvisning innehåller viktig information för användare av produkten. Alla som använder produkten skall studera och fullt förstå innehållet i bruksanvisningen. Tänk på att förvara bruksanvisningen så att den alltid är tillgänglig för användare av produkten.



Planlyft Bläckfisken uppfyller erforderliga krav enligt Medicintekniska direktivet för Klass I produkter.


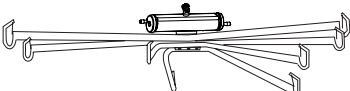
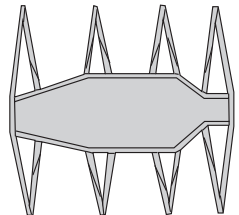
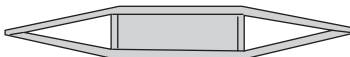
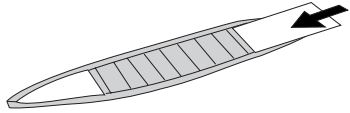
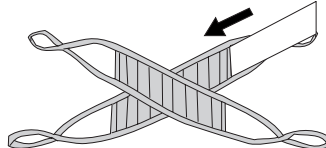

**Max.last: 200 kg**

## Säkerhetsföreskrifter

### Tänk på följande innan lyft med planlyft:

- Vi rekommenderar att minst två personer hjälps åt vid lyft med Planlyft Bläckfisken.
- Planera lyftmomentet före lyft så att det sker så tryggt och smidigt som möjligt.
- Trots att Likos lyftbyglar är försedda med urkrokningskydd måste särskild uppmärksamhet iakttagas: Innan patienten lyfts från underlaget, men när banden är ordentligt sträckta, är det viktigt att kontrollera att banden är rätt påhakade på planlyften.
- Lämna aldrig en patient utan tillsyn i en lyftsituation.
- Se till att hjulen på säng, brits etc. är låsta under arbetsmomenten (Mobillyftens hjul ska däremot **inte** vara låsta i de flesta fall).

## Definitioner


3156055	Planlyft Bläckfisken	st	
3156056	Planlyft Bläckfisk Balans	st	
3683105	Lyftduk, nylon, medium	st	
3683106	Lyftduk, nylon, large	st	
3683405	Lyftduk, plastad nät, medium	st	
3683406	Lyftduk, plastad nät, large	st	
3683102	Lyftband, nylon	st	
3683202	Lyftband, bomull	st	
3683402	Lyftband, plastad nät	st	
3683112	Lyftband, förstyvat (med ficka för plastinlägg men excl. plastinlägg)	st	
3683114	Lyftkryss, förstyvat (med ficka för plastinlägg men excl. plastinlägg)	st	
3683062	Plastinlägg (för extra styvnad, passar 3683112, 3683114)	st	

## Tillbehör


### Snabbkoppling TDM art. nr. 3156502

Bläckfisken kan kompletteras med Snabbkoppling TDM för enkel montering utan verktyg i lyften. Snabbkoppling TDM kopplas till ett speciellt fäste i lyften.

Beroende på vilken av Likos lyftar som används är lyften antingen försedd med eller kan kompletteras med Likos Q-linkfäste alt. Adapter 13.

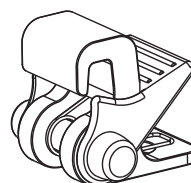

Snabbkoppling TDM  
- 3156502


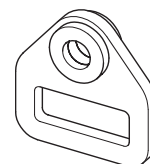


Adapter 13  
- 3156506

### Våg

I Likos sortiment finns våg att kopplas till lyften för enkel vägning i samband med lyft. Vågen kan monteras fast i lyften eller med Snabbkoppling. Kontakta din Likorepresentant för vägledning.

# Montering

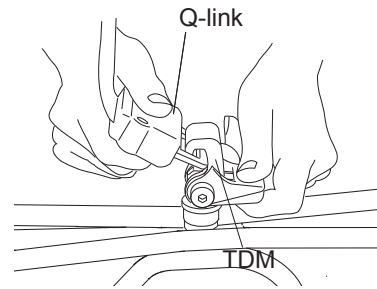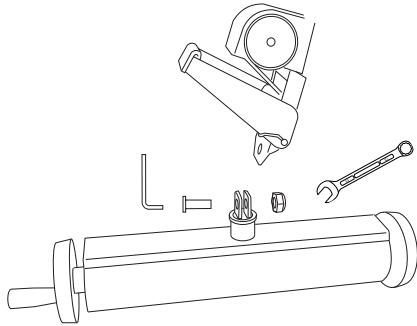

## Fast montering

Bläckfisken monteras med skruv M10 x 25 och mutter i lyftens s.k. bandbleck. Använd insexnyckel 6 mm och ringnyckel 17 mm. (Gäller Liko Vårdlyft, Likorall och Golvo.)

## Montering med snabbkoppling

Bläckfisken kan monteras med Snabbkoppling TDM (art. 3156502) för enkel upphängning utan verktyg till Multirall eller annan av föreskrivna lyftar som försetts med Likos Q-linkfäste. alt. Adapter 13 (Viking).

# Lyft med hel duk


Vid lyft med hel duk är det naturligtvis en fördel om patienten är mobil och själv kan lägga sig på duken. Detta är ibland fallet i samband med operationer.

Operationsborden förbereds och bäddas med lyftduken under operationsdukarna så att den sövda patienten kan lyftas efter operationen.


För placering av lyftduken under immobile patienter visar vi här två alternativa metoder; genom vändning och med hjälp av glidlakan.

## Alt 1) Placering av lyftduk med hjälp av vändning/draglakan


Att vända en tung patient till sidan är ett tungt moment som kan underlättas med hjälpmedel, exempelvis med ett vanligt draglakan. Två eller fler medhjälpare behöver hjälpas åt.

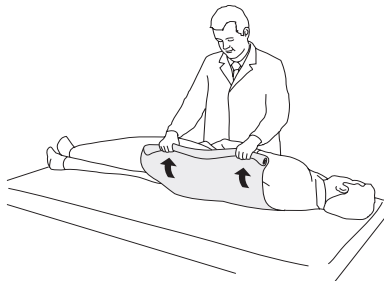

Vänd patienten till sidan genom att dra lakanet mot er. **△**Var uppmärksam på att patienten har tillräcklig plats i sängen så att ingen risk finns att han/hon faller i golvet, eventuellt kan sänggrinden behöva vara uppfälld.

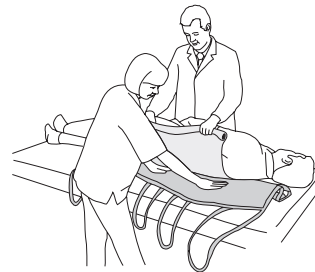

Lägg lyftduken så långt in under patienten som möjligt. Märklappen ska vara mot huvudändan och ner mot sängen. Lägg in mer duk i veck så att patienten ligger mitt på duken när han/hon läggs på rygg.

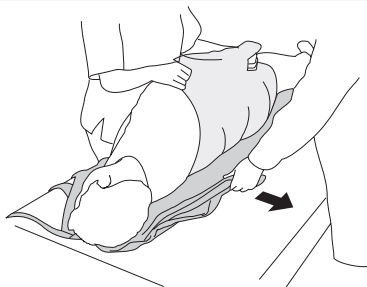


Vänd patienten lite åt andra hållet så att duken kan dras ut. Samtidigt ska nu draglakanet tas bort. Vik in det under patienten innan han/hon läggs på rygg.



Vänd försiktigt på patienten så att draglakanet kan dras bort. Lägg patienten på rygg som nu ska ligga mitt på duken med stöd för huvudet.

## Alt 2) Placering av lyftduk med hjälp av glidlakan:

Om lyftduken ska placeras under en patient som inte kan vändas till sidläge kan glidlakan användas. Patienten ligger på rygg, två parallella glidlakan dras på plats under patienten och lyftduken dras på plats mellan glidlakanen. Två eller fler medhjälpare behöver hjälpas åt.

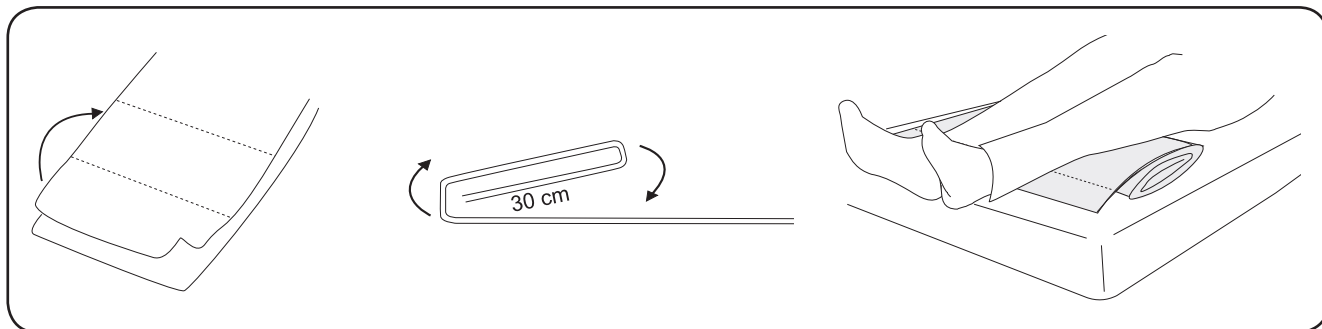


Lägg två glidlakan på varandra. Vik upp ca 30 cm från nederkanten. Upprepa denna procedur tills hela längden är uppvikt. Vänd lakanen så att inviken hamnar ner mot madrassen. Placera de vikta lakanen under patientens fötter och underben.



Medhjälparna fattar med armen närmast patienten tag i tygvecket under glidlakanen. Den andra handen håller tag om lakanens nederkant.

Medhjälparna drar samtidigt ut första vecket upp under patienten. Armarna närmast patienten drar upp vecket medan armarna från patienten "håller emot" nedåt.

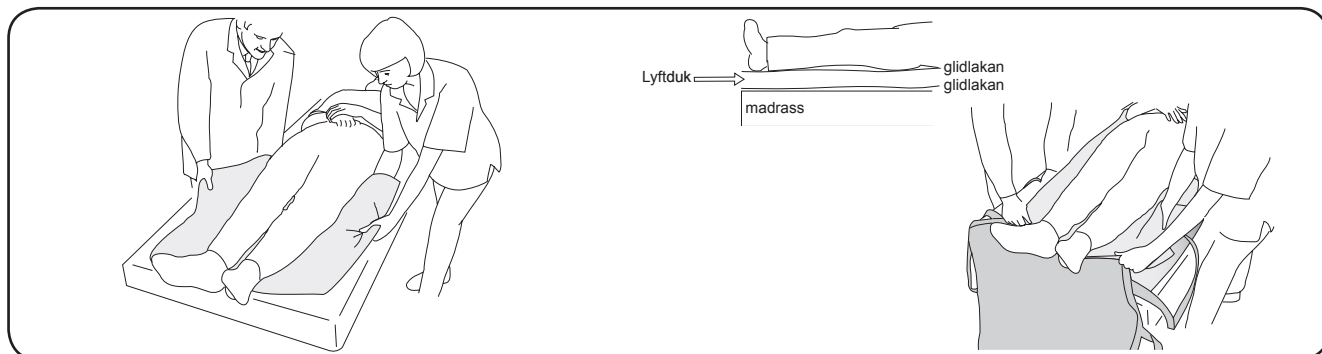

De tar sedan nytt grepp om nästa veck och proceduren upprepas tills glidlakanen ligger under hela patienten.

Planlyftduken förs in mellan glidlakanen från fotändan för att dras på plats mellan de glatta glidlakanen.




Duken dragen på plats under patienten. Överkanten är tillräckligt långt upp för att nå upp under huvudet.

Nu ska glidlakanen dras bort. Enklarest sker detta uppifrån huvudändan och genom att de dras "under sig själv".

## Placering av lyftband

Placering av lyftband kan ske genom vändning. För detaljerade instruktioner, se applicering av lyftduk.

I vissa fall och om patienten inte kan vändas kan det vara lämpligast att försiktigt trä in lyftbanden (som ska ligga under stuss och skuldror) under svankryggen och sedan skjuta dem på plats försiktigt.

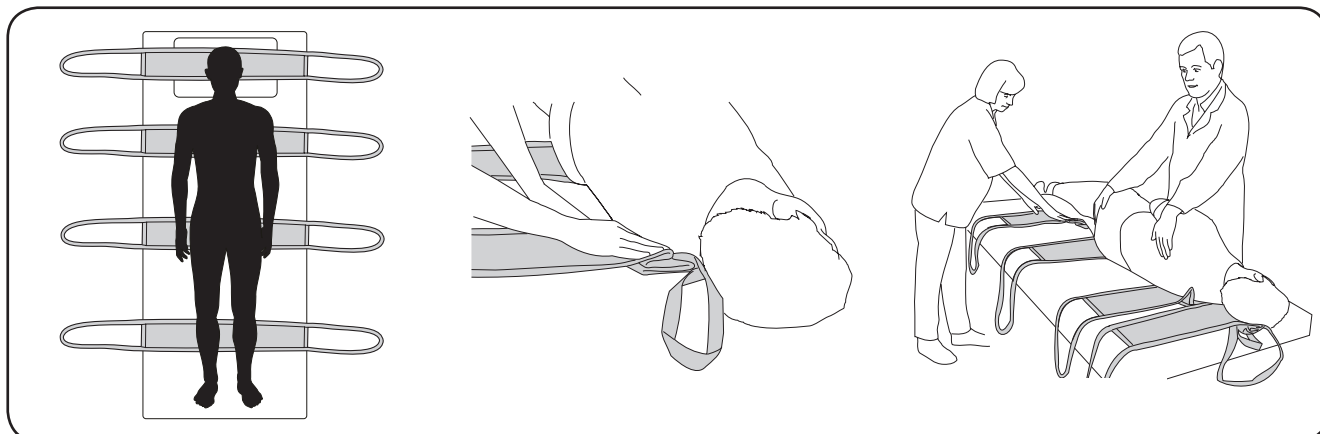


Lyftbanden placeras under huvud, skuldror, sätet och vader. Benen kan lyftas tillsammans eller var för sig med varsitt lyftband, det sistnämnda är lämpligt vid skötsel av underlivshygien.

När lyftbanden ska tas bort sker detta antingen genom vändning (se tidigare instruktion) eller genom att mycket försiktigt dra bort dem under patienten.

## Alternativ placering av lyftband

För att placera banden under en patient som inte kan vändas till sidan måste banden skjutas in mycket försiktigt för att undvika obehag för patienten när denne ligger på rygg.


Placeringen av huvud- och benband är oftast inget problem. Banden som ska lyfta under stussen och under skulderna kan lättast skjutas in under patientens midja där trycket vanligen är mindre.

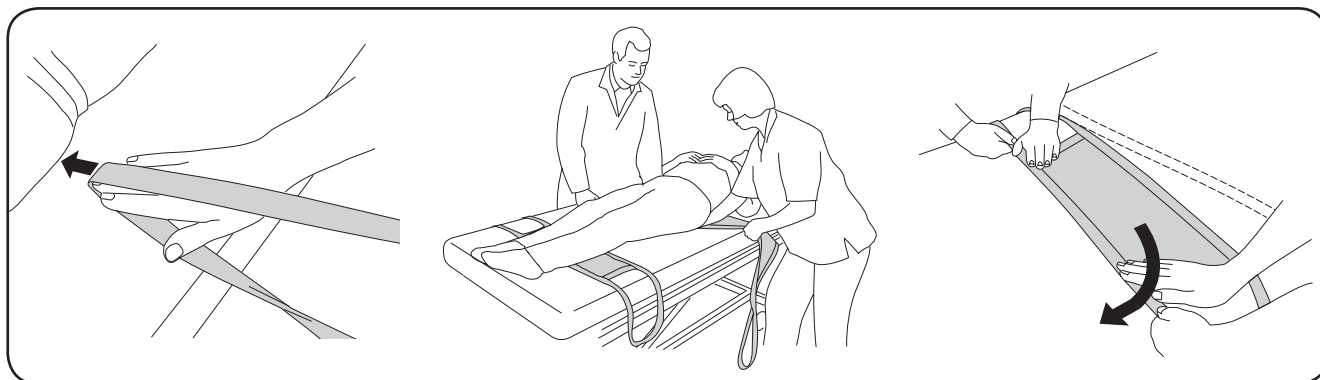

1. För in ett lyftband under midjan som bilden visar. Tryck din hand snett ner och inåt.

2. Din medhjälpare möter med sin hand under patienten och drar ut lyftbandet på andra sidan.


3. Tillsammans hjälps ni åt att skjuta bandet på plats under patienten; neråt under stussen resp. uppåt under skulderna. Drag växelvis utåt-nedåt åt vardera sidan samtidigt som bandet hålls ordentligt sträckt. Upprepa tills lyftbandet är på plats.

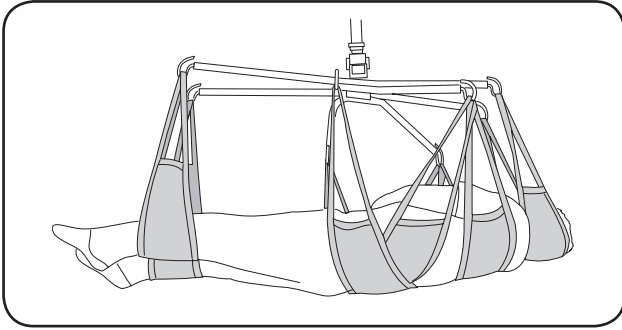

## Lyftkryss

Lyftkrysset är ett tillbehör som kan ersätta stussbandet, det placeras något högre upp mot svanken och används då man i största möjliga mån vill undvika band under stussen.


Lyftkrysset har en ficka med plats för ett plastinlägg för extra förstärkning.

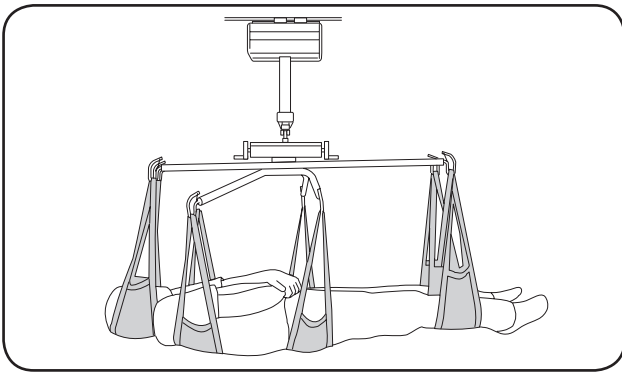

## Lyft efter applicering av duk/band

För fram planlyft Bläckfisken över patienten och sänk ner till ungefär en halvmeter över bädden. Häng upp alla bandöglor på planlyften. Tänk på att Bläckfisken har en huvud- och en fotända.

△ Kontrollera att alla bandöglor är rätt påhakade när banden är uppsträckta men innan patienten lyfts från underlaget.

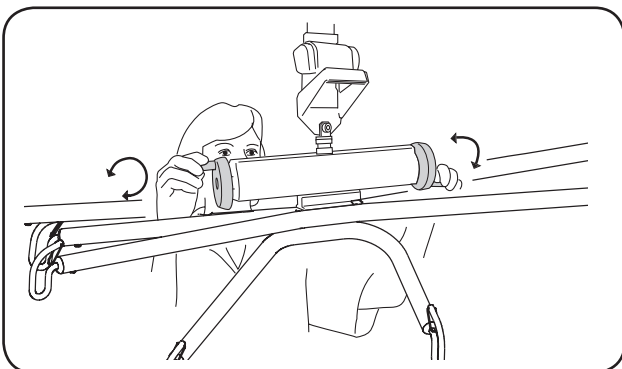

## Bläckfisk med Balanstillsats

Vid lyft kontrolleras att patienten hänger i önskat läge: horisontellt eller vanligen något högre med huvudet. Vid behov, kan detta justeras genom att vrida rattarna på Balanstillsatsen.



A  Company

[www.liko.se](http://www.liko.se)

---

Liko AB  
Nedre vägen 100  
SE-975 92 Luleå  
Tel: 0920 - 47 47 00  
Fax: 0920 - 47 47 01  
[info@liko.se](mailto:info@liko.se)