

## Brugsanvisning Ashby toiletforhøjer Med låg



### Montering:

- 1) Drej knopperne mod urets retning, indtil beslagene er fuldt udstrakt
- 2) Løft det eksisterende sæde, og læg det hævede toilet-sæde på toilettet
- 3) Drej knopperne i urets retning, indtil gummistødpuderne berører toilettet - pas på med ikke at stramme for meget
- 4) Før hvert brug, kontrolleres om sædet sidder ordentligt fast

**Maks. brugervægt 190 kg.**

### Rengøring:

Kan foretages med sæbevand samt alle gængse- dog ikke ætsende og slibende rengøringsmidler, eller termisk desinficering ved 85° i et minut