

Amputasjonsseil 25040

Spesifikasjoner

Stoff: Nylon, Kordfløyel i bomull

Kantbånd: Polyester

Max-last: 250 kg

Størrelser: S, M, L, XL


Vaskeråd: Se etikett på løfteseil

EAN-kod: Se www.humancare.se/lifts

Tilbehør: Brystbånd, Art. Nr. 25145

Størrelser: 40 (Barn), 50 (Barn), 70, 80, 90, 100, 110

Tilbehør: Løfteåk for 4-punkts oppheng, Art Nr. 21126

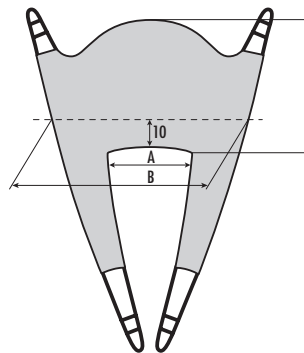

Størrelse		Fargekode	A	B	C
S	Small	Rød	26	75	59
M	Medium	Gul	34	85	59
L	Large	Grønn	44	95	59
XL	Extra large	Blå	50	105	59



Human Care Norge AS, Furuveien 11, NO-2020 Skedsmokorset
Tel 63 87 78 13 • Fax 63 87 78 17 • E-post: post@hcn.no • www.hcn.no

040301-050N



Amputasjonsseil 25040



CE

Human Care Amputasjonsseil 25040 er først og fremst beregnet på løft av enkelt- eller dobbeltamputerte personer. Løfteseilet kan også anvendes på personer som har en tendens til å gli ut. Ved forflytting av amputerte dras ben-delene oftest omkring begge bena. Dette sammen med seilets konstruksjon gir en meget liten åpning nedentil. Muligheten er også til stede for å dra opp ben-delene mellom pleiemottagerens ben.

Seilet kan kompletteres med Human Cares Brystband 25145.

25040 er tilpasset for topunkts opphenging. Firepunkts opphenging kan oppnås med hjelp av Human Cares Løfteåk 21126.

Viktig!


⚠ Løft og forflytting av en person innebærer alltid en risiko. Les derfor nøye igjennom bruksanvisning for både løfter og løftetilbehøret. Forviss deg alltid om at det løftetilbehøret du anvender, fungerer sammen med løfteren. Som pleier/medhjelper er du ansvarlig for pleiemottagerens sikkerhet og du må kjenne til vedkommendes mulighet til å tåle løftesituasjonen. Ved usikkerhet kontakt leverandøren.

Løft fra liggende



Hvis mulig, reis opp ryggstøtten til halvt sittende. Før ned seilet bakom ryggen til høyde med halebenet. Legg merke til seilets merking (utside-opp).

Alternativ; Legg pleiemottageren på siden. Før inn seilet slik at midten havner langs ryggraden. Rull over pleiemottageren på den andre siden og dra fram seilet.

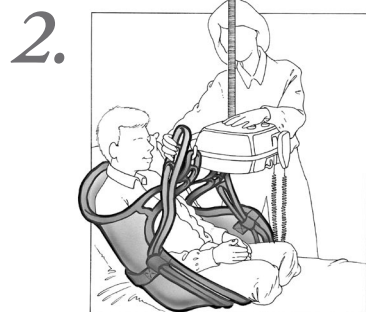


Dra seilets bendeler under begge bena. Vær nøye med å få inn bendelene ordentlig. Tre deretter inn bendelenes løftestropper inn i de spesielle hempene på seilets inn- respektive utside. Senk ned løfteren i høyde med magen. Hekt rygg- og bendelenes løftestropper på løftegalgen. Hold løfteren unna pleiemottagerens ansikt med den ene hånden mens du kjører løfteren opp over hodet.

Alternativ: Seilet kan også brukes med firepunkts oppheng. Human Cares separate løfteåk monteres da på den fremre kroken.




Stopp i denne posisjonen og kontroller at alle løftestroppene er stramme og at de sitter på rett sted.

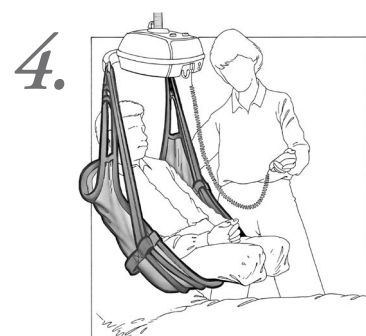


Fortsett løftet. Det kan bli nødvendig å senke sengen noe. Kontroller at bena ikke glir ut. Hold gjerne din arm omkring pleiemottageren under forflytningen for å skape større trygghet.

Løft fra sittende

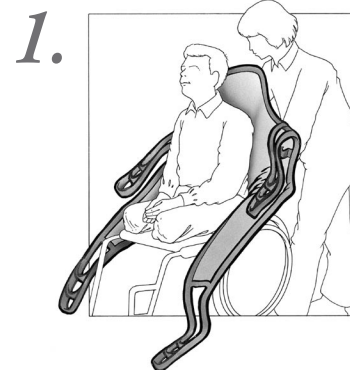


Før seilet ned bakom ryggen. Legg merke til seilets merking (utside-opp). Seilet skal ned slik at underkanten er nede ved halebenet. Dra fram seilets bendeler.

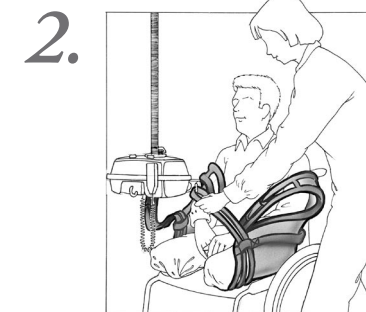

Dra seilets bendeler under begge bena. Vær nøye med å få inn bendelene ordentlig. Tre deretter inn bendelenes løftestropper inn i de spesielle hempene på seilets inn- respektive utside. Senk ned løfteren i høyde med magen. Hekt rygg- og bendelenes løftestropper på løftegalgen. Hold løfteren unna pleiemottagerens ansikt med den ene hånden mens du kjører løfteren opp over hodet.

Alternativ: Seilet kan også brukes med firepunkts oppheng. Human Cares separate løfteåk monteres da på den fremre kroken.

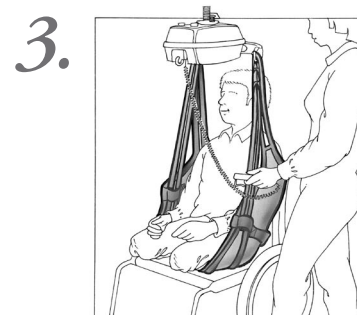

Stopp i denne posisjonen og kontroller at alle løftestroppene er stramme og at de sitter på rett sted.



Fortsett løftet. Kontroller at bena ikke glir ut. Hold gjerne din arm omkring pleiemottageren under forflytningen for å skape en større trygghet.