



medemagruppen



Brugsanvisning Swing Bade- og toiletstol

Kære kunde!

Tak fordi du valgte et af vores produkter.

Før du tager produktet i brug, beder vi dig læse brugs- og sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem og følge disse.

Vi tager forbehold for tekniske ændringer.

Vigtig information!

Sørg for at brugsanvisningen altid er tilgængelig i nærheden af produktet. Tag eventuelt en kopi for en sikkerheds skyld.

Medema A/S



Inhold	Side
Generelle bemærkninger	4
Sikkerhedsanvisninger	4
Brugsområder	4
Brug	
Sikring af bade- og toiletstolen (styrehjul)	5
Justering af sædevinklen	5
Regulering af sædehøjden	6
Tilbehør	
Bækken	6
Hovedstøtte	7
Fodstøtte	7
Montering af fodremme	8
Montering af hoftebælte	9
Bord med polstret armstøtte	10
Abduktionsklods med integreret stænkskærm	10
Todelt PU-indlægspude	11
Pleje og vedligehold	11
Tekniske data	12
Konstruktion	12
Garanti	13



Generelle bemærkninger

Swing er en stabil bade- og toiletstol til brug hjemme og på institutioner. Den anatomisk udformede sædeskal giver ekstra god støtte til børn og unge. Den kan bruges både som toiletstol og badestol og leveres i fem størrelser. Som toiletstol kan den enten placeres over toilettet eller bruges fritstående med et bækken under.

Sædet på Swing kan reguleres og tilpasses både en aktiv og passiv sidestilling via en gasfjeder. Sædevinklen justeres med en pedal foran. Det er også muligt at regulere sædehøjden og der skal ikke anvendes værktøj til dette.

Vinklen og højden på hovedstøtten kan tilpasses til den enkelte bruger. Det samme gælder knævinklen og højden, samt vinklen på den opklappelige fodstøtte.

Overkroppen kan støttes med et polstret støttebord af rustfrit stål som monteres i beslag på skalrammen. Til personer som er følsomme overfor tryk, fås en todelt indlægspude.

Sikkerhedsanvisninger

- Korrekt brug af produktet forudsætter at den behandlingsansvarlige sætter sig grundigt ind i produktet.
- Hofte bæltet skal monteres så stramt at brugeren ikke kan glide ud af stolen. Hvis Swing bruges uden benstøtter, øges risikoen for at brugeren kan glide ud af stolen. I disse tilfælde må brugeren være under konstant opsyn, når stolen benyttes.
- Produktet skal bare benyttes under opsyn.
- Produktet er ikke egnet til transport af personer.
- Maksimal brugervægt er angivet under punktet "Tekniske data" i denne brugsanvisning.
- Ved indstillingsarbejde må brugeren ikke være i kontakt med de bevægelige dele.

Brugsområder

Swing kan bruges som toiletstol over toilettet, fritstående sammen med et bækken eller som badestol. Tag hensyn til følgende:

Over toilettet:

Åbn toiletlæg og -sæde. Tilpas højden på sædeskallen til toilethøjden, se afsnit om regulering af sædehøjden. Fjern bækkenet. Kør toiletstolen baglæns ind over toilettet og lås hjulene.

Fritstående:

Der må altid benyttes bækken, når Swing skal bruges fritstående.

Som badestol:



Swing består af materialer som tåler vand, og kan dermed bruges som badestol uden betænkeligheder.

Brug

Sikring af bade- og toiletstolen (styrehjul)


Produktet må sikres ved at låse de fire styrehjul, således at stolen ikke triller utilsigtet.

Brems/lås styrehjulene (træd ned med skosnuden):

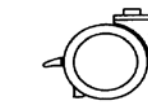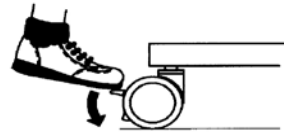

Bremse/lås styrehjulene

Løsne styrehjulene (løft med skosnuden):

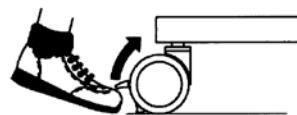

Løsne styrehjulene

NB: Bremsen er kun konstrueret for at forhindre at stolen triller utilsigtet på fladt underlag.

Justering af sædevinklen

Sædeskallen kan justeres trinløst fra (-) 5° aktiv til 30° passiv. For at gøre dette trykker u på pedalen (rød pil) placeret foran til højre på hovedrammen set i køre-retningen. Nu kan du justere sædeskallens vinkel ved at trykke eller trække let i skallen. Slip pedalen igen, når vinklen er den rigtige.

Pedalen kan sikres mod uønsket betjening ved hjælp af låsestiften (på siden af pedalen). Drej låsestiften til den får fat. Bevæg om nødvendig let på pedalen for at stiften skal komme i hak. Spærrefunktionen ophæves ved at trække låsestiften ud og dreje den en kvart omgang.



Sædehøjde regulering



Sædehøjden reguleres således:

Først trækker du de fjederbelastede låsestifter (A) på forsiden ud og drejer dem lidt til venstre eller højre, så de forbliver ulåste. Derefter løsner du kipspænderne (B) på bagsiden

Placer sædeenheten i den ønskede højde, vrid derefter på de fjederbelastede låsestifter, (A) og sørg for at de går tilbage og i kontakt med hulmønsteret (C). Derefter strammes kipspænderne (B) på bagsiden igen.

Det kan være nødvendigt at justere gasfjederen for at sædevinklen forbliver rigtig. Hvis dette bliver nødvendigt gøres følgende: Træk den fjederbelastede låsestift ud (D) under sædet og drej den lidt til venstre eller højre, så den står i ulåst position. Derefter løsnes kipspændet (E).

Sæt derefter gasfjederen i den ønskede højde, sørg for at den fjederbelastede låsestift (D) går tilbage i låsepositionen. Derefter strammes kipspændet (E) igen.

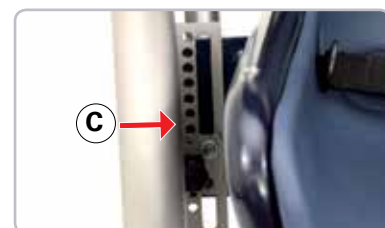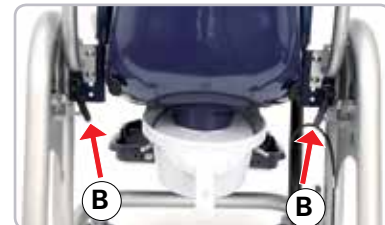

NB: Det må ikke sidde nogen i stolen mens indstillingsarbejdet udføres.

Bækkenet:

Bækkenet skubbes ind bagfra under sædeenheten. Den smalle skinne hindrer bækkenet i at glide ud. Efter brug af bækkenet skal sædeenhet og bækken rengøres og desinficeres grundigt. Brug standard kommercielle desinfektionsmidler.




Hovedstøtte

Vinklen og højden på hovedstøtten kan tilpasses til den enkelte bruger.

Justere højden: Løsn skruen **A** og indstil den ønskede højde **B**.

Justere vinklen: Løsn skruerne **B** og **C** og tilpas hovedstøtten.

NB: Når justeringen er udført, må alle skruer strammes godt igen.

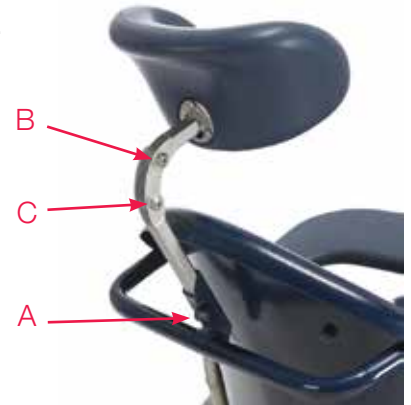**Fodstøtte:**

Fodstøttens knævinkel, fodvinkel og højde kan reguleres, og fodstøtten kan klappes op for at forenkle forflytning til stolen.

Justering af højden:

De to justeringsskruer **A** løsnes og indstilles i den ønskede højde.


Justering af knævinklen:

Kipspænde **B** løsnes og strammes igen når fodstøtten har den ønskede knævinkel.

Justering af fodvinklen:

Først løsnes låsemøtrikken **C**, derefter flyttes justeringsskruen **D** ind- eller udover for at justere fodvinklen. Stram til slut låsemøtrikken igen.

NB: Når justeringen er udført, må skruerne og kipspændet strammes godt igen.

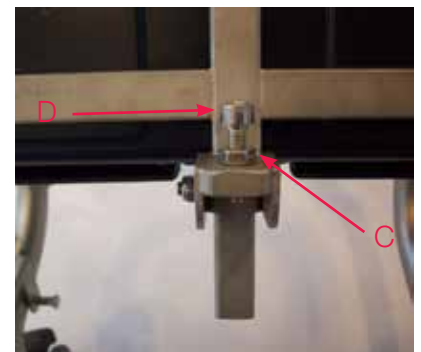

Monteringspakken indeholder følgende:

- 2 stk. fodremme med spænder og mallehul
- 2 stk. M6 unbrako skrue
- 2 stk. M6 låsemøtrikker
- 2 stk. M6 skiver



1. Mål ud, hvor brugeren skal fastsætte fødderne på fodstøtten.
2. Afmonter fodstøtten fra stolen ved at løsne unbrako skrue under sædet og træk fodstøtten ud.
3. Bor 6,5 mm huller i fodkanten øverst på den position, der passer til brugerens fiksering. Der er forberedt markeringer til hullboring på bagsiden.



4. Sæt skruen gennem mallehul i bæltet og igennem hullet.



5. Sæt skiven og låsemøtrikken på bagsiden og stram til.



6. Sæt fodstøtten tilbage på stolen og prøv med brugeren.

1. Tag sommerfuglespændet af og før bæltedel igennem det forberedte hul i sædeenheden (Fig1)



2. Sæt sommerfuglespændet på bæltet igen, ved at trække bæltet igennem første hul, over tværpinden og ned i andet hul (Fig.2)



3. Før bæltet tilbage igennem første hul (Fig.3)



4. Bæltet er nu korrekt monteret og vil ikke kunne løsne sig, eller gå igennem hullet i sædeenheden (Fig.4)



Bord med polstret armstøtte, nedfældbart:

For at svinge bordet ud, f.eks. for at gøre det enklere at sætte eller rejse sig fra stolen, trækker du i stangen (rød pil). Bordet kan nu svinges ud til siden og over mod beslaget til venstre på skal-rammen eller tages helt af. Når bordet svinges på plads igen, må du sikre dig at det kommer på plads i låsen.



Højden på armstøtten / bordet kan justeres således:

Skruerne (B) løsnes i begge sider, juster højden via den perforerede plade og stram skruerne til igen.



Det er en fordel hvis du fjerner støttebordet først og derefter justerer beslagene hver for sig.

Abduktionsklods med integreret stænkskærm:

Abduktionsklodsen monteres i den runde åbning midt foran på sædeskallen ved hjælp af stiften (under stænkskærmen). Tryk klodsen nedover til du hører at den smækker på plads. For at fjerne stænkskærmen trykker du den let opover og trækker den ud.



Abduktionsklods færdigmonteret



Todelt PU-innleggspude

For personer som er ømfintlige overfor trykk, leveres en todelt PU-innleggspude. Denne kan enkelt fjernes fra stolen f.eks. når den skal rengjøres (bruk mildt såpevann).

For at fjerne puden trækkes gummiknoppen ud af hullerne i sædeskallen.

Når puden skal monteres igen, trykkes gummiknoppen ind i hullerne på sædeskallen igen.

**Pleje og vedligeholdelse:**

Som ethvert teknisk produkt kræver også Swing regelmæssig eftersyn. Kontroller derfor bade- og toiletstolen med jævne mellemrum med hensyn til sprækker, brud, løse eller manglende dele og/eller funktionsfejl. Produktet må ikke bruges hvis det ikke længere opfylder alle funktioner.

Når du passer godt på bade- og toiletstolen vil du have glæde af den i lang tid. Rengør derfor sæde og understel regelmæssigt med mildt sæbevand. Brug ikke blegemidler.

Til desinficering benyttes vanlige desinfektionsmidler. Skyl med rent vand og lad stolen tørre.

Merk: Bemærk: Brug ikke aggressive rengøringsmidler, f.eks. opløsningsmidler, hårde børster eller lignende.

Tekniske data

Materiale: Se punktet "Konstruksjon"

Mål:	Str. 0	Str. 1	Str. 2	Str. 3	Str. 4
Sædebredde foran	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm	51 cm
Sædebredde bagtil	26 cm	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm
Sædedybde	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm	48 cm
Ryghøjde	49 cm	51 cm	56 cm	61 cm	65 cm
Sædevinkel	(-) 5°–30°	(-) 5°–30°	(-) 5°–30°	(-) 5°–30°	(-) 5°–30°
Højde på toilettet	47–57 cm	45–55 cm	42–52 cm	42–52 cm	42–52 cm
Total bredde	56 cm	61 cm	63 cm	71,5 cm	74 cm
Total længde	65 cm	65 cm	65 cm	70 cm	70 cm
Maks. belastning	60 kg	80 kg	100 kg	100 kg	150 kg



Dette produkt opfylder kravene i EU-direktiv 93/42/EØS for medicinsk udstyr

Konstruktion

Sædeskallen er lavet af UV-beständig, dytrukket PE-plast.

Alle metaldele er lavet af rustfrit stål og til dels pulverlakeret.



Garanti

Som en del af vores generelle forretningsvilkår leveres rammene på bade- og toiletstolen med en garanti på

3 år.

I tilfælde af at en eventuel fejl beviseligt kan føres tilbage til materiale- eller produktionsfejl, erstattes ødelagte deler uden omkostninger. Vi påtager os intet ansvar for ændringer og konstruktionsmæssige indgreb udover normal tilpasning af produktet til brugerens krop og størrelse.

Med forbehold om tekniske ændringer.

NB: Det er ingen returret på speciel konstruerede modeller.

Brug af produkter fra andre leverandører sammen med vores produkter kan indebære risiko. Med mindre produktkombinationen er udtrykkelig godkendt af os, påtager vi os intet ansvar for skader som skyldes sådan brug.

Mangler som skyldes naturlig slitage, overbelastning, hårdhændet håndtering eller brug i strid med det fastsatte brugsområde, dækkes heller ikke af garantien.

Garantien bortfalder hvis der ikke bruges originale reservedele fra Schuchmann ved reparationer.



Forhandlerens stempel:

Serienr.:

Produsent: Schuchmann GmbH
Dütestrasse 3
DE-49205 Hasbergen
Germany

Medema A/S
Enggårdsvej 7
7400 Herning
Tlf: 70101755
Mail: info@medema.com



Notater:

