

DETECT DOOR

trådløs dørklokke



(DK) brugervejledning

)))))) **PhonicEar**[®]

yderligere information på www.phonicear.dk

indholdsfortegnelse

DETECT DOOR funktion	1
DETECT DOOR indstillinger	2
DETECT DOOR instruktioner.	7
Fejlsøgning.	18
Test og godkendelse	19
Sikkerhedsforanstaltninger	20
Garanti	21

DETECT DOOR funktion

DETECT DOOR er en af PUZZLE systemets alarmsendere. Den fungerer som en trådløs dørklokke og erstatter den almindelige trykknop uden for døren.

Når en besøgende trykker på DETECT DOOR trykknappen, sendes der et trådløst signal til PUZZLE systemets modtager. DETECT DOOR samarbejder med følgende modtagere i PUZZLE systemet: CALL, FLASH, WAKE, POCKETVIB, LOOP, BEAM og LINK.

DETECT DOOR kan også forbindes til den eksisterende dørklokkeinstallation, hvis det ønskes.

DETECT DOOR indstillinger

- | | |
|---|--|
| 1 trykknop
Aktivering af enheden | 6 indgangsstik
Tilslutning til eksisterende
dørklokkeinstallation |
| 2 statuslys
Indikerer om enheden
sender | 7 fejlindikator
Angiver om ledningen
til den eksisterende
dørklokke er korrekt
installeret |
| 3 alarmvælger
Valg af alarmmønster | 8 batteriskuffe |
| 4 kanalvalg
Valg af personlig kode | 9 batteri
Litium 1/2 AA, 3,6 V |
| 5 kanaltype
Valg af "X" eller "Y"
kanaler | 10 monteringshuller |


DETECT DOOR indstillinger

11 ledningshul
Til ledning fra eksisterende
dørklokkeinstallation

12 demonteringsknap


13 tætningsring
Til at holde den vandtæt

14 skruetrækker

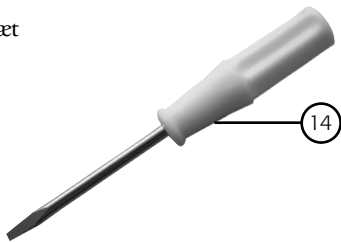


DETECT DOOR indstillinger

forside

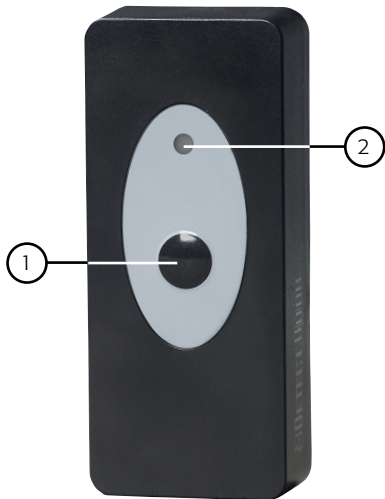


DETECT DOOR features

forside set indefra

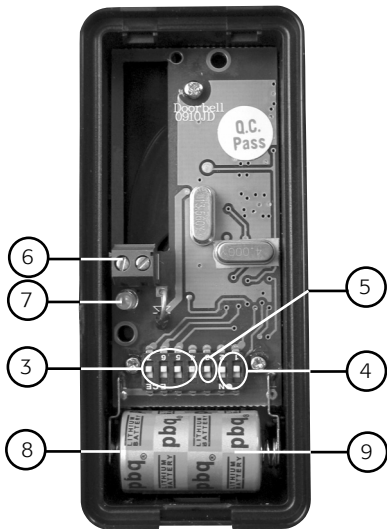

DETECT DOOR features

bagside set indefra

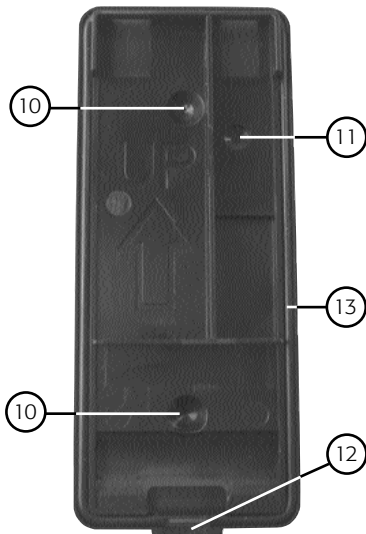

DETECT DOOR instruktioner

1a forberedelse




Adskil DETECT DOOR ved at løfte nederste ende af den forreste del samtidig med, at der trykkes på **demonteringsknappen** med skruetrækkeren.

Hvis DETECT DOOR skal forbindes til en eksisterende dørklokkeinstallation, skal den eksisterende dørklokkeplade fjernes. Skub det materiale, der sidder i **ledningshullet** på DETECT DOOR, ud ved hjælp af skruetrækkeren. Før ledningerne gennem hullet. Lad ellers materialet i **ledningshullet** blive siddende.

DETECT DOOR instruktioner

1b forberedelse

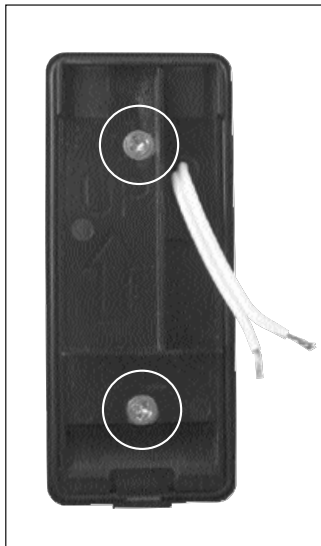

Skru bagsiden af DETECT DOOR fast i den ønskede stilling ved hjælp af de to monteringshuller.

DETECT DOOR instruktioner

2 isætning af batteri




Isæt **batteriet** i **batteriskuffen**, og sørg for, at batteriet vender rigtigt i overensstemmelse med symbolerne.

DETECT DOOR instruktioner

3a valg af alarmmønster

Mønster	Pin 6	Pin 7
1	off	off
3	on	off
4	off	on
5	on	on

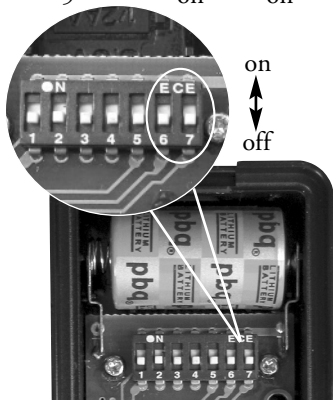


Alarmmønstrene, DETECT DOOR sender til PUZZLE systemets modtagere, vælges ved hjælp af pin 6 og 7 (se tabel).

Indstilling af et unikt mønster for DETECT DOOR vil gøre det nemmere at skelne en besøgendes ankomst fra andre alarmer, som du evt. har PUZZLE sendere til at opfange.

DETECT DOOR instruktioner

3b valg af alarmmønster

BEMÆRK: Brug skruetrækkeren, der følger med, til at ændre indstillingerne.

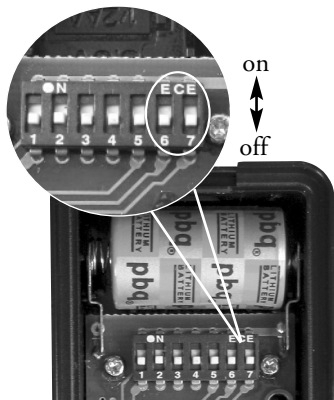


Hvis alarmmønster 1 vælges til den DETECT DOOR, der er placeret ved fordøren, bør alarmmønster 3 vælges til den DETECT DOOR, der er placeret ved bagdøren osv. Da hver alarm har sit eget alarmmønster, kan du lære at skelne de forskellige alarmmønstre fra hinanden.

BEMÆRK:

Mønstrene 2, 6 og 7 er også til rådighed i forbindelse med andre PUZZLE sendere.

DETECT DOOR instruktioner

4a valg af personlig kode

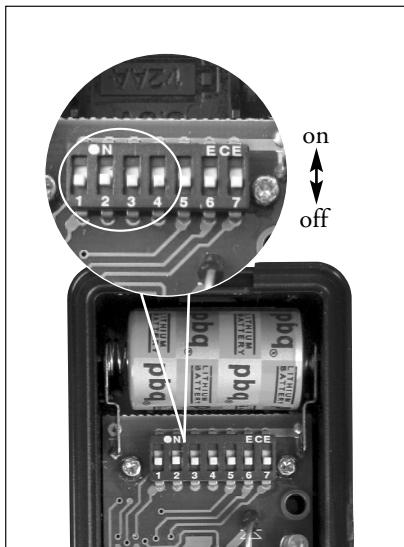

Personlig kode vælges ved hjælp af pin 1, 2, 3, 4 i henhold til tabellen på side 13.

BEMÆRK: PUZZLE systemets forskellige modtagere bør indstilles til den samme personlige kode.

BEMÆRK: Brug skruetrækkeren, der fulgte med, til at ændre indstillingerne.

DETECT DOOR instruktioner


4b valg af personlig kode

Mønster	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
0	Off	Off	Off	Off
1	On	Off	Off	Off
2	Off	On	Off	Off
3	On	On	Off	Off
4	Off	Off	On	Off
5	On	Off	On	Off
6	Off	On	On	Off
7	On	On	On	Off
8	Off	Off	Off	On
9	On	Off	Off	On
A	Off	On	Off	On
B	On	On	Off	On
C	Off	Off	On	On
D	On	Off	On	On
E	Off	On	On	On
F	On	On	On	On

13 **BEMÆRK:** Pin 5: "Off" = "X" Kanaler "On" = "Y" kanaler

DETECT DOOR instruktioner

5a tilslutning til eksisterende dørklokke

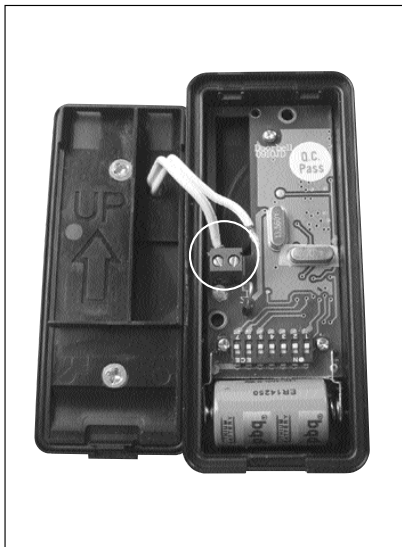

Klip ledningen fra den eksisterende dørklokke til en længde på ca. 5 cm, og fjern 3 mm af isoleringen fra begge ledninger. Indsæt den ene af de to ledninger i det ene af hullerne på **indgangsstikket**. Stram skruen for at fastgøre ledningen.

DETECT DOOR instruktioner

5b tilslutning til eksisterende dørklokke



Indsæt den anden ledning i det andet hul på **indgangsstikket**, og spænd skruen til for at fastgøre denne ledning. Hvis **fejllindikatoren** lyser, så byt om på tilslutningen.

BEMÆRK: Der kan anbringes ekstra ledning i kassen om nødvendigt.

DETECT DOOR instruktioner

6 afslut installationen



Skub forsiden af DETECT DOOR forsvarligt på plads på bagstykket, indtil der høres et klik, og begynd med den øverste ende.

BEMÆRK: Sørg for, at tætningsringen er helt på plads inden samling.

DETECT DOOR instruktioner

7 afslut installationen



Tryk ind på **trykknappen**.
DETECT DOOR sender signalet til alle PUZZLE modtagere, og **statuslyset** bliver tændt.

BEMÆRK: Hvis DETECT DOOR forbindes til en eksisterende dørklokkeinstallation, aktiveres den eksisterende dørklokke, mens knappen aktiveres.

fejlsøgning

Fungerer din DETECT DOOR trådløse dørklokke ikke tilfredsstillende, bedes du kontrollere nedenstående fejlmuligheder:

Statuslyset bliver ikke tændt, når der trykkes på trykknappen

- Kontroller, om batteriet er isat korrekt. Se [2](#).
- Udskift batteriet. Se [2](#).

BEMÆRK: *Statuslyset tændes kun et kort øjeblik efter hver aktivering.*

Statuslyset bliver ikke tændt, men kun nogle eller ingen af PUZZLE systemets modtagere udsender alarmsignal

- Kontroller, om DETECT DOOR og PUZZLE systemets modtagere bruger den samme personlige kode. Se [4a](#) og [4b](#).

PUZZLE systemet udsender et alarmsignal tilsyneladende uden grund

- Skift den personlige kode for hele systemet til en anden indstilling, fordi fejllarmer kan forårsages af interferens fra PUZZLE systeminstallationer i nærheden. Se [4a](#) og [4b](#).

fejlsøgning

Fejlindikatoren bliver tændt uanset lednings-tilslutning

- En tændt fejlindikator kan ignoreres, hvis den eksisterende dørklokkeinstallation kører på vekselstrøm og ringer, når der trykkes på trykknappen på DETECT DOOR.

Hvis der fortsat er problemer efter at have prøvet med ovenstående forslag, så kontakt din lokale autoriserede Phonic Ear forhandler/installatør.

test og godkendelse

DETECT DOOR er godkendt og CE-mærket i overensstemmelse med R&TTE-direktivet. Undertegnede Phonic Ear erklærer herved, at følgende udstyr DETECT DOOR dørklokken overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.



Affald fra elektronisk udstyr skal håndteres i overensstemmelse med de lokale forskrifter.

sikkerhedsforanstaltninger

Advarsel

Litium-batteri indeni. Fare for brand, eksplosion og alvorlige forbrændinger, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Må ikke genoplades, skilles ad, opvarmes til over 100°C, forbrændes eller udsættes for vand eller direkte sollys.

Lad være med at adskille, ændre eller udsætte dette produkt for tryk, så der kan opstå skader på elektroniske kredsløb.

Vigtig bemærkning

Litium-batterier må ikke åbnes eller forbrændes. Udsættelse for stoffer indeholdt i produktet eller opstået i forbindelse med afbrænding heraf vil kunne medføre personskaade.

garanti

Phonic Ear yder en 2 års begrænset garanti på nye produkter.

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad dækker garantien

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller design-fejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejllens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad dækker garantien ikke

- 1 Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
- 2 Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner er returneret mere end 30 dage fra faktureringsdatoen.
- 3 Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
- 4 Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
- 5 Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.

garanti

- 6** Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Phonic Ear forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte eksemplarer. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til producenten. Er produktet ikke under garanti, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere information og rådgivning.

Din lokale forhandler:



Telefon: 3917 7101

Webside: www.phonicear.dk