

Brugsanvisning, Plexus Auto Aire Select

- med Low Air Loss.

1. Anbring madrassen direkte på sengebunden.
2. Spænd sikkerhedsbåndlerne omkring de bevægelige dele af sengebunden.
3. Anbring kontrolenheden på sengegavlen i fodenden.
4. Tilslut luftslangerne og sensorkabel til kontrolenheden.
5. Tilslut strømledningen til kontrolenheden. Tænd for strømmen.
6. Tænd på den grå ON/OFF knap. Denne lyser grønt når kontrolenheden arbejder.



7. Komforten indstilles efter behov på pile-tasterne.



8. Ønskes automatisk indstilling af korrekt tryk, aktiveres 'Sensor' knappen og denne vil lyse.



Brugsanvisning, Plexus Auto Aire Select

- med Low Air Loss.

1. Anbring madrassen direkte på sengebunden.
2. Spænd sikkerhedsbåndlerne omkring de bevægelige dele af sengebunden.
3. Anbring kontrolenheden på sengegavlen i fodenden.
4. Tilslut luftslangerne og sensorkabel til kontrolenheden.
5. Tilslut strømledningen til kontrolenheden. Tænd for strømmen.
6. Tænd på den grå ON/OFF knap. Denne lyser grønt når kontrolenheden arbejder.



7. Komforten indstilles efter behov på pile-tasterne.



8. Ønskes automatisk indstilling af korrekt tryk, aktiveres 'Sensor' knappen og denne vil lyse.



Ønskes **alternering/dynamisk** funktion aktiveres og denne vil lyse.



Ved **pleje/mobilisering/træning** aktiveres 'Max Inflate' og madrassen fyldes max. således at brugeren ligger på en stabil overflade i 30 min, hvorefter systemet genoptager ønsket terapi.



Udfør 'Håndtest'

En lodret flad hånd føres ind under brugerens sædeparti mellem 2 luftceller.

For at sikre den korrekte luftmængde, skal der være en håndsbredde luft mellem brugeren og bunden af helmadrassen.

Hjertemassage (CPR-kardiopulmonal genoplivning)

For at tømme madrassen (eller **ved hjertestop**), kobles luftslangerne fra kontrolenheden og madrassen vil tømmes i løbet af få sekunder.

For at fylde madrassen igen, tilsluttes luftslangerne kontrolenheden.

Ønskes **alternering/dynamisk** funktion aktiveres og denne vil lyse.



Ved **pleje/mobilisering/træning** aktiveres 'Max Inflate' og madrassen fyldes max. således at brugeren ligger på en stabil overflade i 30 min, hvorefter systemet genoptager ønsket terapi.



Udfør 'Håndtest'

En lodret flad hånd føres ind under brugerens sædeparti mellem 2 luftceller.

For at sikre den korrekte luftmængde, skal der være en håndsbredde luft mellem brugeren og bunden af helmadrassen.

Hjertemassage (CPR-kardiopulmonal genoplivning)

For at tømme madrassen (eller **ved hjertestop**), kobles luftslangerne fra kontrolenheden og madrassen vil tømmes i løbet af få sekunder.

For at fylde madrassen igen, tilsluttes luftslangerne kontrolenheden.