

One Way MASTER BRUGERVEJLEDNING

Rørformet glidepude



Når mobiliteten forringes...



...forbedrer vi livskvaliteten!

Vare	Art no.	Hmi no.	Produktbetegnelse	Model	Størrelse	Vægt
	MC 001-1285	40372	One Way MASTER rørformet	Small	L 40 x B 35 cm	300 g
	MC 001-1290	40373	One Way MASTER rørformet	Medium	L 50 x B 50 cm	440 g
	MC 001-1295	40376	One Way MASTER rørformet	Large	L 60 x B 60 cm	540 g

One Way MASTER Rørformet glidepude



A. Placering af One Way MASTER Rørformet



1A) Placer One Way MASTER som etiketten "Denne side opad og ind mod sæderyg" foreskriver.



B. Placering af bruger



1B) Rul One Way MASTER en smule frem på stolesædet, indtil der er en afstand fra dens bagkant og ind til sæderyg på ca. 10-15 cm.



2B) Bruger placeres nu på One Way MASTER Rørformet.



C. Forflytning tilbage i stol



1C) Undgå at brugers ben hænger mod forkant af stolesædet ved at placere brugers fødder i fodstøtter eller ved at anvende Foot MASTER. Dette for at få vægten ind på One Way MASTER Rørformet.



2C) Bruger glider sig ved hjælp af One Way MASTER tilbage i stolen.

One Way MASTER Rørformet glidepude



D. Forflytning tilbage i stol med en eller to hjælpere



1D) Hvis bruger har behov for hjælp kan hjælper skubbe mod brugerens ben foran.



2D) Mini MASTER kan med fordel anvendes som hjælperedskab ved at føre denne rundt foran brugerens maveparti. Brugeren læner sig godt fremad samtidig med at hjælper trækker i håndtag på Mini MASTER. Bruger glider nu ind på stolesædet.



3D) Er der yderligere behov for hjælp, kan den ene hjælper skubbe foran mod brugerens ben mens den anden trækker brugeren ind på stolesædet med Mini MASTER.

One Way MASTER Rørformet glidepude

Vaskeanvisning

One Way MASTER kan vaskes ved 80 grader C




Kun skånsom tørretumbling



ADVARSEL

Der må ikke anvendes skylle- eller blegemiddel. Dette forringer glideeffekten.

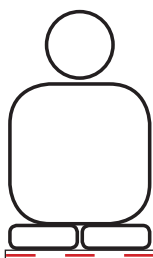

VIGTIGT

- Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger.
- Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.
- Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.



ANSVAR

- Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller u hensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.



ADVARSEL

- Husk altid at anvende den permante sikkerhedssele, som er fastmonteret i bilen inden kørsel med One Way MASTER Rørformet.

Produktbeskrivelse

One Way MASTER Rørformet består af en tynd rørformet polstret glidepude med en overside af velour og polstring af økotex fibervat. Inder-siden af One Way MASTER Rørformet er forsynet med tre stk. "en-vejs-bånd" i kraftigt velour, der låser, når brugeren glider frem i stolen, men giver brugeren mulighed for at glide tilbage i stolesædet.

Anvendelse

One Way MASTER placeres i brugerens stol og hjælper nu brugeren med at glide tilbage i stolen, samtidig forhindres fremadglidning i sædet. Anvendes af bruger, der selv kan hjælpe til med tilbageglidningen.

Fordele

- Nedsætter friktionen ved forflytning tilbage i stol
- Forhindrer brugeren i at glide frem i stolen
- Bruger er selv aktiv med tilbageglidning i stol
- Er nem at placere