


BRUGSVEJLEDNING for A ERGOTIP 3 (HMI-nr. 22566)



Max. belastning: 150 kg.

Læs brugsvejledningen nøje igennem, før du anvender produktet. Vær opmærksom på alle anvisninger og følg dem.

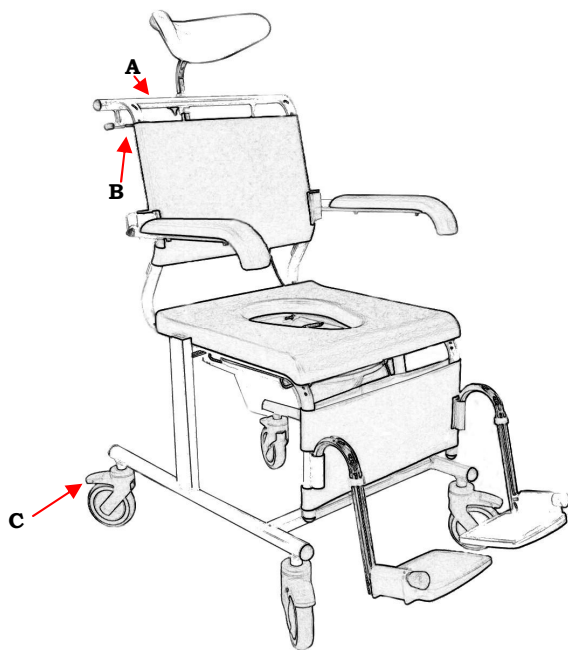

HVORDAN TIPPES STOLEN BAGUD: Grib med én hånd om skubbegrebet (A) øverst på stolens ryglæn. Klem så med fingrene kablet (B) ind mod skubbegrebet:

STOLEN TIPPER HERVED BAGOVER.

Slip kablet med fingrene, når den ønskede position er nået:

STOLEN ER HERMED FASTLÅST I DENNE STILLING.

Et lodret rørstykke på bækkengliderne sørger for, at spanden IKKE falder ud ved tipning: Ved isætning/udtagning skubbes spanden blot ind over rørstykket og er hermed sikret mod at falde ud ved tipning af stolen.

HVORDAN TIPPES STOLEN FREMAD: Stå ved siden af stolen. Grib med én hånd omkring skubbegrebet (A) og udløs (evt. med en tommelfot) kablet (B) ved at klemme det ind mod skubbegrebet. Placér den anden hånd på forkanten af stolens sæde. Træk derefter fremad med "udløserhånden" samtidigt med, at den anden hånd skubber nedad på sædets forkant:

STOLEN TIPPER HERVED FREMAD.

Slip kablet med fingrene, når den ønskede position er nået:

STOLEN ER HERMED FASTLÅST I DENNE STILLING.

Ved brug af denne form for vægtoverførsel er belastningen på rygsøjle og hofter minimal.



Ved brugers ind- og udstigning i stolen samt ved tipning SKAL det sikres, at stolens hjul er aflåst. Hjulenes bremsepedaler (C) må IKKE "pege" ind under stolen !



Hvis brugeren læner sig kraftigt fremad, kan der opstå **tipningsfare**, hvis forhjulene ikke er låst, og **hvis** deres bremsepedaler ikke peger fremad.



Ved brugers ind- og udstigning må særlig opmærksomhed vies til evt. tipningsfare.
STÅ ALDRIG PÅ FODHVILERNES FODPLADER !

OBS !


Siderne på nakkestøttens PUR kan *forsigtigt* skubbes sammen (:til smalle nakker) eller trækkes fra hinanden (:til bredere nakker). Skub/ træk i PUR-støtten inde på dens midte - *ikke* i de yderste dele af PUR-støtten.

Vær opmærksom på, at evt. brud opstået ved "vold" IKKE omfattes af garantien !

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:


Rengøring foretages med almindelige ikke-ætsende rengøringsmidler, hvorefter stolen spules. Den efterfølgende aftørring sker bedst med en blød klud.

HJULENE efterses med jævne mellemrum - **efterspændes** eventuelt - og skal holdes fri for bl.a. hår for at bevare den optimale køreevne.

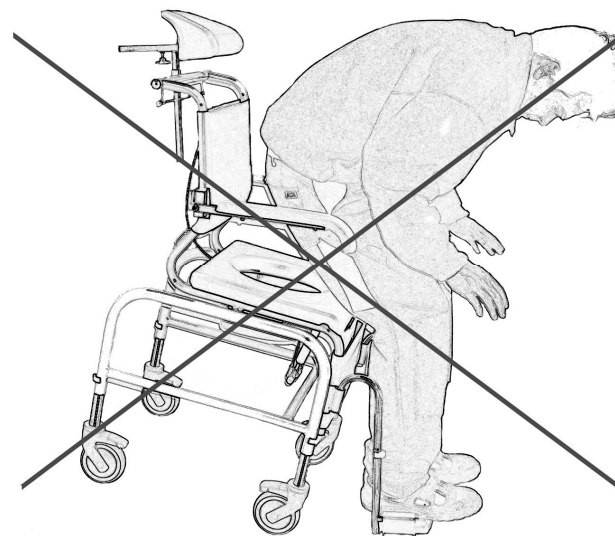

EXTRA TILBEHØR: Se www.danrehab.dk

Brugsvejledning fodhvilere model 01055

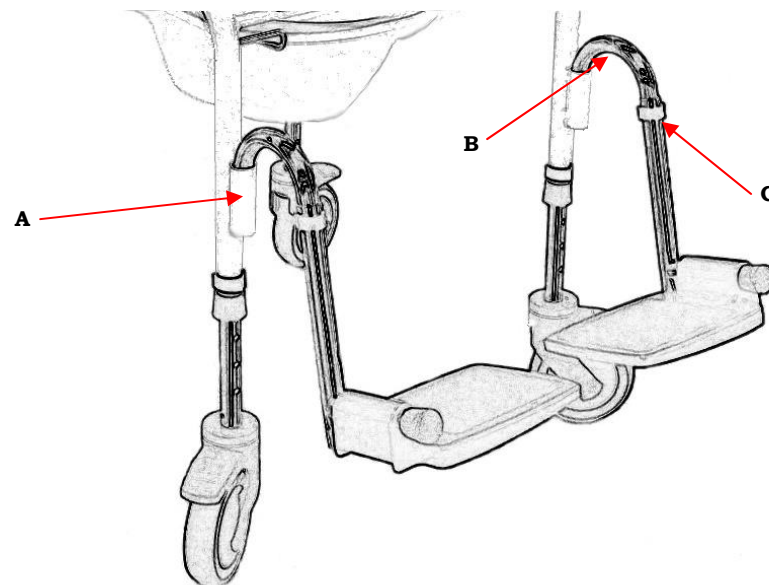

Hvert fodhvilerpar består af to højdeindstillelige fodhvilere (én til højre og én til venstre fod).

1. Anbring fodhvileren i beslaget (A), som er påsvejet stolens forben. I beslaget er indsvæjet en tværstang, som fodhvilerens slidser glider ned over og derved låser fodhvileren for sidedrej.



Disse slidser kan have skarpe kanter, som man kan rive sig på ved et uheld, når fodhvilene ikke er monteret på en stol.

2. Ønskes fodhvileren svinget ud til siden, **løftes** fodhvileren (nemtest i krumningen (B)) cirka én cm lodret: Herved glider fodhvilerens slidser fri af tværstangen, og fodhvileren kan nu drejes til siden (eller tages helt af).
3. Fodhvileren indstilles i længden ved at **fjerne** dens låseclip (C) og derefter **trække** (eller **skubbe**) fodhvilerens inderrør til den ønskede længde. **HUSK** at sætte fodhvilerens låseclip på plads igen.
4. Fodhvilene kan forsynes med et indstilleligt lægbånd (**model 01052**) fremstillet i skai med velcrolukning til at **stramme** eller **slække** samt en udelt polstret fodplade til at sætte oven på de to eksisterende fodplader (**model 01055-PL**). Fodhvilene kan efter ønske leveres **længere** eller **kortere**, hvis brugeren har ekstraordinært lange eller korte ben.



Under indstillingen skal man tage hensyn til den klemrisiko, der altid er til stede.