

Kindkontakt



Vejledning

Montagevejledning



Gældende for følgende vare:

Vare nr.: 450201
Kindkontakt med stik

Kindkontakten monteres på en kontakt arm fra Jysk Handi f.eks. en Flexarm eller tilsvarende arm system.

Montagebeskrivelse



Indhold:

1 stk. Kindkontakt
2 stk. Pinolskrue M5x6
1 stk. Pinolskrue M10x10
1 stk. Pinolskrue M10x12
1 stk. Pinolskrue M10x30
1 stk. Jackstik mono han, løst eller monteret.

Derudover skal der bruges:
2,5 mm Umbracoøgle **Medfølger ikke**
5 mm Umbracoøgle **Medfølger ikke**



Montering i 0°



Montering i 70°




Kindkontakt



Vejledning

Montageoversigt

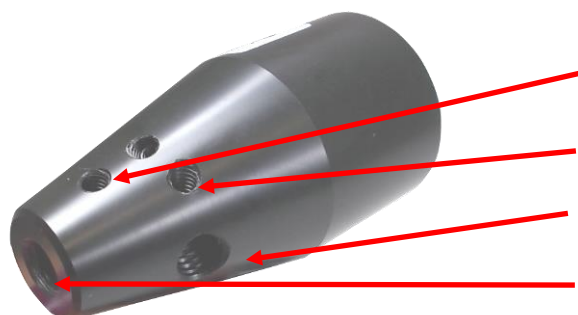

Huller

B

C


D

A


Montage af kindkontakt i 0°



1.

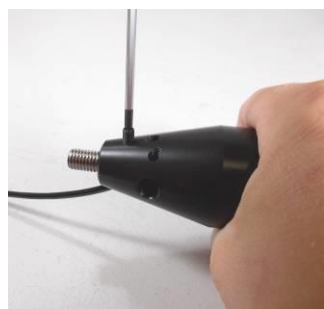

2.

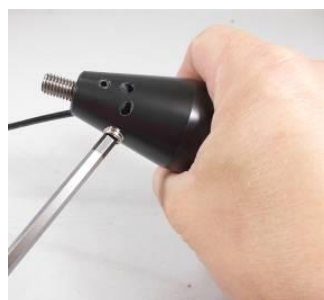

3.

1. Skru M10x30 pinolskrue i hul **A**



Må ikke skrues længere ind end 15 mm.

2. Skru M5x6 pinolskrue i hul **B** for at låse M10x30 i hul **A**
3. Skru M10x10 pinolskrue i hul **D** som en prop
4. Skru M5x6 pinolskrue i hul **C** for at låse M10x10 i hul **D**



Kindkontakt



Vejledning

Montage af kindkontakt i 70°



1. Skru M10x30 pinolskrue i hul **D**
2. Skru M5x6 pinolskrue i hul **C** for at låse M10x30 i hul **D**
3. Skru M10x12 pinolskrue i hul **A** som en prop
4. Skru M5x6 pinolskrue i hul **B** for og låse M10x12 i hul **A**

