

**DermaSilk<sup>®</sup>** tubeformet bandage. Ren stræksilke med Lycra<sup>®</sup> og anti-mikrobiel effekt. Ideel til behandling af atopisk eksem og irriteret hud.

## TUBEFORMET BANDAGE

KNÆ-/ALBUEBIND MV.

- Reducerer kløe og svie
- Mindsker hudirritation
- Tillader huden at ånde
- Bedre end bomuld
- Høj komfort
- Dokumenteret effekt



**DermaSilk<sup>®</sup>** er en hel tekstilserie i 100% silke, og fås som undertøj, nattøj, handsker, sokker, trusser, overtrækshue, knæ/albue bind m.v. DermaSilk lindrer symptomer og er ideelt til behandling af atopisk eksem/børneeksem, eksem og andre hudlidelser. Den lækre striksilke tillader huden at ånde, og beskytter uden at irritere som bomuld, uld og syntetiske stoffer. DermaSilk medvirker til at opretholde hudens naturlige fedt- og fugtbalance. DermaSilk er rensat for sericin og behandlet med AEM 5772/5, som aktivt forhindrer at bakterier og svampe kan trives på stoffet. Behandlingen kan hverken ses eller mærkes og er helt uden bivirkninger. DermaSilk overfører ikke kemikalier, gasser, medicin eller andre stoffer til huden. Den anti-mikrobielle effekt er permanent bundet til stoffet og bevares efter gentagen vask jf. nedenfor. DermaSilk bruges som supplement til, eller i stedet for, anden behandling som f.eks. hormon/steroid cremer. Da effekten er betinget af at stoffet er i direkte kontakt med huden, bør DermaSilk bruges mest muligt. Hvis der anvendes cremer, skal disse være helt absorberede inden brug af DermaSilk.

### VASKEANVISNING:



DermaSilk vaskes enten i hånden med neutral hårshampoo uden balsam, eller i vaskemaskine med pH-neutralt vaskemiddel ved 30-40 grader (finvask). Anvend ikke skyllemiddel eller blegemiddel. Skyl grundigt. DermaSilk bør ikke centrifugeres eller tørres i tørretumbler – stoffet tørrer hurtigt af sig selv. Som andre delikate stoffer, lægges DermaSilk vandret til tørre. Stryges eventuelt på svag varme. DermaSilk lægges før hver 10. vask nogle timer i blød, i en opløsning af 2 spiseskefulde natron (natriumbikarbonat) per 1 liter vand.

### Jepsen Import

Tune Erhvervspark  
Tune Parkvej 5 · DK-4000 Roskilde  
Telefon +45 4499 1432  
[www.jepsenimport.dk](http://www.jepsenimport.dk)

*Medicinsk udstyr*

*Speciale i astma, allergi og eksem*



 Medical Device Class 1

 Medical Device Class 1

Patenteret og produceret af  
Al.Pre.Tec., Italien.

**jepsenImport**

WEARING YOUR HEALTH

