

Brugermanual

CepaCom

v. 2.0

Dansk

1 Indholdsfortegnelse

1	Indholdsfortegnelse	2
2	CepaCom – Indhold.....	3
3	Tre trin for at komme hurtigt i gang	4
	Trin 1: Tjek hardware forbindelser	4
	Trin 2: Indstil Windows Operativ System	5
	Trin 3: Indstil CepaCom	7
4	Bluetooth Forbindelse.....	10
5	Opladning af Pocket PC og Combox.....	11
6	Isætning af SIM-kort i Pocket PC	11
7	Opbygning af skærbilledet.....	12
8	Indstil CepaCom – Overblik	12
9	Indstil CepaCom – Forklaring til de enkelte Indstillinger.....	13
10	Valg af menupunkt.....	18
11	Ring til en Person	18
12	Skriv SMS	19
13	Skriv en tekst/SMS og gem den	20
14	Check SMS.....	20
15	Tilføj kontakt	20
16	Søg kontakt	21
17	Vis kontakt	21
18	Slet kontakt.....	21
19	MP3 afspiller	22
20	Auto PIN Kode.....	23
21	Overfør SIM kortposter	23
22	Geninstaller CepaCom	23
23	Ikoner – Forklaring.....	24
24	Bilag # 1 Guide til Problemløsning	30
25	DISCLAIMER!.....	36
24	Index.....	37

2 CepaCom – Indhold

Grundlæggende Indeholder CepaCom flg. (Indhold kan variere):

- 1 stk. GB SD hukommelses kort med 1 stk. CepaCom software brugerlicens
- 1 stk. Pocket PC med standard tilbehør. (model kan variere)
- 1 stk. Casing til Pocket PC med påmonteret bagplade af metal.
- 1 stk. "Regnfrakke", der holder Pocket PC fast i casingen og beskytter mod regn og støv.
- 1 stk. ComBox (bruger du CepaCom ved direkte tryk på skærmen anvendes ikke ComBox).
- 1 stk brugervejledning.
- Diverse ledninger og stik.

Ekstra tilbehør kan være:


- Custom headset
- Headset adapter
- Ekstern højttaler
- Bluetooth headset
- Bluetooth højttaler
- Dele til montering af CepaCom (RAM mounts)



BEMÆRK: SD hukommelses kortet er en komplet backup af bl.a. dine SMSer, kontakter, indstillinger etc. Pas derfor godt på dit SD kort!

BEMÆRK: Det kan være en god ide at sætte et stykke tape omkring den øverste del af dit SD-kort. På den måde går det ikke så let i stykker, når det gentagne gange trykkes ind og ud af Pocket PCen.

CepaCom overblik:

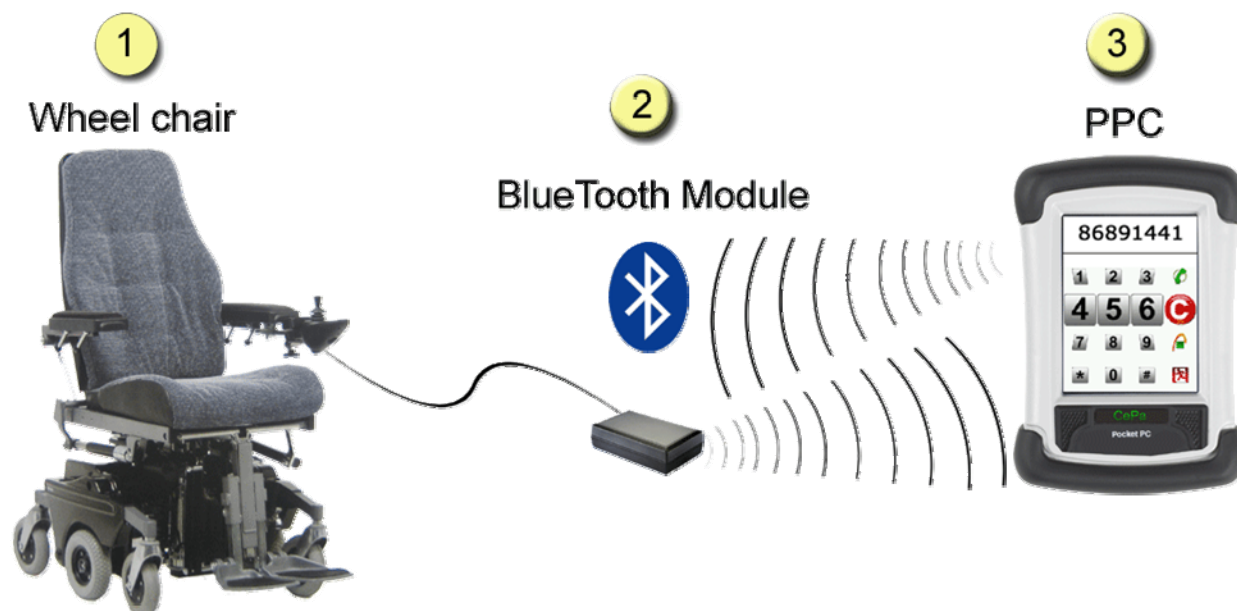

ComBoxen (2) er monteret på kørestolen (1) og har trådløs forbindelse til Pocket Pcen (PPC) (3).

3 Tre trin for at komme hurtigt i gang

Trin 1: Tjek hardware forbindelser

Når du modtager din CepaCom, skal du tjekke om alt er monteret korrekt, sidder fast og får den nødvendige strøm. Det gør du ved at følge trinnene 1-5 nedenfor.



Bemærk: Hvis CepaCom er monteret forkert, kan det resultere i manglende eller forkert ladning som kan skade systemet. Sørg for at CepaCom monteres af en autoriseret montør.

1. Sørg for at Pocket PCen (POCKET PC) og ComBox er opladt eller tilsluttet en fast strømkilde.
 - a. Ved fast montering på el-kørestol oplades Pocket PC og ComBox af el-kørestolen. Sørg for at el-kørestolen er opladt. (Se Pocket PC manual for opladning af Pocket PC)
 - b. Ved opladning af Combox fra en væglader skal du kontrollere, at vægladeren er intakt.
2. Tjek at alle ledninger er forbundet. Der må ikke være nogen løse kabler (brug strips til at fastgøre med)
3. Tjek at Joystick og/eller 01-kontakter er korrekt forbundet til ComBoxen (BlueTooth elektronik der forbinder joystick og kontakter til Pocket PCen).
4. Tjek at SIM kort er korrekt indsat i Pocket PC og ulåst. (Brug evt. klar tape til at forstærke SD kortets bagkant).

(Billede af den nye ComBox)

(1) Tilslutning af 01-kontakt (2) Tilslutning af både power og CAN-BUS (3) Tilslutning af USB ladekabel til Pocket Pcen (4) Tilslutning af eksterne enheder.




Advarsel: Vær meget forsigtig ved ind og udtagning af PPC fra holderen. Stikket i bunden af Pocket Pcen kan tage skade hvis ind- og udtagning sker for skødesløst.

Trin 2: Indstil Windows Operativ System

Efter check af hardware skal du sørge for at to specifikke Windows Indstillinger er sat korrekt op. Det gør du ved at følge nedenstående 8 punkter:


1. Udtag SD-kort med CepaCom programmet af Pocket PC.
2. Genstart Pocket PC'en ved at resette den. (Windows starter automatisk) (Se Pocket PC manual)
3. Sørg for at "Backlight" (lyset i skærmen) er indstillet korrekt i Windows. Vejledning herunder:

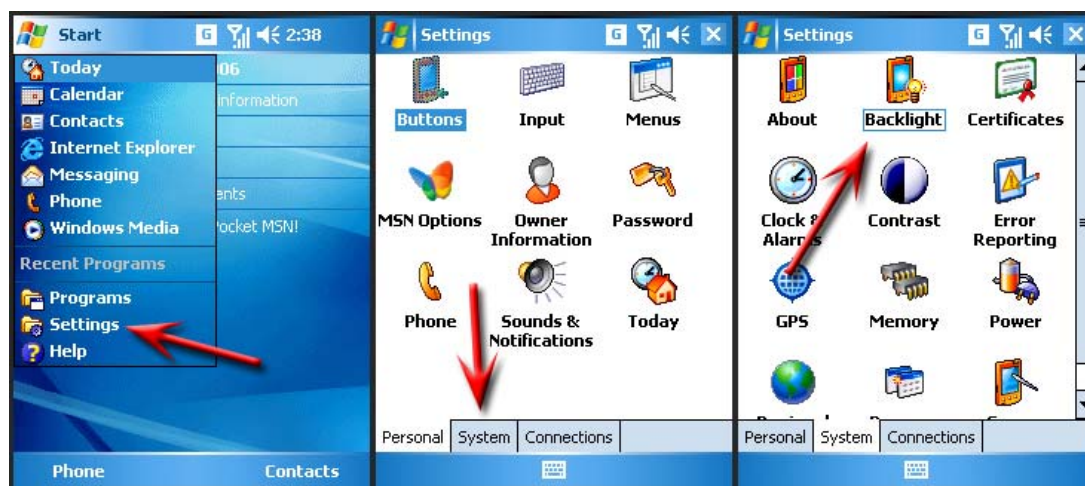

1. Tryk på "Start" og find "Settings"

2. Tryk på fanebladet "System"


4. Tryk på ikonet "Backlight"

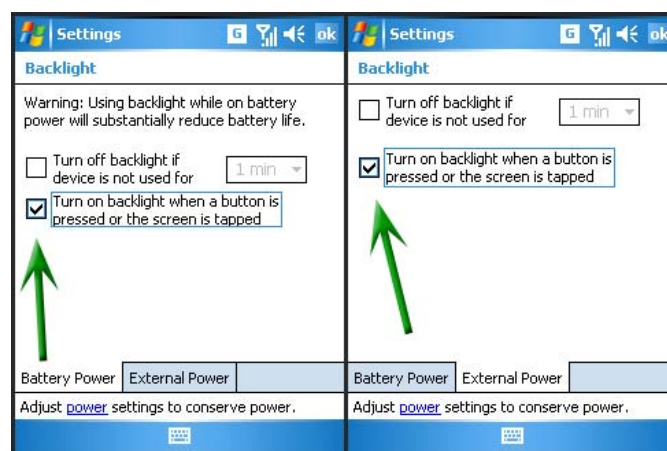

4. I fanebladet "Battery Power" skal du sørge for at der er flueben i den nederste. IKKE den øverste!

5. I fanebladet "External Power" skal du sørge for at der er flueben i den nederste. IKKE den øverste!


5. Sørg for at "Power Save" (Strømsbesparelse) er indstillet korrekt i Windows. Vejledning herunder:

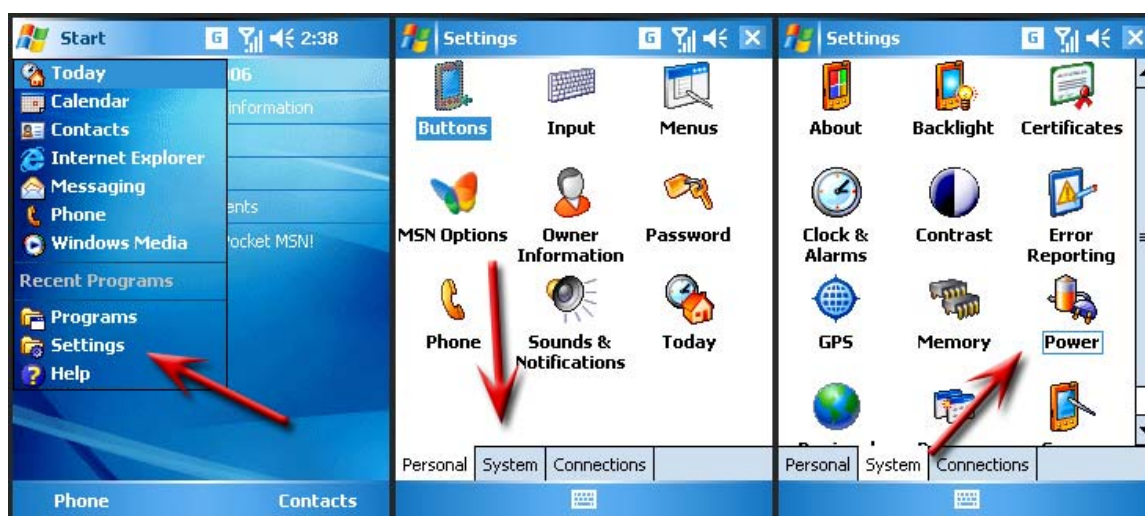

1. Tryk på "Start" og find "Settings"

2. Tryk på fanebladet "System"

3. Tryk på ikonet "Power"

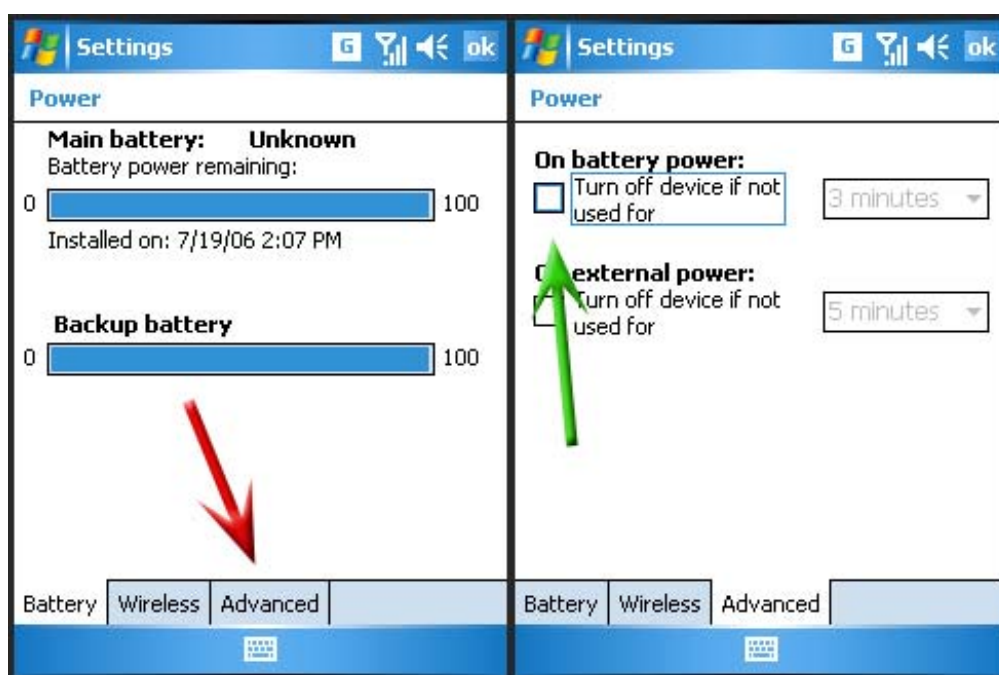

4. Klik på fanebladet "Advanced"

5. Kontroller at begge firkanter er tomme. M.a.o. billedet herover skal ligne dit eget skærmbillede på Pocket PCen.

6. Indsæt SD kort med CepaCom programmet i Pocket PCen (se Pocket PC manual).
7. Du bliver nu spurgt om du vil starte CepaCom. Vælg ja.
8. Programmet starter

Trin 3: Indstil CepaCom

Første gang Pocket PCen starter op bliver du guidet igennem en række indstillinger.

1. Forbind ComBox med Pocket PC (ComBox ~ Bluetooth elektronik der forbinder joystick og kontakter til Pocket PCen).
2. Indstil hvordan du betjener af CepaCom.
3. Indstil programmet.

Ad. 1 – Forbind ComBox og Pocket PC

Første gang CepaCom starter kan det forekomme, at systemet endnu ikke er tilknyttet en ComBox

Systemet vil først søge efter de ComBoxe som er i nærheden.

For at din Pocket PC selv "ved", at den har fat i den rigtige ComBox, vil den forbinde til alle de fundne ComBoxe én efter én, og afvente at brugeren aktiverer sin 01-kontakt/joystick for at forbinde Pocket PC og ComBox.

I denne fase har brugeren 10 sekunder til at trykke på knappen. Hvis systemet ikke "opdagede" nogle reaktioner fra brugeren i løbet af 10 sekunder, vil systemet prøve den næste ComBox (såfremt der er flere).

Når systemet har modtaget et tryk fra brugeren vil systemet være tilknyttet denne ComBox fremover.

Ad. 2 - Indstil hvordan du betjener CepaCom


Efter en Combox er blevet tilknyttet din Pocket PC, skal du nu til at fortælle programmet, om du bruger Joystick og/eller 01-kontakter til at kontrollere, hvad der foregår på skærmen. Dette vil også bestemme, hvordan du bruger dit joystick og/eller 01-kontakter. Du kan kombinere dette efter dine egne behov og evner.



Det første der sker, er, at systemet vil spørge, hvor mange input brugeren har. Her tæller hver knap og hver retning på dit joystick (højre, venstre, frem og tilbage) som ét input hver.

Forklaring følger på næste side.

Antal Input	Eksempler (andre kombinationer mulige)
1 Input	Hvis du har én 01-kontakt eller kun kan bruge én bevægelsesretning (fx tilbage) med dit joystick, har du 1 input.
2 Input	Hvis du har to 01-kontakter og ikke andet, har du 2 input. Hvis du har et joystick som du kun kan bevæge fx til venstre og tilbage (i 2 retninger) har du 2 input. En kombination mellem én 01-kontakt og én retning på dit joystick udgør også 2 input.
3 Input	Hvis du har tre kontakter og ikke andet har du 3 input. Hvis du har et joystick som du kun kan bevæge fx til venstre, op og ned har du 3 input. En kombination mellem 01-kontakter og joystick er også mulig.
4 Input	Hvis du har et joystick og ikke andet har du 4 input Fejl! Bogmærke er ikke defineret. (højre/venstre/frem/tilbage). En kombination mellem 01-kontakter og joystick er også mulig.
5 Input	Hvis du har et joystick og én knap har du 5 input Fejl! Bogmærke er ikke defineret.. (højre/venstre/frem/tilbage + tryk) En anden kombination mellem 01-kontakter og joystick er også mulig.

Sådan indstiller antallet af brugerens input:

	<p>For at vælge hvor mange input brugeren har, vælges den venstre funktion. (knappen med pilene).</p> <p>Dette kan gøres på to måder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Enten ved at aktivere et vilkårligt input (Eks. tryk på en knap eller ryk i joysticket) når den venstre knap er aktiv (stor). Eller... 2. Tryk et vilkårligt sted på skærmen på Pocket PCen når den venstre knap er aktiv (stor). <p>Når input er sat til det ønskede antal, vælges den højre funktion (OK) for at bekræfte valget. Valget af OK funktionen vælges efter samme fremgangsmåde som ovenfor beskrevet.</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Down</p> 	<p>Herefter vil systemet forsøge at tildele hvert input en betydning efter brugerens valg.</p> <p>På billedet til venstre, er det funktionen "ned" der skal defineres.</p> <p>Hvis brugeren har nemmest ved at navigere ned ved at bevæge joysticket ind mod sig selv (tilbage), rykkes joysticket tilbage.</p> <p>Hold joysticket i tilbage, indtil det røde område er fyldt helt op.</p> <p>Fortsæt med at definere de andre retninger.</p>
<p style="text-align: center;">Select</p> 	<p>På billedet til venstre er det "vælg" funktionen der skal defineres.</p> <p>Har brugeren nemmest ved at vælge med et tryk på en 01-kontakt, holdes denne 01-kontakt nede indtil det røde område er helt fyldt op.</p> <p>Når samtlige valgte input er blevet indstillet/defineret, starter programmet og kan navigeres med de valgte input.</p>



Bemærk: Har du lavet en fejl under denne opsætning gøres flg.:

Vælg det samme input til to forskellige funktionaliteter. Dette resulterer i en fejlmelding og indstillingen vil starte forfra.

Har du afsluttet indstillingerne, skal du opsætte CepaCom igen. Se beskrivelse side XX.

Ad. 3 – Indstil programmet

Indtast PIN kode

Du skal indtaste din PIN-kode for at aktivere dit SIM-kort. Dette gøres ved at udpege de korrekte 4 cifre og bekræfte dette valg.



BEMÆRK: Tre forkerte indtastninger af PIN kode fastlåser din CepaCom. Lås op med PUK kode. PUK koden finder du ved at kontakte din teleudbyder.

BEMÆRK: Cepa Mobility fralægger sig ethvert ansvar i forhold til tab a personlige oplysninger som følge af indtastning af Auto PIN-kode.

BEMÆRK: 3G SIM kort virker ikke i en 2G Pocket PC. Kan du ikke ringe, skal du kontrollere om dit SIM kort er 3G.

4 Bluetooth Forbindelse

Sådan kan du se om Pocket PC og Combox har opnået forbindelse til hinanden:



Den trådløse Bluetooth forbindelse mellem POCKET PC og ComBox er opnået, når ikonet i øverste højre del af skærmen ligner billedet til venstre herfor.

Er der en rød streg over ikonet, er Bluetooth forbindelsen mellem POCKET PC og ComBox gået tabt. Der henvises til bilag # 1 – Guide til problemløsning – Problem 7. Du kan også gennemgå trin 3 i "Seks trin for at komme hurtigt i gang."

5 Opladning af Pocket PC og Combox

Pocket PC:

- Se Pocket PC manual

ComBox:

1. Indsæt AC adapter i Combox.
2. Tilslut strøm.
3. Afvent 3 timer (ComBoxen kan godt anvendes mens den lader fra strømstikket)

Ladetider:

1 time = 80 % opladt

3 timer = 100 % opladt

Batteriet tager ikke skade af at blive opladt uden at være helt afladt (Man kan dermed 'sjat-lade' batterierne).



ADVARSEL: For at undgå at skade din Pocket PC eller AC adapteren, så skal du sikre dig, at alle samlinger/stik er korrekt tilsluttede!

6 Isætning af SIM-kort i Pocket PC

Du skal:

1. Fjerne batteriet
2. Indsætte SIM kort. (Husk at der kan være en fysisk lås på SIM kortet. Brug ikke vold)
3. Isætte batteri (evt. lås batteriet fast)

Genstart CepaCom og hent SIM-kortposter (Se "Seks trin for at komme hurtigt igang")




BEMÆRK: Såfremt SIM kortet efter gentagne forsøg ikke virker, kontakt din teleoperatør.




BEMÆRK: Forlad CepaCom programmet og tryk på on/off knappen inden batteriet tages ud. Så mister du ikke informationer.

7 Opbygning af skærbilledet

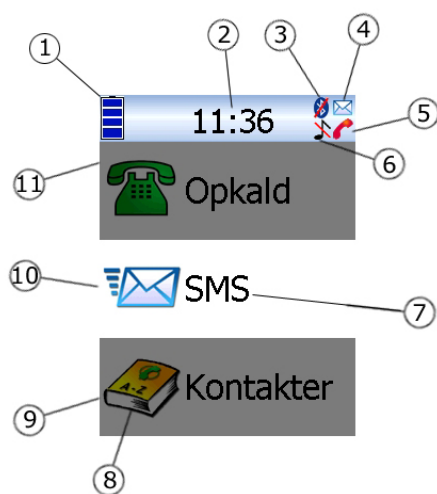

- 1 Batteriniveau
- 2 Tid/dato
- 3 Bluetooth forbindelse on/off
- 4 Ulæst SMS i indbakke
- 5 Mistet opkald
- 6 Lydløs / Mute
- 7 Menu tekst
- 8 Menu ikon
- 9 Nedre menu, Inaktivt
- 10 Mellemste menu, Aktivt
- 11 Øvre menu, Inaktivt

8 Indstil CepaCom – Overblik

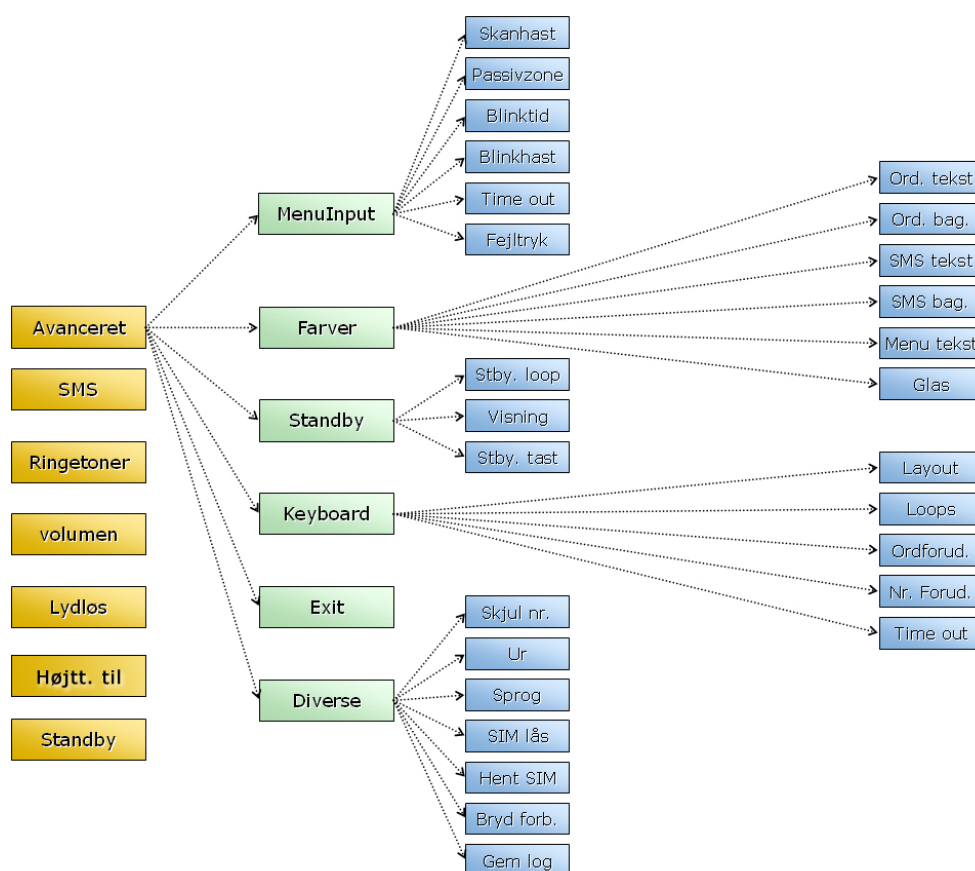







9 Indstil CepaCom – Forklaring til de enkelte Indstillinger

Følgende er en beskrivelse af de enkelte muligheder for at indstille CepaCom efter dine egne behov og evner. Overordnet kan du indstille, hvor hurtigt eller langsomt programmet skal afvikles, hvilke farver skærmen skal vise, hvilke lyde der skal afspilles, hvordan CepaCom falder i søvn, hvordan systemet vågner igen etc. Listen er alfabetisk.

Funktion	Forklaring
Auto PIN	'Auto-PIN' bestemmer om CepaCom skal starte op med eller uden indtastning af PIN-kode.
Blinkhastighed	'Blinkhastighed' angiver hvor hurtigt /langsomt menupunktet blinker efter et valg. ! ADVARSEL: For høj en frekvens på blinkhastighed kan fremkalde epileptiske anfald!
Blinktid	'Blinktid' angiver den tid, som menupunktet blinker efter et valg. Dette gør det muligt at sænke og hæve hastigheden, når man har valgt et menupunkt og kan hjælpe mennesker med kognitive funktionsnedsættelser.
Bryd forbindelsen	Denne indstilling afbryder forbindelsen med ComBoxen, næste gang du genstarter CepaCom.
BT til/fra	'Bluetooth til/fra' slår dit BlueToth headset eller højttaler til/fra ! BEMÆRK: Husk at tilslutte dine BlueTooth enheder i Windows Mobile. Dette gøres ved at starte din Pocket PC uden SD kortet isat. Koden til Bluetooth headset er normalt '1234', '0000' eller '9999'.
Exit Standby	'Exit Stby.' bestemmer, hvor lang tid du skal holde din kontakt nede, før CepaCom laver et 'exit' (går ud af) standby funktionen. Denne indstilling forhindrer, at du ved et uheldigt tryk på kontakten, 'vækker' systemet.
Farve, menutekst	'Menutekst' indstiller tekstfarven i menuerne, når du navigerer i CepaCom.
Farve, Ordbogs baggrund	'Ordb. bag' indstiller den farve, som baggrunden ved ordforslagene bliver vist med.

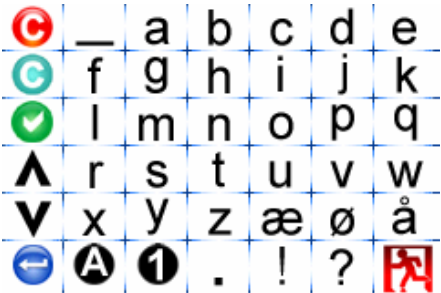Farve, Ordbogs tekst	'Ordb. Tekst' indstiller den tekstfarve, som ordforslagene bliver vist med. Farvekombinationer på for- og baggrund kan hjælpe mennesker med farveblindhed til bedre at se teksten.
Farve, SMS baggrund	'SMS-bag.' indstiller baggrundsfarven ved SMS skrivning.
Farve, SMS tekst	'SMS-tekst' indstiller den farve, som SMS teksten bliver vist med.
Fejltryk	Fejltryk indstiller et tidsinterval, indenfor hvilket flere tryk kun bliver opfattet som ét tryk. Denne indstilling er god til mennesker, der ryster eller har kontakter med PRAL.
Gem log	Denne funktion slår logning til/fra. CepaCom logger/gemmer tryk og evt. fejl der måtte opstå. CepaCom logger IKKE private SMSer og kontakter.
Genstart	Denne funktion genstarter din Pocket PC og opstarter automatisk programmet CepaCom.
Glas	Her indstiller du gennemsigtigheden af de inaktive felter når menuen eller keyboard vises. Denne indstilling bevirker, at man kan se menuerne og keyboardet fra en skarpere vinkel jo lysere grafikken er. Dette er en fordel i omgivelser med meget sollys.
Hent SIM	'Hent Sim' indlæser alle dine personlige kontakter fra SIM kortet. ! Bemærk: Dette kan vare op til 2 minutter! Genstart derfor ikke Pocket PC med det samme. ! Bemærk: Det sker at CepaCom ikke kan importere få af dine SIM-kort poster. Dette skyldes at kontakten på SIM kortet er formateret forkert. CepaCom henter kun ét navn og ét nummer (mobilnummeret).
Højt. til / fra	Slår den eksterne højttaler på Pocket PC fra eller til. ! Bemærk: Det anbefales, at du beholder dit headset tilsluttet Pocket PC. Derved får du den bedste lyd ved telefonopkald, da mikrofonen i headsettet er aktiv.

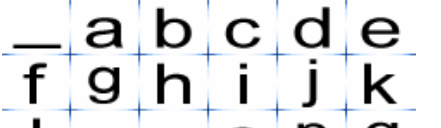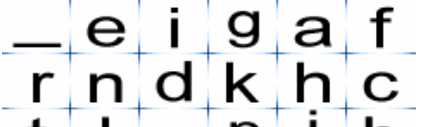Keyboard Layout	'Keyboard Layout' indstiller den opbygning, som keyboardet har.
<p>ABCDEF – Layout med bogstaver ordnet i alfabetisk rækkefølge.</p>	 <p>A 6x7 grid showing the ABCDEF layout. Row 1: [C], [], a, b, c, d, e. Row 2: [C], f, g, h, i, j, k. Row 3: [check], l, m, n, o, p, q. Row 4: [^], r, s, t, u, v, w. Row 5: [v], x, y, z, æ, ø, å. Row 6: [], [A], [1], ., !, ?, []</p>
<p>QWERTY – Layout med bogstaver ordnet efter qwerty rækkefølge.</p>	 <p>A 6x7 grid showing the QWERTY layout. Row 1: [C], [], q, w, e, r, t. Row 2: [C], y, u, i, o, p, å. Row 3: [check], a, s, d, f, g, h. Row 4: [^], j, k, l, æ, ø, z. Row 5: [v], x, c, v, b, n, m. Row 6: [], [A], [1], ., !, ?, []</p>
<p>ERIN – Optimeret layout med bogstaver ordnet efter frekvens. (Anbefales af Cepa Mobility til øvede brugere)</p>	 <p>A 6x7 grid showing the ERIN layout. Row 1: [], e, i, a, g, f, b. Row 2: r, n, d, k, h, c, w. Row 3: t, l, m, p, j, æ, [^]. Row 4: s, o, u, y, ø, å, [v]. Row 5: [A], v, [1], ., [check], q, x. Row 6: [], ?, !, [C], [C], z, []</p>
<p>KISS 1 - Simpelt layout med større bogstaver og færre funktioner. (Anbefales af Cepa Mobility til mindre øvede brugere)</p>	 <p>A 5x7 grid showing the KISS 1 layout. Row 1: [], a, b, c, d, e. Row 2: f, g, h, i, j, k. Row 3: l, m, n, o, p, q. Row 4: r, s, t, u, v, y. Row 5: ., [check], [C], z, å, æ</p>
<p>KISS 2- Simpelt layout med større bogstaver og færre funktioner. (Anbefales af Cepa Mobility til mindre øvede brugere)</p>	 <p>A 5x7 grid showing the KISS 2 layout. Row 1: [], e, i, g, a, f. Row 2: r, n, d, k, h, c. Row 3: t, l, m, p, j, b. Row 4: s, o, u, y, q, å. Row 5: ., [check], [C], v, z, æ</p>

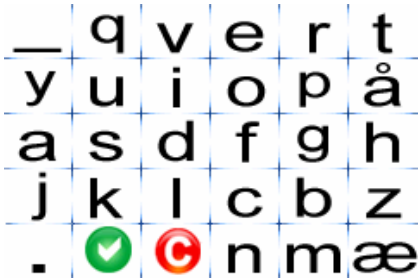	<p>KISS 3- Simpelt layout med større bogstaver og færre funktioner. (Anbefales af Cepa Mobility til mindre øvede brugere)</p> 
Keyboard lyd	Du kan vælge at slå lyd til eller fra under SMS skrivning.
Loops	<p>'Loops' (under keyboard) indstiller det antal gentagelser som den enkelte række vil scanne, såfremt man ikke vælger et bogstav.</p> <p>0x – giver den hurtigste gennemgang af en række 3x – giver den langsomste gennemgang af en række</p>
Lydløs	'Lydløs' angiver, om CepaCom udsender lyde eller ej. Indikation af lydløs tilstand i toppen af skærmen ved valg af menu.
Nr.forud. (Nummer forudsigelse)	'Nr.forud' indstiller, om CepaCom automatisk skal fuldføre et påbegyndt indtastet nummer eller ej (under det numeriske tastatur)
Ordforud. (Ordforudsigelse)	' Ordforud.' (under keyboard) indstiller, det antal ordforslag som vises på keyboardet.
Passiv Zone	<p>Den passive Zone er et interval under scanningen, hvor et valg af menupunkt ikke kan foretages. Denne zone kan udvides eller formindskes og kompenserer for en borgers evt. nedsatte reaktionstid på valg af menupunkt med kontakten. Jo højere % -sats på passiv zone, jo mere kompenseres der for nedsat reaktionsevne.</p> <p>Scannehastighed og passiv zone skal afstemmes den enkelte borgers reaktionsmønstre.</p> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>! BEMÆRK: Såfremt du ikke har problemer med at ramme din kontakt (god reaktionsevne og præcision), kan du sætte den 'Passive Zone' helt ned til 0 % uden at det vil genere.</p> </div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>! BEMÆRK: Har du svært ved at ramme din kontakt, og foretager du mange ubevidste/upræcise valg, kan du sætte den passive zone op til et passende niveau</p> </div>
Ringetoner	<p>'Ringetoner' indstiller ringetonen, når man modtager et telefonopkald.</p> <p>Visse personer med nedsat hørelse har nemmere ved at høre højere toner end dybe. Andre har det omvendt.</p>

Skannehastighed	<p>Jo større interval, des langsommere hastighed. Jo mindre interval, des hurtigere hastighed.</p> <p>! BEMÆRK: Har du fået indstillet din skannehastighed for højt, så scanningen er hurtig?</p>
Skift BT	Skifter mellem to ComBoxe. Er kun relevant såfremt, du har mere en én Combox tilknyttet.
Skjul nr.	'Skjul Nr.' bestemmer, om modtageren af dine telefonopkald skal kunne se, hvem der ringer eller ej.
SMS toner	<p>'SMS-toner' indstiller lyden når man modtager en SMS.</p> <p>Visse personer med nedsat hørelse har nemmere ved at høre højere toner end dybe.</p>
Sprog	Angiver hvilket sprog, der vises i menuerne og samtidig, hvilke ordbøger der er aktive.
Stby. Loop	'Stby. Loop' indstiller, det antal omgange menuerne scanner, inden CepaCom går i dvale.
Stby. Vis	'Stby. Vis' bestemmer, hvad der skal vises på skærmen, når CepaCom går i standby. ('falder i søvn')
Timeout	'Timeout' angiver den tid, som det første menupunkt vil vente efter et valg af forrige menupunkt. Dette gør det muligt at sænke og hæve hastigheden, inden scanningen fortsætter. Dette kan hjælpe mennesker med langsommere reaktionsevne og/eller kognitive funktionsnedsættelser.
Timeout (Keyboard)	<p>'Timeout' (Keyboard) angiver den tid som, det aktive felt på keyboardets øverste række (ordforslag) vil afvente, inden scanningen fortsætter.</p> <p>Dette gør det muligt at sænke og hæve hastigheden under SMS skrivning, inden scanningen fortsætter. Dette kan hjælpe mennesker med læsevanskeligheder, langsommere reaktionsevne og/eller kognitive funktionsnedsættelser at nå at læse ordforslag under SMS skrivning.</p>
Ur	'Ur' bestemmer, hvilke informationer der skal vises i toppen af displayet (på den lyseblå baggrund).
Volumen	'Volumen' angiver den lydstyrke, som CepaCom afgiver ved afspilning af en lyd, ringetone eller sms-tone.

10 Valg af menupunkt

Valg af et menupunkt kan gøres på 2 måder:

1. Gennem din 01-kontakt eller joystick, og/eller....
2. med et tryk med fingeren/hånden på skærmen.

Ad. 1 – 01-Kontakt

Menupunkterne scanner over skærmen fra bunden mod toppen. Når det ønskede menupunkt er i den mellemste (og klareste) del af skærbilledet, afgives et tryk på kontakten. Menupunktet blinker og afgiver en lyd. Menupunktet er valgt.

Ved brug af joystick eller mere end én 01-kontakt, vælges menupunktet manuelt.

Ad. 2 – Tryk på skærmen

Menuerne scanner automatisk over skærmen. Når det ønskede menupunkt er i den mellemste (og klareste) del af skærbilledet, afgives et tryk på skærmen.

Ved brug af joystick fungerer den trykfølsomme skærm sig som et joystick. Du kan dermed trykke på forskellige dele af skærmen og dermed bruge CepaCom.

11 Ring til en Person

Først en forklaring af det numeriske tastatur:

41527188

→ Indtastet nr.



→ Knappen for 'Ring Op'



→ Slet et tal

















→ Fuldfør et foreslået nr.




→ Exit numerisk tastatur.

Du kan ringe til en person på 4 måder:

1.	Opkald → 	Indtast nr. → 	"Indtast nummeret" →	Ring Op 		
2.	Kontakter → 	Søg → 	"Indtast navn" →	Vælg Ok → 	"Vælg navn" →	Ring Op 
3.	Opkald → 	Opkalds i → 	"Vælg telefonnummer" →	Ring Op 		
4.	SMS → 	Indbakke/Udbakke/Afsendte → 	"Vælg SMS" → 	Ring op 		

12 Skriv SMS



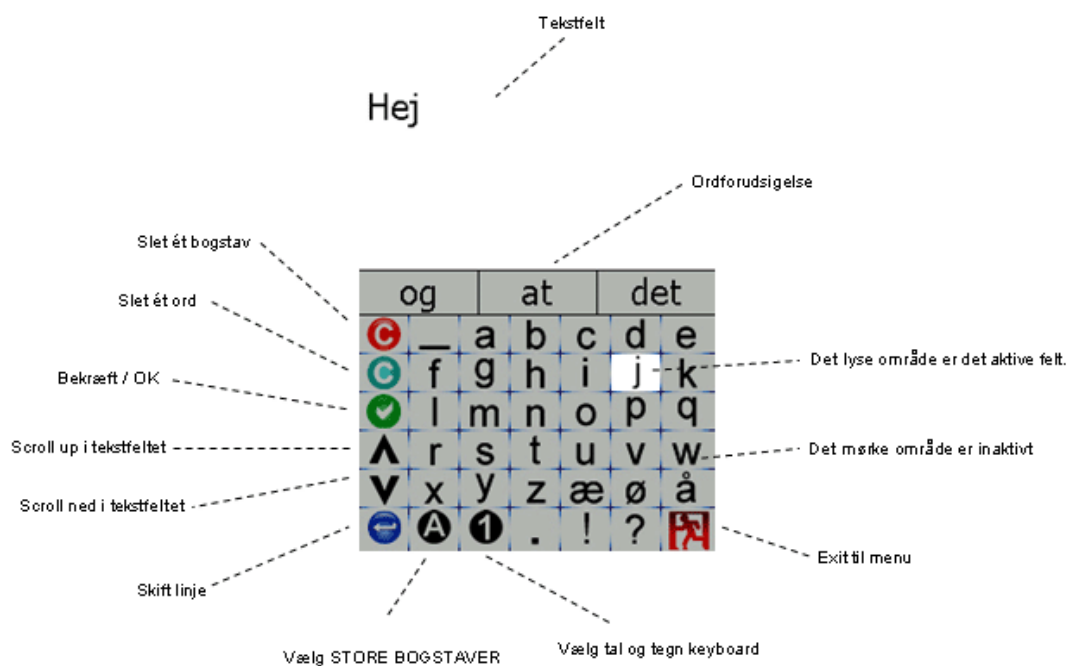

Først en forklaring af skærmtastaturet:



En SMS skrives ved at udpege bogstaverne på skærmen. Anvender du scanning, skal du først vælge den række, hvori det aktuelle bogstav befinder sig. Derefter scanner programmet på tværs i rækken. Når det markerede felt er ud for det aktuelle bogstav, vælger du på din kontakt eller joystick.

13 Skriv en tekst/SMS og gem den

For at skrive en tekst og gemme den i udbakken skal du vælge menupunkterne:

SMS → 	Skriv SMS → 	"Skriv din tekst" →	Bekræft → 	Tilbage 
--	--	---------------------	--	--

Din tekst er nu gemt i udbakken.

14 Check SMS

Vælg flg. menupunkter:

SMS → 	Indbakke → 	Vælg SMS 
--	---	---



BEMÆRK: En læst SMS er markeret med billede, der forestiller et åbent brev. En ulæst SMS er markeret med et billede af et lukket brev.





15 Tilføj kontakt

Vælg flg. menupunkter:

Kontakter → 	Tilføj → 	"Indtast navn" →	Bekræft → 	"Indtast nr." →	Bekræft 
--	---	------------------	--	-----------------	--






16 Søg kontakt

Vælg flg. menupunkter:

Kontakter → 	Søg → 	"Indtast navn" →	Bekræft → 	"Find navnet" →	Bekræft 
--	--	------------------	--	-----------------	--






17 Vis kontakt

Vælg flg. menupunkter:

Kontakter → 	Vis → 	"Indtast navn" →	Bekræft → 	"Find navnet" →	Bekræft → 	Info 
--	--	------------------	--	-----------------	--	---

18 Slet kontakt


Vælg flg. menupunkter:

Kontakter → 	Søg → 	"Indtast navn" →	Bekræft → 	"Find navnet" →	Bekræft → 	Slet 
--	--	------------------	--	-----------------	--	---

19 MP3 afspiller

MP3-afspillerens brugergrænsefladen består af to primære dele. Den øverste halvdel indeholder elementer til at styre afspilleren, og den nederste del giver information om, hvor lang tid det aktive nummer har spillet, den aktuelle volumenstyrke og om *repeat* eller *shuffle* er slået til.

MP3 Oversigt.

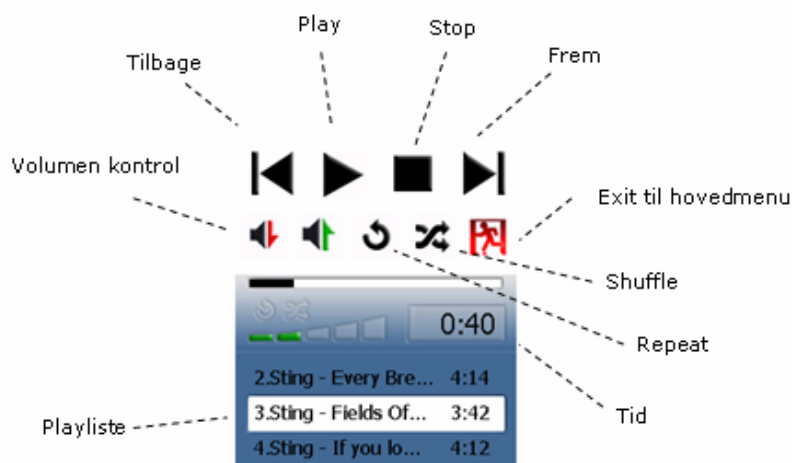

Tilføjelse af musik

MP3-Afspilleren viser og afspiller de MP3 numre, der ligger i mappen "Musik" på SD-Kortet. Hvis du vil tilføje musik, skal du kopiere de ønskede mp3-filer over i 'Musik' mappen på SD-kortet.

Kopiering af MP3-filer fra en computer til SD-kort kan enten ske gennem Pocket PCen eller direkte til SD-Kortet.

Gennem Pocket PC

1. Først skal du sikre dig at SD-kortet sidder i Pocket PCen.
2. Derefter tilslutter du Pocket PCen til den computer, du ønsker at hente MP3-filer fra.
3. Herefter skal du vælge fig.:
 - a. "Denne computer"
 - b. "mobile Device"
 - c. " My Windows Mobile-Based Device"
 - d. "SDMMC".
 - e. Find mappen "Musik"
 - f. Overfør Musik og e-bøger til denne mappe.





Direkte til SD-kort

Hvis du har en SD-kortlæser, kan du lægger MP3-filerne direkte i mappen "Musik", der ligger på SD kortet.

Kopiering direkte til SD-kortet går væsentligt hurtigere end gennem Pocket PCen.





20 Auto PIN Kode

Du kan indstille CepaCom til automatisk at indtaste din PIN kode hver gang programmet starter. Så er du fri for at indtaste PIN koden, hver gang du starter CepaCom. Dette gøres ved at vælge:

Indstil →	Avanceret →	Diverse →	Auto Pin →	"Indtast din PIN kode"
				

21 Overfør SIM kortposter

Du skal vælge følgende menupunkter for at få overført din telefonbog (SIM-kort poster) til din CepaCom.

Indstil →	Avanceret →	Diverse →	Hent SIM →	"CepaCom overfører SIM kort poster"
				







BEMÆRK: CepaCom overfører kun ét navn og ét nummer. Du kan med andre ord ikke have flere telefonnumre tilknyttet den samme kontaktperson. Sørg derfor for at det telefonnummer, du bruger oftest til en kontaktperson, er det første nummer under dine kontakter.



BEMÆRK: Overførsel af SIM-kort poster kan tage flere minutter.

22 Geninstaller CepaCom
















Denne tilknytning kan dog brydes ved at gå ind under:
















Indstil →	Avanceret →	Diverse →	Bryd forb..
			
















Tilslut et BlueTooth headset eller BlueTooth Højttaler








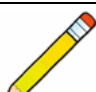







23 Ikoner – Forklaring















	ACCEPTÉR/BEKRÆFT – Accepterer en forespørgsel.
	AFBRYD – Afbryder et igangværende opkald. (lægger røret på)
	AFSENDTE – Viser de SMS beskeder som du har afsendt.
	AFVIS – Afviser en forespørgsel.
	ANNULLER – Får dig tilbage til hovedmenuen.
	AUTO PIN – Giver mulighed for at indtaste din PIN kode én gang for alle. På den måde kan du starte din CepaCom op hurtigere.
	BEMÆRK – Angiver når der fx ikke er nogen SMSer i indbakken.
	BESKED - Giver adgang til menuen hvor du bl.a. kan læse og skrive SMSer.
	BLINKHASTIGHED – Indstiller hvor hurtigt et menupunkt skal blinke, når man har valgt det.
	BLINK TID – Indstiller i hvor lang tid menupunktet skal blinke, inden scanningen fortsætter.
	BRYD FORBINDELSEN – Denne indstilling afbryder forbindelsen med ComBoxen, næste gang du genstarter CepaCom.
	'Bluetooth til/fra' slår dit BlueToth headset eller højttaler til/fra ! BEMÆRK: Husk at tilslutte dine BlueTooth enheder I Windows Mobile. Dette gores ved at starte din Pocket PC uden SD kortet isat. Koden til Bluetooth headset er normalt '1234', '0000' eller '9999'.
	DIVERSE – Giver adgang til at indstille 'Skjul Nr' og 'Ur i Top'.

	ENTER – Skifter linje ved skrivning af SMS
	EXIT – Forlader det numeriske tastatur.
	EXIT to Windows
	FARVER – Her kan du indstille farverne på bl.a. menuerne, baggrunde og tekst.
	FEJLTRYK – Indstiller et tidsinterval indenfor hvilket flere tryk kun bliver opfattet som ét tryk.
	FULDFØR NR. - Fuldfører et telefonnummer såfremt dette forefindes på Pocket PCen.
	GEM LOG – Denne funktion slår logging til/fra. CepaCom logger (gemmer) dine tryk og evt. fejl der måtte opstå. CepaCom logger/gemmer IKKE SMS og kontakter.
	GENOPTAG – Genoptager skrivningen af en SMS.
	GENSTART – Genstarter CepaCom.
	GLAS – Her indstiller du gennemsigtigheden af de inaktive felter under scanningen. Dette har indflydelse på menuerne og SMS skrivningen og bevirker, at man kan se informationerne fra en skarpere vinkel.
	HJEMME NUMMER – Angiver telefonnummer på kontaktens hjemme-adresse.
	HENT SIM – Importerer dine SIM-kort poster (dine kontakter) fra din gamle telefon til CepaCom.
	HØJTALER TIL – Slår lyden i din eksterne højttaler til. (Ekstern højttaler er IKKE en del af CepaCom basis-løsningen)
	HØJTALER FRA – Slår lyden i din eksterne højttaler fra. (Ekstern højttaler er IKKE en del af CepaCom basis-løsningen)
	INDBAKKE – Viser dine indkomne SMS beskeder.

	INDKOMNE OPKALD
	INDSTIL – Giver adgang til alle de muligheder for indstillinger som telefonen har.
	INFO - Her kan du se informationer på en personlig kontakt.
	KALD OP – Dette billede giver adgang til det numeriske tastatur.
	KEYBOARD – Her indstilles bl.a. keyboard layout, timeout, loops ved scanning, ordprædiktion og nummerprædiktion.
	KEYBOARD LYD – Slår lyden til eller fra ved SMS skrivning. Dette gør din CepaCom lydløs når du skriver SMS.
	KONTAKTER – Giver adgang til at tilføje, søge, vise og slette dine personlige kontakter.
	LAYOUT – Her kan du indstille, hvilket keyboard layout du vil have. Vælg mellem ABCDE, QWERTY, samt ERIN (et optimeret keyboard). Cepa Mobility anbefaler ERIN keyboardet.
	LOOPS – Indstiller det antal gange som scanningen gentager sig selv på en række, såfremt brugeren ikke vælger et bogstav (eller har foretaget et fejltast).
	LOOP STBY – Indstiller det antal loops menuerne skal foretage, inden CepaCom går i standby.
	LYD – Her indstiller du lyden på din CepaCom. Du kan indstille ringetoner, volumen, SMS toner og niveauer af feedback.
	LYDLØS/MUTE – Slår lyden på CepaCom fra eller til. Gør CepaCom lydløs.
	LÆST SMS – Angiver at du har læst/åbnet SMSen.
	MENUINPUT – Her indstiller du, hvorledes menuerne skal opføre sig. Scannehastighed, passiv zone, blink tid, blink hastighed etc.
	MENUTEKST – Her indstiller du, hvilken farve teksten skal have i menuerne.

	MINUS – Nedsætter en værdi.
	MISTEDE OPKALD – Angiver at du har mistet et opkald.
	MOBIL NUMMER – Angiver mobiltelefon nummeret på kontaktpersonen.
	MP3 – Giver adgang til MP3 afspilleren (add-on)
	OK – Accepterer et valg. (fx ved en indstilling eller ved SMS skrivning)
	OPKALD – Giver adgang til menuen hvor du kan ringe op samt checke opkalds info.
	OPKALDS I – Giver adgang til at se listen over opkald. Indgående, udgående samt mistede opkald.
	ORDBOG BAGGRUND – Indstiller baggrundsfarven på ordforslagene når man skriver en SMS.
	ORDBOGS TEKST – Indstiller tekstfarven på ordforslag ved SMS skrivning.
	ORD PRÆDIKTION – Indstiller hvor mange ordforslag ordbogen skal give ved skrivning af SMS.
	PARKÈR OPKALD – Ved et igangværende opkald kan du parkere opkaldet. På den måde kan modtageren ikke høre, hvad der bliver talt om.
	PAKERET OPKALD – Dette angiver at modtageren af dit opkald ikke kan høre hvad du siger.
	PASSIV ZONE – Indstiller en zone (et tidsrum) i scanningen mellem to menupunkter, hvor det ikke vil være muligt at foretage et valg. Står Passiv Zone fx til 100 % kan menupunktet kun vælges når dette "står stille". Denne indstilling forhindrer at en bruger vælger et forkert menupunkt ved at "komme for sent".
	PLUS – Forøger en værdi
	RING OP – Angiver at du med denne funktion kan ringe op.

	RINGETONER – Her kan du indstille, hvilken ringetone der skal afspilles ved et indgående opkald.
	SCANNE HASTIGHED – Her indstiller du, hvor hurtigt scanningen skal gå. Jo mindre interval des hurtigere. Jo større interval des langsommere.
	SCROLL OP – Scroller op i en SMS
	SCROLL NED – Scroller ned i en SMS
	QUICK – Med denne funktion kan du ringe de 10 mest anvendte telefonnumre op hurtigt.
	SEND IGEN – Gør det muligt at sende den samme SMS igen.
	SKIFT – Skifter tilstand. Det er fx dette ikon du bruger, når du skal skifte mellem forskellige keyboard layouts.
	SKRIV SMS – Giver adgang til at skrive en SMS via et On-Screen-Keyboad.
	SKJUL NUMMER – Her bestemmer du, om modtageren af dine opkald skal kunne se hvem der ringer.
	SKIFT BT – Skifter mellem to ComBoxe. Er kun relevant såfremt du har mere en én Combox tilknyttet.
	SLET – Sletter et tal eller et bogstav. Ikonet anvendes også, når man fx skal slette SMS beskeder.
	SLET ORD – Sletter et helt ord indtil næste mellemrum.
	SMS BAGGRUND – Her indstiller du baggrundsfarven i tekstfeltet under SMS skrivning.
	SMS TEKST – Her indstiller du, hvilken farve teksten på SMS skrivningen skal have.
	SMS TONER – Her indstiller du, hvilken SMS tone der skal afspilles når du modtager en SMS.

	SPROG – Angiver hvilket sprog der vises i menuerne og hvilke ordbøger der er aktive.
	STAND BY – Sætter Pocket PCen på standby indtil et nyt tryk på kontakten foretages.
	STBY TAST – Her indstiller du, hvor lang tid din 01-kontakt skal holdes nede før CepaCom går ud af standby mode.
	STBY VIS – Her indstiller du, hvad der skal vises på skærmen når CepaCom er i standby mode.
	SØG – Her kan du søge efter en bestemt kontakt.
	TILBAGE – Fører tilbage til den forrige menu. TILBAGE er altid placeret som nr. 3 i rækken af menupunkter.
	TILFØJ – Her kan du tilføje en personlig kontakt.
	TIMEOUT – Angiver den ventetid der opstår efter et valg af menupunkt.
	UDBAKKE – Viser de SMS beskeder som du ikke har sendt endnu.
	UDGÅENDE OPKALD
	ULÆST SMS - Ikonet angiver en ulæst SMS.
	UR – Angiver indstillingerne for uret i toppen af menuen.
	VIS – Viser de kontakter du har på din CepaCom.
	VOLUMEN – Her kan du indstille volumen for CepaCom.

24 Bilag # 1 Guide til Problemløsning

Problem 1 Pocket PCen er 'død' og vil ikke tænde ved tryk på on/off knappen, selvom den har siddet til opladning i holderen.	Løsning s. 31
Problem 2 Skærmen er har en ukendt farve ved opstart.	Løsning s. 31
Problem 3 Automatisk opstart virker ikke	Løsning s. 32
Problem 4 Ved opstart af CepaCom melder programmet: 'Fejl på SIM-kort eller manglende SIM-kort !'	Løsning s. 32
Problem 5 Der er ingen trådløs forbindelse mellem Pocket PCen og min 01-kontakt/er eller joystick.	Løsning s. 33
Problem 6 Min scannehastighed er for hurtig. Jeg kan ikke følge med.	Løsning s. 33
Problem 7 CepaCom vil ikke hente alle mine SIM-kort poster.	Løsning s. 34
Problem 8 Min Eksterne Bluetooth enhed (headset eller højttaler) har mistet forbindelsen	Løsning s. 34
Problem 8 Mit problem er ikke beskrevet ovenfor	Løsning s. 34
SUPPORT – KONTAKT	s. 35

Problem 1	Årsag	Symptom	Action (Reparér)	Det Gode råd
Pocket PCen er 'død' og vil ikke tænde ved tryk på on/off knappen, selvom den har siddet til opladning i holderen.	<p>Der har ikke været sat strøm til laderen.</p> <p>EI-kørestolens batteri har været afladet.</p> <p>Laderen vil ikke oplade Pocket PCen.</p> <p>Batteriet i Pocket PCen er ikke låst fast.</p>	<p>Pocket PCen er 'død' og reagerer ikke.</p> <p>Den røde diode (øverste højre hjørne af Pocket PCen) er slukket.</p>	<p>Oplad Pocket PC:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tag Pocket PCen op af laderen. 2. Sæt Pocket PCen tilbage i laderen 3. Check at den røde diode lyser. 4. Afvent ½ time mens den lader. 5. Tænd Pocket PCen på on/off 6. Afvent auto-opstart (ca. 1½ minut) <p>Eller</p> <p>Udtag batteriet af POCKET PC, vent 10 sekunder, sæt det tilbage igen.</p>	<p>Check et par gange om dagen om den diode der viser at den lader lyser.</p> <p>Lyser dioden undgår du at Pocket PCen aflader.</p> <p>Udtag batteriet af POCKET PC, vent 10 sekunder, sæt det tilbage igen.</p>
Problem 2	Årsag	Symptom	Action (Reparér)	Det Gode råd
Skærmen er har en ukendt farve ved opstart.	Pocket PCen har evt. været afladt, og starter der derfor i 'Safe Mode' (sikker tilstand)	Skærmen er har en ukendt farve ved opstart.	<p>Hardware Reset Pocket PC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tag pennen ud fra Pocket PCen 2. Hold on/off knappen nede samtidig med at du... 3. Giver den lille reset knap på Pocket PCen et tryk med pennen. 4. Sig 'Nej/No' til evt. spørgsmål om at ville slette noget. 5. Afvent auto-opstart. 	<p>Check et par gange om dagen om den diode der viser at Pocket PCen lader lyser.</p> <p>Lyser dioden undgår du at Pocket PCen aflader.</p>

Problem 3	Årsag	Symptom	Action (Reparer)	Det Gode råd
Automatisk opstart virker ikke	SD kortet har evt. ikke siddet korrekt isat ved opstart. Du har trykket på Pocket PCen inden autoopstarten nåede at starte.	Pocket PCen starter op i Windows og bliver der uden at starte CepaCom.	Start via SD kort. 1. Tag SD-kort ud. 2. Sæt SD-kort tilbage. 3. Bekræft opstart.	Check at SD kortet er sat ordentligt i. Ellers genstart Pocket PC med et tryk på 'Reset'
Problem 4	Årsag	Symptom	Action (Reparer)	Det Gode råd
Ved opstart af CepaCom melder programmet: 'Fejl på SIM-kort eller manglende SIM-kort !'	GSM (telefonen) i Pocket PCen er slået fra. SIM-kortet mangler Der er fejl på SIM-kortet SIM-kortet er ikke låst fast.	Du kan hverken ringe eller skrive SMS	Slå GSM modul til: Vejledning i manual under punkt 2. 1. 'Exit' til Windows i CepaCom eller genstart Pocket PC UDEN SD-kort. 2. Tag pennen ud fra Pocket PCen 3. Vælg det lille ikon med de røde streger nederst til højre på Pocket PCen. 4. Slå GSM til ved at vælge det øverste ikon. 5. Genstart Pocket PC med stylus i siden eller isæt SD kort.	

Problem 5	Årsag	Symptom	Action (Reparer)	Det Gode råd
Der er ingen trådløs forbindelse mellem Pocket PCen og min 01-kontakt/er eller joystick.	<p>Vægladeren til ComBoxen er defekt.</p> <p>Ledningen til ComBoxen er revet over.</p> <p>Bluetooth Modulet i Pocket PCen er slået fra.</p> <p>ComBoxen er afladt</p> <p>Comboxen er beskadiget</p>	<p>Der er ingen kontakt når der trykkes på kontakten.</p> <p>Der er en rød streg over ikonet (øverst til højre på skærmen)</p>	<p>Prøv først at undersøge vægladeren eller ledninger der giver strøm til Comboxen.</p> <p>Slå Bluetooth modul til:</p> <p>Se manual punkt 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 'Exit' til Windows i CepaCom eller genstart Pocket PC UDEN SD-kort. 2. Tag pennen ud fra Pocket PCen 3. Vælg det lille ikon med de røde streger nederst til højre på Pocket PCen. 4. Slå Bluetooth til ved at vælge det mellemste ikon for 'Bluetooth'. 5. Genstart Pocket PC med stylus eller isæt SD kort. 	<p>Oplad ComBoxen</p> <p>Kontakt support@cepa.dk såfremt ComBoxen evt. er beskadiget.</p>
Problem 6	Årsag	Symptom	Action (Reparer)	Det Gode råd
Min scannehastighed er for hurtig. Jeg kan ikke følge med.	Du har ved en fejl indstillet hastigheden.	Det går for hurtigt	<p>Indstil via Internet</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Log ind på din side på www.cepa.dk 2. Indstil scannehastigheden 3. Send indstillings SMS til dig selv. (dit eget telefonnummer) 	Indstil hastigheden med omtanke.

Problem 7	Årsag	Symptom	Action (Reparer)	Det Gode råd
CepaCom vil ikke hente alle mine SIM-kort poster.	Dette kan skyldes at den specifikke kontakt på SIM kortet er formateret forkert. Fejl på SIM-kort	Vil ikke hente alle SIM-kort poster	Prøv at hente igen Ændre de specifikke kontakter der ikke blev hentet på en anden mobiltelefon og hent igen.	
Problem 8	Årsag	Symptom	Action (Reparer)	Det Gode råd
Min Eksterne Bluetooth enhed (headset eller højttaler) har mistet forbindelsen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forbindelsen er gået tabt midlertidigt 2. Forbindelsen er gået tabt permanent. 3. Der er ikke strøm på din Bluetooth enhed 	Ingen lyd i headset eller højttaler under opkald	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check om problemet er midlertidigt ved at vælge menu punktet "BT til" under menu punktet "Indstil". 2. Opret forbindelsen manuelt i Windows styresystem. 3. Oplad Bluetooth enhed eller check strømforsyning 	<p>Check altid om forbindelsen er gået midlertidigt tabt inden du prøver at oprette forbindelsen manuelt i Windows styresystem.</p> <p>Husk altid at oplade Bluetooth enheder.</p>
Problem 9	Årsag	Symptom	Action (Reparer)	Det Gode råd
Mit problem er ikke beskrevet ovenfor	Ukendt problem	Ukendt	Skriv til din tekniker og han vil ringe dig op: support@cepa.dk	Følg de gode råd.

SUPPORT - KONTAKT

I åbningstiden (0830 – 1600)

SIM-kort

Din teleudbyder

Pocket PC:

Find producenten på Internet eller skriv til support@cepa.dk

Generelt:

Cepa Mobility: support@cepa.dk

Udenfor åbningstid (1600 – 0800)

SIM-kort

Din teleudbyder

Generelt:

Cepa Mobility: support@cepa.dk

Pocket PC:

Find producenten på Internet eller skriv til support@cepa.dk

Find mere hjælp samt evt. tekniske specifikationer på www.cepa.dk

25 DISCLAIMER!

De informationer om Cepa Mobility Aps og dets datter- eller søsterselskaber (benævnes samlet som "Cepa") og Cepas produkter og service gives under følgende betingelser:

1. Informationer, navne, billeder, logoer og ikoner der angår og relaterer til Cepa eller dens produkter og service stilles til rådighed som de er, uden nogen form for erklæring eller forpligtigelse og uden nogen form for garanti, hverken eksplicit eller implicit deriblandt, men ikke kun, de underforståede garantier for handelsforhold, som er passende for et særligt eller ikke krænkende forhold. Informationen på disse sider er ikke skrevet for at imødekomme dine individuelle behov og det er op til dig at få de nødvendige oplysninger.

2. Hverken Cepa eller nogen af dets leverandører eller ansatte kan drages til ansvar for nogen form for skader, derunder direkte, særlige, indirekte eller afledte skader, som er et resultat af eller som er sket i forbindelse med adgang eller brug af Cepas Produkter og udbredelse af informationen på den. Følgende forhold bør indskræmpes:

- 2.1 Der væsentligt at Cepas produkter anvendes forsvarligt i tilfælde hvor der foregår flere aktiviteter samtidig. Anvend derfor Cepas produkter med omtanke når du fx kører bil eller foretager anden bevægelig aktivitet. Husk, sikkerhed kommer først, ikke et telefonopkald!
- 2.2 Cepas produkter er udelukkende at betragte som en kommunikator med mobiltelefonfunktionalitet, og fungerer ikke, og skal ikke opfattes som en substitut for et kaldeanlæg til brug i kritiske/akutte situationer. Man kan med andre ord ikke forlade sig på, at være livsnødvendig afhængig af produkter fra Cepa.
- 2.3 Cepa fralægger sig derfor ethvert ansvar for de kritiske situationer der måtte opstå på baggrund af manglende GSM forbindelse eller svigtende teknik.
- 2.4 Man må under ingen omstændigheder åbne elektronik leveret af Cepa. Dette kan resultere i elektriske stød, og at Cepas produkter ikke fungerer korrekt.
- 2.5 Man må under ingen omstændigheder indoptage elektronik eller dele leveret af Cepa i organismen. Elektronik samt monteringsdele kan udgøre en sundhedsrisiko, såfremt de spises eller på anden måde indtages i organismen.
- 2.6 Man må under ingen omstændigheder skabe mulighed for at børn eller husdyr kan komme i nærheden af produkter/dele leveret af Cepa.
- 2.7 Cepas produkter er såvel fysisk som elektronisk adskilt fra din el-kørestols elektroniske kontroller. Cepas produkter kan dermed ikke på nogen måde have indflydelse på hvordan din el-kørestol kører, bremses eller reagerer. Cepa Mobility fralægger sig derfor ethvert ansvar i forbindelse med eventuelle ulykker der må være opstået i forbindelse med eller under kørsel af el-kørestolen.
- 2.8 Cepas produkter er ikke 100 % vandtætte. Det anbefales at man tildækker Cepas produkter med en vandtæt plasticpose i tilfælde af regn. Cepa fralægger sig ethvert ansvar for skader sket i forbindelse med regn eller vand i øvrigt.
- 2.9 Cepa fralægger sig ethvert ansvar for skader, der er forårsaget af grov uagtsomhed. Fx ledninger der er brækket/hevet over under kørsel/brug af kørestolen.
- 2.10 Cepa fralægger sig ethvert ansvar for epileptiske anfald, der skyldes en for høj blinkfrekvens ved valg af menuer på Cepas produkter. Cepa fraråder på det kraftigste epileptikere at anvende produktet og fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med evt. anfald forårsaget af Cepas produkter. Såfremt en mistanke om epilepsi eksisterer anbefaler Cepa at 'Blinkhastighed' indstilles til et passende langsomt blinkende niveau.
- 2.11 Cepa fralægger sig ethvert ansvar for høreskader, der skyldes feed eller for høj volumen i høretelefoner eller andet audio-materiel. Cepa anbefaler at volumen indstilles til et passende lavt niveau, og at feed imod andre højttalereheder/mikrofoner etc. undgås.

3. Produkter og informationer kan indeholde unøjagtigheder eller slåfejl som rettes af Cepa så snart de identificeres. Desuden oPOCKET PCter indeholdt jævnligt. Cepa forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt og uden varsel at ændre, forbedre og /eller udskifte de informationer, betingelser, navne, billeder, logoer og ikoner eller de produkter og services der henvises til på Cepas websider og andet informationsmateriale. Da Internet kører uafhængigt på tusindvis af websider over hele verden, kan de informationer, betingelser, navne, billeder, logoer og ikoner som der muligvis gives adgang til gennem denne webside stamme fra en kilde uden for denne webside. Derfor, fralægger Cepa sig enhver forpligtigelse eller ansvar til ethvert form for indhold, som man har fået adgang til, hentet eller modtaget igennem, via eller uden for den webside.

4. De varemærker og firmanavne, billeder, logoer og fotos som identificerer Cepas produkter og service samt alle websidedesign, tekst og grafik tilhører Cepa. Medmindre tydeligt angivet, skal intet heri opfattes som værende udtryk for en licens eller rettighed i forhold til ophavsret eller andre intellektuelle og andre ejendomsrettigheder der tilhører Cepa. Cepa Mobility © Aps med alle rettigheder forbeholdt 2006.

5. De produkter og services der nævnes i denne manual er på ethvert tidspunkt underlagt Cepas transportvilkår – betingelser og/eller andre relevante betingelser. Se desuden de engelske standardbetingelser (Terms and Conditions of Carriage). Der kan forekomme og gælde lokale afvigelser alt afhængig af forsendelsens oprindelsesland. Kontakt venligst din lokale Cepa-afdeling/forhandler for at få en kopi af de vilkår og betingelser, der gælder der.

6. Cepas produkter og services kan ikke garanteres (uden videre) at være til rådighed i alle lande.

7. Selvom Cepa gør alt hvad der er muligt for at holde egne produkter og websider fri for vira, kan Cepa ikke garantere dette og påtager sig intet ansvar for eventuelle vira på din egen Computer. Du anbefales derfor at tage de nødvendige forholdsregler før du downloader information fra Cepas webside.

8. Alle data som du stiller til rådighed for Cepa, vil blive betragtet som fortrolige oplysninger og Cepa vil ikke offentliggøre dem over for tredjemand, medmindre der er givet fuldmagt hertil og at dette i øvrigt er nødvendigt for at gennemføre en tilfredsstillende service.

9. Vi opfordrer alle vores kunder til at skåne miljøet ved korrekt håndtering af elektronisk affald. Din lokale genbrugsstation tager imod batterier samt brugt computerudstyr. Du kan også sende dine brugte batterier og gamle mobiltelefoner til os. Cepa Mobility Aps er medlem af organisationen WEEE, der sørger for at gammel elektronik afhændes korrekt, og ikke ender i 3. verdens lande.

10. Disse betingelser og denne disclaimer og ethvert krav på baggrund af information fra denne webside falder under Dansk lov og parterne skal udelukkende indberette i Københavns retskreds, Danmark.

24 Index

—0—

01-kontakt.....	6;8;17;27;28;31
01-kontakter.....	4;7;8

—A—

AC adapter.....	10
ACCEPTÉR/BEKRÆFT.....	22
Accepterer et valg.....	25
Action (Reparér).....	29
adapteren.....	10
Advanced.....	6
ADVARSEL.....	10;12
AFBRYD.....	22
afladt.....	10;29;31
AFSENDTE.....	22
AFVIS.....	22
aktivere dit SIM-kort.....	9
anfald.....	34
ANNULLER.....	22
ansvar.....	34
Antal Input	7
antallet af brugerens input.....	8
Anvender du scanning.....	19
audio-materiel.....	34
Auto PIN	12
AUTO PIN.....	22
Auto PIN kode	9
automatisk opstart.....	4
Automatisk opstart virker ikke.....	28;30
auto-opstart.....	29
Avanceret	7;9

—B—

Backlight.....	4
backup.....	3
batteri.....	11;29
Batteriet.....	10;29
Batteriniveau.....	11
Battery Power.....	5
Bekræft	19;20;21;30
BEMÆRK.....	3;9;11;16;20;22
BESKED.....	22
beskyttelse.....	3
betingelser.....	14;34
bevæge joysticket.....	8
bevægelig aktivitet.....	34
bilag # 1.....	10
BLINK TID.....	22
blinkefrekvens.....	34
Blinkhastighed.....	12;34
BLINKHASTIGHED.....	22
Blinktid	13
Bluetooth.....	6;10;11;31
Brugervejledning.....	3

brugt computerudstyr.....	34
brugte batterier	34
Bryd forb	7
Bryd forbindelsen	13
BRYD FORBINDELSEN.....	22
brækket/hevet over.....	34
—C—	
Casing.....	3
CepaCom.....	1;3;4;6;7;8;9;11;12;13;14;15;16;17;22;23;24;28;30;31;32
Check SMS.....	20
Combox	4;7;10;16;26
ComBox.....	3;4;6;7;10
Comboxe der blev fundet	6
—D—	
Det Gode råd	29;30;31;32
disclaimer.....	34
DISCLAIMER!.....	34
Diverse	7;9
DIVERSE.....	23
—E—	
ejendomsrettigheder.....	34
Ekstern højttaler.....	3
Ekstra tilbehør.....	3
elektriske stød.....	34
el-kørestolen	4;34
én kontakt	7
ENTER.....	23
epileptikere	34
epileptiske anfald.....	12;34
EXIT.....	23
Exit numerisk tastatur	18
Exit Standby	13
External Power	5
—F—	
Farve, menutekst	13
Farve, Ordbogs baggrund	13
Farve, Ordbogs tekst	13
Farve, SMS baggrund	13
Farve, SMS tekst	13
FARVER.....	23
fast montering.....	4
fastgørelse.....	3
feed.....	34
Fejl på SIM-kort	28
fejlmelding.....	8
Fejltryk	13
FEJLTRYK.....	23
Fjerne batteriet.....	11
flere Comboxe	6
forbinde.....	6
forkert antal input.....	8
forklaring af skærmtastaturet:.....	19
Forklaring til de enkelte Indstillinger	12
Forlad CepaCom	11
forpligtigelse.....	34
fortrolige.....	34
Forøger en værdi.....	25

Fuldfør et foreslået nr.	18
FULDFØR NR.....	23
—G—	
gamle mobiltelefoner	34
gammel elektronik.....	34
garanti	34
Gem log	13
GEM LOG	23
genbrugsstation	34
GENOPTAG	23
Genstart	13;14;30;31
GENSTART	23
Genstarte CepaCom.....	11
Glas	13
GLAS	23
grov uagtsomhed	34
GSM.....	6;30;34
Guide til problemløsning	10
Guide til Problemløsning	6;28
—H—	
headset	3;14
Hent SIM	9;14
HENT SIM.....	23
hent SIM-kortposter	11
HJEMME NUMMER	23
hvor mange input.....	7;8
Højt. til / fra	13;14
HØJTTALER FRA.....	23
HØJTTALER TIL.....	23
højtalerenheder/mikrofoner	34
høreaskader.....	34
høretelefoner	34
håndtering af elektronisk affald.....	34
—I—	
i stykker.....	3
ikoner	34
Ikoner – Forklaring.....	22
Indbakke	18;20
INDBAKKE.....	24
INDKOMNE OPKALD.....	24
indoptage elektronik.....	34
Indstil	7;9;12;31
INDSTIL	24
indstille CepaCom.....	12
Indsætte SIM kort	11
Indtast navn	18;20;21
Indtast nr.	18;20
Indtast PIN kode	9
Indtastet nr	18
<i>Indtil din Pocket PC</i>	4
Info	20
INFO	24
informationsmateriale	34
ingen trådløs forbindelse	28;31
input	7;8
Input	7
Isætning af SIM-kort	11

Isætte batteri	11
—J—	
joystick	7;17;19;28;31
Joystick	4;7;8
joysticket	6;8
—K—	
kabler	4
KALD OP	24
kaldeanlæg	34
KEYBOARD	24
Keyboard Layout	14
Keyboard lyd	15
KEYBOARD LYD	24
knap	7;8;29
knappen	6;8;11;28;29
Knappen for 'Ring Op'	18
Kontakt	17;31;34
Kontakter	18;20;21
KONTAKTER	24
Kopiering af MP3-filer fra en computer til SD-kort	21
korrekt forbundet	4
kritiske situationer	34
kritiske/akutte situationer	34
kører bil	34
kørestol	3;4;34
—L—	
Ladetider	10
LAYOUT	24
ledninger	4;31;34
Ledninger og stik	3
livsnødvendig	34
logoer	34
LOOP STBY	24
Loops	15
LOOPS	24
LYD	24
Lydløs	11;15
Lydløs / Mute	11
LYDLØS/MUTE	24
læst SMS	20
LÆST SMS	24
løse kabler	4
Lås op	9
—M—	
manglende GSM forbindelse	34
manglende SIM-kort	28
mappen "Musik"	21;22
Mellemste menu	11
Menu ikon	11
Menu tekst	11
MENUINPUT	24
MENUTEKST	25
miljøet	34
MINUS	25
MISTEDE OPKALD	25
Mistet opkald	11
MOBIL NUMMER	25

Monteringsdele	3
MP3.....	25
MP3 afspiller	21
MP3 afspilleren	25
MP3 Oversigt	21
Musik.....	21;22
—N—	
navigere	8
Nedre menu	11
Nedsætter en værdi	25
Nr.forud	15
numeriske tastatur	15;18;23;24
Nummer forudsigtelse	15
—O—	
OK.....	25
on/off	11;28;29
Opbygning af skærmbilledet.....	11
oPOCKET PCter	34
OPKALD	25
OPKALDS I.....	25
Opladning	10
opladt	4;10
ORD PRÆDIKTION.....	25
ORDBOG BAGGRUND	25
ORDBOGS TEKST.....	25
Ordforud	15
Ordforudsigtelse	15
Overblik.....	12
Overførsel af SIM-kort	9
—P—	
PAKERET OPKALD	25
PARKÈR OPKALD	25
Passiv Zone	16;25
PASSIV ZONE.....	25
PIN kode	9;22
PIN koden	9
PLUS.....	25
Pocket PC.....	3;6;7;10
Pocket PCen.....	6;8;21;22
Power Save	5
POCKET PC	4;6;10;11;14;29;30;31;33
POCKET PC manual	4
POCKET PCen	3;4;6;23;27;28;29;30;31
problemer.....	6;16
PUK kode.....	9
—Q—	
QUICK	26
—R—	
regn.....	34
retning	7
RING OP.....	26
Ring til en Person	18
Ringetoner	16
RINGETONER.....	26
rød streg over ikonet.....	10;31
røde bar	8
røde diode.....	29

—S—

samlinger/stik.....	10
samme input til to forskellige funktionaliteter.....	8
SCANNE HASTIGHED.....	26
scannehastighed er for hurtig.....	28
SCROLL NED.....	26
SCROLL OP.....	26
SD kort.....	3;6;30;31
SD-kort	3;4;22;30;31
SD-kortlæser.....	22
SDMMC.....	21
SEND IGEN.....	26
seng.....	3
service.....	34
sikkerhed.....	34
SIM kort.....	4;9;11
SIM-kort.....	9;11;14;23;28;30;32;33
sjat-lade.....	10
skader.....	34
Skannehastighed	16
SKIFT.....	26
Skift BT	16
SKIFT BT.....	26
Skifter linje.....	23
Skjul nr.	16
SKJUL NUMMER.....	26
Skriv en tekst/SMS og gem den.....	19
Skriv SMS.....	19
SKRIV SMS.....	26
skærmen.....	3;4;6;7;8;10;15;16;17;19;27;31
Slet	18;21
SLET.....	26
Slet et tal	18
SLET ORD.....	26
slåfejl.....	34
SMS	13;15;16;17;18;19;20;22;23;24;25;26;27;30;31
SMS toner	16;24
Sprog	16
SPROG.....	27
STAND BY.....	27
standard tilbehør.....	3
startet programmet.....	6
STBY TAST.....	27
STBY VIS.....	27
Stby. Loop	16
Stby. Vis	16
<i>Step 1</i>	4
Strømsbesparelse.....	5
<i>styring/betjening</i>	7
sundhedsrisiko.....	34
SUPPORT	28
svigtende teknik.....	34
Symptom.....	29;30;31;32
Søg	18;20;21
SØG.....	27
Søg kontakt.....	20
—T—	
tape.....	3

telefonbog.....	9
telefonnumre.....	26
telefonopkald.....	14;16;34
teleoperatør.....	11
teleudbyder.....	9;33
Terms and Conditions of Carriage.....	34
Tid/dato.....	11
TILBAGE.....	27
Tilføj	20
TILFØJ.....	27
Tilføj kontakt.....	20
Tilføjelse af musik	21
<i>Tilslut din ComBox</i>	6
Tilslut strøm.....	10
tilsluttet en fast strømkilde.....	4
Timeout	17
TIMEOUT.....	27
<i>Tjek hardware forbindelser</i>	4
to kontakter.....	7
transportvilkår.....	34
Tre forkerte indtastninger.....	9
tre kontakter.....	7
tænd/sluk knappen.....	4
—U—	
UDBAKKE.....	27
udbakken.....	19
UDGÅENDE OPKALD.....	27
udpege bogstaverne.....	19
ukendt farve ved opstart.....	28
Ulæst SMS.....	11
ULÆST SMS.....	27
unøjagtigheder.....	34
Ur 17;23	
UR.....	27
uønsket input.....	8
—V—	
valg af menuer.....	34
Valg af menupunkt.....	17
vand.....	34
varemærker.....	34
vil ikke hente alle mine SIM-kort.....	28
vil ikke tænde.....	28;29
vilkår og betingelser.....	34
vilkårligt input.....	8
Vis	20
VIS.....	27
Vis kontakt.....	20
volumen.....	24;27;34
Volumen	17
VOLUMEN.....	27
væglader.....	4
Vælg SMS	18;20
—W—	
WEEE.....	34
Windows.....	4;5;6;21;23;30;31
—Ø—	
Øvre menu.....	11

—Å—

Årsag..... 29;30;31;32