


Indhold

Billede af Combivox urets knapper.....	1
Beskrivelse af Combivox uret.....	2
Hvordan bruges Combivox.....	3
Knappernes placering og funktioner.....	3
Hvordan stilles Combivox alarm.....	4
Indstilling af ur og dato.....	5
Indstilling af ugedag, dato, måned og år.....	5
Batteriskift.....	6

Billede af Combivox urets knapper

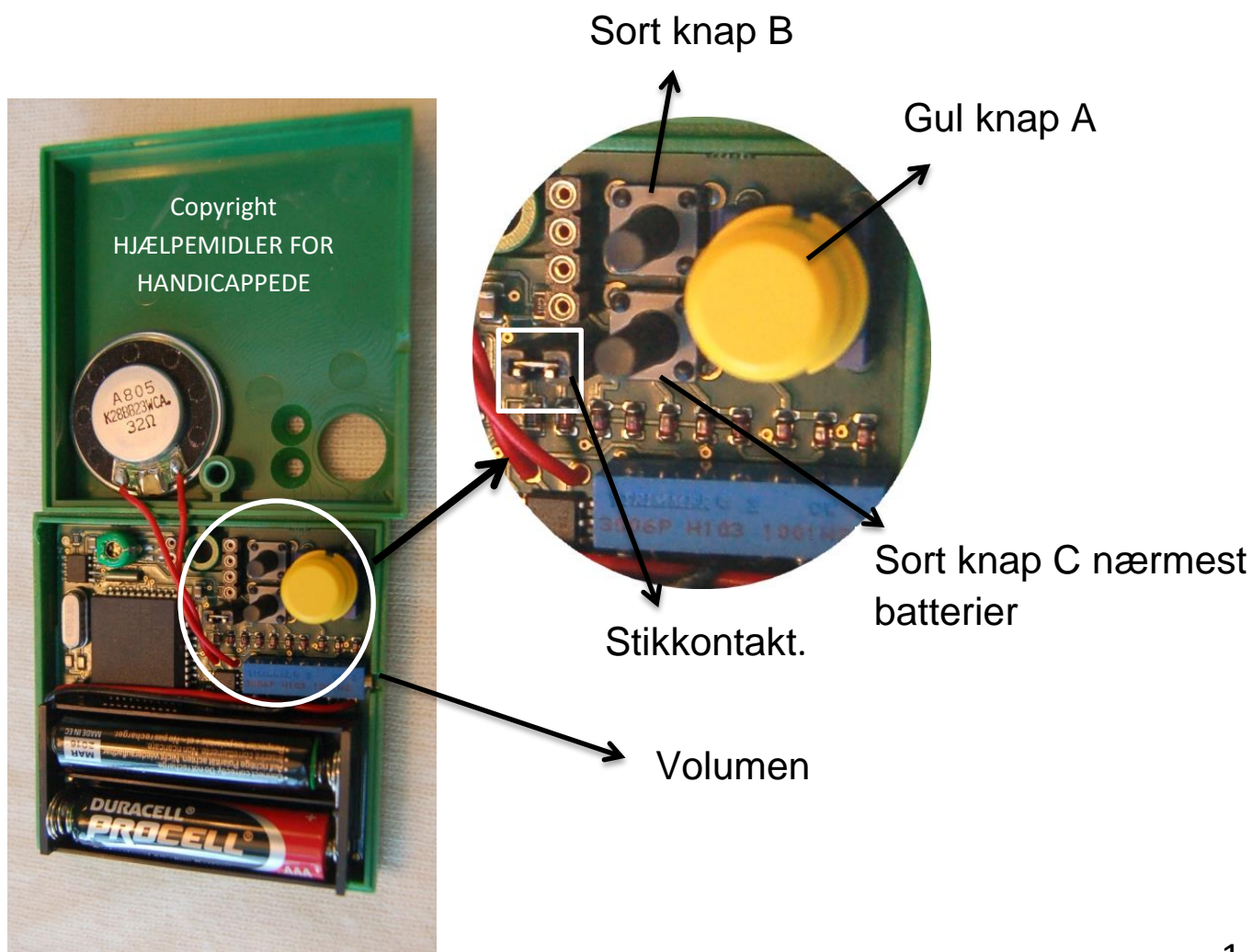



Beskrivelse af Combivox uret

Combivox er et talende ur, med vækkeur.

Uret indstilles til at fortælle klokken på to forskellige måder:

På digital vis eksempel:

Klokken er tre:femten.

Eller på "gammeldags" måde eksempel:

Klokken er kvart over tre om natten.

Uret leveres på "gammeldags" tid.

For at skifte mellem de to slags "tid" skal du åbne uret ved hjælp af skruen på bagsiden af uret, (forsigtigt da de to kasser, som udgør "huset", er forbundet med en ledning). I den ene kasse finder du printet, og på dette sidder der en mini-stikkontakt. Hvis du ønsker Digital tid, skal begge ben sidde i kontakten.

Uret ligger i en lille lædertaske, når du modtager det. Den bør du altid opbevare uret i, da den beskytter det.



Hvordan bruges Combivox

Ved at trykke kort på den gule knap A, får du at vide hvad klokken er. Trykker du på den og holder den nede til uret siger en ugedag, f.eks. søndag, vil uret melde den aktuelle ugedag, dato og måned, f.eks. søndag den 25. maj, og alarmtidspunktet, hvis alarmen er slået til.

Du kan vælge mellem 4 forskellige vækketoner/alarmer.

Uret har 3 knapper, hvoraf kun den gule, tidstagningsknappen er direkte tilgængelig. For at aktivere de 2 andre kan du enten åbne uret eller bruge en tændstik, eller en anden spids genstand.

Lydstyrken reguleres ved at skrue på den lille skrue, der sidder midt på den smalle side til højre for den gule knap (se tegning, volumen).

Knappernes placering og funktioner

- A) Den gule knap: Tidstagningsknap.
- B) Den sorte knap (længst væk fra batterier).
Starter indstilling og tæller frem eks. 1 2 3...
- C) Den sorte knap (nærmest batterier)
Slår alarmen til/fra.
Under indstilling tæller tilbage eks. 3 2 1...



I følgende tekst er beskrevet hvordan alarm, ur og dato, måned og årstal indstilles i letteste rækkefølge. Det er ikke nødvendigt at gennemføre alle indstillinger. Når du har indstillet det du ønsker, kan du på ethvert tidspunkt stoppe indstillingen ved at trykke på den gule knap (A) og holde den nede indtil der lyder 2 bip toner.

Hvordan stilles Combivox alarm

Først vælges om man ønsker alarm slået til eller fra.

Tryk på knap C. Uret siger alarm til eller alarm fra.

Hvis du ønsker alarm til, skal dette vælges – og tidspunkt skal indstilles.

Tryk knap B - 1 gang.

Nu kan alarm timetal vælges.

For at vælge tid frem bruges knap B. Tid tilbage brug knap C.

Tryk derefter gul knap A.

Nu kan alarm minuttal vælges.

Igen kan knap B+C anvendes for at gå frem/tilbage i minuttal.

Tryk gul knap A 1 gang.

Nu kan alarmsignal vælges.

Brug igen knap B+C for at finde det ønskede alarmsignal.



Indstilling af ur og dato

(Gælder også for omstilling til sommer/vintertid.)

Når alarm er indstillet kan du fortsætte indstilling med et kort tryk på den gule knap A til uret siger: "tidsindstilling timetal".

For at skifte tal tryk på knap B for tid frem og knap C for tid tilbage.

Tryk igen på knap A: Nu kan du ændre minuttal

Igen anvendes knap B og C til at skifte frem og tilbage i minuttal.

Indstilling af ugedag, dato, måned og år

Tryk igen gul knap A. Nu kan du vælge ugedag.

Knap B og C bruges til at bladre gennem dagene.

Tryk gul knap A igen for at vælge dato og måned.

Her anvendes igen knap B og C for at bladre gennem datoer, måneder og årstal.

Når du ønsker at afslutte indstillingen gøres det ved et tryk på den gule knap (A). Uret giver 2 bip lyde, som fortæller at indstillingen er afsluttet.



Batteriskift

Når uret begynder at tale volapyk, er det tid at skifte batterierne. Du skal bruge 2 AAA batterier.

Det er vigtigt, at du anbringer dem rigtigt, da du kan ødelægge uret, hvis de sidder forkert – minus-polen (den flade side) skal sidde mod spiralfjederen.

Hvis du skifter batterierne indenfor 45 sekunder, beholder uret indstillingerne.

Hvis uret har mistet indstillingerne (lavet reset), vil det melde sig med 2 bip, når du trykker på den gule knap (A) for at høre tiden, og vil befinde sig i følgende indstillinger:

Alarmtid: 12:01

Tid: 12:00

Dato: Lørdag d. 1. januar 05

Alarmtone: Høne

Hvis uret efter batteriskift nægter at tale eller gå, så tag batterierne ud igen og tryk den gule knap (A) ned i nogle få sekunder. Sæt derefter batterierne i igen. Når du nu trykker på den gule knap (A), laver uret reset og står i de netop beskrevne indstillinger.

Hvis du har spørgsmål til uret eller vejledningen kan du kontakte os på tlf. 98 95 42 44 eller hfh@synsnerven.dk