

DARO

by able 

Brugervejledning Kørepose til dobbelt benamputation

Faconsyet, varm og blød vinterkørepose med sæde og høj ryg. Fås til både børn og voksne. Fremstillet i et åndbart, vind- og vandafvisende kvalitetsmateriale med varm Thinsulate isolering og blød fleeceforing.



Varenr. (voksne): 1-06X

Varenr. (børn): 1-06514th

Kære kunde,

Tak fordi du valgte et produkt fra DARO. Vi håber du bliver glad for det og får mange gode oplevelser ude i det fri.

Læs denne brugervejledning, inden du bruger køreposen.



Sikkerhedsregler

- ⚠️ Brug kun en kørepose, der passer til brugerens størrelse.
- ⚠️ Brug **aldrig** køreposen, hvis dele er frigjort, i stykker eller mangler. Der er fare for, at det kan sætte sig fast i hjulene.
- ⚠️ Immobiler eller plejekrævende brugere må **ikke** lades alene eller være uden opsyn, når køreposen er på.
- ⚠️ Vær opmærksom på brugerens temperatur og reguler påklædningen derefter. Dette for at undgå overophedning.
- ⚠️ Benytter brugeren sele, skal denne **altid** være fastspændt ved brug af kørepose, således brugeren ikke glider ned.

Reklamationsret

DARO yder 2 års reklamationsret i henhold til dansk købelov. Det omfatter materiale- og produktionsfejl og således **IKKE** ved:

- Forkert brug.
- Forkert vask.
- Forkert vedligehold.
- Uautoriseret indgreb.
- Almindelig slidtage.

Køreposens funktioner

- Vindtæt, åndbar og vandafvisende.
- Varm Thinsulate-isolering og blød fleeceforing.
- YKK-lynlåse i begge sider.
- Elastik i taljen, der sikrer at køreposen slutter til foroven.
- Sædestykke i skridsikker regnstof.
- Bagstykke med elastikker og gribebånd for fastgørelse til kørestolen.
- Sikkerhedsreflekser på forstykket for bedre synlighed i mørke.



Sådan bruges køreposen

1. Lyn lynlåsen ned i hver side og placer køreposen i stolen.
2. Fastgør elastikker og gribebånd til kørestolen.
3. Lyn køreposen op.



Vask

- ⚠ Denne vaskeanvisning **SKAL** følges. Vaskes produktet forkert, er der risiko for beskadigelse og forkortet produktlevetid.
- ⚠ Anvend **IKKE** skyllemiddel, iblødsætning eller vaskemiddel med blegestoffer.

Vask i maskine

1. Luk lynlåsene og læg køreposen i tromlen med vrangen ud.
2. Benyt kun en lille mængde vaskemiddel **uden** blegestoffer.
3. Vask køreposen ved **max. 60°C** og ved lav centrifugering.
4. Hæng køreposen til tørre. Den kan også tørretumbles ved lav varme.



Vedligehold

- Tjek jævnligt køreposen for skader.
- Brug **aldrig** køreposen, hvis dele er frigjort, i stykker eller mangler.

Materiale

Yderstof

- OEKO-TEX® 100-certificeret.



- 100% polyester med PU-coating.

Isolering

- OEKO-TEX® 100-certificeret.
- Thinsulate P100.



Foer

- OEKO-TEX® 100-certificeret.
- 100% polyester fleece.

Teknisk info

Yderstof

- Vandsøjletryk: 10.000 mm.
- Åndbarhed: 5.000g/m².
- Kvadratmetervægt: 135g/m².

Isolering

- Evne: Bevarer isoleringen i fugtige omgivelser og tørrer hurtigt.
- Kvadratmetervægt: 95g/m²
- Isolering: 0,30 Rct.
- Tykkelse: 1,1 cm.

Foer

- Anti-peeling.
- Kvadratmetervægt: 300g/m².

DARO

by able

able nordic a/s
DARO
Skavholmvej 8C, 1.
DK-8520 Lystrup
Danmark

Tlf. (+45) 75 88 16 22
daro@ablenordic.dk
www.daro.dk

DARO - dansk producent af tøj til alle typer handicap

Hos DARO brænder vi for at lave tøj til alle typer handicap - tøj, som kan give dig en øget livskvalitet, komfort og lette din hverdag. DARO har mere end 40 års erfaring med at designe og sy moderigtigt og funktionelt tøj til både børn og voksne. Vi kan specialtilpasse tøjet præcis til dig og hjælper gerne med nye løsninger, hvis du har specifikke behov. Se hele DAROs produktudvalg på www.daro.dk.

DARO er tøj til DIG og tøj med omtanke.