

Brugervejledning Kørepose Facon II - vinter

Blød og faconsyet vinterkørepose med høj ryg og aftagelig frontdel.
Fås i børne- og voksenstørrelser. Fremstillet i et åndbart, vind- og vandafvisende kvalitetsmateriale og isoleret med varm Thinsulate.

Vandafvisende



Vindtæt



Åndbar



Vaskbar



Varenr. (voksne): 1-03X TH

Varenr. (børn): 1-035XX TH






Kære kunde,

Tak fordi du valgte et produkt fra DARO. Vi håber du bliver glad for det og får mange gode oplevelser ude i det fri.

Læs denne brugervejledning, inden du bruger køreposen.



Sikkerhedsregler

-  Brug kun en kørepose, der passer til brugerens størrelse.
-  Brug **aldrig** køreposen, hvis dele er frigjort, i stykker eller mangler. Der er fare for, at det kan sætte sig fast i hjulene.
-  Immobiler eller plejekrævende brugere må **ikke** lades alene eller være uden opsyn, når køreposen er på.
-  Vær opmærksom på brugerens temperatur og reguler påklædningen derefter. Dette for at undgå overophedning.
-  Benytter brugeren sele, skal denne **altid** være fastspændt ved brug af kørepose, således brugeren ikke glider ned.

Reklamationsret

DARO yder 2 års reklamationsret i henhold til dansk købelov. Det omfatter materiale- og produktionsfejl og således **IKKE** ved:

- Forkert brug.
- Forkert vask.
- Forkert vedligehold.
- Uautoriseret indgreb.
- Almindelig slidtage.

Køreposens funktioner

- Vintermodel.
- Vind- og vandafvisende.
- Åndbar.
- Varm Thinsulate-isolering og blød fleeceforing.
- Faconsyet og med høj ryg.
- Sædestykke i skridsikker regnstof.
- Delbare 2-vejs lynlåse med lange hængere, der samles i taljen og lynes ned langs siden til bundpladen.
- Forstykke og bundplade kan adskilles fra bagstykket.
- Bundplade udvendig og indvendig i sort kunstlæder og med Thinsulate-isolering imellem. Herunder gribebånd til fastgørelse om fodpladen.
- Bagstykke med elastik og gribebånd, for fastgørelse til kørestolen.
- Sikkerhedsreflekser på forstykket for bedre synlighed i mørke.
- Elastik i taljen.
- Huller til hofteseler.
- Åbning til hælbespænding.
- Forsyet til abduktionsklods.

Sådan bruges køreposen

1. Adskil bagstykket fra forstykket og placer bagstykket i stolen.
2. Fastgør bagstykket til stolen med gribebåndene og før rygdelen elastikker om hvert ryghjørne.
3. Før hofteselerne ud gennem hullerne i hver side og placer brugeren i stolen og fastspænd.
4. Læg forstykket på brugeren og sørg for at bundpladen placeres **mellem** brugerens fødder og stolens fodplade.
5. Fastspænd bundpladens gribebånd under stolens fodplade.
6. Luk hver lynlås i taljen og lyn ned til bundpladen i begge sider.

TIP! Ved brug af abduktionsklods klippes den forsyede del forsigtigt op. Klip **ikke** i syningerne, men i midten.



Køreposen skal placeres **mellem** brugers fødder og kørestolens fodplade.

Vask

- ⚠ Denne vaskeanvisning **SKAL** følges. Vaskes produktet forkert, er der risiko for beskadigelse og forkortet produktlevetid.
- ⚠ Anvend **IKKE** skyllemiddel, iblødsætning eller vaskemiddel med blegestoffer.

Vask i maskine

1. Luk gribebånd og lynlåse og læg køreposen i tromlen med vrangen ud.
2. Benyt kun en lille mængde vaskemiddel **uden** blegestoffer.
3. Vask køreposen ved **max. 60°C** og ved lav centrifugering.
4. Hæng køreposen til tørre. Den kan også tørretumbles ved lav varme.



Ingen blegemiddel



Skånevask max. 60°C



Tørretumbling ved lav varme



Strygning ved lav varme



Rens er muligt

Vedligehold

- Tjek jævnligt køreposen for skader.
- Brug **aldrig** køreposen, hvis dele er frigjort, i stykker eller mangler.

Materiale

Yderstof

- OEKO-TEX® 100-certificeret.



- 100% polyester med PU-coating.

Isolering

- OEKO-TEX® 100-certificeret.
- Thinsulate P100.



Foer

- OEKO-TEX® 100-certificeret.
- 100% polyester fleece.

Teknisk info

Yderstof

- Vandsøjletryk: 10.000 mm.
- Åndbarhed: 5.000g/m².
- Kvadratmetervægt: 135g/m².

Isolering

- Evne: Bevarer isoleringen i fugtige omgivelser og tørrer hurtigt.
- Kvadratmetervægt: 95g/m²
- Isolering: 0,30 Rct.
- Tykkelse: 1,1 cm.

Foer

- Anti-peeling.
- Kvadratmetervægt: 300g/m².

DARO

by able

able nordic a/s
DARO
Skavholmvej 8C, 1.
DK-8520 Lystrup
Danmark

Tlf. (+45) 75 88 16 22
daro@ablenordic.dk
www.daro.dk

DARO - dansk producent af tøj til alle typer handicap

Hos DARO brænder vi for at lave tøj til alle typer handicap - tøj, som kan give dig en øget livskvalitet, komfort og lette din hverdag. DARO har mere end 40 års erfaring med at designe og sy moderigtigt og funktionelt tøj til både børn og voksne. Vi kan specialtilpasse tøjet præcis til dig og hjælper gerne med nye løsninger, hvis du har specifikke behov. Se hele DAROs produktudvalg på www.daro.dk.

DARO er tøj til DIG og tøj med omtanke.

