

PROcare, a daily part of living

Stensmosevej 22-24

2620 Albertslund

Skil stroppen fra spændedelen (velcro som åbnes), flyt stroppen længere ind/ud i spændedelen. Hvis stroppen er meget for lang, klippes der overflødige af. Luk spændedelen og monter som vist ovenfor.

Alle skinnedele kan vaskes i maskine ved 40° og tørres i tørretumbler ved lav varme. Hvis skinnen vaskes i vaskemaskine anbefales det at lægge den i en vaskepose eller et pudebetræk.

Foeret kan vaskes ved 60° og kan også tørres i tørretumbler ved høj varme.

PROgress skinnerne er hvileskiner hvilket indikerer at håndleddet skal placeres i en dorsal flexion på 12-20°

Skinnens vinkler og facon tilpasses ved at gribe med 2 hænder og bukke og tilrette det indvendige metal i den facon som er nødvendig.

Kontakt PROcare på tlf. 43 62 62 43 hvis du har spørgsmål

PROcare, a daily part of living

Stensmosevej 22-24

2620 Albertslund

## Vejledning i montering af PROGRESS skinner generelt

**Når du åbner pakken vil du finde flg.**

1 skinne

1 foer

3 bånd til montering



Båndene er som regel monteret på skinner, men du kan have behov for at ændre på deres placering eller længde

PROcare, a daily part of living  
Stensmosevej 22-24  
2620 Albertslund  
Montering:



På den ene side af båndet på spændet, er der velcro som let hæfter til skinnen. Sæt dette velcro på så spændet lige "kigger" over kanten på skinnen, mens resten af båndet ligger over mod anden side af skinnen.



Denne montering gør det enklere at få snippen ind i spændet, hvorefter du trækker stroppen igennem fra modsatte side (uden at stramme for meget) og så lægger snippen ind over sig selv for at låse (der er velcro på strop og snip)

PROcare, a daily part of living  
Stensmosevej 22-24  
2620 Albertslund

Dette gentager du for hver strop. Husk at der så vidt muligt ikke må ligge stropper over knoglefremspring.



Hvis du har behov for længere stropper gøres det på flg. måde:

