

## Brugsanvisning SMS kørestolspude



### Placering:

1) Placér puden i kørestolen med den runde bagkant vendt mod kørestolens ryg og med den skrå forkant udad - sørg for at puden ligger helt tilbage i sædet

### Brugervægt:

120 kg.

### Materiale:

Produceret i koldskum 38 kg./m<sup>3</sup>.  
Hygi-tex sort inkontinensbetræk

### Rengøring:

Puden aftørres med milde rengøringsmidler, ligeledes kan hospitalssprit og lignende midler anvendes

Anvend en blød vaskesvamp eller klud

Betrækket kan maskinvaskes ved maks. 40° C

Betrækket skal være tørt, inden det igen sættes på puden  
Må ikke tørretumbles eller stryges

### Brandtest:

Puden er brandtestet og godkendt iht. CAL 117 A&D State of California samt certificeret laboratorium Akzo Nobel - Deventer - Holland