


# Monteringsvejledning

## Ji Knækpedal

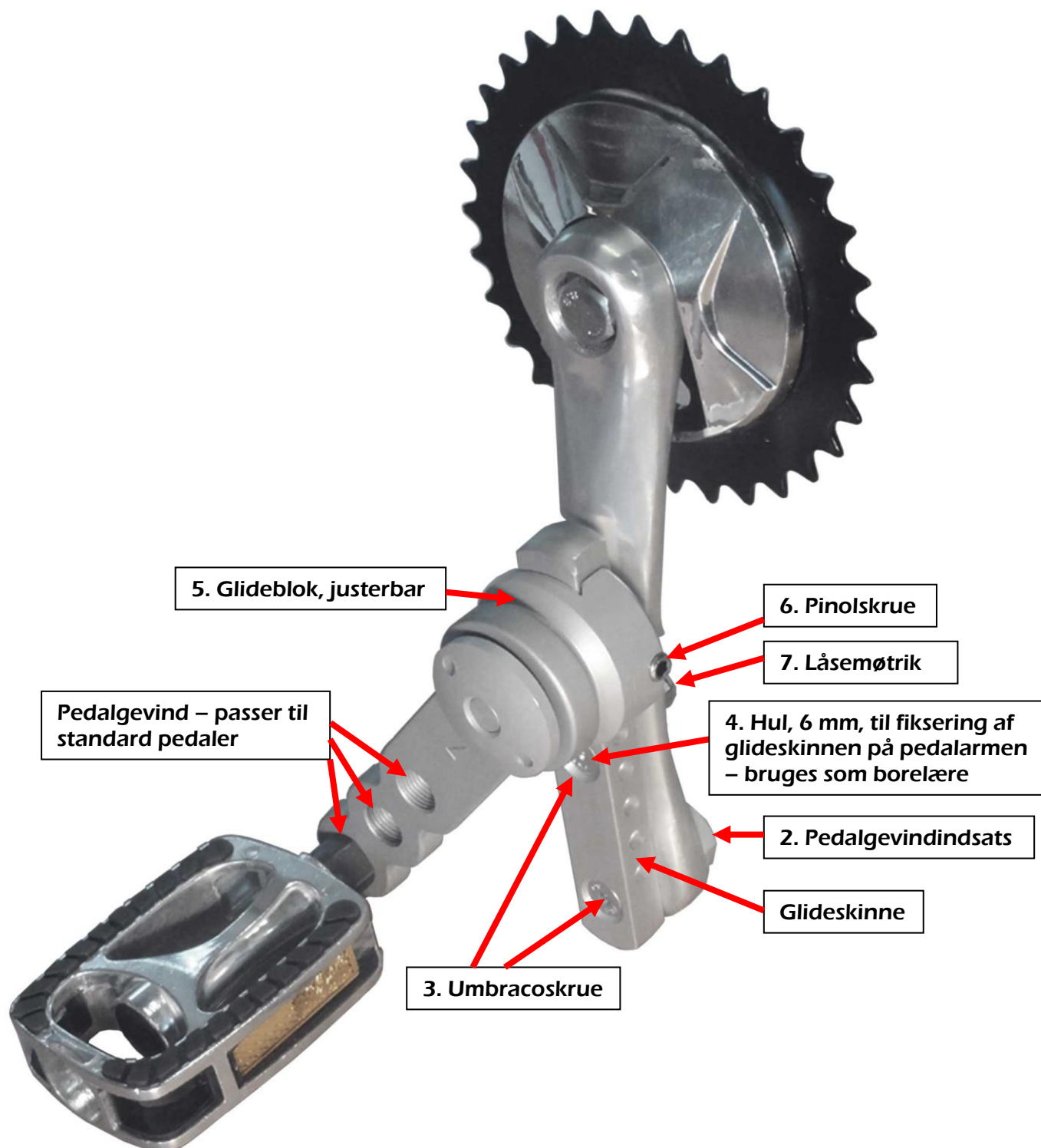

**Jørn Iversen Rødekro ApS**

Hydevadvej 48, 6230 Rødekro

Tlf. 74 66 92 42 – e-mail: iversen@ji.dk

[www.ji.dk](http://www.ji.dk)

**Anbefalet værktøj**

Gaffel/ringnøgle 10 mm  
 Metalbor 6 mm (og boremaskine)  
 Metalsav  
 Skruestik (ikke absolut nødvendig, men letter arbejdet når der skal bores hul i pedalarmen)

**1.** Skru pedalen af den originale pedalarm.

**3.** Læg glideskinnen langs med pedalarmen, så det nederste hul passer med pedalgevindindsatsen.  
 Fastgør glideskinnen i pedalarmen ved at skrue umbracoskruen ind i pedalgevindindsatsen. Spænd ikke skruen alt for meget – glideskinnen skal kunne bevæges.

**5.** Glideblokken med knækpedalarmen monteres på glideskinnen (se nr. 5).  
 Fikses i ønsket position med pinolskruen (se nr. 6).

**Monteringssettet indeholder:**

1 knækpedalarm  
 1 glideskinne  
 1 pedalgevindindsats  
 2 umbracoskruer 6x40 mm  
 2 spændskiver  
 2 selvlåsende møtrikker  
 1 umbraconøgle 4 mm

**2.** Monter pedalgevindindsatsen i pedalarmen (se nr. 2).

**4.** Glideskinnen lægges parallelt med pedalarmen.  
 Brug hullet i glideskinnen (se nr. 4) som borelære for at bore et 6 mm hul i pedalarmen. Har du en skruestik, kan pedalarmen spændes fast heri når hullet skal bores.  
 Umbracoskruen sættes i hullet og fastspændes med 6 mm selvlåsende møtrik – husk spændeskiven (se nr. 7).  
 Den del af skruen, der stikker ud fra møtrikken, saves af.  
 Efterspænd umbracoskruen, der er skruet ind i pedalgevindindsatsen.  
 Den del af umbracoskruen, der stikker ud igennem pedalgevindindsatsen, saves af.

**6.** Monter pedalen i knækpedalarmen. Der er 3 huller at vælge imellem.

**Er du i tvivl...**

Så ring til vores teknikere – de kan sikkert hjælpe dig.  
 Telefon 74 66 92 42 – telefonerne er åbne mellem 08.00 og 16.00.