

Brugsanvisning Merry Nøglegreb



Montering af nøgle:

- 1) Skru skruen ud
- 2) Drej pladen så cylinderen til nøglen er fri
- 3) Fjern evt. den yderste cylinder, for at få nøglen til at passe
- 4) Drej pladen tilbage og skru skruen fast

Rengøring:

Rengøring kan foretages med alle gængse- eller med ikke ætsende desinfektionsmidler såsom hospitalssprit eller Terralin og lignende

Mål:

- A: Bredde = 1,8 cm.
B: Længde = 7,7 cm.
C: Højde = 2,5 cm.

Vægt: 17 gram

Materiale:

Plastik