

# Breeze

by ACCESS™



Forward  
Thinking  
Mobility

[www.Breeze-walker.com](http://www.Breeze-walker.com)

USER MANUAL

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Indhold               | 6. Montering og transport     |
| 2. Introduktion          | 7. Pasning og vedligeholdelse |
| 3. Beskrivelse af delene | 8. Funktioner                 |
| 4. Personlig sikkerhed   | 9. Specifikationer            |
| 5. Personlig tilpasning  | 10. Tilleggsudstyr            |

Tillykke med din nye Breeze rollator. Denne Breeze rollator er et højtudviklet design fra Access Vital, i Hamar, Norge. Breeze er let og slank, med et moderne og elegant design. Rollatoren er designet til at hjælpe brugeren med forskellige hverdagsopgaver som gåture og indkøb.

Hos Access mener vi, at alle skal kunne nyde at være udendørs og komme omkring på gader og hjemme, med den frihed som øget mobilitet giver.

Vores produkter er ualmindeligt funktionelle, og med deres moderne udstråling er de ikke 'stigmatiserende' som hjælp til mobiliteten.

Breeze er anvendelig til både indendørs- og udendørsbrug i hverdagen. Den er nem at justere, sædet har tre forskellige højder, og rollatoren er nem at tage med.

Alle Breeze rollatorer er fremstillet efter de højeste kvalitetsstandarder, og de er CE-mærkede som medicinsk udstyr. Breeze rollatoren er et robust og visuelt tiltalende produkt i skandinavisk design, og samtidig en omkostningsbesparende og pålidelig ledsager til hjælp med de specielle mobilitetsbehov.

### 3.

## BESKRIVELSE AF DELENE



### 4.

## PASNING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Rollatoren må kun anvendes som hjælpemiddel til mobilitet.
- Sørg for at rollatoren er holdt ren. Rollatoren kan vaskes af med en klud eller svamp med et mildt rengøringsmiddel, eller rengøres med en højtrykssprøjte eller haveslange.
- Kontroller regelmæssigt de bevægende dele (fx hjul og højdejustering).
- Kontroller at de håndtagsstyrede kabelbremser er justeret rigtigt (se afsnittet FUNKTIONER).
- Alle befæstelselementer (skruer, møtrikker og bolte) skal kontrolleres regelmæssigt, for at sikre at de er strammet godt til.
- Lad kun en autoriseret forhandler udføre vedligeholdelse eller reparationer på din Breeze rollator.

## 5.

## PERSONLIG TILPASNING

**Justering af håndtagshøjde**

For at indstille højden af rollatorens håndtag, skal håndtagsslåsen trykkes ud mens håndtaget flyttes op eller ned. Når den rigtige højde er valgt slippes håndtagsslåsen. Tryk håndtaget ned, for at sikre at det er låst fast i stillingen.

Gentag dette med det andet håndtag

**Justering af sædehøjde**

For at justere sædehøjden skal begge sædets låsetappe trykkes ind, træk sædet frem ud af rillerne. Flyt sædet til den ønskede højde og skub sædet ind, indtil sædets låsetappe låser sædet fast.

## 6.

## MONTERING OG TRANSPORT



- Breeze rollatoren leveres fuldt monteret og klar til brug. Der er ikke brug for værktøj.
- Fold Breeze sammen til transport eller opbevaring ved at trække foldehåndtaget op, mens Breeze løftes op i sædehåndtaget. Breeze vil låse sig i den foldede stilling, og vil være foldet sammen som vist på fotoet til venstre.
- Fold Breeze ud ved at trække foldehåndtaget op indtil bagbenene drejer. Tryk håndtaget ned for at låse Breeze i den åbne brugsstilling.
- Vær forsigtig når rollatoren løftes op og lægges ind i og tages ud af bilens bagagerum.

- Af hensyn til helbred og komfort skal man sørge for, at have en god holdning og holde fat i rollatoren på en måde, så man let kan bruge bremsen.
- Opbevar rollatoren på et sikkert sted.
- Fold rollatoren helt ud, så den låser fast, før den anvendes.
- Risiko for klemning – placer ikke fingrene eller hænderne i hængslerne på Breeze rollatoren når den foldes sammen eller åbnes for at bruge den.
- Sørg for at hjulene er stabile og på jorden før brugen.
- Sørg for at bremserne er justeret rigtigt og testet før brugen.
- Sørg for at sædet er låst fast i positionen, før der siddes på det.
- Sid altid midt på sædet, med sædet indstillet således, at brugeren har sine fødder på gulvet.
- Sørg for at parkeringsbremsen er låst, før der siddes på rollatoren.
- Sid aldrig på rollatoren, når den er foldet sammen til opbevaring.
- Stå aldrig på rollatoren og brug den aldrig som trappestige.
- Transporter aldrig en person siddende på rollatorens sæde.
- Vær forsigtig når rollatoren løftes og bæres.



### Kurv

Den praktiske indkøbskurv hænger på forsiden af sædet på Breeze rollatoren. Kurven kan bære op til 10kg maks.



### Forhindringer.

Rollatoren er forsynet med store forhjul og en trinplade til at takle større forhindringer (som fx en kantsten). Tryk nedad på trinpladen med foden og træk samtidig håndtagene tilbage for at løfte forhjulene og takle forhindringen.



## Bremser.

Bremserne er specielt designede og en vigtig del af din Breeze rollator. Der er ingen synlige bremsekabler, og det patenterede system er både sikrere og kræver mindre vedligeholdelse end andre systemer.

For at bremse, skal du kun klemme bremsehåndtaget op mod håndtaget. Kun et let tryk er nødvendigt, og bremserne kan let varieres med forskellige niveauer af modstand.

For at låse bremsen (og aktivere parkeringsbremsen), skal bremsehåndtaget ganske enkelt trykkes ned, indtil det låser.

Lås bremserne op ved at trække bremsehåndtaget op, og det vil af sig selv springe tilbage til neutral stilling.



## Vedligeholdelse af bremserne.

Bremsernes justering skal kontrolleres før du begynder at bruge din Breeze rollator. På grund af normal slidtage af bremser og dæk, når rollatoren er i brug, skal der også udføres periodiske eftersyn af bremserne, for at holde dem i god funktion.

Der er en praktisk justeringsskru (sekskantskru) placeret i bagbensprofilen (se billedet til højre) lige over baghjulet. Justér skruen således at bremsearmen er ca. 3mm fra dækket. Drejes skruen ind (mod højre) øges afstanden, og drejes skruen ud (mod venstre) formindskes afstanden til dækket.



Type	Breeze
Maks. brukervægt	125kg
Håndtakshøyde	77-95cm
Setehøyde	48-62cm
Mål i cm (BxL)	60 x 72cm
Mål sammenfoldet	60 x 28 x 96
Vægt	7 kg
Materiale	Aluminium og fiberforstærket plasti
Rengøring	Sæbevand eller høytrykksvask

## 10.

## TILLEGGSUTSTYR

Din Breeze rollator kan utstyres med forskjellige typer af ekstraudstyr for at tilpasse dine behov. Kontakt din leverandør, hvis du behøver noget af det ekstraudstyr som er listet nedenfor:



\* Rygstøtte - polstret rygstøtte som spændes fast til sædet.



\* Stokkeholder.



\* Serveringsbrett - til mat og drikke (max 3 kg)



\* Deluxe Case logic bag - elegant og ergonomisk