



Vital Base Venti



Vital Base Sit



Vital Base Royal



Uno

BRUGSANVISNING SIDDEPUDER

VITAL BASE[®]

Your challenge - our science

ALU_REHAB[™]
Thinking ahead - moving forward

Gyldig fra august 2010

Valid from August 2010

Gültig ab August 2010

Indhold

1. Brugsanvisning	2
2. Montering af puden	2
3. Vedligeholdelse	2
4. Vaskeanvisning Et vasketemperatur °C	3
5. Vaskevejledning	4
6. Rutiner for eftersyn	4

1. Brugsanvisning

Uno, Vital Base Sit, Vital Base Venti og Vital Base Royal er puder, som er udviklet til at passe ind i kørestole med faste sædeplader. Puderne har en friktionsdug på underside, som gør dem kompatible med alle eksisterende kørestolemodeller på markedet.

Uno og Vital Base Royal+ er puder der er udviklet til at passe i kørestole med krydsramme og sædedug. Basen har en konveks (buet) undersiden, som gør det muligt at at få en tilnærmet plan understøttelsesflade for brugeren som sidder på puden. Pudens modvirker 'hængekøje' effekt.

Uno Et Uno+ er en basis siddepude, designet til brugere som sidder passivt i kørestolen i kortere perioder og til brugere som selv aktivt ændrer siddestilling.

Vital Base Sit har gode trykfordelende egenskaber og er beregnet til at sidde på i længere perioder.

Vital Base Venti har gode trykfordelende egenskaber og er beregnet til at sidde på i længere perioder. Venti har i tillæg gode ventilerende egenskaber.

Vital Base Royal og Vital Base Royal+ er en tryksårsforebyggende pude beregnet til brugere der sidder passivt i længere perioder i løbet af dagen. Pudens har temperaturregulerende ClimaTherm betræk.

2. Montering af puden

Pudens tages ud af emballagen og placeres i kørestolens sæde. Monter pudens i sædet i henhold til anvisningen på etiketten, som er syet fast på betrækkets underside. Friktionsdugen med etiket skal vende ned mod sædepladen. Pudens forkant skal flugte med forkanten af sædepladen.

3. Vedligeholdelse

Den eneste vedligeholdelse pudens har behov for er rengøring:

1. Åben lynlåsen i bagkanten og tag yderbetrækket af.
2. Åben lynlåsen i underkanten af inderbetrækket (gælder kun Sit og Royal).
3. Tag kernen ud og sæt den på højkant til udluftning, mens betrækket vaskes.
4. Følg vaskeanvisningen som beskrevet på etiketten, som er syet fast på undersiden af yder- og inderbetrækket.
5. Efter vask placeres kernen i betrækkene med etiketten vendt nedad. For rigtig frem/bag placering se etiket.
6. Træk et eventuelt inderbetræk på først. Lynlåsen skal være i bagkanten og etiketten skal vende nedad.
7. Træk yderbetræk på. Lynlåsen skal være i bagkanten og etiketten skal vende nedad.

4. Vaskeanvisning & vasketemperatur °C

	UNO (+)	Vital Base Sit	Vital Base Venti	Vital Base Royal
Kerne				
Vask	Håndvask 40° C	Håndvask 40° C	Håndvask 40° C	Håndvask 40° C
Desinficering	Virkon S*	Virkon S*	Virkon S*	Virkon S*
	Autoklivering 105° C	Autoklivering 105° C	Autoklivering 105° C	Autoklivering 105° C
Tørring	Klemmes sammen	Klemmes sammen	Klemmes sammen	Klemmes sammen
	Lufttørres stående	Lufttørres stående	Lufttørres stående	Lufttørres stående
Inderbetræk	Ikke standard		Ikke standard	
Vask		Maskinvaskes 95° C		Maskinvaskes 95° C
		Aftørres med alm. sæbe		Aftørres med alm. sæbe
Tørring		Centrifugeres & lufttørres		Centrifugeres & lufttørres
		IKKE tørretumbles		IKKE tørretumbles
Yderbetræk				
Vask	Maskinvask 60° C	Maskinvask 60° C	Maskinvask 60° C	Maskinvask 60° C
Tørring	Tørretumbles maks. 85° C	Tørretumbles maks. 85° C	Tørretumbles maks. 85° C	Centrifugeres & lufttørres
				IKKE tørretumbles

* Læs brugsanvisning til Virkon S på pakningsvedlæg fra Lilleborg

5. Vaskevejledning

General information

Følg vaskeanvisningerne på yderbetrækket, inderbetræk (Vital base Sit Vital base Royal) og kerne. Behov for vask af kerne og betræk vil variere bruger til bruger, afhængig af bl.a. inkontinensgrad. En tommelfingerregel kan være, at man en gang i ugen tager kernen ud af betrækkene og sætter den på højkant til udluftning og samtidigt vasker betrækkene.

Det kan være en fordel at have et ekstra betræk til puden, så brugeren ikke skal mangle puden mens betrækket tørrer.

Kernen og betræk skal vaskes separat. Brug mild sæbe uden blegemiddel. Klem kernen sammen efter vask for at få vandet i kernen ud og lad kernen tørre stående på højkant så vandet løber fra. Brug ikke stive børster eller stærke pletfjernere. For at fjerne pletter, brug almindeligt husholdningssæbe og en blød klud. Hvis pletterne er vanskelige, kan betrækket ligges i blød før vask.

Kerne

Kernen kan håndvaskes ved 40° C med mild sæbe, autoklaveres ved 105° C eller dicificeres med Virkon S. Ved brug af Virkon S fra Lilleborg, følg vejledningen på pakningen. Klem kernen sammen efter vask for at få vandet i kernen ud og lad kernen tørre stående så vandet løber fra.

Inderbetræk

Vital Base Royal (+) og Vital base Sit har et inderbetræk. Dette beskytter kernen og sørger for at behovet vask reduceres betydeligt. Inderbetrækket kan vaskes ved 95° C. Betrækket centrifugeres og lufttørres.

Yderbetræk

Vital Base Venti Et Vital Base Sit

Yderbetræk 3D: Maskinvaskes ved 60° C og tørretumbles ved 85° C.

Vital base Royal

Yderbetræk ClimaTherm: Maskinvaskes ved 60° C. Centrifugeres og lufttørres.

Uno

Yderbetræk Mars: Maskinvaskes ved 60° C og tørretumbles ved 85° C.

6. Rutiner for eftersyn

Før brugeren placeres i stolen, tjek at puden er monteret korrekt i henhold til anvisningen på etiketten under puden. Ved jævne mellemrum kan det være klogt at tjekke at betrækkene og kernen er placeret rigtigt (følg punkterne under 3. Vedligeholdelse).



VITAL BASE[®]

Your challenge - our science

ALU_REHAB[™]

Alu Rehab ApS

Kløftehøj 8, 8680 Ry

CVR 13868670

Tlf. 87 88 73 00

Fax 87 88 73 19

Mail: info@alurehab.dk

www.alurehab.dk