



BRUGSANVISNING VEDLIGEHOOLDSPUMPE TIL CAREBED

BRUGSANVISNING:

Skru den grønne prop af og fjern den røde ventil. Skru den grønne prop på slangen til madrassen. Pres enden af slangen fast på studsens på pumpen og tilslut strøm. Pumpen anbringes på sengegavlen.

Læg patienten på madrassen og start pumpen. Det varer ca. 20 minutter at fylde madrassen. Sørg for at der er 1-2 cm mellemrum mellem patienten og madrassen.

Pumpen stopper når patienten ikke ligger i sengen. Hvis man glemmer at stoppe pumpen fyldes madrassen helt. Hvis patienten lægger sig på en helt fyldt madras vil mængden af luft i madrassen reduceres til korrekt niveau i løbet af ca. 15 minutter.

DISSE ADVARSLER ER SKREVET AF SIKKERHEDSHENSYN. LÆS INSTRUKTIONEN OMHYGGELIGT, FØR DU ANVENDER PUMPEN.

Pumpen må kun bruges af voksne. Børn må ikke røre knapperne eller lege med dem. Efterlad aldrig en tændt pumpe, når der er børn i nærheden.

Det er farligt at ændre specifikationerne, eller modificere pumpen på nogen måde.

Pumpen er beregnet til indendørs brug, og skal altid opbevares tørt.

Vær opmærksom på, at pumpen ikke kommer i kontakt med vand eller andre væsker.

Brug aldrig pumpen i nærheden af brændbare gasser.

Efterlad aldrig en arbejdende pumpe uden opsyn.

Træk aldrig i ledningen, brug stikproppen når ledningen skal ud af stikkontakten.

Lad ikke ledningen komme i kontakt med olie, skarpe kanter eller ujævne overflader. Ledningen bør udskiftes hvis den beskadiges.

Brug aldrig forlængerledninger i vådrum.

Forsøg aldrig selv at reparere pumpen. Reparationer udført af ikke autoriseret personale, kan medføre alvorlige fejl og/eller skader, samt at garantien bortfalder.

Pumpen bør ikke opbevares i fugtige rum.

Rengøring: Tørres med en klud fugtet i vand, metanol eller isopropanol.