

# Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare BE1560/BE1570

## Inledning

Tack för att du valt produkter från Bellman & Symfon. Bellman Visit 868-systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika händelser i omgivningen och sänder en radiosignal till mottagarna. Mottagarna tar emot denna signal och indikerar med ljus, ljud och/eller vibration. Sändaren bestämmer vilken typ av ljus, ljud eller vibration som skall visas och på så sätt vet man anledningen till indikeringen. Läs igenom hela bruksanvisningen först och börja sedan att montera systemet. Se illustration av Bellman Visit 868-systemet på insidan av omslaget.

## Att komma igång

### Packa upp och prova apparaten

Normal placering av Laddaren är stående på ett plant underlag och Armbandsmottagaren skall normalt sitta runt handleden eller i Laddaren.

1. Drag bort den lilla pappersfliken som sticker ut från batteriluckan (9) och anslut batterieliminatortill till nätspänning samt till uttaget för batterieliminatortill (15). Den gröna lysdioden (10) skall tändas och lysa så länge som Laddaren har extern strömförsörjning.
2. Sätt Armbandsmottagaren i Laddaren för Armbandsmottagare. Den gröna lysdioden (12) skall tändas. Om batteriet är helt tomt startar Armbandsmottagaren men kan endast användas sittande i Laddaren tills den laddats i cirka två timmar.
3. Anslut en Bellman Sängvibrator, BE1270 (tillbehör) till uttaget (14) och tryck på Laddarens Testknapp (11). Vibratorn skall vibrera så länge knappen trycks in. Notera att då Testknappen (11) trycks in drivs Laddaren endast med backupbatterierna.
4. För att testa radiomottagningen behövs en Bellman Visit 868-sändare. Tryck in testknappen på Bellman Visit 868-sändaren. Bellman Visit 868 Armbandsmottagare kommer att avge ljussignal och vibration via den anslutna Sängvibratortill. Observera att Armbandsmottagaren i sig inte vibrerar när den sitter i Laddaren.
5. Bellman Visit 868 Armbandsmottagare används runt handleden precis som en armbandsklocka.

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare, BE1560 placeras i Bellman Visit Laddare för Armbandsmottagare, BE1570 både för att laddas och för att via Laddaren kunna ansluta en Bellman Sängvibrator, BE1270 (tillbehör) som placeras under kudden för väckning. Laddningen styrs av Armbandsmottagaren och tar upp till 8 timmar. Under laddningen lyser lysdioden (12) på Laddaren för Armbandsmottagare grönt.



## Teknisk information BE1560

### Strömförsörjning

#### Nät drift:

Via Bellman Visit Laddare för Armbandsmottagare, BE1570.

#### Batteridrift:

1 st 1,2 V VARTA V40H uppladdningsbart NiMH-batteri. Batteriluckan öppnas med ett mynt.

**Drifttid:** Cirka 30 timmar

**Laddtid:** Cirka 8 timmar. Om batteriet är helt tomt kan du ändå använda Armbandsmottagaren genom att sätta den i Laddaren. För att använda Armbandsmottagaren löst igen bör den laddas i cirka två timmar.

#### Strömförbrukning:

Aktiv: Cirka 100 mA  
Vänteläge: Cirka 3 mA

### Radiofunktion

**Radiofrekvens:** 868,3 MHz

**Antal Radionycklar:** 64 st

Radionycklar som standard. Dessa kan ökas med specialprogramvara till 256 Radionycklar i steg om 64 st per programvara. För vidare information kontakta närmaste leverantör.

**Räckvidd:** Normalt är räckvidden mellan en sändare och Bellman Visit 868 Armbandsmottagare cirka 100 meter vid fri sikt. Räckvidden reduceras av väggar och större föremål som skärmar signalerna; framför allt tjocka väggar av armerad betong påverkar räckvidden kraftigt. Systemet kan även påverkas av radiosändare såsom TV-sändare, datorer, mobiltelefoner etc. Detta gör att en enhet kan fungera perfekt i en del av rummet men inte alls i en annan.

### Aktivering

#### Radio:

Bellman Visit 868-systemet

#### Utsignaler:

Vibratordrivning: Inbyggd

### Övrigt

Endast för inomhusbruk

**Storlek B x H x D:** 38 x 12 x 49 mm

#### Vikt:

Med batteri: 27 g. Utan batteri: 25 g.


**Färg:** Vit med svart överdel och grå Funktionsknapp.

#### Tillbehör:

Bellman Visit Laddare för Armbandsmottagare, BE1570.  
Bellman Sängvibrator, BE1270, (ansluts till BE1570).  
Bellman Armbandsverktyg, BE9140.


## För att ladda Armbandsmottagaren

1. Vinkla Armbandsmottagaren lätt utåt så att de 2 små hålen i Armbandsmottagarens kant pekar nedåt och för in Armbandsmottagaren mot den rörliga nedre delen av Laddaren.
2. Tryck Armbandsmottagaren och den rörliga knappen nedåt.
3. För in övre delen av Armbandsmottagaren mot bakkanten och släpp upp försiktigt. Den gröna lysdioden (12) skall tändas.

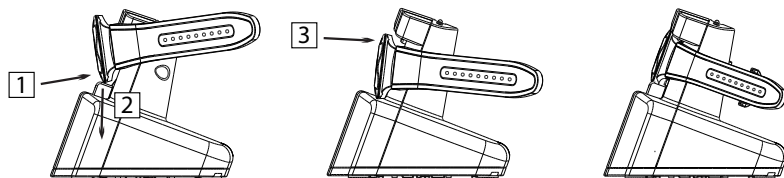

## För att använda Armbandsmottagaren när den laddats klart

4. Tryck Armbandsmottagaren och den rörliga knappen nedåt.
5. Vinkla ut den övre delen av Armbandsmottagaren.
6. Lyft ut Armbandsmottagaren ur Laddaren

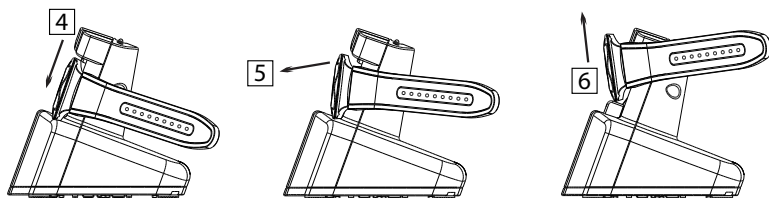

## Funktion

### Allmänt

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare, BE1560, är en mottagare i Bellman Visit 868-systemet och Bellman Visit Laddare för Armbandsmottagare, BE1570, är en laddare för att ladda Armbandsmottagarens interna batteri. Båda produkterna är till för inomhusbruk och Armbandsmottagaren påkallar uppmärksamheten med ljus och vibrationer. Laddaren för Armbandsmottagaren ska normalt alltid vara ansluten till nätdrift via batterieliminatort och laddning av dess interna backupbatterier sker då automatiskt. Detta ger en större trygghet eftersom backupbatterierna bevarar funktionaliteten även vid strömavbrott.

Om Armbandsmottagaren är kopplad till Laddaren för Armbandsmottagare kan man ansluta en Bellman Sängvibrator BE1270 (tillbehör) och därigenom bli uppmärksam på vad som händer samtidigt som Armbandsmottagaren laddas. Denna kombination ger en bättre funktionalitet genom väckningsmöjligheterna med Sängvibratort då man sover.

Aktivering sker via radiosignaler från någon av sändarna i Bellman Visit 868-systemet.

### Radionyckel

Vid leverans är alla Bellman Visit 868-enheter inställda på samma Radionyckel. Om man har en granne som har ett likadant system kan man ändra till olika Radionycklar för att inte påverka varandras system.

Man ändrar Radionyckel på denna mottagare genom att hålla Funktionsknappen (1) intryckt i ungefär fem sekunder till dess att Lysdiодerna (3) och (4) blinkar växelvis. Släpp Funktionsknappen (1) och tryck sedan in sändarens testknapp så att mottagarens lysdiодer (2-5) blinkar, vilket bekräftar Radionyckelbytet. Alla enheter i ett Bellman Visit 868-system måste ha samma Radionyckel för att fungera ihop. Se respektive enhets bruksanvisning.



## Teknisk information BE1570

### Strömförsörjning

**Nät drift:** 7,5 V DC / 1500 mA med batterieliminatort BE9201 (Europa) och BE9202 (Storbritannien).

**Batteridrift:** 4 st 1,2 V /600 mA NiMh TMK AAA60CT uppladdningsbara batterier.

**Laddning:** Via batterieliminatort, minst 24 timmar vid urladdade backupbatterier. Normalt ska BE1570 vara konstant ansluten till nät drift.

### Strömförbrukning:

Aktiv: 650 mA

Vänteläge: 70 mA

### Radiofunktion

Ingen radiofunktion i BE1570, se BE1560

### Aktivering

Via BE1560

### Utsignaler:

Vibratordrivning: 2.0 – 4.0 VDC

### Övrigt

Endast för inomhusbruk

### Storlek B x H x D:

95 x 100 x 117 mm

### Vikt:

Utan batteri: 135 g

Med batteri: 185 g

### Färg:

Vit

### Sladdlängd:

1,7m

### Tillbehör:

Bellman Sängvibrator, BE1270.

Bellman Extern Triggkabel, BE9086.



### Viktigt:

Alla Bellman Visit 868-produkter i samma system måste vara inställda på samma Radionyckel för att fungera tillsammans.

## Indikeringar och Signaler

I Bellman Visit 868-systemet är det generellt sändarna som bestämmer hur mottagarna skall indikera. Se vidare beskrivning i respektive sändares bruksanvisning.

### Systemindikeringar

Lysdioderna ☞ ☐ ☎ ☹ (2 - 5), som indikerar vilken sändare som aktiverat Bellman Visit 868 Armbandsmottagare, har normalt följande betydelse:

- Orange lysdiod ☞ (2) betyder Babyvakt
- Grön lysdiod ☐ (3) betyder Dörrsändare
- Gul lysdiod ☎ (4) betyder Telefonsändare
- Röd lysdiod ☹ (5) betyder Brandvarnare

Om grön ☐ (3) och gul ☎ (4) lysdiod blinkar växelvis betyder det att Bellman Visit 868 Armbandsmottagare är i ett läge för val av Radionyckel. Armbandsmottagaren väntar då på en radiosignal från den sändare i Bellman Visit 868-systemet som skall anpassa mottagaren till samma Radionyckel som sändaren är inställd på.

### Vibration

Den inbyggda vibratoren i Armbandsmottagaren vibrerar olika beroende på vilken sändare som aktiverat Armbandsmottagaren. För mer information om vibrationsmönster, se vidare i bruksanvisningen till respektive Bellman Visit 868-sändare.

För att kunna använda Armbandsmottagaren även när man sover kan man ansluta en Bellman Sängvibrator, BE1270 (tillbehör) till Laddaren. Sängvibratoren placeras under huvudkudden och när Armbandsmottagaren sitter i Laddaren för att ladda under natten väcks man av sängvibratoren när Bellman Visit 868 Armbandsmottagare aktiveras.

Obs! Då Armbandsmottagaren sitter i Laddaren för Armbandsmottagare vibrerar den inte. Vibration får man då man kopplar en Bellman Sängvibrator, BE1270 (tillbehör) till Laddaren. Övriga indikeringar visas som vanligt.

Till vibratorutgången kan man förutom Bellman Sängvibrator, BE1270 koppla andra produkter som t.ex. Bellman Väckarklocka, BE1341, Bellman Visit 868 Guard Receiver m.fl.

### Strömförsörjning

Om lysdioden ☐ (6) på Armbandsmottagaren blinkar kort gult, betyder det att batteriet är dåligt och måste laddas. Använd endast uppladdningsbara NiMh-batterier av typ VARTA V40H för Armbandsmottagaren.

Om lysdioden (12) på Laddaren för Armbandsmottagare lyser grönt, betyder det att Armbandsmottagaren är ansluten till Laddaren och att Armbandsmottagarens batteri laddas.

Om lysdioden (10) på Laddaren för Armbandsmottagare lyser grönt, betyder det att Laddaren är ansluten till batterieliminatoren och att Laddaren drivs på nätspänning.


Om lysdioden (10) på Laddaren för Armbandsmottagare blinkar grönt, betyder det att Laddaren drivs med backupbatterierna. Använd endast uppladdningsbara NiMh-batterier av typ TMK AAA60CT till Laddaren för Armbandsmottagaren.




### **OBS! Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Bellman Visit Laddare för Armbandsmottagare KAN ENDAST ANVÄNDAS MED UPPLADDNINGSBARA NiMH-BATTERIER!**

Icke uppladdningsbara batterier som laddas kommer att börja läcka! Syran från batterierna kommer att skada elektroniken i Bellman Visit 868 Arm-bandsmottagare, BE1560 och Laddaren för Armbandsmottagare, BE1570. Skadorna som uppkommer täcks inte av någon form av garanti. Använd endast batterier av typerna Varta V40H till Armbandsmottagaren och TMK AAA60CT till Laddaren.

## Kortfattad felsökning


Symptom	Åtgärd
Ingenting händer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att batterieliminatorn är korrekt ansluten och att den gröna lysdioden (10) på Laddaren lyser.</li> <li>Ladda eller byt batteriet i Armbandsmottagaren. Använd endast ett uppladdningsbart NiMh-batteri av typ VARTA V40H. Om batteriet är helt tomt kan du ändå använda Armbandsmottagaren genom att sätta den i Laddaren. För att använda Armbandsmottagaren löst igen bör den laddas i cirka två timmar.</li> <li>Kontrollera att Armbandsmottagaren är korrekt placerad i Laddaren för Armbandsmottagaren samt att lysdioden (12) lyser grönt.</li> </ul>
Det går inte att ladda Armbandsmottagaren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att batterieliminatorn är korrekt ansluten och att de gröna lysdiодerna (10 och 12) på Laddaren lyser.</li> <li>Ladda eller byt batterierna på Laddaren för Armbandsmottagaren. Använd endast uppladdningsbara NiMh-batterier av typ TMK AAA60CT.</li> </ul>
Inget händer när batterieliminatorn kopplas bort. Testknappen (11) fungerar heller inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ladda eller byt batterierna i Laddaren. Använd endast uppladdningsbara NiMh-batterier av typ TMK AAA60CT.</li> </ul>
Lysdioden  (6) på Armbandsmottagaren blinkar gult!	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ladda eller byt batteriet i Armbandsmottagaren. Använd endast ett uppladdningsbart NiMh-batteri av typ VARTA V40H. Om batteriet är helt tomt kan du ändå använda Armbandsmottagaren genom att sätta den i Laddaren. För att använda Armbandsmottagaren löst igen bör den laddas i cirka två timmar.</li> </ul>
Sängvibratorn vibrerar inte när Armbandsmottagaren aktiveras.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att sängvibratorn är riktigt ansluten till Laddaren för Armbandsmottagare.</li> <li>Kontrollera att Armbandsmottagaren är korrekt isatt i Laddaren för Armbandsmottagare samt att lysdioden (12) lyser grönt.</li> </ul>
Armbandsmottagaren aktiveras inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera batteriet i Sändarna.</li> <li>Kontrollera att Armbandsmottagaren inte är för långt bort från Sändarna genom att placera den närmare Sändarna.</li> <li>Kontrollera att Armbandsmottagaren är inställd på rätt Radionyckel. Se vidare under Funktion/Radionyckel.</li> </ul>
Mottagarna i systemet ger signaler utan anledning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Byt Radionyckel på samtliga enheter i systemet. Se vidare under Funktion/Radionyckel.</li> </ul>

# Armbandsmottagare

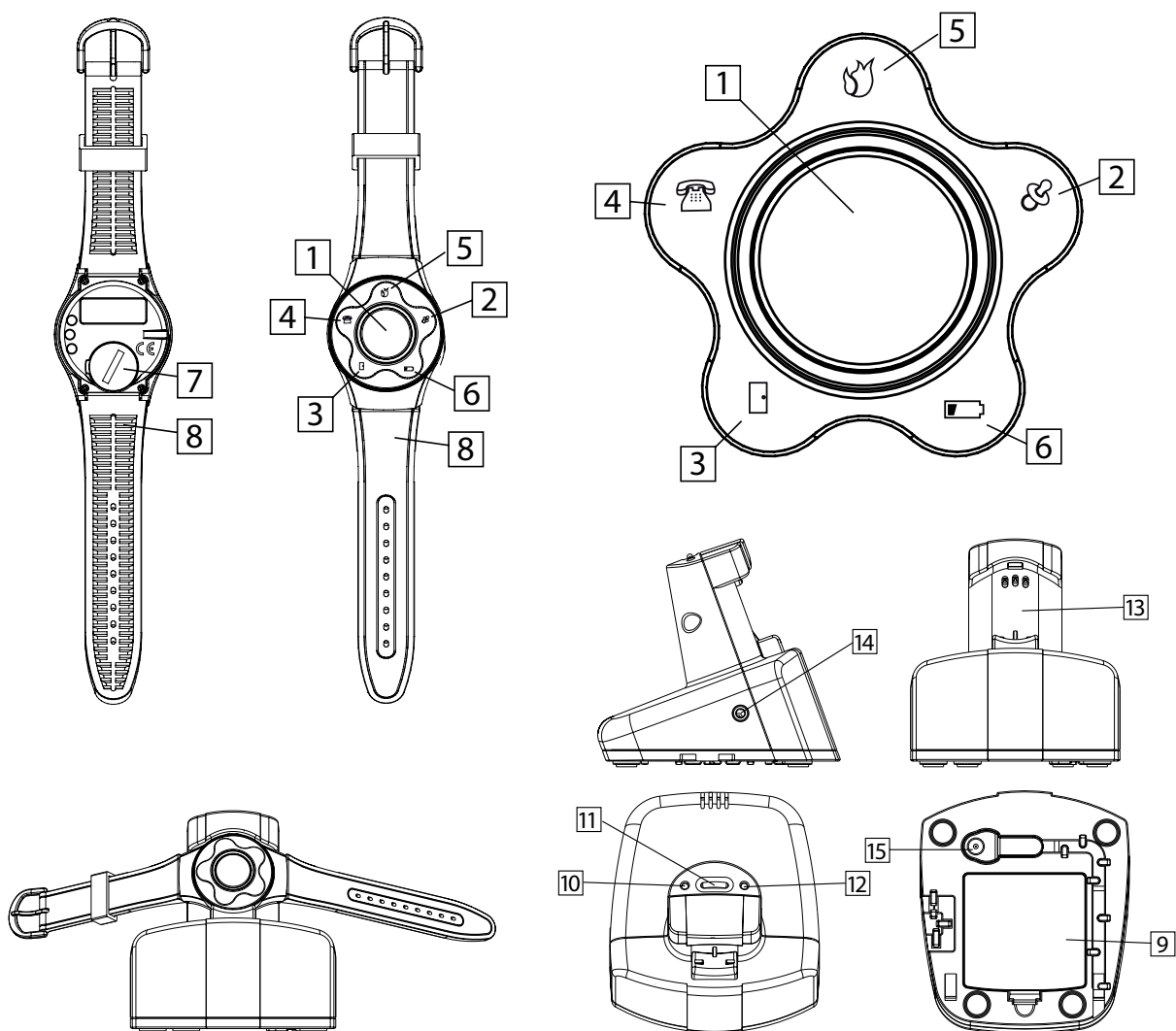

1. Funktionsknapp
2. Orange lysdiod ☞
3. Grön lysdiod ☐
4. Gul lysdiod ☎
5. Röd lysdiod 🔥
6. Gul lysdiod för indikering av dåligt batteri 🔋
7. Batterilucka Armbandsmottagare
8. Armband
9. Batterilucka Laddare
10. Grön lysdiod för nätanslutning
11. Testknapp
12. Grön lysdiod för laddning av Armbandsmottagare
13. Laddutrymme för Armbandsmottagaren
14. Uttag för Sängvibrator ☞
15. Uttag för batterieliminatör ☹☞☺

## Byte av armband

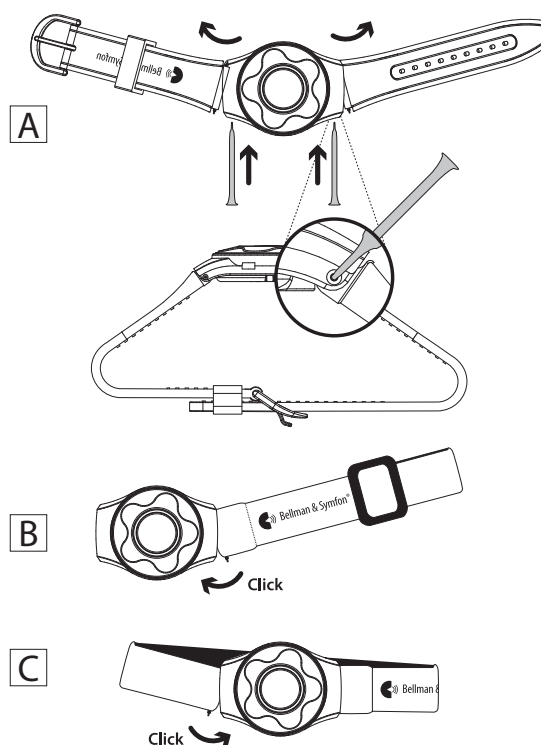

# Appendix

## Fördjupning






### Inställningar

För normal användning behöver man inte göra några inställningar. Om man av någon anledning vill ändra på något finns beskrivningar nedan.

#### Radionyckel

För att kunna använda flera Bellman Visit 868-system i närheten av varandra utan att störa varandra, kan man ställa in olika Radionycklar på de olika systemen. Från fabrik är alla enheter i Bellman Visit 868-systemet inställda på samma Radionyckel, nämligen Radionyckel 0. Detta innebär att alla Radionyckelomkopplare på sändarna är ställda i läge OFF.

För att ändra Radionyckel på Bellman Visit 868 Armbandsmottagare behövs även en Bellman Visit 868-sändare. Gör så här för att byta Radionyckel:

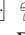- Ställ in en valfri Bellman Visit 868-sändare på önskad Radionyckel genom att ändra dess Radionyckelomkopplare till önskad Radionyckel. För vidare information se sändarens bruksanvisning.
- Håll Funktionsknappen (1) på Bellman Visit 868 Armbandsmottagare intryckt till dess att den gröna  (3) och den gula  (4) lysdioden blinkar växelvis. Släpp knappen och Bellman Visit 868 Armbandsmottagare är nu i programmeringsläge i cirka 30 sekunder.
- Tryck på Bellman Visit 868-sändarens testknapp.
- Lysdioderna    (2, 3, 4 och 5) kommer nu att blinka fem gånger efter varandra i snabb följd för att indikera ett lyckat Radionyckelbyte.
- Efter bytet av Radionyckel återgår Bellman Visit 868 Armbandsmottagare automatiskt till normalläge.

**Viktigt:**

Alla Bellman Visit 868-produkter i samma system måste vara inställda på samma Radionyckel för att fungera tillsammans.

### Signalmönster

Ett Signalmönster är benämningen på det sätt som en mottagare i Bellman Visit 868-systemet indikerar en aktivering. Genom att ändra sändarnas Signalomkopplare ändrar man Signalmönstret som mottagarna visar då sändaren aktiveras.

Observera att Armbandsmottagaren varken avger ljud eller blyxt.

## Armbandsmottagare

### Signalmönster för Bellman Visit 868-systemet

Typ	Lysdiodmönster	Ljud	Vibration	Blixt
Grön 1	Grön lyser konstant	1 x Ding dong, Baston	Enstaka	Ja
Grön 2	Grön blinkar två gånger åt gången	2 x Ding dong, Baston	Enstaka	Ja
Grön 3	Grön blinkar tre gånger åt gången	1 x Ding dong, Diskantton	Enstaka	Ja
Grön 4	Grön blinkar konstant	2 x Ding dong, Diskantton	Enstaka	Ja
Gul 1	Gul lyser konstant	1 x Ring, Baston	Kort	Ja
Gul 2	Gul blinkar två gånger åt gången	2 x Ring Ring, Baston	Kort	Ja
Gul 3	Gul blinkar tre gånger åt gången	1 x Ring, Diskantton	Kort	Ja
Gul 4	Gul blinkar konstant	2 x Ring Ring, Diskantton	Kort	Ja
Orange 1	Orange lyser konstant	Baby	Hastig	Ja
Orange 2	Orange blinkar två gånger åt gången	Baby	Hastig	Ja
Orange 3	Orange blinkar tre gånger åt gången	Baby	Hastig	Ja
Orange 4	Orange blinkar konstant	Baby	Hastig	Ja
VMA	Röd och Orange blinkar alternerande konstant	VMA konstant	Lång	Ja
Brandlarm	Röd blinkar konstant	Brandlarm konstant	Lång	Ja
Brandlarm lågt batteri	Röd blinkar var femte sekund	Nej	Nej	Nej
Brandlarm tomt batteri	Röd blinkar var femte sekund	Brandlarm en kort	En kort	Ja

Observera att Armbandsmottagaren varken avger ljud eller blixt.

### Avancerad programmering





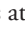
Avancerad programmering ger extra möjligheter för dem som önskar specialanpassa sin Bellman Visit 868 Armbandsmottagare.

Tanken är att man skall kunna välja ett helt unikt signalmönster som är knutet till en aktivering från en specifik ingång på en speciell Bellman Visit 868-sändare. Funktionen fungerar oberoende av Radionyckel-inställningar på de apparater som programmeras. Observera att funktionen, av säkerhetsskäl, inte fungerar med Bellman Visit 868 Brandvarnare, BE1480.

Med hjälp av Avancerad programmering av Bellman Visit 868 Armbands-mottagare, justerar man den så att dess Signalmönster helt motsvarar vad den skall användas till. Man kan med andra ord programmera ett helt eget signalmönster som t.ex. visar en orange fast lysande lysdiod och en konstant vibration.

För att kunna göra inställningen måste den Bellman Visit 868-sändare som Bellman Visit 868 Armbands-mottagare skall anpassas till, finnas tillgänglig. Sändaren måste också vara kopplad så att den kan aktiveras på det sätt den är ämnad att användas.



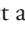


Gör så här:

1. Håll Funktionsknappen (1) på Bellman Visit 868 Armbandsmottagare intryckt till dess att den gröna  (3) och den gula  (4) lysdioden blinkar växelvis. Bellman Visit 868 Armbandsmottagare är nu i programmeringsläge i cirka 30 sekunder.
2. Håll Funktionsknappen (1) intryckt samtidigt som den aktuella Bellman Visit 868-sändaren aktiveras på precis det sätt som den är ämnad att användas. Den gula lysdioden  (6) tänds. Observera att alla ingångar är individuella, så det fungerar inte att använda testknappen på en Bellman Visit 868 Telefonsändare vars telefoningång skall visa det aktuella mönstret.
3. Stega mellan de olika lysdiodalternativen genom att trycka kort på Funktionsknappen (1). Välj aktuell indikering genom att hålla Funktionsknappen (1) intryckt till dess att Lysdioden  (6) slocknar och börjar lysa gult med ett fast sken igen.
4. Stega mellan de olika vibrationsalternativen genom att trycka kort på Funktionsknappen (1). Välj aktuell indikering genom att hålla Funktionsknappen (1) intryckt till dess att Lysdioden  (6) slocknar och börjar lysa gult med ett fast sken igen.
5. Bellman Visit 868 Armbandsmottagare visar nu det inprogrammerade sättet att indikera. Avsluta visningen med en kort tryckning på Funktionsknappen (1).
6. Efter en kort stund återgår Bellman Visit 868 Armbandsmottagare automatiskt till normalläge.

Denna funktion är helt nödvändig i de fall man önskar att en sändare skall fungera på ett speciellt sätt mot en specifik mottagare.

### Återställning av Avancerad programmering

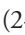Om Bellman Visit 868 Armbandsmottagare behöver återställas efter att ha varit programmerad med Avancerad programmering görs detta enkelt.




1. Håll Funktionsknappen (1) på Bellman Visit 868 Armbandsmottagare intryckt till dess att den gröna  (3) och den gula  (4) lysdioden blinkar växelvis. Bellman Visit 868 Armbandsmottagare är nu i programmeringsläge i cirka 30 sekunder.
2. Tryck på Funktionsknappen (1) tre gånger i snabb följd.
3. Alla Lysdioder    (2-5) lyser med fast sken i några sekunder.
4. Alla Avancerade programmeringar har nu raderats och Bellman Visit 868 Armbandsmottagare återgår automatiskt till normalläge.

### Test

Det är enkelt att testa Bellman Visit 868 Armbandsmottagare, BE1560. Om Armbandsmottagaren inte fungerar enligt beskrivningen nedan kan man kontrollera vidare under Appendix/Fördjupning/Felsökning/Felsökningsguide.

#### Hur man testar

För att testa radiomottagningen på Bellman Visit 868 Armbands-mottagare, BE1560, krävs en sändare i Bellman Visit 868-systemet som är inställd med samma Radionyckel som Armbandsmottagare.

- Tryck på sändarens testknapp.
- Bellman Visit 868 Armbandsmottagare kommer att indikera genom att:
  - o Tända den av lysdioderna    (2-5) som antingen sändaren är inställd på att indikera med eller som Bellman Visit 868 Armbandsmottagare har programmerats till med Avancerad Programmering.
  - o Vibrera som antingen sändaren är inställd på att indikera eller som Bellman Visit 868 Armbandsmottagare har programmerats till med Avancerad Programmering.




## Armbandsmottagare

### Felsökning

Det finns en hel del man kan kontrollera själv innan man sänder en produkt för reparation.

#### Felsökningsguide

Symptom	Åtgärd
Ingen ting händer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att batterieliminatorn är korrekt ansluten och att den gröna lysdioden (10) på Laddaren lyser.</li> <li>Ladda eller byt batteriet i Armbandsmottagaren. Använd endast ett uppladdningsbart NiMh-batteri av typ VARTA V40H. Om batteriet är helt tomt kan du ändå använda Armbandsmottagaren genom att sätta den i Laddaren. För att använda Armbandsmottagaren löst igen bör den laddas i cirka två timmar.</li> <li>Kontrollera att Armbandsmottagaren är korrekt placerad i Laddaren för Armbandsmottagaren samt att lysdioden (12) lyser grönt.</li> </ul>
Det går inte att ladda Armbandsmottagaren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att batterieliminatorn är korrekt ansluten och att de gröna lysdiодerna (10 och 12) på Laddaren lyser</li> <li>Ladda eller byt batterierna på Laddaren för Armbandsmottagaren. Använd endast uppladdningsbara NiMh-batterier av typ TMK AAA60CT.</li> </ul>
Inget händer när batterieliminatorn kopplas bort. Testknappen (11) fungerar heller inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ladda eller byt batterierna. Använd endast uppladdningsbara NiMh-batterier av typ TMK AAA60CT.</li> </ul>
Lysdioden  (6) på Armbandsmottagaren blinkar gult!	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ladda eller byt batteriet i Armbandsmottagaren. Använd endast ett uppladdningsbart NiMh-batteri av typ VARTA V40H. Om batteriet är helt tomt kan du ändå använda Armbandsmottagaren genom att sätta den i Laddaren. För att använda Armbandsmottagaren löst igen bör den laddas i cirka två timmar.</li> </ul>
Sängvibratorn vibrerar inte när Armbandsmottagaren aktiveras.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att sängvibratorn är riktigt ansluten till Laddaren för Armbandsmottagare.</li> <li>Kontrollera att Armbandsmottagaren är korrekt isatt i Laddaren för Armbandsmottagare samt att lysdioden (12) lyser grönt.</li> </ul>
Armbandsmottagaren tar inte emot signalerna från Bellman Visit 868 Sändarna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera batteriet i Sändarna.</li> <li>Kontrollera att Armbandsmottagaren inte är för långt bort genom att placera den närmare sändaren.</li> <li>Kontrollera att Bellman Visit 868 Armbandsmottagare är inställd på samma Radionyckel som övriga enheter i det aktuella Bellman Visit 868-systemet. Se vidare under Appendix/Fördjupning/Inställningar/Radionyckel.</li> </ul>
Armbandsmottagaren signalerar fel hur man än ställer om sändaren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Radera avancerad programmering, se Appendix/Fördjupning/Återställning av Avancerad programmering.</li> </ul>
Mottagaren signalerar utan att någon sändare aktiverats.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Byt Radionyckel på samtliga enheter i det aktuella Bellman Visit 868-systemet. Det finns troligen ett annat system i närheten med samma Radionyckel.</li> </ul>