

MADE IN
EUROPE



Vores produkter og
råvarer er produceret i
Europa

Vælg kvalitet, spar
penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning


14_20230626_DK

Travel Master

Det perfekte vendesystem til rejsen



Travel Master

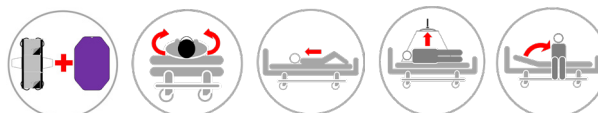

Varenr.

MC 002-1328

MC 002-1331

HMI nr.

69437

50301

Navn - Størrelse

Travel Master Top

Travel Master Bund

UDI-DI/GTIN

5744001971987

5744001971994

Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1



ISO 12 31 03 20

The Original Nordic
Human Handling Concept



Developed &
Manufactured by:



Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:

Let og mobilt vendesystem til nedsættelse af friktion under bækkenet ved vendinger og forflytning til sengekant hos brugere med nedsat fysisk funktion.

Der er kun anti-skrid i den ene side, hvorfor den skal monteres korrekt i sengen for at undgå fald.

Advarsel:

Placer altid Travel Master Bund med det grå anti-skrid ud til den side, som der stiges ud af sengen til. Dette for at undgå at glide på gulvet.

Anvendelse af produktet:

Placer de to dele af Travel Master i sengen. De to dele glider mod hinanden ved vendinger og forflytning i seng. Travel Master er let og mobilt, hvorfor det er optimalt fx ved rejser, da det er let at pakke sammen og kun fylder lidt.

Risikovurdering:

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

Levetid:

Produktet forventes at have en levetid på 1-3 år ved normal slitage og vask. Produktets levetid afhænger af brug, belastning samt hvordan og hvor ofte produktet vaskes.

Produkter, der ikke længere yder tilstrækkelig friktionsnedsættelse til en sundhedsmæssigt forsvarlig forflytning for både hjælper og bruger, bør kasseres. Produkter bør jævnligt efterses, og hvis defekte syninger eller brudte overflader findes, bør produktet kasseres.

Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Utsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:

Utsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.



Brugervejledning - Travel Master

Placering af Travel Master:



1. Travel Master Bund placeres på sengens midte. Vær opmærksom på, at anti-skridstykket skal vende ud mod sengekanten. Dette for at bruger ikke glider ud af sengen.



2. Travel Master Top placeres oven på bundstykket med den bredeste side udaf.



3. Alternativt placeres den omkring brugeren med etiketten "Denne side på" op mod ryggen.

Ind i seng med Travel Master:



4. Brugeren sætter sig med Travel Master Top på sengekanten, ovenpå Travel Master Bunden, hvor der er antiskrid.



5. Brugeren drejer sig ind i sengen ved brug af den nedsatte friktion mellem de 2 nylonflader. Haves en elevations-/plejeseng kan knæ-knæk og hovedgærde eleveres.



6. Når brugeren ligger ned rettes den evt. foldede Travel Master ud.

Vending og op at sidde på sengekant med Travel Master:



7. Udfør vending eller tilpasning af stillingen ved at bruger støder fra med fødderne på lagenet. Understøt evt. vendingen ved at benytte sengehesten.



8. Når bruger skal ud af sengen igen, kan Travel Master Top foldes omkring brugeren. Knæ-knæket og hovedgærdet kan eleveres, hvis muligt, og brugeren drejer sig til siddende stilling.



9. Antiskridkanten på Travel Master Bund sikrer, at brugeren bliver siddende sikkert på sengekanten.

Brugervejledning - Travel Master

Tekniske specifikationer

Materialer:

Bomuld, polyester, polyamide, nylon

ISO klassificering:

ISO 12952-1:2015

Tekstiler - Vurdering af sengeudstyrs antændelighed - Del 1: glødende cigaret.

Varenummer - Navn:	Størrelse:	Håndtag:	Max. Brugervægt:
MC 002-1328 Travel Master Top	L 70 x B 90 cm	2	200 kg
MC 002-1331 Travel Master Bund	L 40 x B 85 cm	-	200 kg

ADVARSLER



Efterlad aldrig bruger på produktet på sengekanten.



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.



Sørg altid for, at brugeren ikke hænger fast i stropperne.



Efterlad aldrig en bruger liggende på produktet, mens dette er koblet på en lift.



Relevant? Må ikke bruges som liftsejl – kan med fordel kombineres med lift til fx. vendinger i seng.



Sørg for, at alle relevante bremsere er låst, inden forflytning foretages.



CE-mærkning:

Produktet er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



Brugervægt:

Anbefalet max. brugervægt: 160 kg.



Vask:

Travel Master Top kan vaskes i vaskemaskine ved max. 85 °C. Lavere vaskegrader vil forlænge levetiden væsentligt.



Vask:

Travel Master Bund kan vaskes i vaskemaskine ved max. 60 °C. Lavere vaskegrader vil forlænge levetiden væsentligt.



Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



Skyllemiddel:

Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideegenskaberne væsentligt.



Tørretumbling:

Dette produkt må kun tørretumbles skånsomt og ved max. 40 °C. Lufttørring forlænger levetiden væsentligt.



Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



Strygning:

Tåler ikke strygning



Kemisk rengøring:

Tåler ikke rengøring.



Blegning:

Tåler ikke blegning.



Desinficering:

Dette produkt tåler overføring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.



Eftersyn:

Produktet skal kontrolleres jævnlig og gerne inden hver brug. Kontroller, at der ikke er skader på stof, stropper, sømme mm. Har produktet høj friktion eller på anden vis er i stykker, skal produktet kasseres.



Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

Find os på:



master-care.dk

