



Vejledning til Coil

# At Max-lyslupper

Tillykke med anskaffelsen af Deres nye At Max-lyslup fra Coil. Vi håber De må få stor gavn af den.

## Ibrugtagning

Deres At Max-lyslup har en indbygget lyskilde, som drives af to batterier i størrelse AA (også kaldet LR-6). Batterirummet findes i håndtaget, og åbnes ved at trykke på det hvide stykke som vist her til højre.

Husk at vende batterierne som vist til højre: Batteriet til venstre har pluspolen (den med den lille knop) væk fra håndtaget, mens batteriet til højre vender den anden vej, med pluspol-knoppen *ind* mod håndtaget.

Der er en lille tegning der hvor man trykker for at åbne batterirummet, som viser hvordan batterierne skal vende.

Luk derefter låget på batterirummet, til det "klikker" på plads.



Tryk her, så kan batterirummet åbnes

## Daglig brug

Deres At Max bruges som omtrent enhver anden lup; hold den over det, De ønsker at se/læse på, og se gennem linsen. Det indbyggede lys tændes helt automatisk, så snart De griber om håndtaget, og slukker et øjeblik efter De slipper håndtaget igen – se illustrationerne nedenfor. Der er således ingen tænd/sluk-knap at bekymre sig om!



Lyset i At Max-luppen tænder helt af sig selv, så snart man griber om luppens håndtag...



... og slukker også automatisk, et øjeblik efter man har sluppet håndtaget.