



Dansk Høreteknik

...lyd giver liv!

Brugervejledning

AP40

Telefon med ekstra høj styrke, kraftig telespole og blitzlys



Indledning

Tak fordi du valgte at købe en AP40 telefon. Vi håber, at du bliver glad for telefonen. Vi anbefaler, at du læser hele brugervejledningen før installation og ibrugtagning

Advarsel!

Denne telefon er beregnet til personer med nedsat hørelse og er udstyret med en volumenkontrol til individuel indstilling. Det er vigtigt, at telefonen er sat på det laveste niveau, således at forskellige brugere kan vælge deres egen styrke. Det er vigtigt, at alle brugere af telefonen er bekendt hermed.

OBS!

For at minimere risiko for at telefonen forstyrres ved lynnedslag, bør telefonen slukkes ved voldsomme uvejr.

Indholdsfortegnelse

Installation af telefonen

Oversigt	side	4
Tilslutning af telefonen.....	side	6
Batterier	side	7
Ringsignaler og forskellige kombinationer	side	7
Indstilling af ringestyrke	side	8
Tone/pulsvalg (T/P)	side	8
TBR.....	side	9
Ventende meddelelse.....	side	9
Vægmontering	side	9

Anvendelse af telefonen

Teleslynge	side	9
Besvar indgående samtaler.....	side	10
Styrke- og tonekontrol (indgående lyd).....	side	10
Foretag en opringning	side	11
Opringning med hovedsæt	side	11
Håndfri opringning / anvend højtaleren	side	11
Genopkald	side	11
Anvendelse af knapperne med symbolerne * og #	side	12
Mikrofonafbryder - Mute	side	12
Indtast hurtigvalgs- og kortnumre	side	12
Ring på et hurtigvalgs- eller kortnummer.....	side	13


Tillbehør

Telefonrør tilpasset personer med konduktivt høretab	side	13
Vibrator	side	13
Hovedsæt	side	13
Batterier	side	13


Øvrigt

Hvis telefonen ikke fungerer	side	14
Drift og vedligehold.....	side	14
Miljø og genbrug.....	side	15
Borelære.....	side	15
Garanti.....	side	16


Installation af telefonen

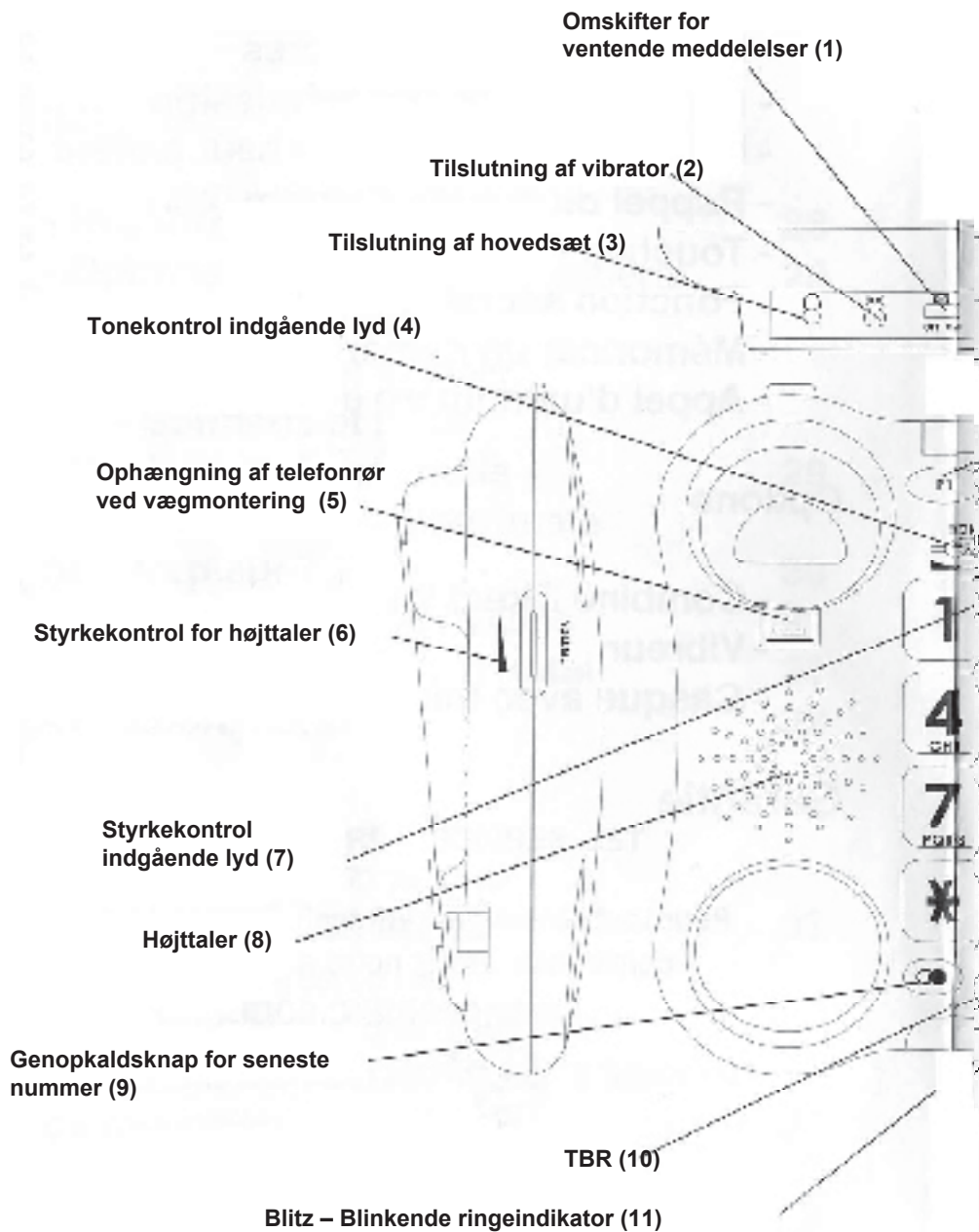

Installation af telefonen

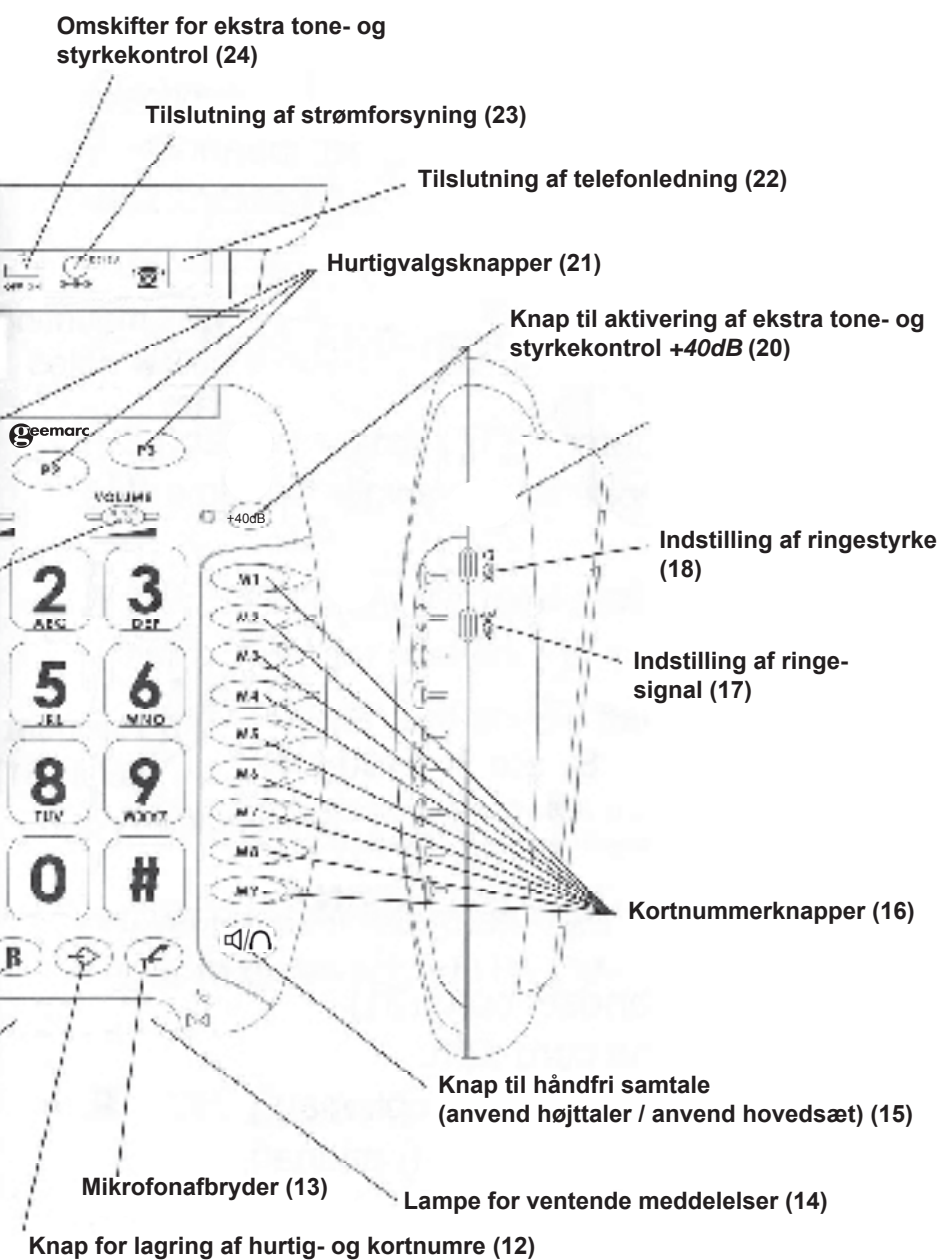

Installation af telefonen

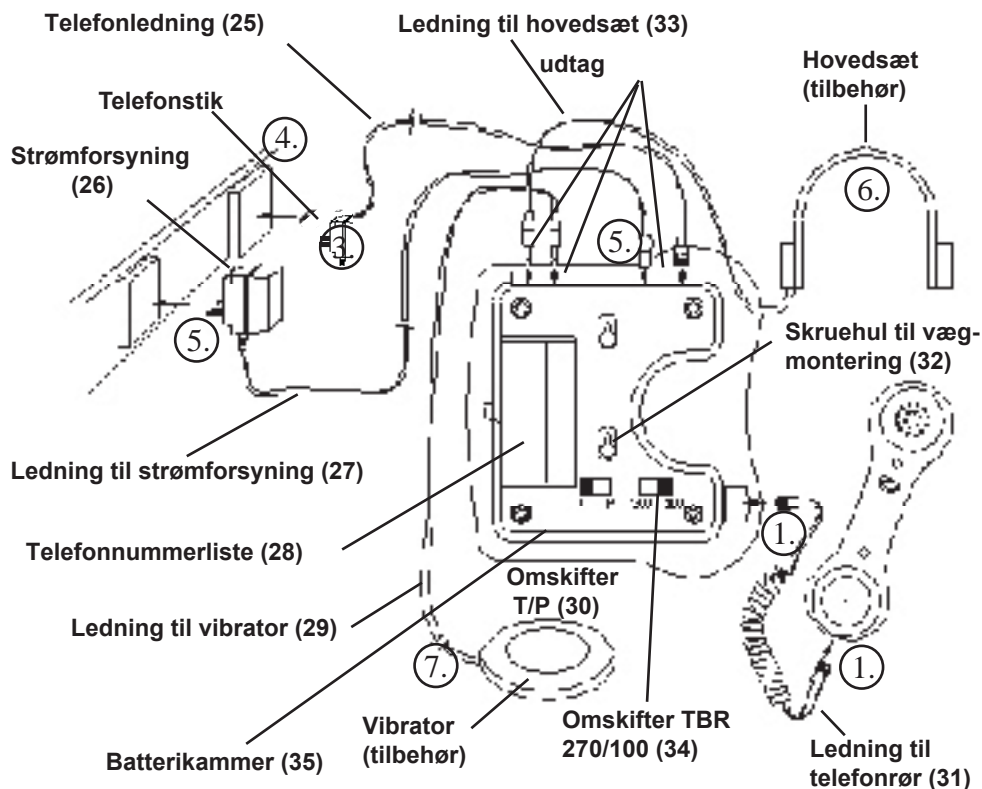

1. Tilslut røret (31) til telefonen
2. Tilslut telefonledningen (25) til telefonen
3. Tilslut den anden ende af telefonledningen til telefonstikket (3).
4. Tilslut telefonstikket til telefonvægstikket (4).
OBS! Telefonstikket skal sidde yderst, ovenpå andet produkt som f.eks. modem, telefonsvarer eller lignende
5. Tilslut strømforsyningen (26) til telefonen og stikkontakten
Tilslut eventuelt tilbehør; hovedsæt (6), vibrator (7) til telefonen, se side 13.

Installation af telefonen

Batterier


For at ringesignalet fungerer - selv ved strømafbrydelse - kræves 4 stk. AAA/LR03 alkaline-batterier (leveres ikke med ved køb af telefonen).

OBS!

Tag først strømforsyningen ud af stikkontakten inden du sætter batterier i.

Åbn batterilåget (35) ved forsigtigt at trykke på "kliklåsen", f.eks. med en lille skruetrækker. Sæt batterierne i og sæt låget på igen.

Læs mere om batterier i afsnittet *Tilbehør* under rubrikken *Batterier*, side 13.

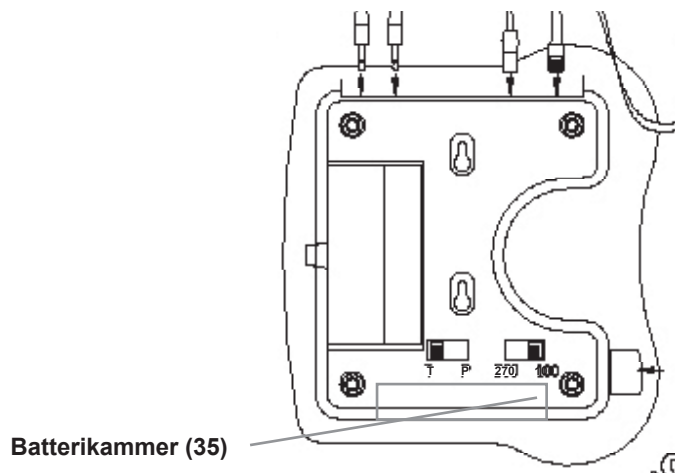

Ringesignaler og forskellige kombinationer


På højre side af telefonen sidder en knap til indstilling af ringesignal (17). Der er 3 forskellige valgmuligheder: afbrudt - lav og høj

- 0 Ringesignal
- ⓪ Ringesignal og vibrator (tilbehør)
- Ⓜ Ringesignal og blitzlys

Installation af telefonen

Indstilling af ringestyrke


Ringestyrken kan ændres efter behov med ringestyrkeknappen på højre side af telefonen: Afbrudt (Off), lav (Low) og høj (Hi)

 : Off,  : Low,  : Hi

Telefonens fabriksindstilling er høj med melodi nr. 6.

	Lav	Mellem	Høj
Melodi Nr 1	1	2	3
Melodi Nr 2	4	5	6 (fabriksindstilling)
Melodi Nr 3	7	8	9

Melodien kan ændres på følgende måde:

- Løft røret
- Tryk på knappen med symbolet  (12)
- Tryk på knappen med symbolet #
- Vælg melodi ved at trykke på en af tasterne fra nr. 1 til 9

Den valgte melodi aktiveres ved næste indgående samtale.

OBS!

For at ringesignalet virker ved strømafbrydelse kræves 4 stk. AAA/LR03 alkaline batterier (se side 7).

Tone-/pulsval (T/P)

Tone-/pulsvalg (30), se side 6, er fabriksindstillet på tonevalg (T). Hvis du ikke hører klartonen, når du forsøger at ringe op, er telefonen formodentlig tilsluttet en gammel telefonpulslinie. Sker dette skal Tone/Puls knappen indstilles på Puls. (P)


Installation af telefonen

TBR

TBR (34), se side 6, skal være indstillet på 100 ms (fabriksindstilling).

Ventende meddelelser

Denne funktion anvendes, når telefonen er tilsluttet f.eks. en moderne hotelomstilling.

Vælg stilling *ON* på knappen med symbolet  (1) placeret øverst, se side 4 for at aktivere funktionen *ventende meddelelser*.

Den røde lampe (14), som sidder i ringeindikatoren (11), se side 4-5, tændes, når du har en ventende meddelelse.

Vægmontering

Hvis du ønsker at montere telefonen på en væg, må du først justere ophængning af telefonrøret.

Tag fat i det sorte plaststykke (5), se side 4, som sidder i underkanten af den øverste fordybning til telefonrøret, og drej den en kvart omgang. På denne måde holdes røret på plads, når telefonen hænger på væggen.

Bor to huller i væggen med 80 mm afstand (anvend målene på side 15 af denne brugervejledning). Skru skruerne i (og eventuelle plugs).

OBS!

Skru ikke skruerne helt i bund, men 6 til 7 mm fra væggen. Hæng telefonen op på skruerne og træk telefonen ned for at sikre ophængningen.

Teleslynge

Hvis du anvender høreapparat, stil da dit høreapparat på T for teleslynge for at udnytte telefonens indbyggede teleslynge.



Anvendelse af telefonen

Besvar indgående samtaler

Med telefonrør

Når telefonen ringer, løft røret. Når samtalen er slut, lægges røret på.

Med hovedsæt (tilbehør, se side 13)


Hvis du vil anvende hovedsæt, når telefonen ringer, tryk på tasten med symbolet  (15) for at svare. Tryk på tasten med symbolet  igen for at afslutte samtalen.



Styrke- og tonekontrol (indgående lyd)

Du kan øge styrken og justere tonen på den indgående lyd efter dine egne behov. Knappen *+40dB (20)*, se side 5, anvendes for at aktivere hhv. de-aktivere indstillingerne under samtalen. Når indstillingen er aktiveret, lyser den røde lampe ved knappen *+40dB (20)*.

Justering af styrke og tone

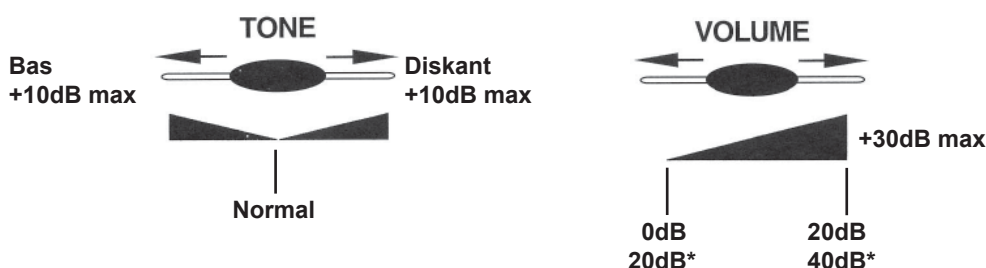Kontrollér, at den røde lampe ved siden af knappen *+40dB (20)* lyser. Juster tone og styrke med knapperne (4) og (7).



OBS! Når omskifteren med symbolet  (24), som sidder øverst på telefonen, se side 5, er i stilling *ON*, aktiveres de individuelle indstillinger, hver gang nogen anvender telefonen. Når omskifteren med symbolet  er i stilling *OFF*, skal de individuelle indstillinger aktiveres ved at trykke på tasten *+40dB (20)* på forsiden af telefonen.



Anvendelse af telefonen

Foretag en opringning



Med telefonrør

1. Løft røret og vælg det ønskede nummer
2. Efter afsluttet telefonsamtale lægges røret på



Med hovedsæt (tilbehør, se side 13)

1. Tryk på knappen med symbolet  (15), se side 5, og vælg det ønskede nummer
2. Tryk på knappen med symbolet  igen for at afslutte samtalen


Opringning med hovedsæt

Tryk på knappen med symbolet  (15), se side 5, og vælg det ønskede nummer. Tryk på knappen med symbolet , hvis ingen svarer eller for at afslutte samtalen.


Håndfri opringning / anvend højttaleren

Tryk på knappen med symbolet  (15) for at aktivere højttaleren. Tal med almindelig styrke. Højttalerens styrke kan justeres med knappen *VOLUME*, som sidder på venstre side, mens samtalen er i gang. Tryk på knappen med symbolet  igen for at afslutte samtalen.

Løft røret for at de-aktivere den håndfri funktion, mens samtalen er i gang.

Tryk på knappen med symbolet  (15) for at aktivere den håndfri funktion, mens samtalen er i gang, læg røret på og fortsæt samtalen.

Genopkald


Løft røret (eller anvend højttalere/hovedsæt som beskrevet herover), og tryk på knappen med symbolet  (9), så ringes det senest anvendte telefonnummer op (fungerer ikke for hurtigvalgs- og kortnumre).

Anvendelse af telefonen

Anvendelse af knapperne med symbolerne * og #

* og # er serviceknapper, som kan anvendes i nyere digitale telefon-systemer. Kontakt venligst din telefonoperatør for yderligere information.

Mikrofonafbryder - Mute



Hvis du vil sige noget til en person ved siden af dig, som du ikke ønsker den person, som du taler i telefon med, skal høre, holder du tasten med symbolet  (13) nede. Du hører stadig, hvad personen du taler med siger, men denne kan ikke høre, hvad du siger. Slip tasten for at gå tilbage til normal telefonsamtale.

Indtast hurtigvalgs- og kortnumre

Telefonen kan lagre 12 telefonnumre, heraf 3 hurtigvalgsnumre. Brug max 21 cifre for hvert telefonnummer.

De 3 hurtigvalgsknapper er ekstra let genkendelige med de tydelige knapper P1, P2 og P3 (21) placeret øvert på telefonen. Vi anbefaler, at du indlagrer disse numre, samtidig med, at du installerer telefonen. Disse tre knapper er velgnede til brug for nødkald, hjemmepleje og lignende.

Sådan indtaster du hurtigvalgs- og kortnummerknapper

- Løft røret (eller anvend højttalere/hovedsæt som beskrevet på side 11)
- Tryk på knappen med symbolet  (12)
- Vælg og tryk på en af knapperne P1, P2, P3 (21) eller en af knapperne M1, M2, ..., M9 (16)
- Indtast nummeret
- Tryk på knappen med symbolet  igen
- Nummeret er nu lagret på den knap, du har valgt

OBS! Hvis du kobler telefonen fra - altså trækker stikkene ud - forsvinder de lagrede data i løbet af et par timer. Hvis du vil ændre et telefonnummer, forsvinder det gamle automatisk, når du indtaster et nyt nummer, som beskrevet ovenfor.

Anvendelse af telefonen

Ring på et hurtigvalgs- eller kortnummer

Løft telefonrøret (eller anvend højttaler hhv. hovedsæt som beskrevet på side 11) og tryk på en af hurtigvalgsknapperne P1, P2, P3 (21) eller kortnummerknapperne M1, M2, ..., M9 (16). Telefonen vælger så det nummer, som er gemt på den respektive tast.

Anvend telefonregistret, som findes under telefonen, for at notere de gemte numre.

Tilbehør

Telefonrør tilpasset personer med konduktivt høretab

Hvis du har et konduktivt høretab, kan du udstyre telefonen med et specielt tilpasset telefonrør, **Direct Vibe®**. Placer røret foran eller under dit øre - alternativt bagved - og find det område, som passer dig bedst. Hvis du er normalthørende, kan dette rør anvendes som et almindeligt telefonrør.

Vibrator

Telefonen kan forsynes med en vibrator (7.), se side 6.

Når telefonen ringer, aktiveres vibratoren automatisk, hvis telefonen indstilles på *ringesignal og vibrator* ((O)), se side 4-7.

Hovedsæt

Telefonen kan udstyres med hovedsæt med mikrofon (6.), se side 6. Når der anvendes hovedsæt, aktiveres højttalertelefonen og højttaler lyden (6), se side 4, bør sættes på *svag*. Tal i mikrofonen på sædvanlig vis.

Batterier

Batteri, alkalisk, AAA/LR03 1,5V. 4 stk.

Hvis telefonen ikke fungerer

- Kontrollér, at alle stik er sat rigtigt i. Det er særligt vigtigt, at telefonrørets modularkontakter er trykket rigtigt i, ellers er der risiko for, at den du taler med, ikke kan høre, hvad du siger. Test ved at trække i ledningen, den må ikke løsne sig.
- Kontroller omskifterknapperne på telefonens underside:
 - TBR (34) skal være indstillet på 100 (se side 6 og 9)
 - Tone- og pulsvælger (30) skal være indstillet på T (tonevalg) hvis telefonen er tilsluttet en moderne telefonlinie (se side 6 og 8)
- Du kan kun ændre tone og styrke, når den røde lampe ved knappen +40dB (20) på telefonens overside er tændt (se side 5)
- Kontakt venligst forhandleren hvis ovenstående forslag ikke løser problemet

OBS! Produktgarantien omfatter ikke fejl, som er opstået ved indgreb i produktet, uforsigtighed, forkert tilslutning og montering eller lignende, se side 16.


Drift og vedligehold

Telefonen kræver normalt ikke vedligehold. Hvis den bliver beskidt, tør da telefonen med en let fugtig klud. Anvend ikke opløsningsmidler eller stærke rengøringsmidler. Stil ikke telefonen, hvor den udsættes for stærkt sollys, varme eller fugt. Pas på, at du ikke taber telefonen på gulvet.

Øvrigt

Miljø og genbrug

Afløber brugte batterier som krævet i gældende miljøforskrifter. Hvis du følger ovenstående anvisning medvirker du til at skabe et bedre miljø.

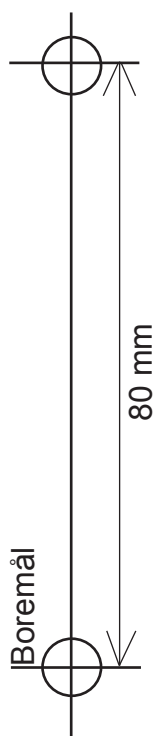

Garanti

Dansk Høreteknik HJM ApS yder til vores kunder 2 års reklamationsret efter købeloven fra leveringstidspunktet. Såfremt eventuelle fejl ikke skyldes nedestående forhold, vil reparationer eller ombytning i reklamationsperioden være uden beregning. Vi gør opmærksom på, at kvittering er gyldigt garantibevis.

Reklamationsretten gælder ikke ved batterifejl, misbrug- eller uforsigtig anvendelse af produktet, tordennejr eller anden force majeure samt øvrige forhold, der ikke skyldes oprindelige fejl ved produktet.

Dansk Høreteknik HJM ApS yder ikke garanti, såfremt der er foretaget fejlagtig tilslutning/montering eller u hensigtsmæssig opbevaring eller øvrige forhold, som kan tilregnes uautoriseret anvendelse, reparation eller ændring af produktet.

Skulle der opstå et problem med produktet, anbefaler vi at De gennemgår fejlsøgningskemaet, hvis et sådant findes i brugervejledningen til Deres produkt. Kan problemet ikke løses ved hjælp af fejlsøgningskemaet tilråder vi, at De henvender Dem til det sted, hvorfra De har fået produktet leveret. Forhandleren vil da kunne hjælpe Dem med reparationsproceduren.

Ved indsendelse direkte til Dansk Høreteknik HJM ApS gør vi opmærksom på, at kunden afholder alle indleveringsomkostninger, mens returneringsomkostninger afholdes af Dansk Høreteknik HJM ApS. For at nedsætte reparationstiden, skal produkter, som indsendes til Dansk Høreteknik HJM ApS, ledsages af en præcis fejlbeskrivelse (få eventuel hjælp hos forhandleren), navn, adresse, telefonnummer samt en kopi af Deres faktura.

Der henvises i øvrigt til vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser, som kan rekvireres ved henvendelse på telefon 4717 5598.

Dansk Høreteknik HJM ApS
Østervej 6
Postboks 114
3650 Ølstykke

Tlf.: 4717 5598
Fax: 4717 5588

dh-as@dh-as.dk
www.dh-as.dk

Forhandler