



Zitzi
DELFI PRO

Indholdsfortegnelse

Udgave 1 2009 06 01 DK1301-1

Værktøj	2:1	Fodstøtte	8:1
Montering af ryg	2:2	Justerbar fodstøtte	8:2
Sæde justering	3:1	Delt fodstøtte, justerbar	8:3
Hofte-vinkel justering	4:1	Lægstøtte	9:1
Justering af ryghøjden	4:2	Ankelbespænding	9:2
Justerbar ryg	4:3	Hovedstøtte	10
Bækkenstyr	5:1	Legebøjle	11:1
Hoftebælte	6:1	Kaleche	11:2
Montering af Support serien	6:2	Montering på stel	12
Armlæn	7:1	Service	13:1
Albuestop	7:2	Tekniske data	14
Bord	7:3		



2:1 Værktøj

Unbrakonøglen (4mm) er placeret på toppen af ryggen. Den bruges til at foretage justeringer.



2:2 Montering af ryg

 = Justeringskruer 

Ryggen er monteret med 4 unbrakoskruer. Fastgør rygprofilen ved at spænde unbrakoskruerne. Ryggen er automatisk korrekt placeret.

3:1 Sædejustering

Sædedybde, benlængde forskel og abduktion / adduktion af benene kan nemt justeres. Start med at fjerne sædebetrækket for, at komme til justerings skrueerne.

Vær opmærksom på – SKRUE ERNE SKAL IKKE SKRUES HELT UD, de skal blot løsnes.



3.1.1 Justering af sædebredde

For at øge eller reducere sædets bredde, skal bendelene justeres.

- Løsen de to skrue med unbrakonøglen.
 - Flyt bendelen til det ønskede "spor".
 - Spænd skrueerne når den ønskede placering er fundet.
- (Start placering for bendelen er "spor" 1)



3.1.2 Benlængde forskelle

Løsen de to skruer med unbrakonøglen og flyt bendelen til det ønskede "spor". Spænd skrueerne, når den ønskede placering er fundet.




3.1.3 Justering af sædebrønd

Når man justerer sædets dybde, skal sædebrønden også justeres.

Eksempel - Hvis sædets dybde justeres til 23 cm (grå område), skal sædebrønden også være i det grå område for, at have en korrekt størrelse sædebrønd.

Løsen skruen med unbrakonøglen og flyt bendelen til det ønskede "spor". Spænd skrueerne, når den ønskede placering er fundet.

 = Justeringsskruer 

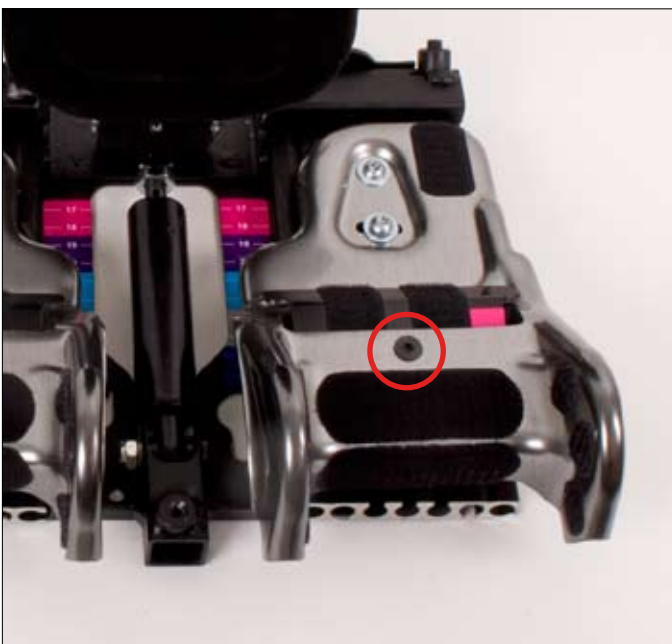

3.1.4 Abduktion og adduktion – skrue B

Løsen skruen med unbrakonøglen og flyt bendelen til den ønskede placering. Spænd skruen, når den ønskede placering er fundet.

 = Justeringsskruer 



Neutral




Adduktion




Abduktion

4:1 Justering af hoftevinkel

For at indstille hoftevinklen, træk håndtaget lige ud og op. For at justere vinklen på ryggen, skub håndtaget nedad og placer det i den ønskede position. Når den ønskede position er opnået, slip håndtaget og sæt det i "børnesikring".

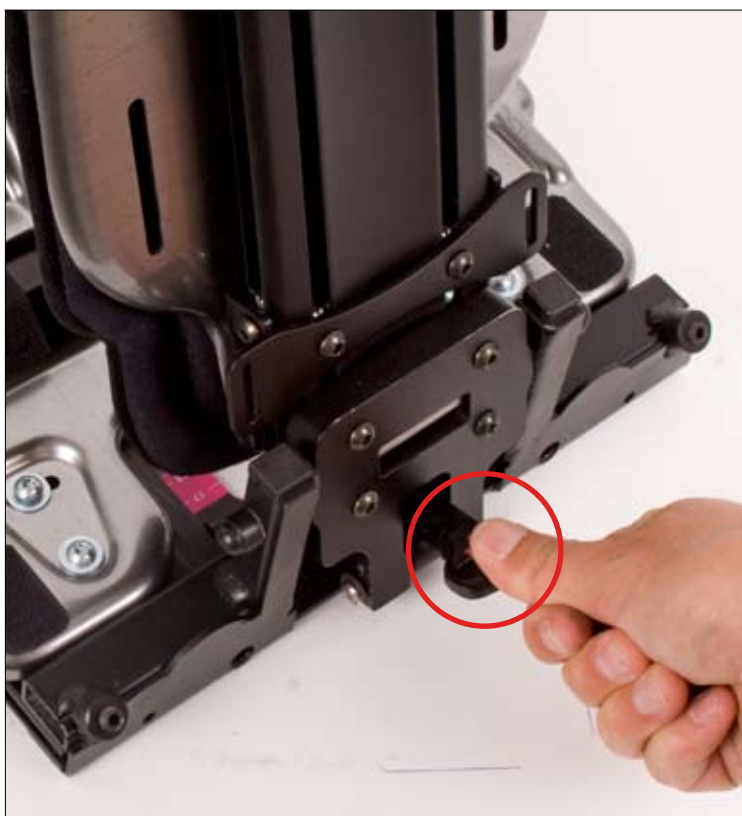

Det er meget vigtigt, at håndtaget er sikret, placeret nedad, når justering er foretaget.

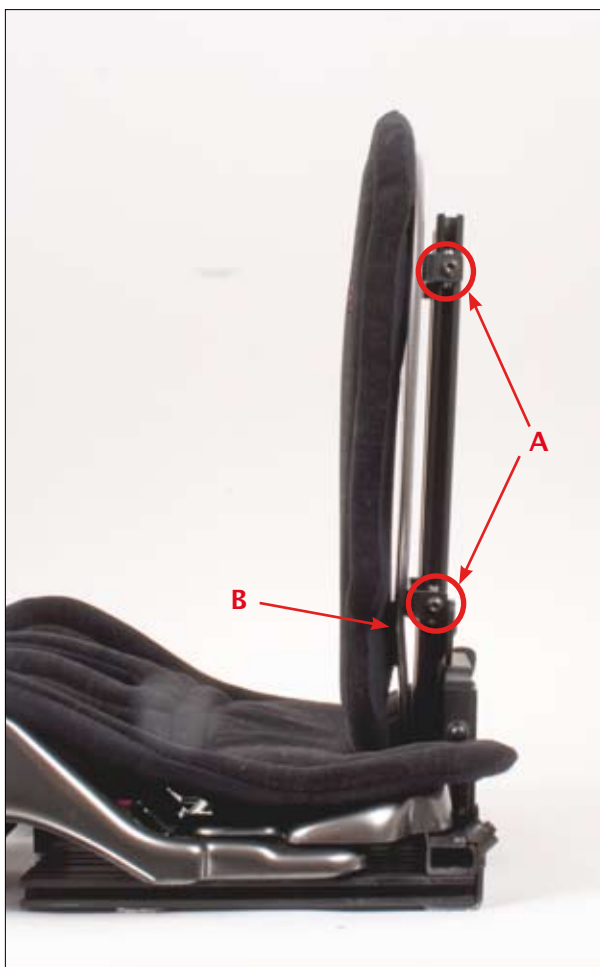

4:2 Justering af ryghøjde

 = Justeringsskruer 

- Løsen unbrakoskruerne (A) på begge sider af rygprofilen (2 på hver side)
- Juster til den ønskede højde
- Spænd skruerne

Placer ryggen så du kan gøre brug af den indbyggede lændestøtte!


4:3 Justerbar ryg



Montering af kropsstøtte

- | | |
|-----------------|--------------------|
| A - Kropsstøtte | D - Skrue |
| B - Skive | E - Distancestykke |
| C - Fingerskrue | F - Beslag |
| | G - Bagplade |

- Sæt (F) på (A)
- Skub (D) gennem (E)
- Træk det igennem sporet på rygpladen
- Sæt skiven på og sæt fingerskrue på
- Monter betræk/puder og spænd fingerskrue

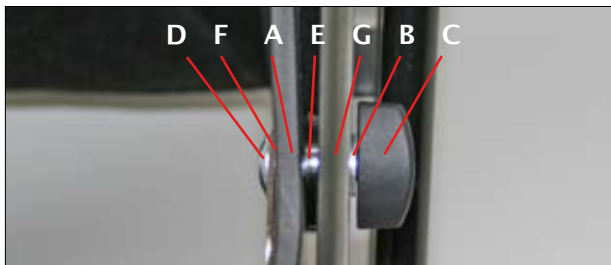

Justering

Løsen fingerskrue (2 på hver side, 4'er ialt) og flyt rygstøtten til den ønskede position. Spænd fingerskrue, når den ønskede placering er opnået.

Justeringsvred





5:1 Monter bækkenstyr



 = Justeringskruer 

Justering (A)

Løsen skruen (A) og flyt til den ønskede position.
Spænd skruen (A).

Løsen skruen (B)


B - monter bækkenstyret og spænd skruen igen.

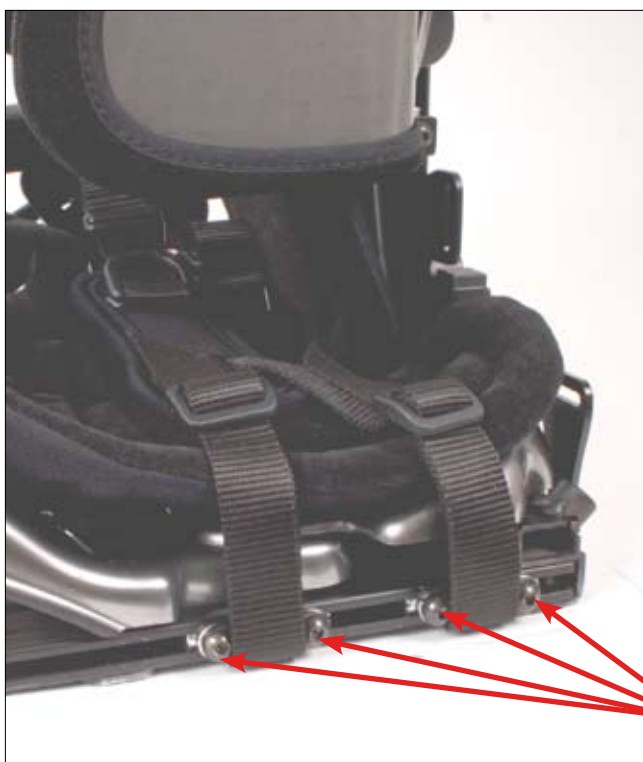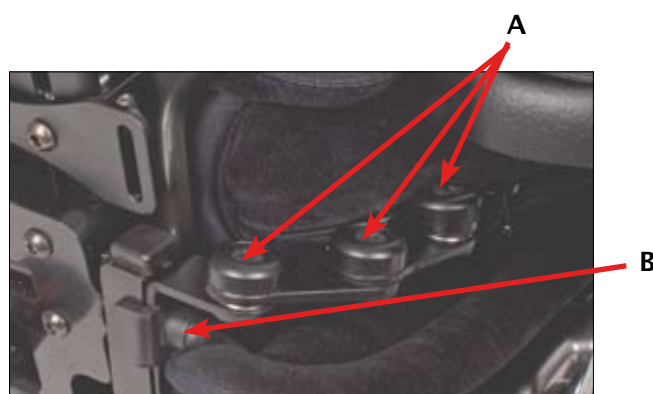

6:1 Hoftebælte

 = Justeringskruer 

A - Hvis hoftebæltet skal justeres, løsen skrue A.
Beslaget kan nu nemt justeres, og når den ønskede position er opnået, spænd skrue A igen.

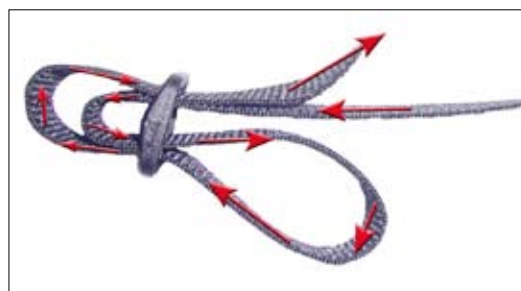

6:2 Montering af Support Serien

 = Justeringskruer 

(A) Øverste monteringsbeslag



(B) Nederste monteringsbeslag

Alternativt nedre monteringsbeslag (Tilvalg 285140)




Montering af øverste monteringsbeslag – A
Start med at fjerne unbrakonøglen, der er placeret øverst på rygprofilen. Skub de øverste monteringsbeslag ind på rygprofilens spor og find den rette placering.

Tilpasning af de øverste monteringsbeslag
Løsen skruerne og foretag de ønskede justeringer. Højden på de øverste monteringsbeslag skal være placeret, så trækretningen er en smule over skulderområdet. Spænd skruerne.

Montering af stropper
Træk stropperne gennem beslaget og ind i spændet. Brug de vedlagte triglide spænder E. Glem ikke at sætte hovedstøtte beslaget på plads, hvis du har fjernet det for at montere stropperne.

Justering af trækretning og bredden
Løsen skruerne på det øverste monteringsbeslag og juster til den ønskede højde. Spænd de øverste skruer.

Juster vinklen og spænd skruerne.

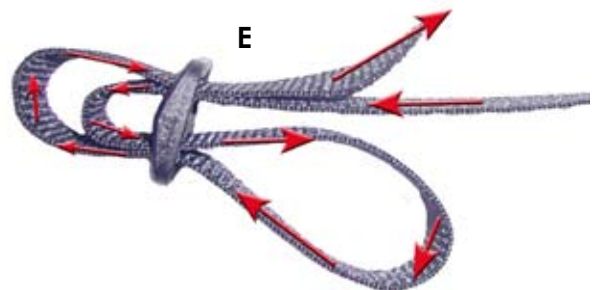

Sikrer dig, at der er nok plads til halsen, at puderne er rigtig placeret og at trykket er korrekt!

7:1 Armlæn

Montering af armlæn, træk armlænene ind på beslaget på hver side af stolen. Spænd skruerne.


Justering af bredde – A: Løsen skrue A juster til den ønskede position. Spænd skruen.

Justering af dybden – B: Løsen skrue B og juster til den ønskede position. Spænd skruen.

Højdejustering af armlænsplade – C: Løsen fingerskruen og juster til den ønskede position. Spænd fingerskruen.


Justering af vinkel på armlænspladen – D: Løsen fingerskruen og juster til den ønskede position. Spænd fingerskruen.

Pude – E: Ved udskiftning eller rengøring, løsen velcro.

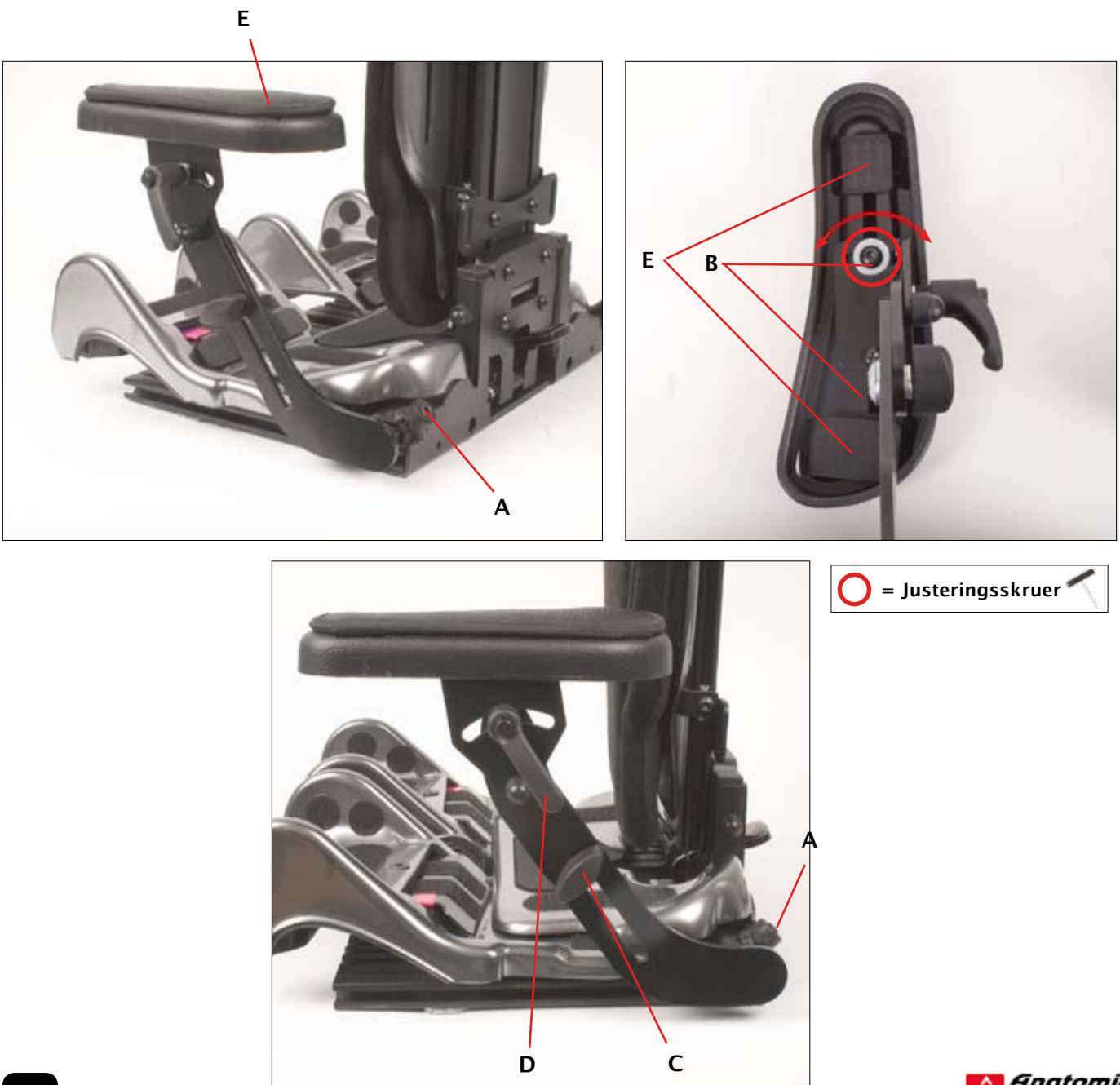

7:2 Albuestop

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 = Justeringsskrue 



7:3 Bord

Placer bordet på armlænene, skub bordets beslag ned og drej dem ind under armlænspladen. Monteringsbeslaget på bordet skubbes indtil det passer under armlænspladen.



Placer bordet på armlænspladen, så det bagerste af bordet passer med det bagerste af armlænet.



Tryk bordet ned indtil beslaget frit kan drejes ind under armlænspladen.



Skub beslaget indtil det ikke kan komme længere og slip det.



Løft IKKE i den forreste del af bordet.

8:1 Fodstøtte

 = Justeringskrue 



Justering af knæleds vinkel - A

Løsen fingerskruen (A) og juster til den ønskede position. Stram skruen, når den ønskede position er opnået.


Vigtigt - "tænderne" skal passe ind i hinanden. Stram skruen godt!

Højdejustering af fodplade - B

Løsen fingerskruen (B) og juster til den ønskede position. Stram skruen, når den ønskede position er opnået.

Justering af fodleds vinklen - C

Løsen fingerskruen (C) og juster til den ønskede position. Stram skruen, når den ønskede position er opnået.

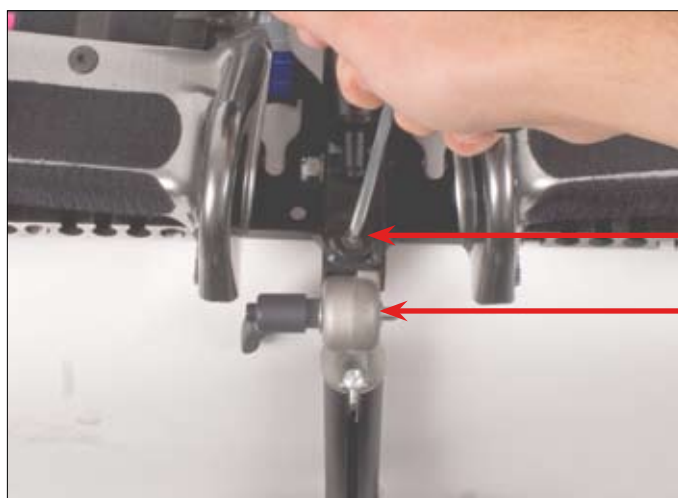

8:2 Justerbar fodstøtte

Vinkel justering, knæled - A

Løsen skruen (A) og juster til den ønskede position. Stram skruen, når den ønskede position er opnået.

Højdejustering, fodplade - B

Løsen fingerskruen (B) og juster til den ønskede position. Stram skruen, når den ønskede position er opnået.

Justering af fodleds vinkel - C

Løsen fingerskruen (C) og juster til den ønskede position. Stram skruen, når den ønskede position er opnået.


Justering af fodpladen - D

Fodpladens bredde og dybde kan justeres.

Løsen unbrakoskrue (D) og juster til den ønskede position. Stram skruen, når den ønskede position er opnået.



Fodstøtte montering

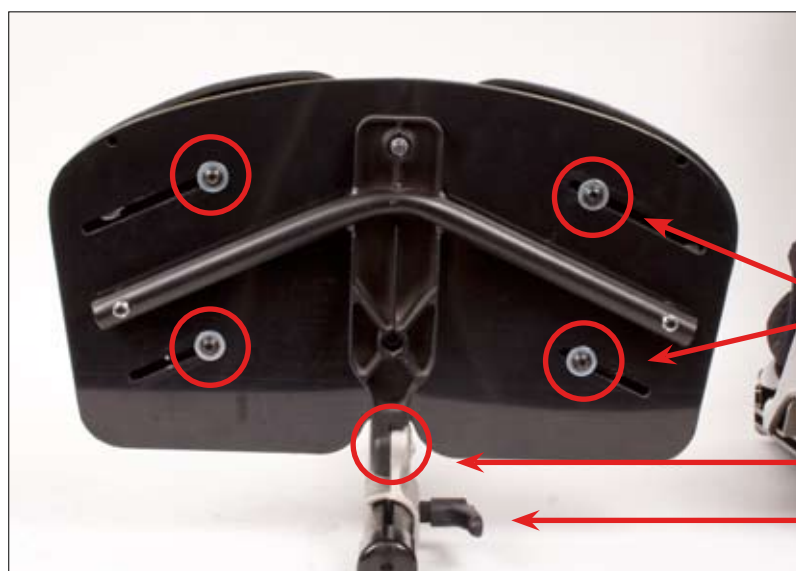

○ = Justeringsskruer

(D) Justering af fodplade

(C) Vinkeljustering, af knæledsvinkel

(B) Højdejustering af fodplade

8:3 Delt fodstøtte - justerbar

Justering af knæledsvinkel - A

Løsen skruen (A) og juster til den ønskede position. Stram skruen, når den ønskede position er opnået.

Højdejustering af fodplade - B

Løsen fingerskruen (B) og juster til den ønskede position. Stram skruen, når den ønskede position er opnået.

Justering af fodledsvinkel - C


Løsen skruen (C) og juster til den ønskede position. Stram skruen, når den ønskede position er opnået.

Justering af fodpladen - D

Fodpladernes bredde og dybde kan justeres.

Løsen unbrakoskrue (D) og juster til den ønskede position.

Stram skruen når den ønskede position er opnået.

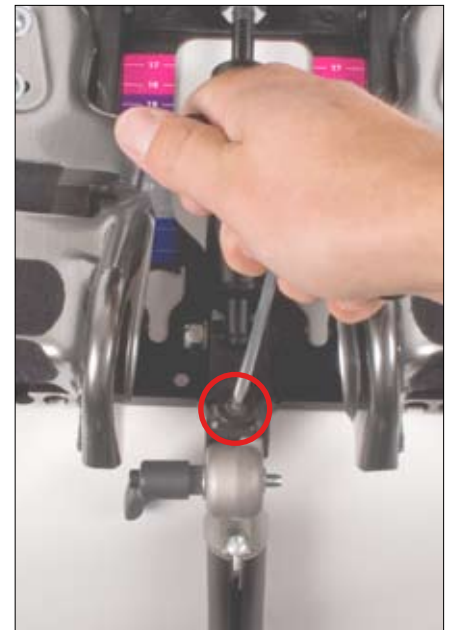


Fodstøtte montering




(D) Justering af fodpladen

(C) Justering af fodledsvinkel

(B) Højdejustering af fodplade

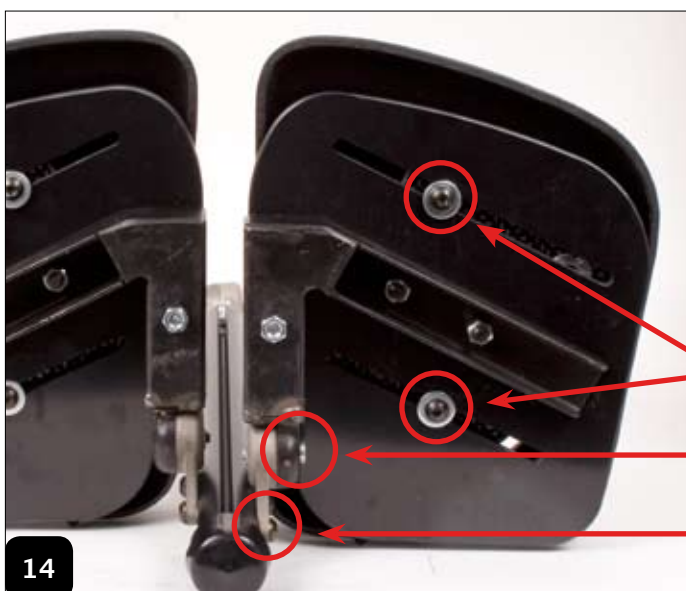

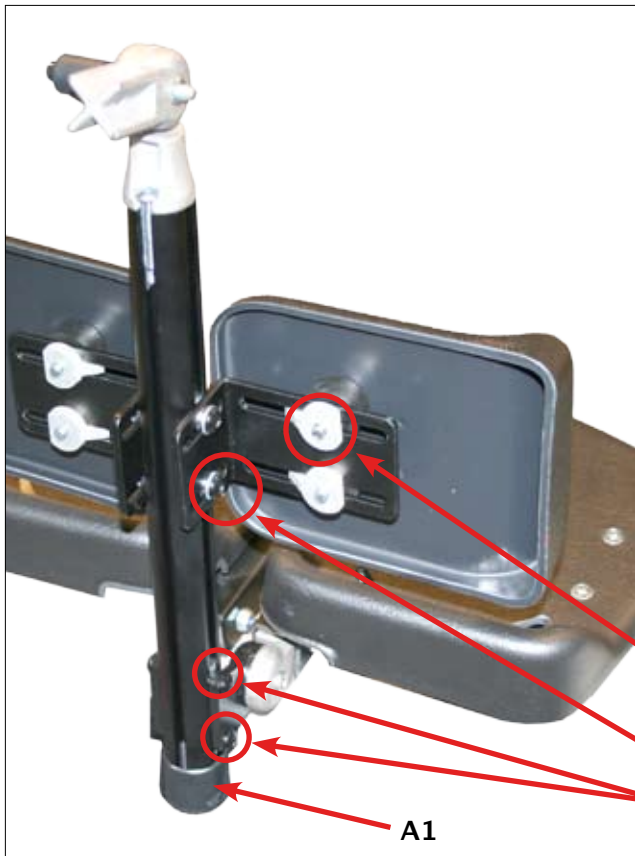

9:1 Lægstøtte

 = Justeringskrue 

A1 - Fjern gummi endestykket.

A2 - Løsen skruen og fjern fodstøtten.

B1 - Skub lægstøtten op på fodstøttestangen. Juster til den ønskede placering og stram skruerne.


C1 - For at justere bredden, brug skrue (C).
Stram skruen, når den ønskede position er opnået.

C1

B1

A2

A1

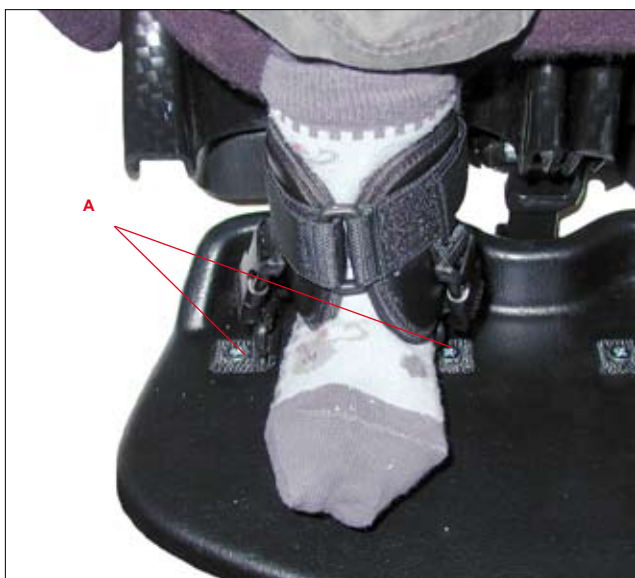

9:2 Ankelbæspænding

Monter ankelbæspændingen på de allerede eksisterende beslag på fodpladen (A).

Sæt ankelbæspændingen rundt om anklen så den åbne del vender udad, spænd det med velcroen.

Juster højden på ankelbæspændingen ved hjælp af spænderne på siden.



Vær sikker på, at puden sidder rigtigt!

10

Hovedstøtte

 = Justeringskruer 

A - Montering af hovedstøttebeslag

Begynd med at fjerne unbrakonøglen øverst på rygprofilen. Skub hovedstøttebeslaget ned i sporene bag på rygprofilen, juster til den ønskede placering. Spænd skruerne!

B - Monter hovedstøtten på beslaget og juster til den ønskede position. Stram fingerskruen.

C - Justering af hovedstøtten

Løsen justeringskruerne en smule så du nemt kan justere med hånden. Når den ønskede position er opnået, stram skruerne (C).

Hvis hovedstøtten skal være højere, løsen fingerskrue (B) og juster hovedstøtten til den ønskede højde. Stram fingerskruen(B).

(A) Hovedstøttebeslag,
4 profilmøtrikker


(B) Højdejusterings
håndtaget




Tel +45 86 17 01 74
Fax +45 86 17 01 75
E-mail a-sitt@anatomic-sitt.dk
Web www.anatomicsitt.com

11:1 Legebøjle

Beslaget til legebøjlen skal monteres på rygprofilen. Udskift det eksisterende endestykke øverst på rygprofilen, med det der følger med legebøjlen. (Endestykket er for boret så det letter monteringen). Skub legebøjlen ned i rygprofilen (D). Spænd legebøjlebs beslag fast til rygprofilen (C). Skub legebøjlen ned og spænd den fast ved hjælp af fingerskruerne (A).

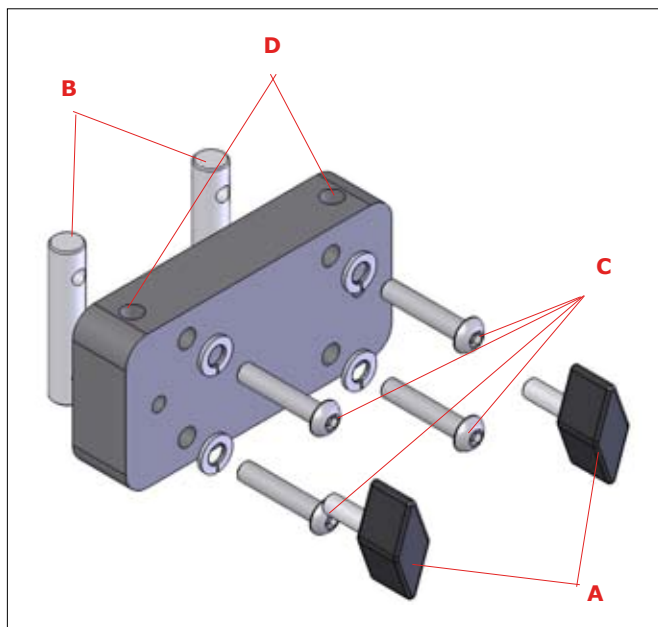

Hvis du monterer en hovedstøtte, beslaget til denne skal sættes sammen med beslaget til legebøjlen – brug de lange skruer (B) og fjederskiver!

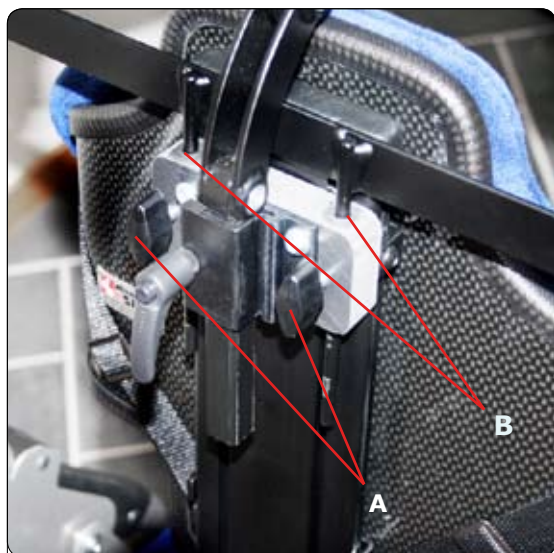


11:2 Kaleche

Kalechen skal monteres i samme beslag som legebøjlen. De kan ikke kombineres. Montering af beslag, se side 10. Hovedstøtten skal afmonteres før montering af kaleche. Afmontering af hovedstøtte, se side 10.

Montering af kaleche.

- Løsen fingerskruerne på begge sider (A).
- Skub kalechen ned i beslaget (B).
- Stram fingerskruerne (A).

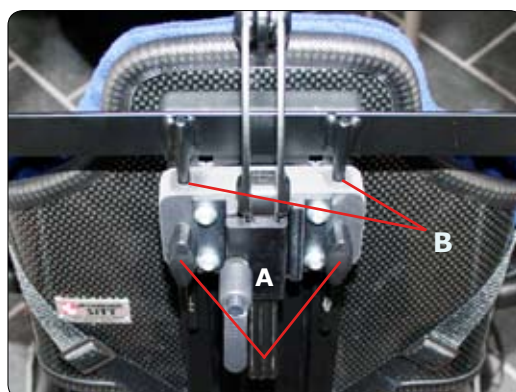


12 Montering på stel


Fæsteplade

Se billedet til højre.

Fæstepladen fastgøres med 4 unbrakoskruer. Juster pladens placering i dybden og spænd skruerne.

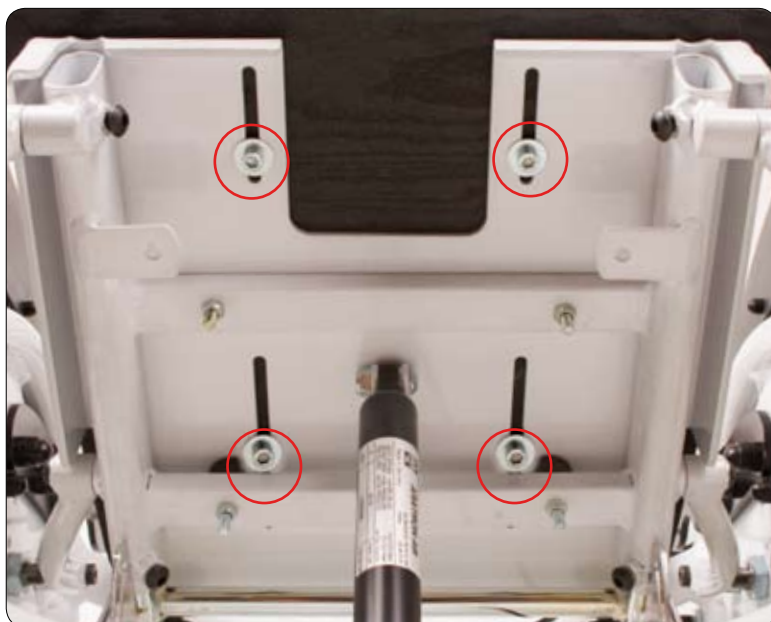


Et sidesystem kan nemt monteres på et stel med en fæsteplade. Fæstepladen er udstyret med 2 skruer, som holder siddesystemet på plads. Skruerne under fæstepladen sikrer, at siddesystemet ikke flytter sig. Monter siddesystemet som vist på billedet. Skub indtil du hører en kliklyd. Stram unbrakoskruerne under sædet med uret.

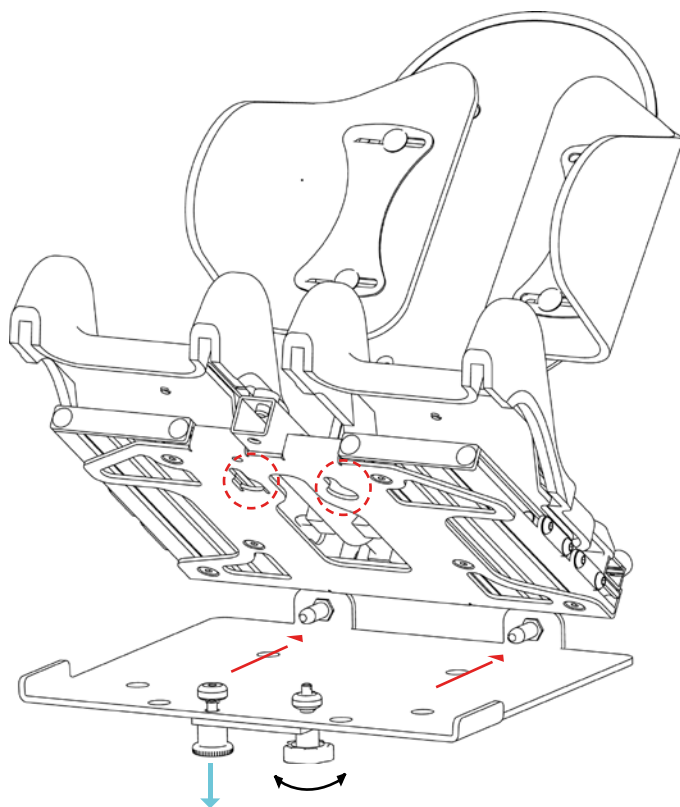

 Kliklås

 Trækretning

 Træk nedad

 Håndtag

13:1 Service

Vedligeholdelse

Puder og bæltepuder: 30°, kold vask. Må ikke tørretumbles eller komme i varmeskab. Plastic og metaldele: Tør skidt af med en våd klud.

Ødelagte dele

Kontroller alle bevægelige dele. Udskift hvis nødvendigt. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anatomic Sitt A/S på tlf.nr. 86170174 eller sende os en email på a-sitt@anatomic-sitt.dk. Hvis produktet skal skrottes, skal delene sorteres efter materiale.

Demontering og skrotning

Ved skrotning af enkeltdele eller hele produktet, skal delene sorteres efter materialetype. Tabellen herunder viser Zitzi Delfi Pro's forskellige materialetyper.

Materialetype	
Metal	Rygprofil, fodstøtte, armlæn, fæsteplade, hovedstøtte dele.
Plastik	Sæde- og rygdele, bord, fodplade.
Brændbart	Betræk, stof, hoftebælte, stropper.

Opsummering

Foretag jævnligt opfølgning som nævnt under de respective punkter.

- Kontroller regelmæssigt, at alle skruer sidder, som de skal.
- Kontroller regelmæssigt alle stropper og puder.
- Vær sikker på, at du har hørt en kliklyd ved montering af sædet, før barnet placeres.

Kip ikke sædet for meget forover, når barnet sidder i sædet.

Kombinationer

Zitzi Delfi Pro er et CE-mærket produkt, der kan kombineres med det tilbehør der er nævnt i denne brugervejledning. Zitzi Delfi Pro passer til stel som Zitzi Flipper Pro, Seabass Pro, Mika, Sunny, Galileo, Zitzi Flipper, Leonardo og Zitzi Wave.

Reservedele

Der kan kun benyttes reservedele leveret af Anatomic Sitt A/S.

Mærkning

Zitzi med tilbehør i denne brugervejledning, er et CE-mærket produkt. På plastikpladen bag rygpuden sidder et serienummer.

Garanti

1 års fabriksgaranti. 2 års reklamationsret.



Tel +45 86 17 01 74
Fax +45 86 17 01 75
E-mail a-sitt@anatomic-sitt.dk
Web www.anatomicsitt.com

**Viengevej 4
8240 Risskov**

14 Tekniske data

Zitzi Delfi Pro	Str. 1	Str 2	Str 3
Sædebredde (cm)	24, 27, 30	26, 29, 32	30, 33, 36
Sædedybde (cm)	19-29	25-35	30-40
Benlængde difference (cm)	10	10	10
Aksil højde (cm)	24-32	27-39	29-50
Aksil til top af ryg (cm)	2,5-7,5	2,5-9,5	5,5-14,5
Brystbredde (cm)	17-26	19,5-28,5	22-31
Brystdybde (cm)	11	14	16
Tilt (grader)	-12/+26	-12/+28	-12/+28