



Zitzi SEABASS PRO

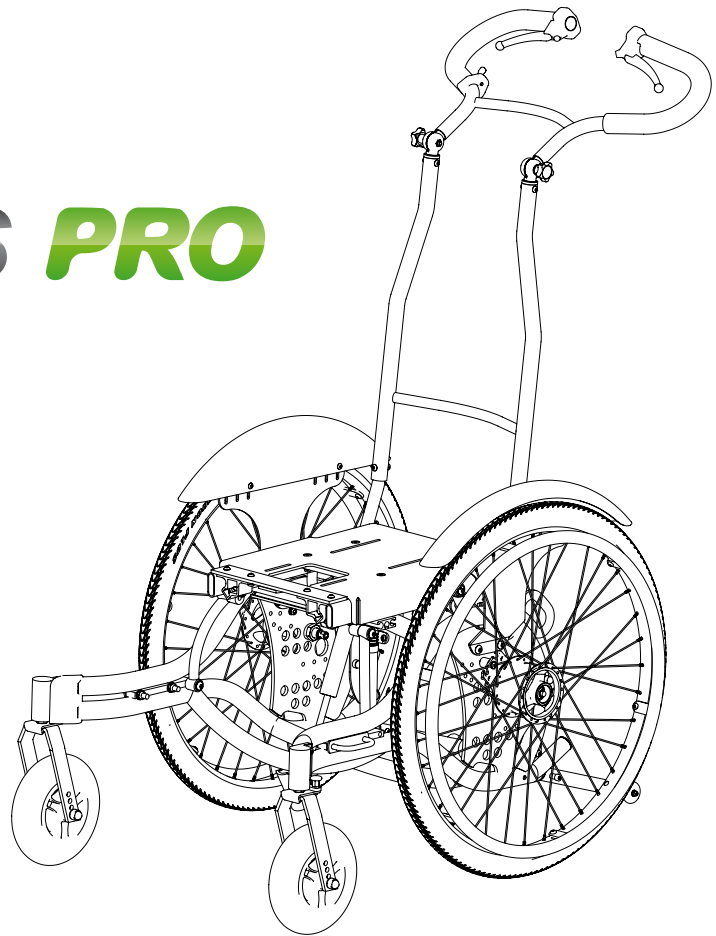

Indholdsfortegnelse

Udgave 1 2009 06 01 DK1201-1

Montering af fæsteplade	1:1		
Bagramme justering	2:1	Fodstøtte	6:1
Kip af sæde	2:2		
Vinkeljustering af håndtag	2:3	Stænkbeskytter	7:1
		Transport beslag	8:1
Placering af hjul	3:1		
Svinghjul	3:2	Parkeringsbremse	9:1
Vinkel på gafflen til svinghjulene	3:3	Antitip støtte	9:2
		Trædepedal	9:3
Håndtag	4:1		
Sammenklappelig håndtag	4:2	Service	10:1
Kørebøjlen	4:3		
		Tekniske data	11:1
Tromlebremse	5:1		
Quick-release, hjul	5:2		

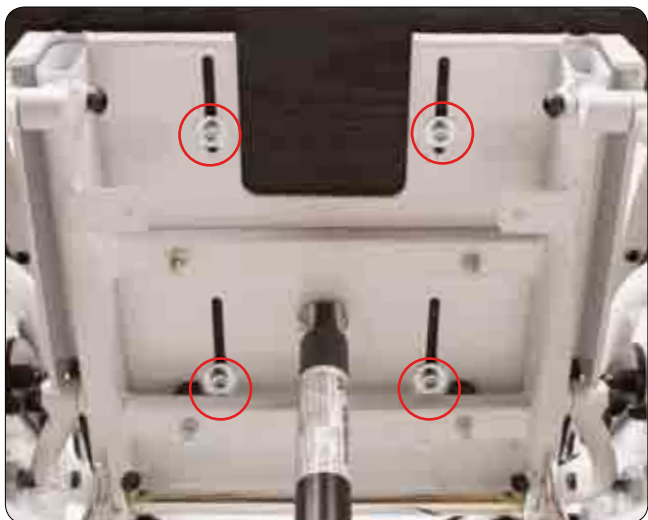


1:1 Montering af fæsteplade

Vælg fæsteplade efter siddesystem.

Juster pladen i dybden og lås de fire bolte.

OBS – Juster sædet, så du opnår en god balance i kørestolen.

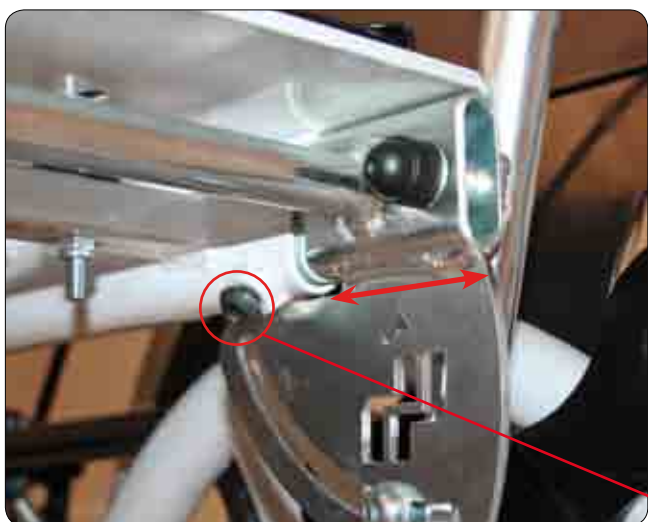

2:1 Bagramme justering


For at opnå den rette balance på Seabass, kan du justere kørehåndtaget i dybden.

Hvis du opnår den rette balance, vil det føles meget bedre og lettere at køre den.

A – Løsen boltene i hver side, juster håndtaget og spænd boltene.


A



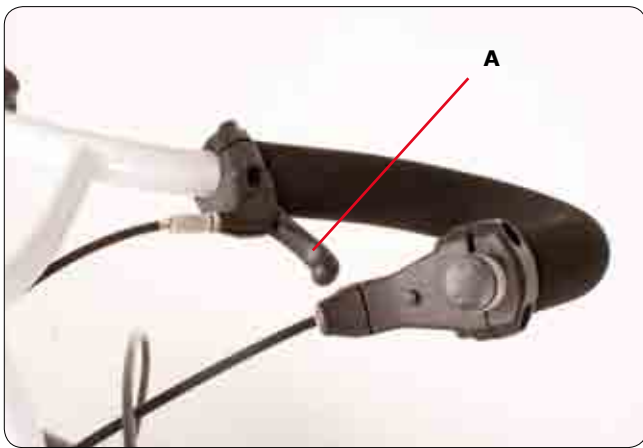

2:2 Kip af sæde

Aktiver kip håndtaget (A) juster kippet til den ønskede position. Slip håndtaget.

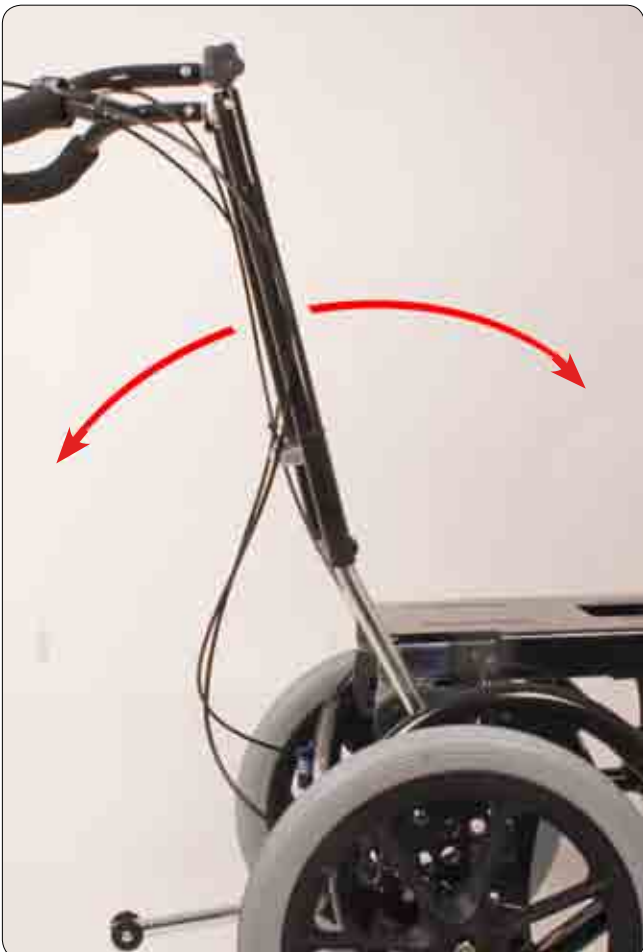


2:3 Vinkeljustering af kørbøjle

Kørebøjlen kan trinløst justeres efter typen af siddesystem.

Løsen kørebøjlen med de to håndtag (A). Juster til det ønskede leje og spænd håndtagene!



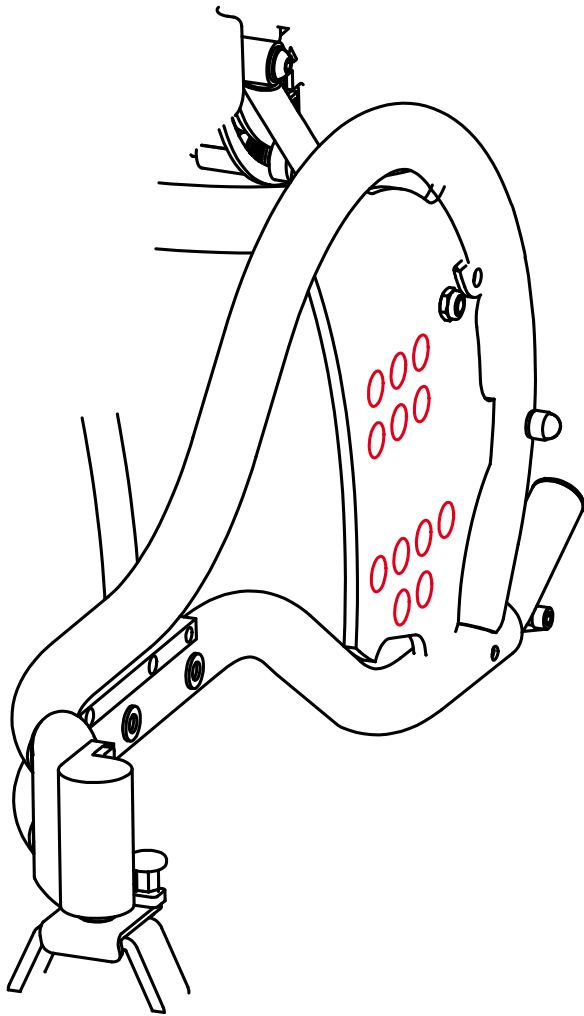

3:1 Hjulenes placering

For at få det rette tyngdepunkt, må du justere hjulenes position. Juster hjulene i horizontal linie for at få en stabil ramme.

Kontakt Anatomic Sitt A/S for at få råd omkring dette.




Sikre dig, at du opnår den rette balance!



3:2 De forreste hjuls placering

Du kan placere svinghjulene i fire forskellige positioner, hvis du skifter drivhjul.

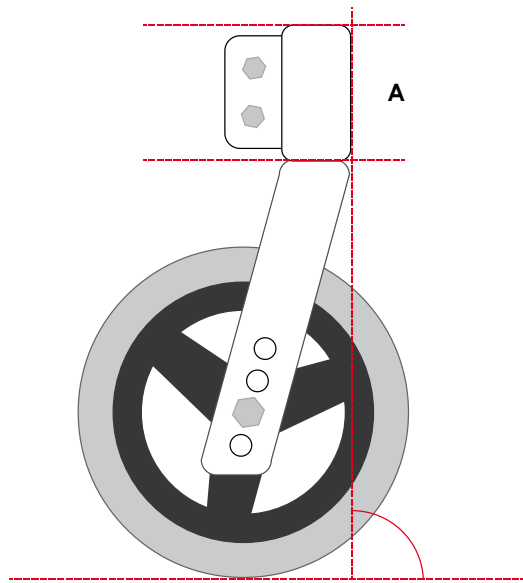

3:3 Vinkel på gafflen til svinghjulene

Fin justering af de forreste hjul.

For at ændre vinklen skal du løsne skruerne og justere de excentriske bolte (A)

OBS – Sikre dig at skruerne er spændt.

4:1 Kørehåndtaget

For at justere vinklen på håndtaget skal du løsne de to fingerskruer. Juster og stram fingerskruerne godt.



Sikrer dig at fingerskruerne er godt spændte



4:2 Kørebøjlen

Kørehåndtaget (eller kørebøjlen) kan justeres til tre forskellige højder. Området markeret med rød på billedet viser de højder, du kan vælge imellem. Vær opmærksom på, at unbrakoskruerne bliver spændt, når du har opnået den ønskede højde.



4:3 Sammenklappelig kørehåndtag

Ekstra tilbehør: Sammenklappelig kørehåndtag

Sammenklapning af kørehåndtag:

Skub nederste tværstang (A) nedad for at klappe håndtaget sammen.

Opklapning:

Tag fat i kørehåndtaget, træk det op indtil du hører en kliklyd. Kliklyden indikerer, at håndtaget er forsvarligt låst.

A
Vigtigt – Sikre dig at kørehåndtaget er låst efter justering.



5:1 Tromlebremse

Kørestolsstellet er udstyret med tromlebremser, som manøvreres af hjælperen.

Låsning af hjul

Tryk bremsehåndtaget ind. Skyd den røde låsepadel frem til ønsket stilling vist pos. A

Frigøring af hjul

Tryk bremsehåndtaget ind. Låsen slipper automatisk. Slip bremsehåndtaget.

Kontroller at bremserne fungerer

Tryk højre bremsehåndtag ind samtidig med at du skubber kørestolsstellet fremad, baghjulet skal bremse/ikke køre. Håndtaget skal ikke kunne trykkes helt ind mod kørebøjlen, der skal være et slip på 5-10 mm.

Gentag proceduren med venstre bremsehåndtag.

Bremserne virker ikke

Kontroller at wirerne har den rette spænding. Wirerne må ikke have for lav spænding. Begynd med at justere skrue (B) indtil bremsen virker, som den skal. Virker det ikke, følg nedenstående instruktion.

- Spænd skruen (B) helt
- Løsen møtrik / skrue (D)
- Brems ved at løfte i "armen" (D), så wiren er i spænd, uden at bremsen er trukket.
- Spænd møtrik / skrue (D)
- Finjuster efterfølgende med skrue (B)

5:2 Quick-release

Drivhjulene kan nemt afmonteres ved transport.


Afmontering

Tryk knappen centreret på hjulet ind, træk hjulet af.

Montering

Tryk knappen ind, sæt Quick release akslen ind i navet, slip knappen.

Kontroller at hjulet sidder fast ved at trække i hjulet uden at trykke på knappen.

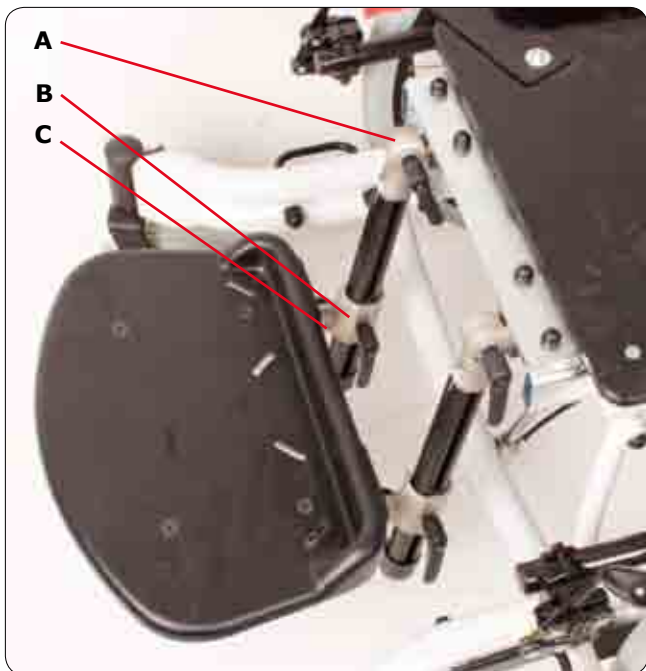

6:1 Fodstøtte

Fodstøtten er monteret i en profil placeret under sædet.

A – Justering af knæ vinklen.

B – Justering af højden på fodpladen.

C – Justering af vinklen på fodpladen.

D – Montering af fodpladen.



Fodstøtten kan dybde justeres!

For at få den rette position, skal fodstøtten dybde justeres (E) med hensyntagen til siddesystemet.






7:1 Stænkbeskyttere

Løsen hjulene ved hjælp af Quick-release (se afsnit 5:2). Stænkbeskytterne skal monteres på ydersiden af rammen. Monter stænkbeskytterne på samme plade, som er monteret med to skruer (A).

Juster placeringen af stænkbeskytterne, så hjulet frit kan snurre rundt uden at ramme på.

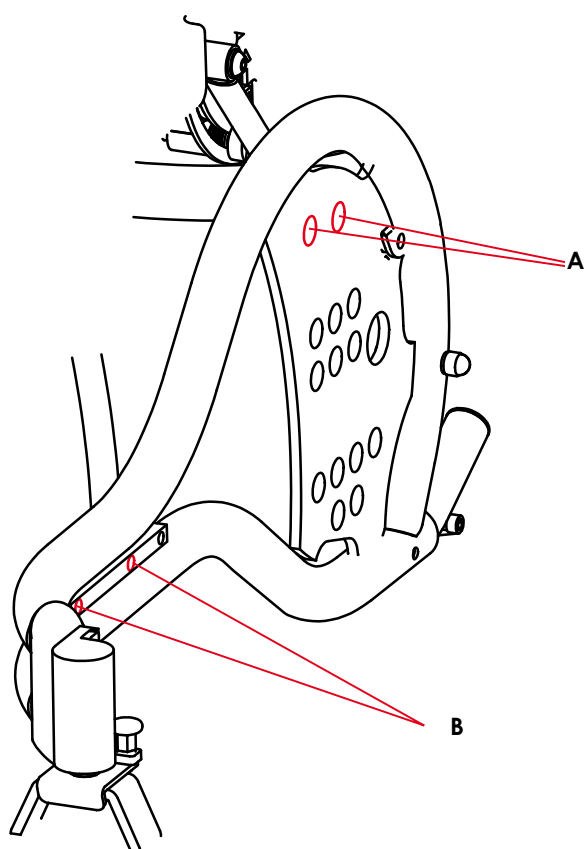

8:1 Transport beslag

Bagerste beslag

Hvert beslag skal monteres med 2 unbrakoskruer på hver side af rammen (A).

Forreste beslag

Hvert beslag skal monteres med 2 bolte i de eksisterende spor i transportbeslaget.

Beslaget skal monteres på ydersiden af rammen, med bøjlen pegende udad og boltene indad.





9:1 Parkeringsbremse

Parkeringsbremsen skal monteres samme sted som det forreste transport beslag.

A



9:2 Antitip støtte

Antitippen kan nemt svinges væk for ikke at være i vejen. Tryk ned på antitippen og drej den - den sidder først korrekt, når den har klikket sig fast.



Kørestolsstellet bør altid udstyres med antitip støtte af sikkerhedsmæssige grunde.



9:3 Trædepedal

Trædepedalen er monteret for at gøre det lettere at tippe kørestolen, over eksempelvis kantsten.

Skub pedalen ind i rammen, og lås den udefra med en skrue.

10:1 Vedligeholdelse

Rengøring af stel

Rengør rammen regelmæssigt med bilshampo eller lignende. Ved kraftig tilsmudsning kan affedtningsmiddel bruges. Vær forsigtig med de elektriske dele og gaspatronen. Sikre dig, at alle bevægelige dele er i orden, udskift hvis nødvendigt.

Kontrol af Quick-release

Træk akslen ud, rengør og kontroller regelmæssigt at kuglerne på akslen fungerer tilfredsstillende. Hvis de skal smøres, så anvend tyndtflydende olie, alternativt 5-56 eller lignende. Akslen skal ikke smøres, da den ikke roterer i navhuset. Sørg for at rengøre akslen for snavs og belægninger. Kontroller at hjulet sidder fast efter montering.

Service

Kontroller alle bevægelige dele for fejl. Udskift hvis nødvendigt. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på tlf. nr. 86170174 eller sende os en e-mail på a-sitt@anatomic-sitt.dk.

Hvis produktet skal skrottes skal delene sorteres efter materiale.

Opsummering

- Foretag jævnligt opfølgning som nævnt under de respektive punkter.
- Kontroller regelmæssigt, at alle skruer sidder, som de skal.
- Kontroller regelmæssigt alle stropper og puder.
- Kontroller regelmæssigt at bremserne virker – samt andre bevægelige dele.

Mærkning

Stellet er mærket med et unikt serienummer, som skal opgives ved alt korrespondance omkring produktet.

11:1 Vedligeholdelse

Garanti

3 års garanti mod fabrikationsfejl.

Tekniske data

Seabass PRO	Størrelse 1	Størrelse 2	Størrelse 3
Bredde (cm)	35	40	45
Bredde forhjul (cm)	46	53	60
Længde (cm)	60	62	62
Sædehøjde (cm)	45	45	45
Bredde indenfor hjulene (cm)	48	53	58
Bredde drivhjul (cm)	51	66	71
Kip (grader)	0-30	0-30	0-30
Max. brugervægt (kg)	130	130	130
Materiale			
Aluminium	Stel	Stel	Stel
Farvekode	Lak	Lak	Lak
Gummi	Øvr. dele	Øvr. dele	Øvr. dele
ABS plastik	Øvr. dele	Øvr. dele	Øvr. dele



Tel +45 86 17 01 74
Fax +45 86 17 01 75
E-mail a-sitt@anatomic-sitt.dk
Web www.anatomicsitt.com

**Viengevej 4
8240 Risskov**