

Dansk Brugermanual

Vicair ® Liberty

Introduktion

Tak fordi du har valgt en Vicair ® Liberty pude. Vi er sikre på, at du hurtigt vil lære at sætte pris på dens enkle udførelse, pålidelighed og effektive virkning.

Det brede udvalg af Vicair ® Academy benytter sig af Vicair ® Tecnology™, en unik og innovativ metode, der giver en dynamisk siddeflade og støtte ved hjælp af flere hundrede små, trekantede, luftfyldte celler kaldet Smartcells™. Disse fleksible celler har en lav friktionsoverflade, glider let mod hinanden og former sig derfor let efter kroppens konturer. Konceptet giver en optimal kombination af trykaflastning, støtte og stabilitet, samtidig med at shear minimeres.

Denne brugermanual gælder for følgende Vicair ® Liberty puder: Liberty ST, Liberty PT og Liberty PPS.

Liberty ST er en pude med 1 kammer. Liberty PT og PPS er puder med 2 lige store kamre. Brugen af puder med 2 kamre anbefales, hvis brugeren har tendens til at glide frem/tilbage.

- ◆ Liberty PPS: en Liberty PT med bækkenstabilisator.

Forskellen på Liberty PT og Liberty PPS er et medfølgende skumstykke forrest under puden. Bækkenstabilisatoren reducerer bækkenets tendens til at kippe bagud. På betrækket til Liberty PT og PPS puderne er monteret to elastiske stropper, der holder bækkenstabilisatoren på plads under puden.

Før du tager din nye Vicair ® Liberty pude i brug, bør du læse og sætte dig ind i følgende enkle, men vigtige anvisninger, så du kan få fuldt udbytte af puden.

- ◆ **Kontroller pudens størrelse:**

Kontroller, at puden har den rigtige størrelse til din kørestol. Vicair ® Liberty puderne leveres i følgende standard størrelser: (bredde x dybde)

Vicair Liberty PT str 40 x 40 cm (alle modeller)
Vicair Liberty PT str 40 x 45 cm (Liberty PT/PPS)
Vicair Liberty PT str 42 x 42 cm (alle modeller)
Vicair Liberty PT str 45 x 40 cm (Liberty PT/PPS)
Vicair Liberty PT str 45 x 45 cm (alle modeller)

◆ **Betræk**

Der findes to forskellige betræk til Vicair® Liberty puderne: et standard betræk og et inkontinensbetræk. Begge betræk har skridsikker bund for at sikre positionering af puden i kørestolen og begge er strækbare i begge retninger. Sørg for, at montere betrækket rigtigt på puden – følg derfor anvisningen på den påsyede mærkat. Ventilen skal placeres i højre, bagerste hjørne af puden.

◆ **Korrekt positionering i kørestolen**

Når puden er tilpasset i kørestolen, sørg da for, at benstøtter og armlæn også er korrekt tilpasset. Når brugeren sidder på Vicair® Liberty puden, former pudens indhold sig efter kroppens konturer ved enhver bevægelse eller ændring, og sikrer dermed optimal aflastning.

◆ **Tilpasning af puden**

Ved tilpasning af puden første gang, placer da brugeren på puden og åben ventilen. Det er her ikke nødvendigt at afmontere det yderste betræk helt, men blot at lyne det lidt op. Lad brugeren sidde på puden i ca. 5 minutter præcist som normalt. Herved tilpasses luften i puden til brugerens vægt og kropskonturer. Luk herefter ventilen igen.

◆ **Brug af puden i højder**

Ved brug af Vicair® Liberty puden i højder, hvor lufttrykket ændres (eks. i fly), er der risiko for at puden ikke fungerer, da cellerne i puden indeholder luft. Det kan derfor være en god ide ikke at benytte puden under disse omstændigheder.

◆ **Brandsikring**

Vicair® Liberty puden lever op til gældende standard vedr. brandsikring. Dog skal puden ikke ligge i nærheden af åben ild eller kraftig varme.

◆ **Beskadet pude**

Hvis Vicair® Liberty puden er ødelagt, bør puden ikke bruges. Kontakt da terapeuten eller forhandleren for nærmere oplysninger om brug af samme eller ny pude.

◆ **Transport**

Hvis brugeren transporteres i bil siddende i kørestolen, skal Vicair® Liberty puden altid være forsvarligt fastspændt til kørestolen. Hvis puden ikke fastspændes, kan dette resultere i, at puden glider ud af stolen og brugeren kommer tilskade. Fastgør puden ved hjælp af en rem.

◆ **Genbrug af puden til anden bruger**

Før puden genbruges til en anden bruger er det vigtigt, at yderbetrækket er rengjort som beskrevet i anvisningerne og at inderbetrækket er desinficeret. Gentag ligeledes tilpasningsproceduren som beskrevet i afsnittet "Tilpasning af puden".

◆ **Regelmæssigt eftersyn**

Med alle nye antidecubitus produkter, er det en nødvendighed at holde øje med brugerens hud de første par dage. Hvis kraftig rødme i huden opstår, skal brugeren ikke fortsat sidde på puden. Kontakt da venligst terapeuten eller forhandleren for yderligere hjælp. Puden bør efterses hver 3. måned for ødelagte celler, da dette vil kunne reducere aflastningen og stabiliteten.

◆ **Korrekt valg af pude**

Alle Vicair® Liberty puderne har afhængig af størrelse og model sin egen specielle fyldningsgrad; et mål for, hvor mange SmartCells™ puderne indeholder. På grund af Liberty pudernes begrænsede højdemål vil det i sjældne tilfælde (eks. ved svær asymmetrisk kroppsfacon, forkert pudestørrelse, etc.) være muligt at sidde igennem puden. Specielt tynde personer er mere tilbøjelige til at sidde igennem puden end mere fyldige personer. I tilfælde af gennemsidning, bør man vælge en anden model eller størrelse af Liberty puderne.

◆ **Rengøringsvejledning**

Ved normal brug af Vicair® Liberty puderne er det kun nødvendigt at aftørre den inderste del af puden med en fugtig klud. Undgå altid skarpe genstande. Sørg for ikke at ødelægge det inderste betræk, når lynlåsen på det yderste betræk åbnes/lukkes. Vask aldrig hele puden i vaskemaskine. Puden må ikke autoklaveres. Puden må ikke udsættes for ekstrem varme og/eller tryk. Inkontinensbetrækket kan maskinvaskes ved 65 grader og tørretumbles ved lav temperatur. Standardbetrækket kan maskinvaskes ved 65 grader og tørretumbles ved lav temperatur. For at forlænge betrækkets levetid, anbefaler Invacare, at dette maskinvaskes med vrangen ud.

◆ **Garanti**

Invacare A/S tilbyder 2 års garanti mod fabrikations- og materialefejl regnet fra den oprindelige købsdato, forudsat at produktet udelukkende er anvendt efter sit formål. Ved skade opstået på baggrund af unormalt brug, eksempelvis forkert håndtering, u hensigtsmæssig rengøring eller skødesløshed fratager garantien. Skulle en fabrikations- og materialefejl opstå inden for 2 år regnet fra den oprindelige købsdato, vil Invacare A/S efter eget valg reparere eller bytte produktet uden beregning. Garantien omfatter ikke punktering, revner eller brandmærker. Betrækket er ligeledes ikke omfattet af garantien, men nyt betræk kan købes separat.