

# Lemco Dictus bånd

---



Ortopædisk hjælpemiddel  
-til dropfod

## Æsken indeholder:

- Læderbånd af skind i 2 lag, med velcro til fastgørelse
- 4 stk. fastgørelseskroge i rustfrit stål (2 i reserve)
- 2 stk. gummibånd af naturgummi (1 i reserve)
- Monokrog til brug for sko uden snørehuller

**Kære kunde.**

Tak for dit valg af Dictusbånd fra LEMCO. Vi anbefaler, at man læser hele vejledningen igennem, inden man tager Dictusbåndet i brug.

## Brugsanvisning

### Anvendelse

Dictusbåndet er et ortopædisk hjælpemiddel til personer med dropfod. Den virksomme del er et gummibånd, som hjælper til med at løfte den forreste del af foden.

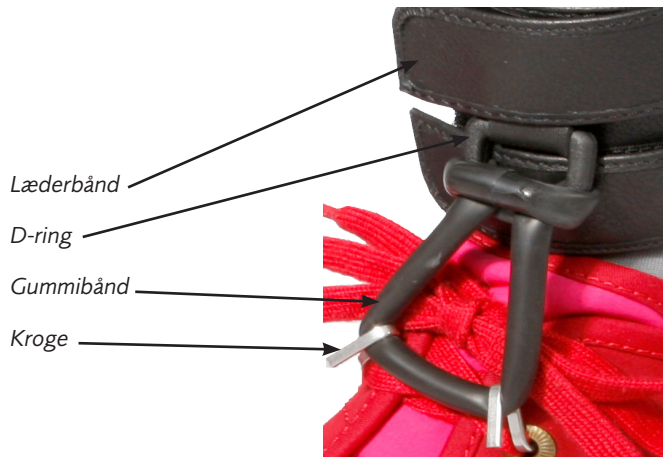


fig. 1 Dictusbåndets dele og placering

### Montering

Læderbåndet sættes rundt om anklen med "buen" vendt opad mod læggen. Læderbåndet skal altid være uden på strømpen, ikke direkte mod huden. Når båndet sidder korrekt strammes læderbåndet med velcro'en.



fig. 2 Dictus båndet "udfoldet med buen øverst

Gummibåndet føres, med den bløde del først, op i gennem D-ringen og bindes. Gummibåndets splejsning (føles hård), skal placeres midt i knuden ved D-ringen (Se figur 3). **En anden placering kan medføre at gummibåndet brister selv ved normalt brug.** Gummi-båndets løftekraft bestemmes af afstanden mellem D-ringen og fastgørelseskroge. Jo større afstand, jo mere løftekraft.



fig. 3 Gummibåndet "monteret" i D-ringen

De medfølgende kroge sættes i de valgte snørehuller i skoen. Det er vigtigt, at man prøver sig frem, for at finde ud af hvilke snørehuller kroge skal fastgøres i, for at opnå den tilsigtede funktion. Når gummibåndet er monteret, hægtes det herefter i kroge, der er monteret i snørehullerne.

Monokrogen er en alternativ medfølgende del, der kan bruges til sko uden snørehuller eller for små snørehuller. Monokrogen skal lægges imellem velcrolukningerne på skoen eller hvis snørebåndshullerne ikke er store nok til metalkroge, så kan monokroge lægges mellem skoflap og snørebånd for at løfte forfoden.



fig. 4 Dictus båndet "monteret" i monokrog

**Se instruktionsvideoer på [lemco.dk](http://lemco.dk)**

*(Bemærk brug af monokrog ikke giver samme understøttende balance, som ved brug af metalkroge)*

## Tilbehør

Man kan få kroge til påsyning i f.eks. sandaler, hjemmesko eller andre sko uden snørehuller. Bemærk, at kroge skal sys på en bændel i skoen eller sandalen af en skomager.

Ønsker man at gå uden sko, skal man have et indendørsbånd, der kan løfte forfoden op. Begge dele kan bestilles telefonisk eller direkte på [Lemco.eu](http://Lemco.eu)

## Forholdsregler og vaskeanvisning

Hver gang Dictusbåndet anvendes, skal man kontrollere, at læderbåndet er fastgjort i henhold til vejledningen, og at krogene er korrekt monterede.

Ved rengøring af Dictusbåndet må der kun anvendes en klud, der er opvredet i lunkent vand.

Sollys nedsætter levetiden for latexgummi. Gummibåndet bør derfor udskiftes efter behov, dog mindst én gang hver 3. måned.

Man bør altid have ét ekstra gummibånd i reserve.

### Bemærk:

- Dictuspakken indeholder smådele og skal derfor holdes væk fra børn
- At opbevare reserve-gummibånd mørkt og køligt, gerne i køleskab.

### Advarsel !

**Hvis gummibåndet brister, eller en eller begge kroge løsner sig fra snørebåndshullet, holdes forreste del af foden ikke længere oppe, hvilket øger risikoen for faldulykker.**

### Ekstra bånd og kroge:

Gummibånd og kroge kan købes som reservedele –  
**bestil telefonisk eller direkte online på [lemco.dk](http://lemco.dk)**

### Garanti

LEMCO yder 1 års garanti på Dictusbåndet, med undtagelse af gummibånd, kroge og D-ring, hvor der ydes 3 måneders garanti, ved usædvanlig kraftig dropfod forbeholder vi os ret til at refundere båndet ved gentagne brug af garanti .

Garantien gælder under forudsætning af, at man følger de henvisninger, der omtales i denne vejledning og ikke udsætter Dictusbåndet og de medfølgende dele for unormale belastninger.