


Comfort Master BRUGERVEJLEDNING

Knækile

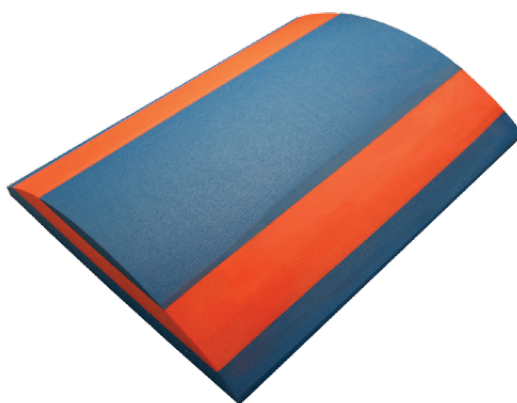

Når mobiliteten forringes...



...forbedrer vi livskvaliteten!

Vare	Art no.	Hmi no.	Produktbetegnelse	Model	Størrelse	*L/B	Vægt
	PMA 8050	54212	Comfort MASTER Knækile		L 50 x B 40 cm	L	340 g

* L=lagervare, hvor det kan forventes, at varen afsendes indenfor 3 arbejdsdage
B=bestillingsvare, her kan påregnes op til ca. 3 ugers leveringstid

Comfort Master

Knækile



A. Placering af Knækile



1A) Brugeren har behov for støtte under knæene. Knækilen kan med fordel placeres ved hjælp af en Nylon MASTER.



VIGTIGT

- Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger.
- Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.
- Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.



ANSVAR

- Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller uhensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.

Produktbeskrivelse

Knækilen er fremstillet i polyethylene med målene 40x50 cm.

Anvendelse

Knækilen placeres under brugerens lår/knæ, således, at der opnås fuld støtte under knæene. Samtidig forhindres overstrækning af knæhaserne. Knækilen er en blid og behagelig støtte, der sikrer den siddende funktion grundet knækilens anti-slip egenskaber på overfladen. Nedglidning i sengen fra den siddende position bliver ved anvendelse af knækilen betydeligt forsinket.

Fordele

- Har gode støtteegenskaber
- Er nem at rengøre
- Kan rengøres med hospitalssprit eller bare en klud med sæbe