

SAFE-MED


Trykfordelende Produkter



Nr. 114.1
10 cm lang
HMI-nr. 54573



Nr. 114.2
30 cm lang
HMI-nr. 54574

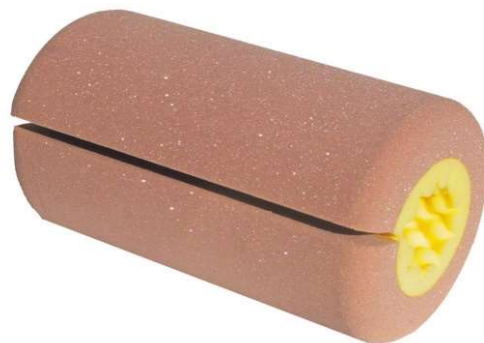


Soft-Cell betræk kan bestilles med VELCRO, men med velcro er kun nødvendigt ved aktiv/livlig borger, da hælløfter som udgangspunkt sidder behageligt og stabilt.



Hælløfter - Hælaflaster

Ved dropfod – støt med pude her!

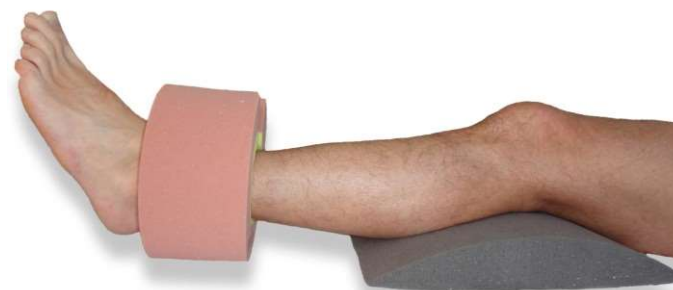

Ved brug af 10 cm hælløfter kan støtte under knæet være vigtig for god balance i trykfordelingen-(gerne m. almindelig pude)

30 cm længde giver fuld underbensstøtte og pude under knæet er ikke nødvendigt. Sammenlignet med en lukket hælstøvle giver SAFE Med Hælløfter luft omkring benet, og den er ikke for varm. Den er meget billigere, er behagelig og mere hygiejnisk i brug, da den kan maskinvaskes mange gange op til 95 grader og kan tørre-tumbles. Det er bedre for brugeren og bedre for økonomien.