
FABORG REHAB TECHNIC



FRT 2500

**Brugervejledning
Platform**

Indholdsfortegnelse

FORORD	3
GENEREL INFORMATION.....	3
SIKKERHEDS INSTRUKTION	3
MILJØ	4
RENGØRNING	4
VEDLIGEHOLDELSE	4
VEJE OPERATION.....	4
GARANTI - ANSVAR.....	4
BORTSKAFFELSE AF VÆGT.....	5
SPECIFIKATION	6
LCD DISPLAY	7
SAMLE INSTRUKTION	8
KEY FUNKTIONS.....	14
OPSÆTNING AF ENHED	15
BRUG AF HOLD FUNKTION.....	17
BRUG AF TARE FUNKTION	17
BRUG AF AUTO TARE FUNKTION	18
BRUG AF BMI FUNKTION	19
INSTRUKTION TIL BRUG AF ADAPTOR	20
SKIFT AF BATTERIER.....	21
FEJL MEDDELSE.....	22

FORORD

Tak for dit valg af FRT/CHARDER MEDICAL produkt. Alle kendetegn ved dette produkt er et nemt og brugervenligt designet. Hvis du har idéer eller problemer så kontakt Faaborg Rehab www.faaborg-rehab.dk eller www.chardermedical.com

GENEREL INFORMATION

Vi anbefaler at bruge vægten på jævnt og hårdt underlag. Ved brug på tæpper og ligende kan der forekomme unøjagtighed.

SIKKERHEDS INSTRUKTION

Før ibrugtagning, læs da venligst brugervejledning igennem. Den indeholder **VIGTIGT** information om installation, vedligeholdelse og rengøring.

Forhandler har ikke erstatningspligt ved forkert brug.

- Når du bruger elektriske komponenter under øget sikkerhedskrav, altid
- I overensstemmelse med de relevante bestemmelser.
- Forkert installation vil ugyldig gøre garanti.
- Vægten er designet til indendørs brug.

Ved problemer, kontakt din lokale CHARDER MEDICAL service partner.

Faaborg Rehab Technic ApS
Smedemestervej 9, 5600 Faaborg.
Tlf. 70205553 eller Fax 70205554
E-mail: fr@faaborg-rehab.dk

MILJØ

- Alle batterier skal afleveres på en genbrugsplads eller til indsamling. **MÅ IKKE** smides i skraldespanden.
- Den optimale temperatur 5°C til +35°C; vil give batterierne den længste levetid.

RENGØRNING

- Vi anbefaler sprit og en ren blød klud til rengøring af vægt.
- Vær venlig ikke at bruge store mængder vand, da det kan ødelægge elektronikken.
- Brug aldrig syre eller base til rengøring.
- Sluk altid for power knappen før rengøring.

VEDLIGEHOLDELSE

Vægten har ikke behov for daglig check. Men alt efter brug og vægt anbefaler vi at check i faste intervaller. Hvis der forekommer unøjagtighed. Kontakt Faaborg Rehab Technic.

VEJE OPERATION

Før læsning af detaljeret instruktion/ brugervejledning, Vær sød at læse guidelines først:

- Vær altid sikker på at display viser 0.0 før brug, hvis ikke tryk da på ZERO knap.
- Vægten er designet til at når stabil vægt er opnået, vil indikator blinke 2 gange, og du kan aflæse vægten.

GARANTI - ANSVAR

Hvis der opstår en fejl eller defekt på vægtenheden er det CHARDER MEDICAL eller Faaborg Rehab ansvar at reparere eller erstatte vægtenheden. Udskiftning af dele er CHARDER ejendom. Er garanti periode er 2 år og starter ved modtagelse. Din faktura er garantibevis. Skulle din vægt kræve service kontakt da Faaborg Rehab eller CHARDER MEDICAL. Erstatning vil ikke blive accepteret hvis fejlen er: Ukorrekt eller upassende brug, ukorrekt installation af ejer eller 3 part, ukorrekt brug af kemikalier, elektrisk interferens eller fugtighed i vægtenheden.

Hvis klima overholdes er det en perfekt vægtenhed der vil være fri for fejl.

BORTSKAFFELSE AF VÆGT


Dette produkt må ikke smides i skraldespanden men afleveres på en genbrugsstation.

Du kan få flere oplysninger ved henvendelse til Faaborg Rehab.

SPECIFIKATION

Model	FRT 2500
Kapacitet	300kg x 0.1kg
Veje enhed	kg (certificeret)
LCD Display	1.0 inch LCD display med 5 1/2 cifre
Dimension	Højde: 1160 mm Platform størrelse: 550 x 550 mm
Key Funktion	ON/OFF, ZERO, PRINT, BMI, HOLD, PRESET TARE, SEMI AUTO TARE, UNIT, CLEAR, ENTER, 0~9
Power	Batteri □ AAA Batteri x 6 ; genopladelig Adaptor □ 9V 100mA ; 15V 300mA
Operation Temperatur	5. / 35.

LCD DISPLAY

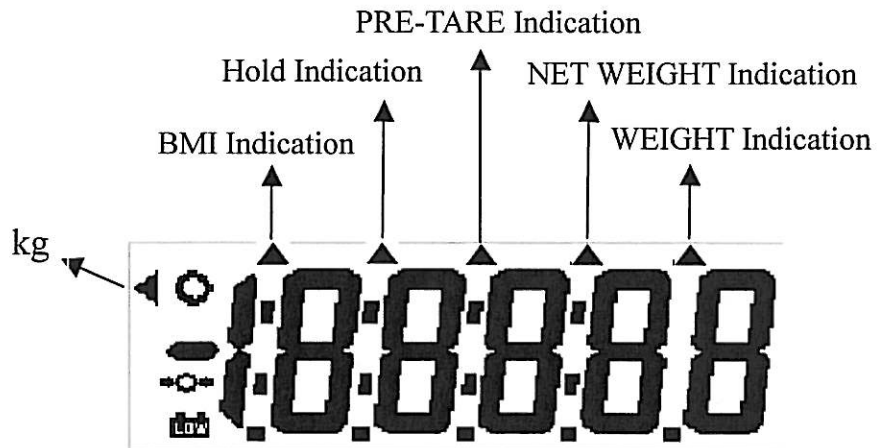


Beskrivelse:

Stabil symbol: Når burger star på vægten og vægten er stabil

Mindre vægt: Vægt under 0


0 symbol: Vægten er 0 stillet

Lav batteri: Spændingen er for lav til måling

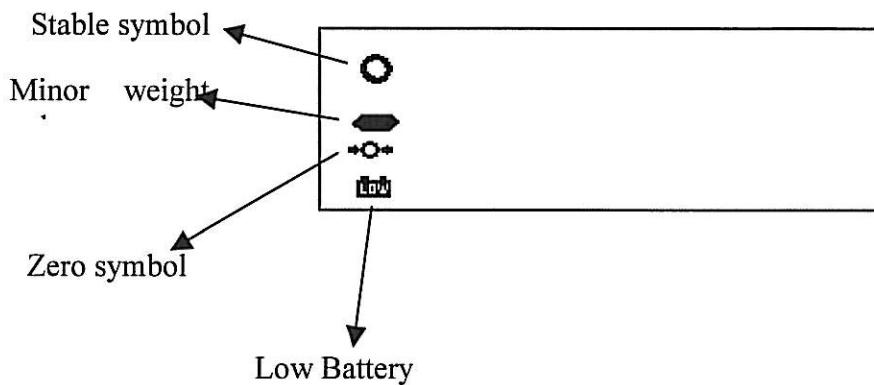


SAMLE INSTRUKTION



Fastgør platform og søjle med display se billede

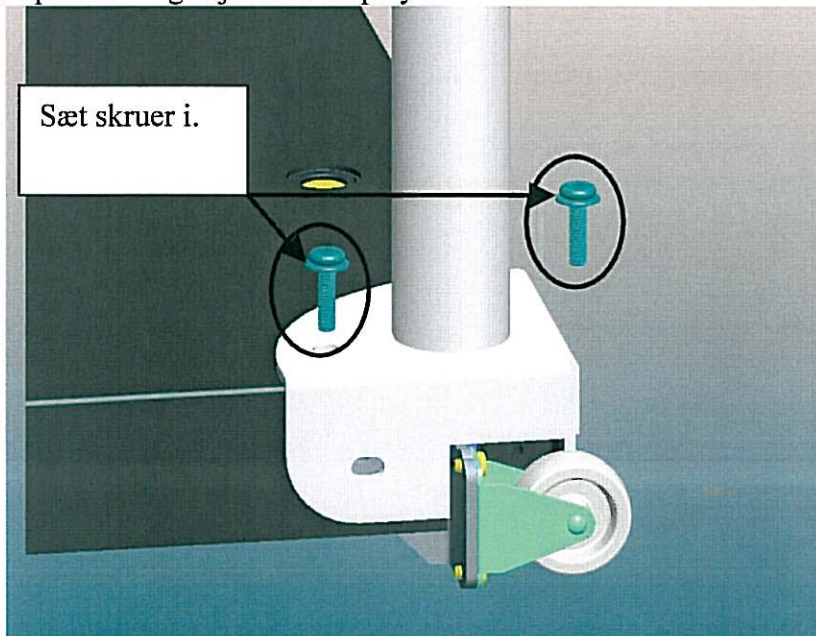

Fastgør platform og anden søjle

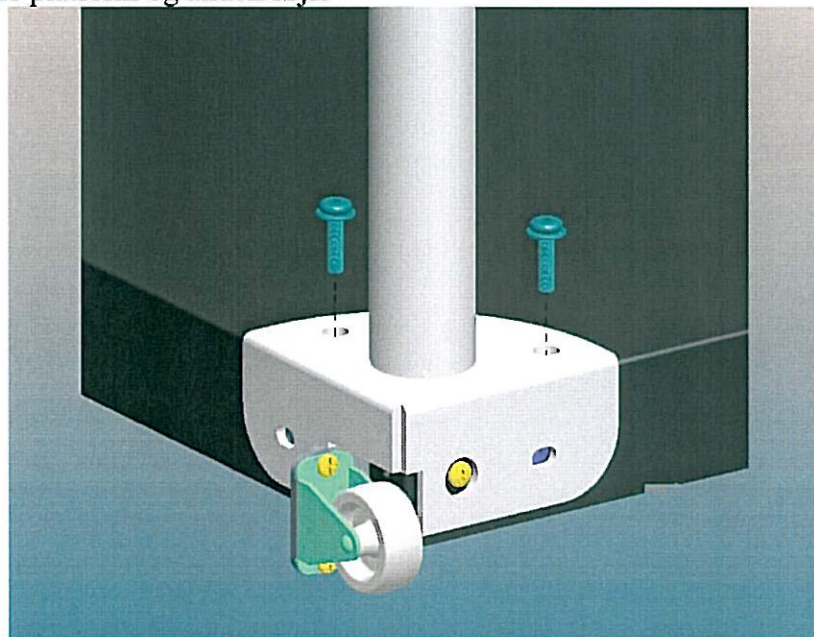


Fastgør platform og 3 søjle

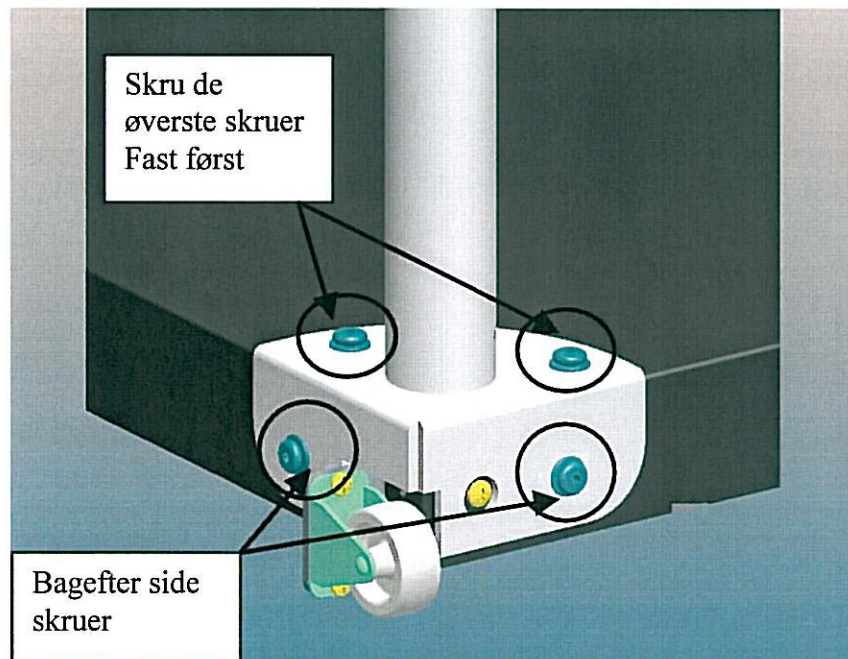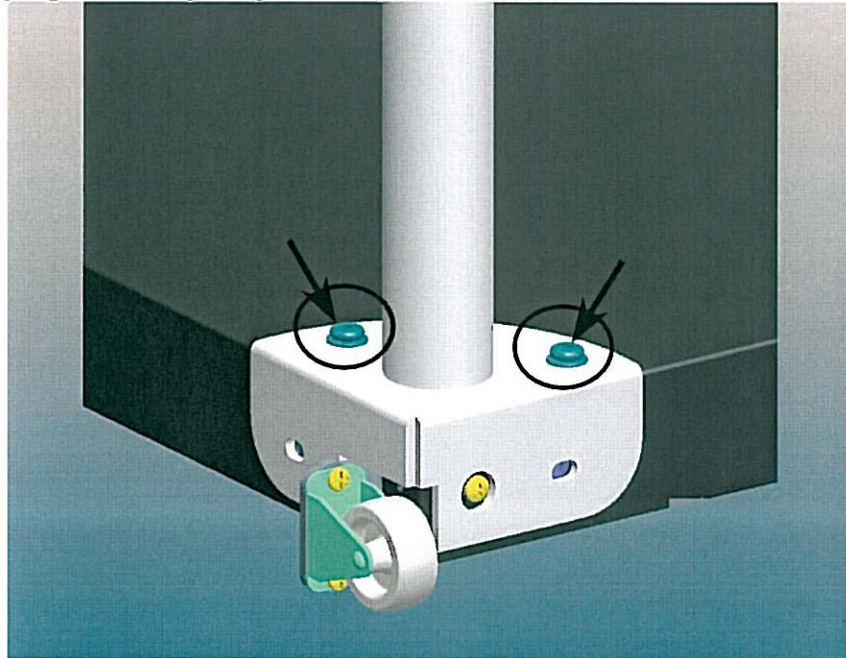


Alle søjler er fast gjort




Samle gelænder

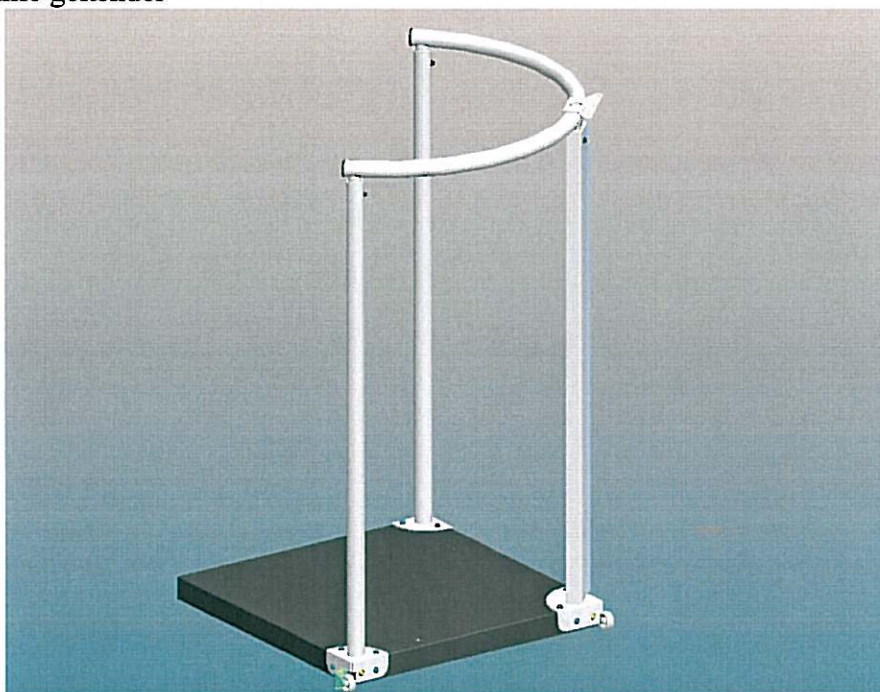



Fast spænd gelænder til søjle med skruer

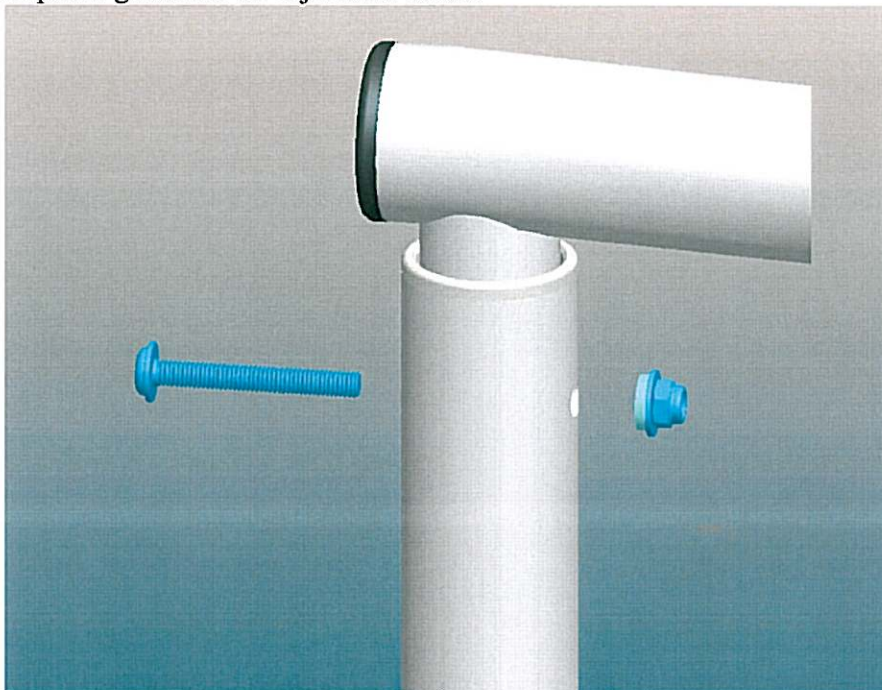


OBS: Skruer I gelænderet skal være helt fastspændt

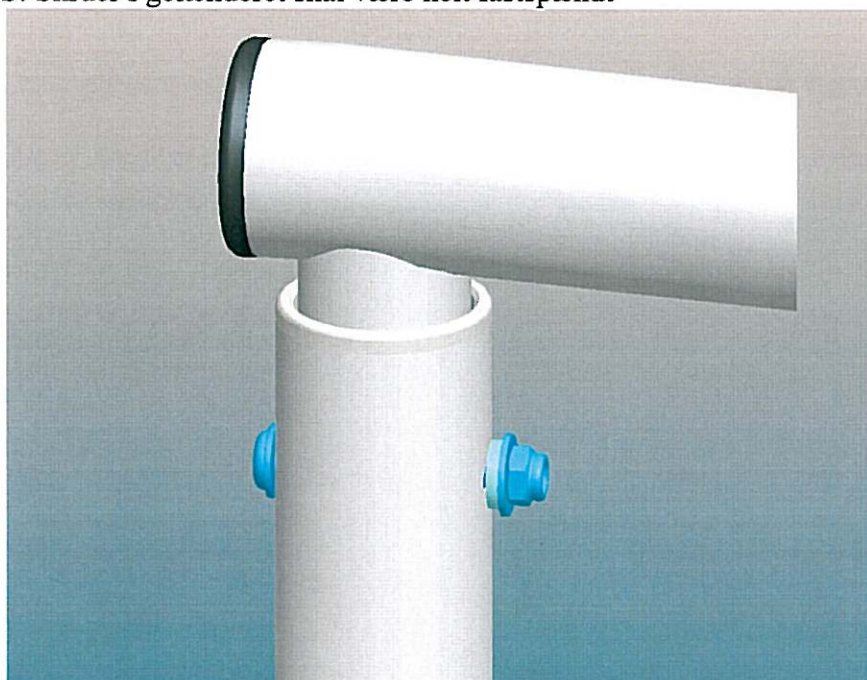


Sæt display fast med skruer

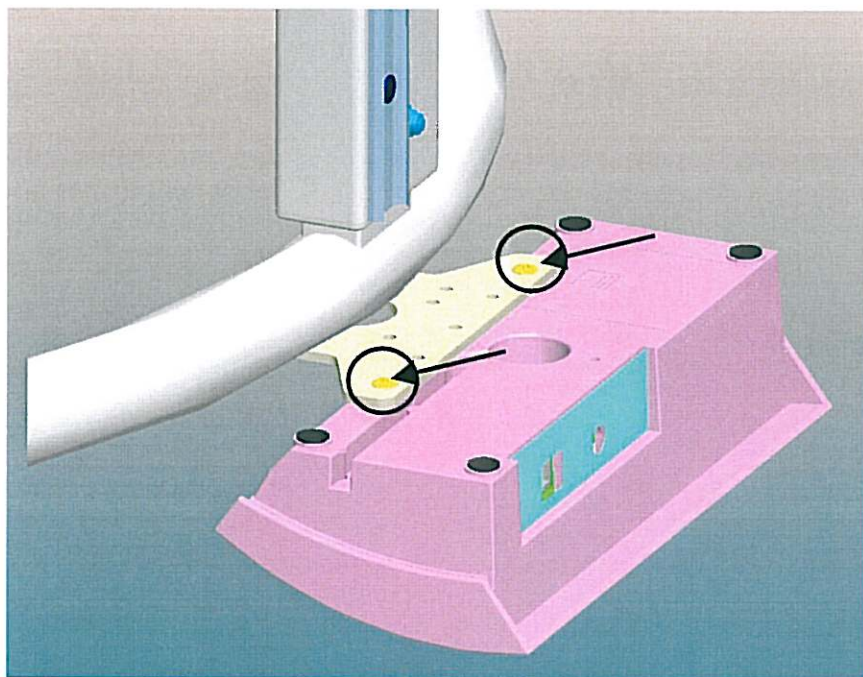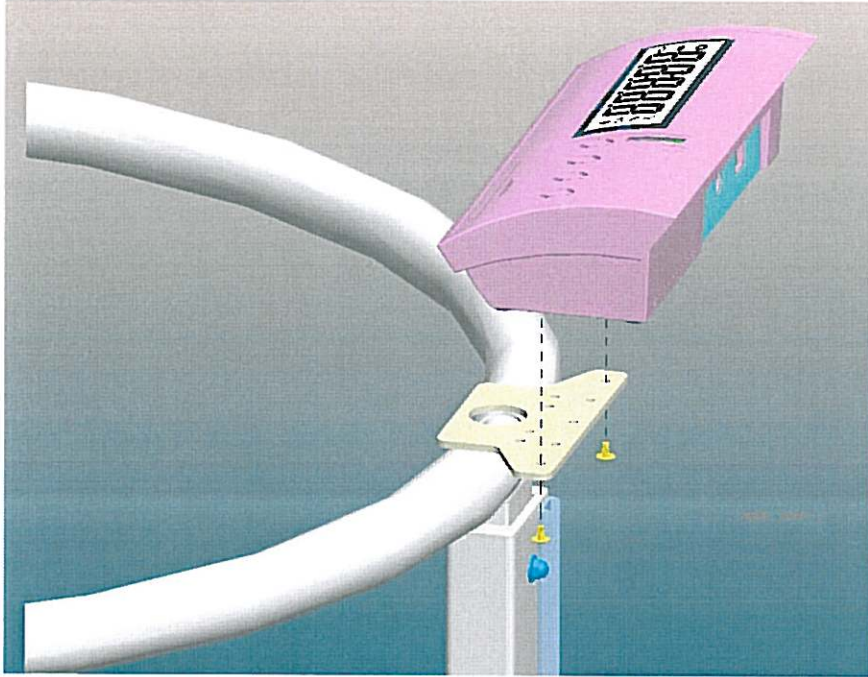

Er nu klar til brug

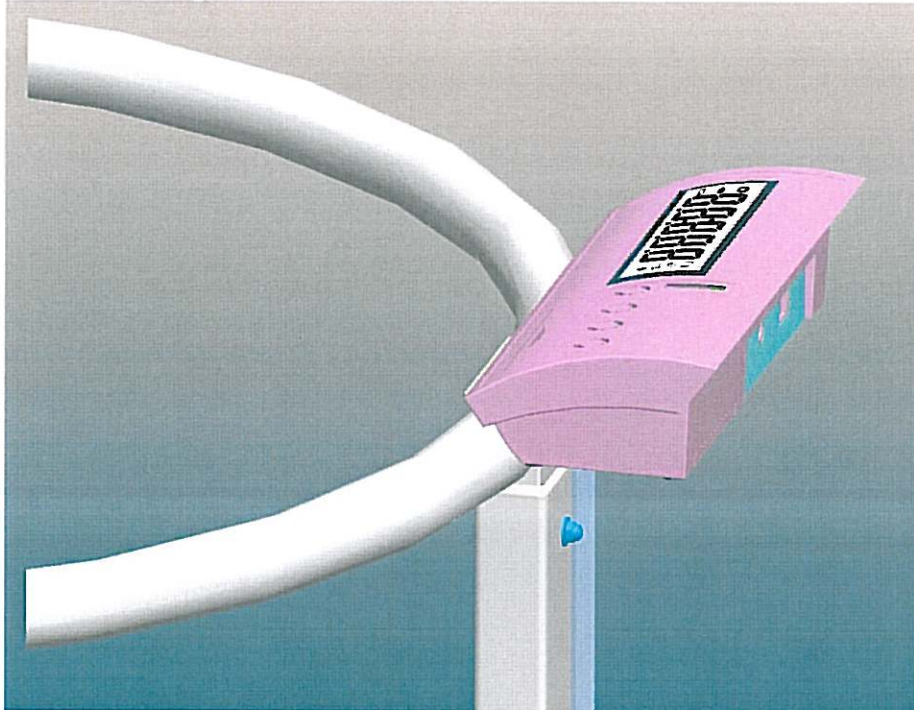

KEY FUNCTIONS

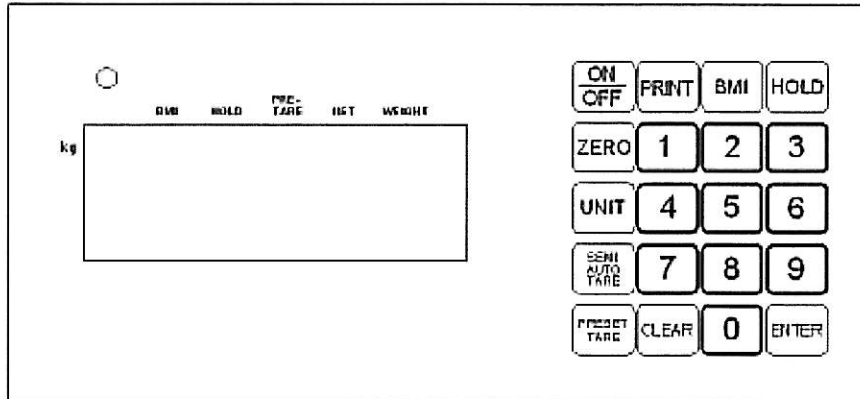

Beskrivelse:

- **ON/OFF**: Tryk for at tænde og slukke
- **ZERO**: Tryk for at 0 stille
- **BMI**: Tryk for at kalkulere Body Mass Index.
- **HOLD**: Tryk for at låse vægt værdi.

Fjern vægt og tryk på HOLD igen for at deaktivere holde funktion.

- **PRESET TARE**: Opsæt mål vægt for TARA før veje proces.
- **SEMI AUTO TARE**: Tara vægt under veje proces
- **UNITS**: Muligt at vælge mellem metriske eller britiske måling.
- **CLEAR**: Slet cifre ved forkert nummer (0 ~ 9).
- **ENTER**: Tryk for at stoppe eller forsætte.
- **PRINT**: Når RS232 forbindes til printer eller PC, skal du trykke på denne tast for at udskrive højde, vægt og BMI
- **KEY PAD 0 ~ 9**: Tryk på tal tasterne, mens indstilling af højde og vægt

OPSÆTNING AF ENHED

➤ AUTO-OFF TIME SETUP

Til opsætning af automatisk slukning når den ikke er i brug

➤ BUZZER ON/OFF SETUP


Dette gør det muligt af tænde og slukke for opsætning af buzzer

Auto off time: 120 sec/180 sec/240 sec/300 sec/off

Buzzer: On/Off


OPERATION FLOW

KEY DIREKTION

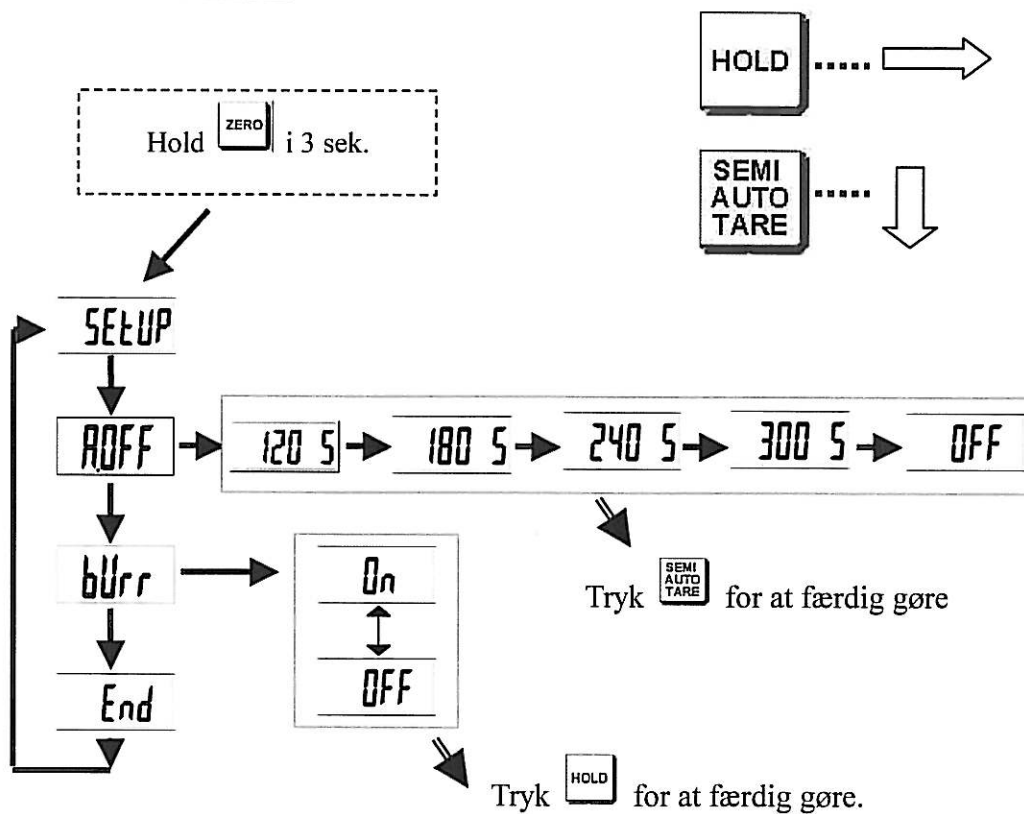



F.eks.: Setup 180s AUTO-OFF time og Buzzer OFF

1.

Tryk  i 3 sekunder for at ændre i setting mode.


2.

Tryk  for at ændre Auto-Off menu når du ser  symbol.


3.

Tryk  for at ændre til  nu vil Auto-Off være 180s.

4.

Tryk  for at bekræfte og vende tilbage til  menu.

5.

Tryk  for at gå til  menu.

6.

Tryk  for at ændre Buzzer menu.


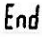

7.

Tryk  for at sætte buzzer  eller .


8.


Tryk  for at bekræfte ON/OFF setting.

9.

Tryk  for at gå til  og tryk  for at gemme settings.

BRUG AF HOLD FUNKTION

1. Tryk  for aktivering af lås og pilen vil begynde at blinke **(figure1.)**

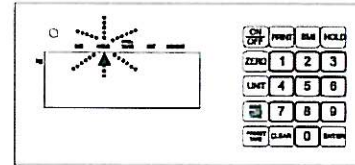


(1)

2. Begynd veje process.
3. Vægten vil låse din vægt, når stabil symbol Kommer frem **(figure2.)**





(2)

4. Check og gem resultat.
5. Tryk  for at deaktiverer lås.


Deaktivering og aktivering af veje låsefunktion, må kun udføres ved at trykke på HOLD knappen.


BRUG AF TARE FUNKTION


1. Tryk  for at tænde eller slukke.

2. Tryk  for at aktivere denne funktion.

3. LCD display viser  er vægten klar til indtastning af tara





4. Indtast den vægt, du ønsker at fratække f.eks.:10kg 

5. Tryk  når indtastning er færdig.









6. Du har nu 10kg som din tara vægt. 

7. Vejer 70kg og 60kg nettovægt.

BRUG AF AUTO TARE FUNKTION

1. Tryk  for at tænde eller slukke.
2. Når der vises  (zero) og bipper 2 gange, kan der placere f.eks tøj som du ønsker at tære sin vægt.
3. Tryk  for at gemme vægten
4. LCD display vil gå til  (zero).
5. Placere personen på vægten
6. Det viste resultat er Nettovægten af personen. Vægten af tøjet er fratrukket på step 3.


BRUG AF BMI FUNKTION

1. Tryk  for at tænde og slukke
2. Du skal kende højden af den person, der er vejjet, så det er bedst at male højden før vejning.
3. Forsæt vejning
4. Når vægten er stabil  Tryk  for at forsætte
5. LCD display vil derefter skifte til visning af højde .
6. Vægten fra personen er nu gemt i hukommelsen.
7. Højden på personen kan nu indtaste  (f.eks.: 186cm. Højden skal være i centimeter).
8. Tryk nummerisk key for at komme til næste cifre.
9. Når det rigtige tale er indtastet for højde, tryk  for at afslutte.
10. Displayet vil nu vise BMI aflæsning . .
11. Tryk  for at gå ud af B.M.I. mode.

INSTRUKTION TIL BRUG AF ADAPTOR

Hvis **Lo** vises på LCD displayet, bør du skifte til adaptor.


Isæt stikket på bagsiden. (se figur)

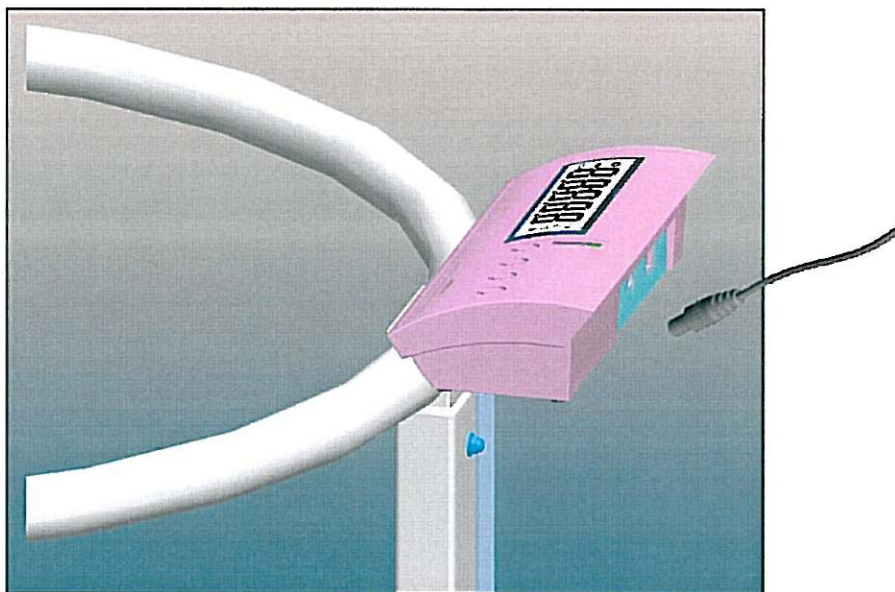

ADVARSEL :


Kom altid adapter i vægten først og så i stikkontakten.
Og tag altid adapter ud af stikkontakten først også vægten.

SKIFT AF BATTERIER

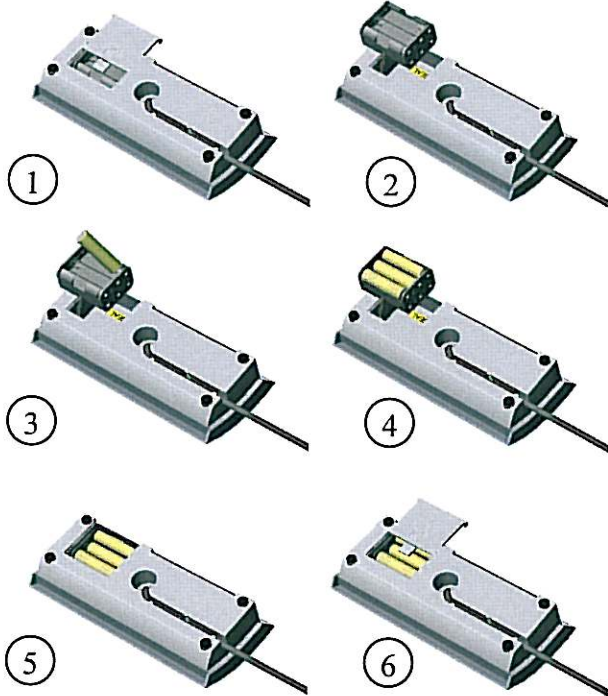

Udtagning
af
batterier

Isætning af
batterier

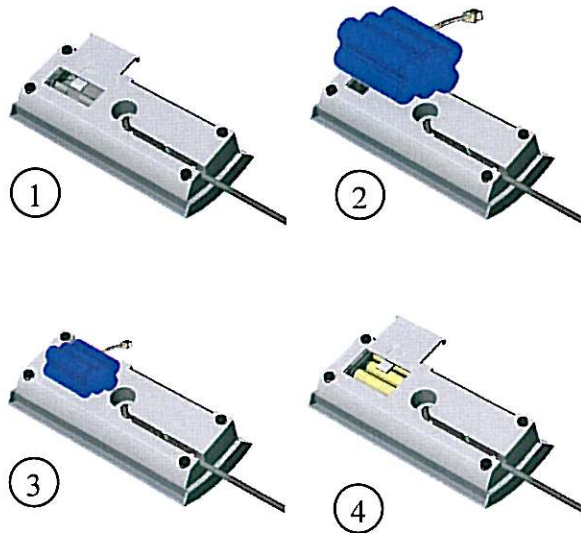

FEJL MEDDELSE

■ Lav batteri niveau:

Denne advarsels **Lo** viser lavt batteri Niveau. Sæt adapter i stikkontakt eller Isæt nye batterier.

A rectangular box containing the error code 'Lo' in a stylized, blocky font. A small 'ca' symbol is visible in the bottom left corner of the box.

■ For lav:

Vægtenheden er for lav til måling, prøv igen eller tilkald din lokale service partner:
Faaborg Rehab Technic

A rectangular box containing the error code 'ErrL' in a stylized, blocky font.

■ For høj til måling:

Vægtenheden er for høj til måling, prøv igen eller tilkald din lokale service Partner:
Faaborg Rehab Technic

A rectangular box containing the error code 'Err' in a stylized, blocky font.

■ EEPROM fejl :

Der er program fejl på vægten.
Tilkald din locale service partner
Faaborg Rehab Technic

A rectangular box containing the error code 'ErrP' in a stylized, blocky font.



Manufacturer's Declaration of Conformity

This product has been manufactured in accordance with the harmonized European standards, following the provisions of the below stated directives:

Electro Magnetic Compatibility Directive 2004/108/EC
Low Voltage Directive 2006/95/EC

only Medical Approval Scale is in conformity with
Medical Directive 93/42/EEC

FCC CLASS B Declaration of Conformity


This device complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules

Authorized EU Representative:

EC	REP
----	-----

 ealth Oy
Ilinmaenkuja 8,
FI-90230 OULU,
Finland

Manufactured by:

Chirder Electronic Co., Ltd.
 103, Kuo Chung Road, Dah Li City,
Taichung Hsien, Taiwan (R.O.C.)

FDA no.: D051882 / 3007074

IN-1045 [8044D]
