

Brugsanvisning Hårvaskering med 2 luftkamre



- 1) Pust hårvaskeringen op med munden, eller en pumpe - brug IKKE kompressor
- 2) Læg hårvaskeringen under brugerens hoved
- 3) For at øge brugerens bekvemmelighed, lægges evt. et håndklæde mellem brugerens skuldre og hårvaskeringen
- 4) Anbring afløbsslangen mindst 30 cm. højere end den forventede vandstand
Bemærk hårvaskeringens afløb i bunden
- 5) Vask håret som normalt
- 6) Rengør håret grundigt, og lad vandet løbe ud i et afløb
- 7) Lad hårvaskeringen tørre grundigt, inden den foldes sammen

Materiale:

Vinyl

Mål:

A: Dybde = 60 cm.

B: Bredde = 66 cm.

C: Højde = 15 cm.

D: Afløbsslange = 118 cm.

Rengøring:

Rengøring kan foretages med alle gængse- dog ikke ætsende rengøringsmidler og desinfektionsmidler, såsom hospitalsprit eller Terralin og lignende