

## Brugsanvisning Derby badekarsbræt



### Montering med beslag:

- 1) Sæt plastbeslagene i hver ende af undersiden af badekarsbrættet, gennem de yderste riller, med de medfølgende skruebolte og møtrikker

### Montering med ben:

- 1) Fastgør de to ben i hver ende gennem de yderste riller i badekarsbrættet
- 2) Læg badekarsbrættet over badekarret, og justér beslagene, så de passer
- 3) Undgå evt. overhæng
- 4) Stram vingemøtrikker og ben
- 5) Sørg for at badekarsbrættet er stabilt

### Rengøring:

Kan foretages med sæbevand samt alle gængse- dog ikke ætsende og slibende rengøringsmidler

**Maks. brugervægt 190 kg.**