

Ekamed lejringspuder

TIL UNDERSTØTTELSE I TERAPIEN / PROFYLAKSE

Håndbog & lejrings- anvisning.

A/D-SURCON lejringspuder til understøttelse i terapien.

Med denne serie af lejringspuder fra *ekamed* får man et bredt sortiment af puder, der dækker de flestes behov for en forbedret støtte og aflastning. Med få lejringspuder, er det muligt at få en god og stabil positionering af brugeren i forbindelse med forebyggelse, pleje eller ved behandling af f.eks. vævs skader, tryk sår eller til understøttelse ved aflastning i en ryg lejringsposition bl.a. i forbindelse med lunge- og luftvejsproblemer.

Lejringspuderne er også velegnet til at understøtte nervøse/urolige personer da puderne giver en beroligende effekt samt en øget liggekomfort.

Fordele:

- Tilpasser sig patientens morfologi, da puden er blød og formstabil på grund af fyldets blandingsforhold.
- Bielastisk PU betræk
- Behageligt materiale
- Fugt og varme ledes bort
- Åndbart betræk
- Ugennemtrængeligt for over for blod, urin, mv.
- Flammehæmmende materiale
- Ekstra betræk kan fås, også betræk i f.eks. Jersey
- Mulighed for nogle puder med inder pose og yderbetræk med lynlås
- Mulighed for fremstilling af specielle puder efter ønske!

For nærmere information, kontakt venligst *SURCON Care Line ApS*.


Denne manual beskriver nogle af de vigtigste indsættelses muligheder med de forskellige lejringspuder.

Lejrings- anvisning ved Decubitus profylakse

Hvis man er sengeliggende, immobil eller har svært ved at kunne bevæge sig ved egen hjælp (forandre sin kropssposition), er man i risikozonen for at udvikle tryk sår, også hvis der forligger div. sygdomme som f.eks. stofskifte sygdomme, dårlig blodcirkulation m.v. Det er normalt for alle mennesker selv at kunne forandre sin ligge eller siddeposition, derfor er det meget vigtigt at erstatte den mangelfulde fysiske aktivitet på anden vis, såfremt mobiliteten er mangelfuld!

Ved at omlejre brugeren efter et planlagt tidsinterval, afhængig af brugerens tilstand, kan man understøtte den manglende fysiske aktivitet. Til dette anvendes specielle lejringspudder fra Surcon. Det skal understreges, at det er også vigtigt at brugeren ligger på en god trykaflastende madras- eller en vekseltryks madras tilpasset den aktuelle tryksårskategori.

Kontakt os på 8655 7045 for yderlig information vedr. specielle trykaflastende madrasser eller vores innovative automatiske vendesystem ”**ekamove**” fra firmaet *ekamed*.

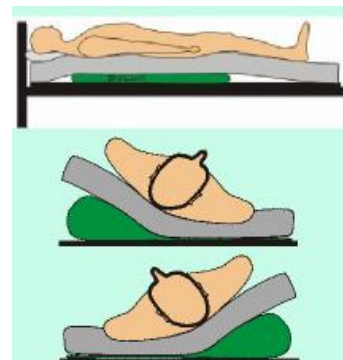


Lejrings- anvisning ved Decubitus profylakse

30° lejrning.


30° lejrning anses for den letteste men også en god måde at lejre en bruger på, da denne type lejrning kan udføres alene af en hjælper. Desuden er det også den bedste lejringsvinkel, såfremt der er tale om en cachexia person. Personer med lungeproblemer henvises til en speciel anvisning fra læge, fysioterapeut m.fl.

30 gr. lejrning er også den mindst risikable lejrning - hvis udført korrekt - da hverken trochanter eller kors ben her bliver belastet så hårdt.


Vær opmærksom at brugeren ligger på en god madras, vælg en madras, der passer til brugerens sygdomsbillede.

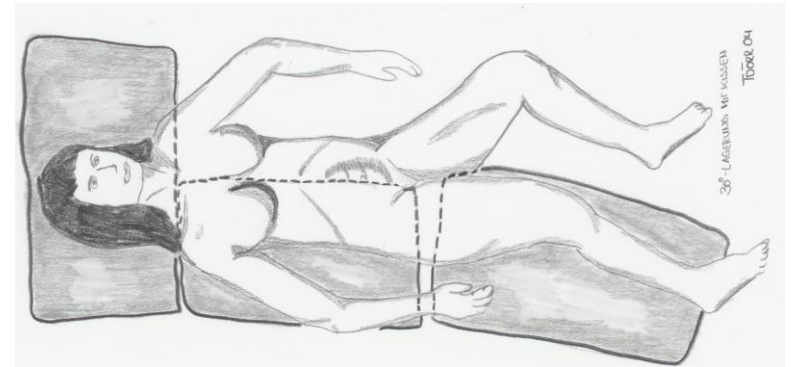

Lejrings- anvisning ved Decubitus profylakse

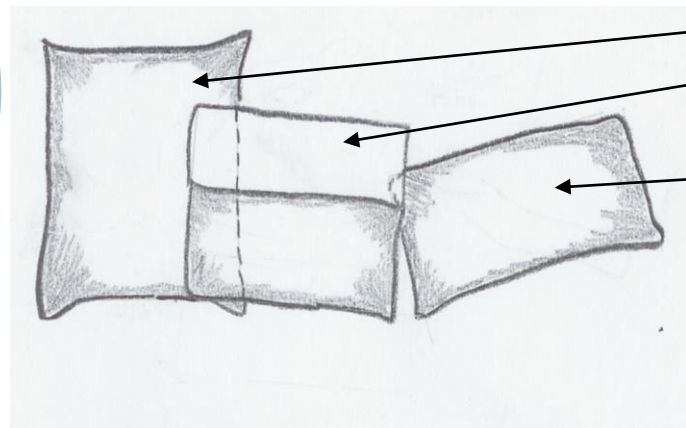

- 45 x 80cm. lejringspude, nr. 4155-05, HMI nr. 55580.
- 85 x 85cm. ryg pude med fane (den fyldte del: 40x85cm.) nr. 4158-05, HMI nr. 55583.
- 45 x 80cm. lejringspude, nr. 4155-05, HMI nr. 55580.

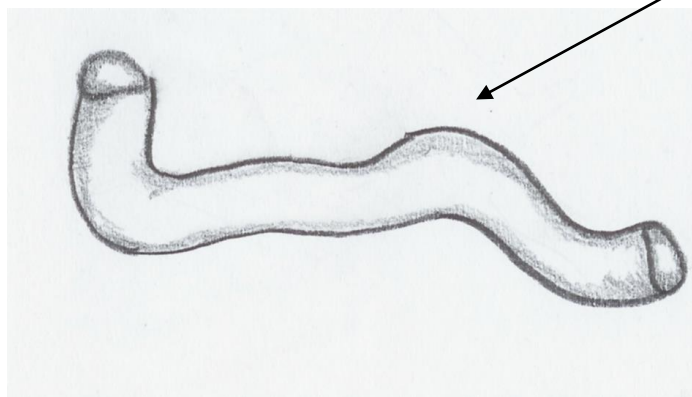



- 30 x 260cm. slangepude, ”Sø-slange” nr. 4164-05, HMI nr. 55598 – **også velegnet til 135 graders lejrning.**
- Der kan også indsættes følgende puder:
 - Slangepude 30 x 200cm. nr. 4163-05, HMI nr. 55597
 - Lejringsrulle 20 x 100cm. nr. 4160-05, HMI nr. 55594
 - Lejringsrulle 20 x 200cm. nr. 4161-05, HMI nr. 55595
 - Lejringsrulle 20 x 260cm. nr. 4162-05, HMI nr. 55596
 - U-form pude, L: 160cm. nr. 4165-05, HMI nr. 55592
 - U-form pude, L: 190cm. nr. 4166-05, HMI nr. 55593

Lejrings- anvisning ved Decubitus profylakse


Halebens regionen og hælene er et af de mest sårbare områder, da disse steder udsættes for et kraftigt tryk, derfor dannes netop her oftest tryksår eller trykmærker. Specielt på disse kropsdele er det vigtigt at lave en effektiv forebyggelse / aflastning.

135 graders lejrning.


Ved 135 graders lejrning aflastes halebens regionen samt hælene. Her vil Slangepuden være en ideel løsning.

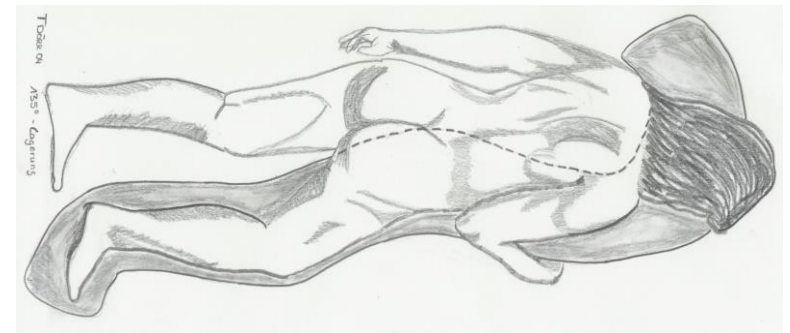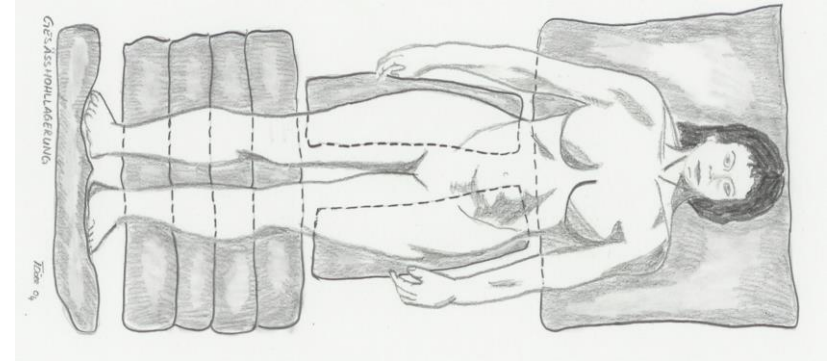

Lejrings- anvisning ved Decubitus profylakse

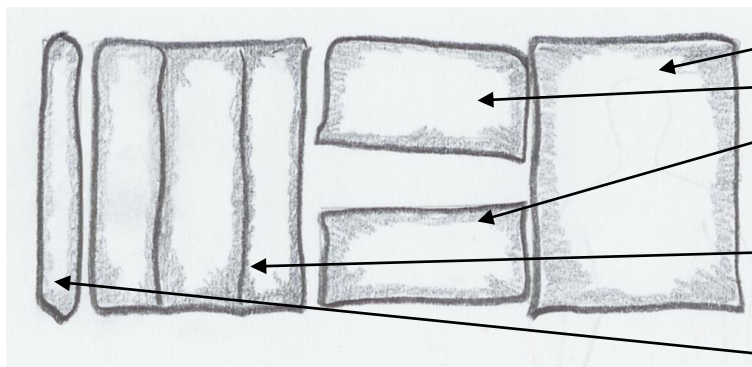

- 45 x 80cm. lejringspude, nr. 4155-05, HMI nr. 55580.
- 40 x 75cm. lejringspude, nr. 4154-05, HMI nr. 55578.
- 40 x 75cm. lejringspude, nr. 4154-05, HMI nr. 55578
- 80 x 80cm. universal pude med 4 kamre, nr. 4157-05, HMI nr. 55582
- 45 x 80cm. lejringspude, nr. 4155-05, HMI nr. 55580

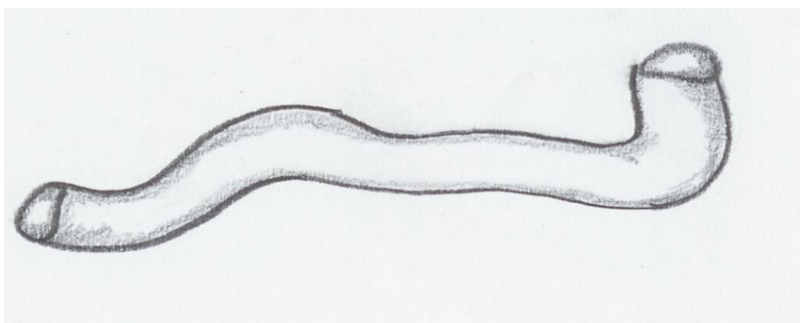



30 x 260cm. slangepude, nr. 4164-05, HMI nr. 55598

Lejrings- anvisning ved Hemiplegi


Halvside lammelse.

Ved lejrning på den svage side stimuleres personens fornemmelse for denne side, og selve stimulationen vil kunne reducere forekomsten af kontraktür og forebygge tryk sår.


Det er vigtig at personen efterfølgende omlejres på den anden side efter et nærmere **individuel fastlagt tidsinterval.**

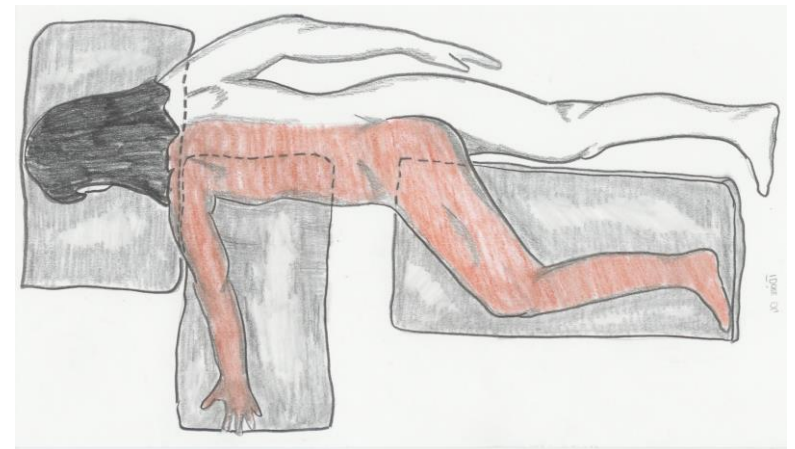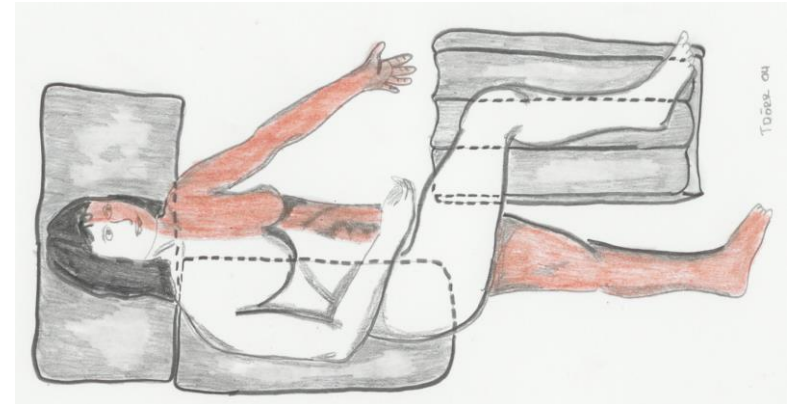

Lejrings- anvisning ved Hemiplegi

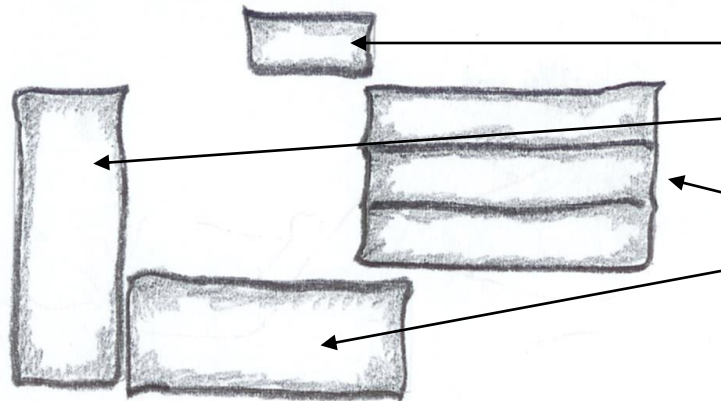


- 30 x 40cm. lejringspude, nr. 4152-05, HMI nr. 55579.
- 40 x 95cm. lejringspude, nr. 4156-05, HMI nr. 55576.
- 80 x 80cm. universalpude med 4 kamre, nr. 4157-05, HMI nr. 55582
- 50 x 85 x 6cm. flad lejringspude, nr. 4159-05, HMI nr. 55584.

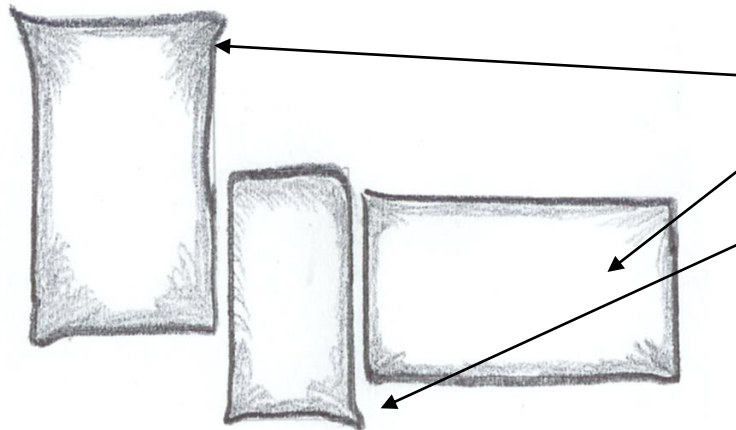


- 50 x 85 x 6cm flad Lejringspude, nr. 4159-05, HMI nr. 55584.
- 50 x 85 x 6cm. flad Lejringspude, nr. 4159-05, HMI nr. 55584.
- 45 x 80cm. lejringspude, nr. 4155-05, HMI nr. 55580

Lejrings- anvisning ved Hemiplegi

- Ved halvside lammelse skal kroppen på den pågældende person lejres i forhold til central-akselen, med henblik på at støtte den berørte side. Pude lægges under hoved og den venstre arm støttes (Lammelse i venstre side, se tegning).
- Hvis man er i siddende stilling understøttes også under knæene med en universalpude.

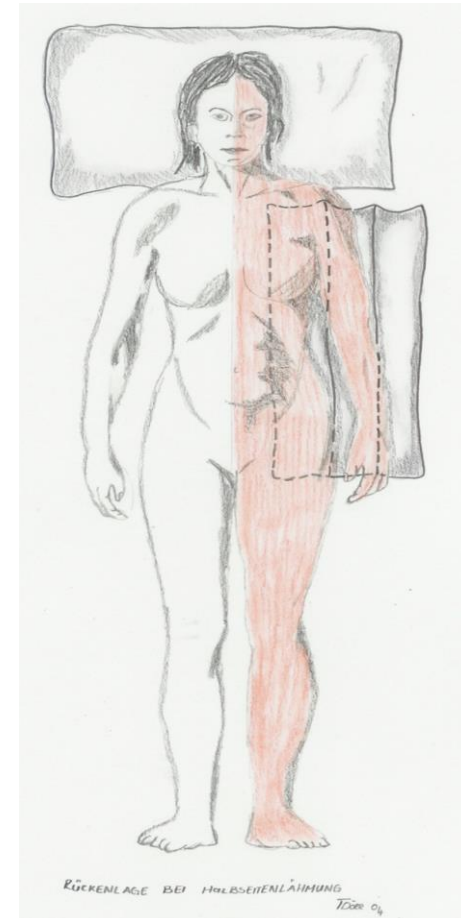

Lejrings- anvisning ved Hemiplegi


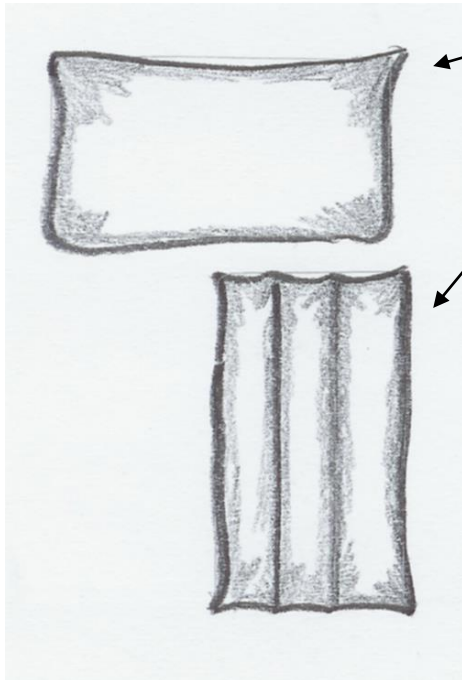


- 45 x 80cm. Lejringspude, nr. 415505, HMI nr. 55580.
- 80 x 80cm. Universal pude med 4 kamre, nr. 415705, HMI nr. 55582.


- **Lejringspuder til f.eks. Hemiparese lejrning kan også købes i et sæt:**
 - 30 x 40cm. Lejringspude, nr. 4152-05, HMI nr. 55579.
 - 40 x 75cm. Lejringspude, nr. 4154-05, HMI nr. 55578.
 - 45 x 80cm. Lejringspude, nr. 4155-05, HMI nr. 55580.
 - 40 x 95cm. Lejringspude, nr. 4156-05, HMI nr. 55576.
 - 80 x 80cm. Universal pude med 4 kamre, nr. 4157-05, HMI nr. 55582.
 - 50 x 85 x 6cm. Flad Lejringspude, nr. 4159-05, HMI nr. 55584.

Lejrings- anvisning ved Pneumoni profylakse.

- De 3 viste positioneringer (side 12 og 13) må kun ses som en tidsbegrænset lejrning. Lejringsmåden er særligt velegnet til at understøtte åndedrættet ved ryg leje. Lejrings metoderne medvirker til en udvidelse af lungerne og forbedrer respirationen ved luftvejsinfektioner.
- Disse lejringsmetoder kan også anvendes til at frilægge følsomme områder i forbindelse pleje af tryk sår eller ved aflastning af dele af skulblad og rygsøjle området.

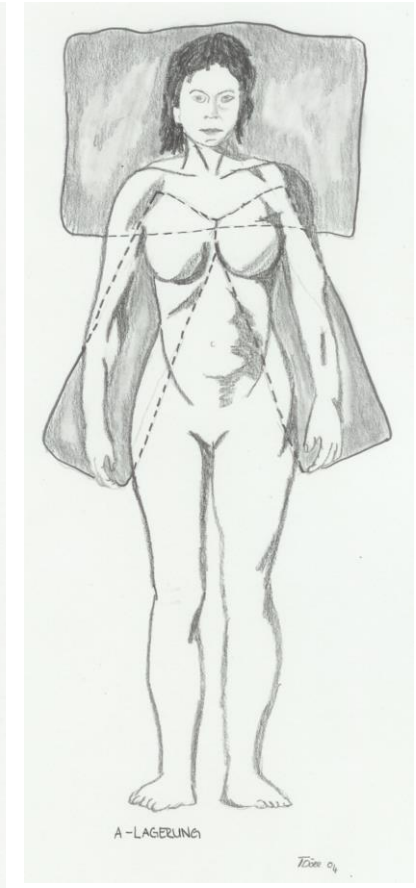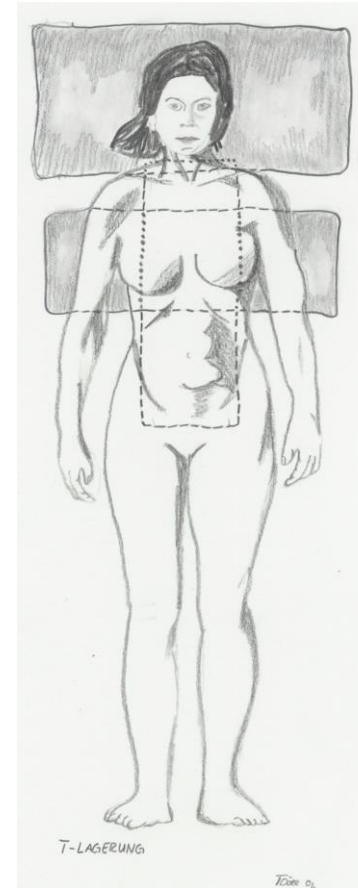

Lejrings- anvisning ved Pneumoni profylakse

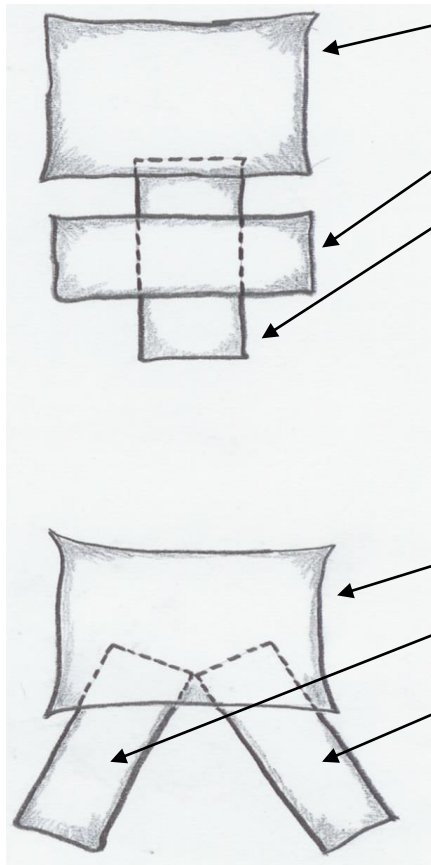


- 45 x 80cm. Lejringspude, nr. 4155-05, HMI nr. 55580.
- 24 x 73cm. Lejringspude, nr. 4153-05, HMI nr. 55581.
- 24 x 73cm. Lejringspude, nr. 4153-05, HMI nr. 55581.

- 45 x 80cm. Lejringspude, nr. 4155-05, HMI nr. 55580.
- 24 x 73cm. Lejringspude, nr. 4153-05, HMI nr. 55581.
- 24 x 73cm. Lejringspude, nr. 4153-05, HMI nr. 55581.


Lejrings- anvisning ved Pneumoni profylakse

- Efter operative indgreb i ryg regionen kan en af disse 3 lejrings typer indsættes til en varierende støtte- og aflastning.

Følgende placering af puder hjælper med til at øge en udvidelse af lunger nes nedre område, ligeledes aflastes dele af skulderblad og ryggrad.

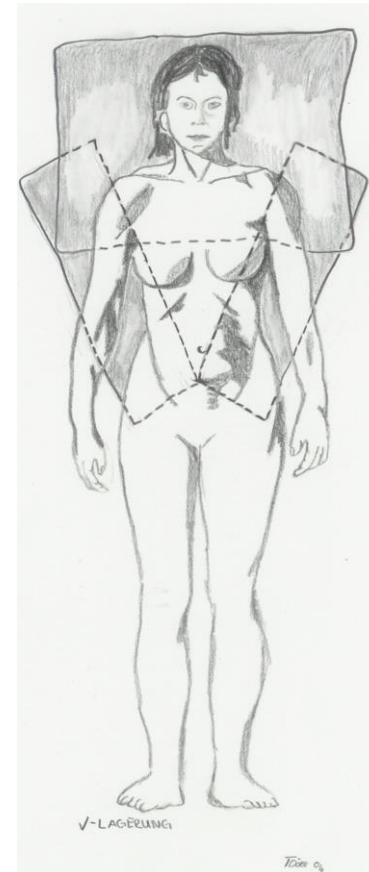

Lejrings- anvisning ved Pneumoni profylakse

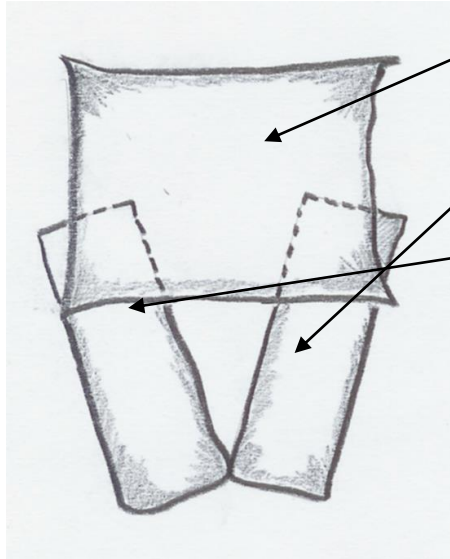

- 45 x 80cm. lejringspude, nr. 4155-05, HMI nr. 55580.
- 24 x 73cm. lejringspude, nr. 4153-05, HMI nr. 55581.
- 24 x 73cm. lejringspude, nr. 4153-05, HMI nr. 55581.

Til A-T-V lejringen kan man udover puden på 45 x 80cm. supplere med 2 stk. 24 x 73cm. som anvist på tegningen.



Flad lejringspude



U-formet lejringspude



Puder til micro-lejring.



Ryg pude med lejringsfane.



Lejringspude (fås i flere dimensioner).



Slangepude.



Universalpude



Lejringsrulle

- Vores standard lejringspuder består af fyldet af 50% Krøyer kugler og 50% skum-flokker. Betræk: bi-elastisk PU betræk.
- **Speciel puder kan bestilles.** Fyld kan individuelt tilpasses. Du kan også bruge en fyldning (W = blød) i 100% skum flager eller en 100% Krøyer kugler fyldning (F = Fast). I øvrigt kan der fremstilles puder i specielle mål efter kundens ønske. Programmet giver mulighed for en optimal udnyttelse af de forskellige lejringsmåder. Levering af standard puder: Fra dag til dag. Specie fremstillet puder ca. 14 dage.
- **Rengøring:** Vaskbar ved 60°. Almindelig rengøring kan foretages ved aftørring med en klud. Brug gængse rengørings- og desinfektionsmidler.
AFTØRRING KAN evt. FORETAGES MED Wet Wipe Universal, Wet Wipe Chlorine Disinfection, Wet Wipe Triamin Disinfection og Wet Wipe Ethanol Disinfection
DESINFEKT. SERVIETTER/KLUDE .

Aftageligt PU betræk kan vaskes op til 95° C. Følg anvisningen på label der er fastgjort til betrækket, f.eks. kan PU betræk vaskes ved 95°C – PUROTEX ved 60° C.

Produktliste, Lejringspuder

Ekamed lejringspuder.

Forhandler: Surcon. Tlf.: 86 55 70 45 Fax.: 86 55 71 45

CE
Producent: Ekamed Tyskland

Type. Mål. Best.nr/HMI nr.
Betræk: Smudsafvisende bi-elastisk PU materiale, Fyld: 50% polystyrenkugler og 50% PU-skumflokker.

Beskrivelse Okt. 2021
Advarsel ! Rygning forbudt.

Puderne er med dobbelt søm!



LEJRINGSPUDE

40 x 95cm - H: 5-9cm.	4156 05 .. HMI nr. 55576
40 x 75cm - H: 6-11cm.	4154 05 .. HMI nr. 55578
** 30x40cm - H: 6-8cm.	4152 05 .. HMI nr. 55579
** 45x80cm - H: 8-12cm	4155 05 .. HMI nr. 55580
24 x 73cm - H: 4-8cm.	4153 05 .. HMI nr. 55581
60 x 45cm - H: 6-11cm.	4175 05.. HMI nr. 83758

Disse puder fås i forskellige størrelser og giver mulighed for at finde en lejringspude, der passer netop til den ønskede lejrning, herunder ATV- lejrning.



UNIVERSALPUDE 4 kamre

** 80 x 80cm	4157 05 .. HMI nr. 55582
--------------	--------------------------

Denne pude kan bl.a. rulles og tilpasses til mange formål. Indsættelse: **alle kroppsdele** samt hæl/knæ, div. aflastninger, støtte af fødder og hæl m.v.



RYGPUDE med LEJRINGSFANE

** 85 x 85 x 10/12cm	4158 05 .. HMI nr. 55583
----------------------	--------------------------

Denne pude er velegnet til sideleje i 30° position, og pudens fane, der placeres under selve kroppen, bevirker at brugeren "fikseres" i den ønskede position. Puden ligger stabil. Den fyldte del er 40 x 85 cm.



Flad lejringspude

** 50x85x6cm	4159 05 .. HMI nr. 55584
--------------	--------------------------

Denne helt specielle pude er meget velegnet til støtte under ben ved sidelejrning



Pude til MICROLEJRING

** Disse bliver anvendt til Bobath-Lejrning.	
(Hmi nr. 55585 er samme pude.)	
12 x 28cm H: 3-5cm.	4150 05 .. HMI nr. 55586
20 x 30cm H: 5-7cm.	4151 05 .. HMI nr. 55587

Puderne er perfekte på grund af deres størrelse. Til understøttelse ved "Micro lejrning".



Lejringspude "Slange" bl.a. til 30gr. lejrning S-FORM - anatomisk lejringspude "Søhest" HMI nr.: 55599/ 55600 kan fås med inderpose samt lynlås på det aftagelige yderbetræk.

small - 30 x 200cm	4163 05 .. HMI nr. 55597
large - 30 x 260cm	4164 05 .. HMI nr. 55598
small - 180 / 32cm.	4170 05 .. HMI nr. 55599
large - 200 / 32cm.	4171 05 .. HMI nr. 55600

Slange-puden anvendes til side- og 30° lejrning. Puden kan enten placeres bagved brugerens ryg, eller hovedet kan støttes på puden, der herefter føres ned langs kroppen og til sidst ind imellem benene.

"Slangen" er velegnet til både 30- og 135° lejrning.



Lejringsrulle

20 x 100cm	4160 05 .. HMI nr. 55594
20 x 200cm	4161 05 .. HMI nr. 55595
20 x 260cm	4162 05 .. HMI nr. 55596

Lejringsrulle puden kan anvendes til side-lejrning samt evt. til kropstøtte ved ryg-lejrning.



U-FORM Lejringspude

160cm	4165 05 .. HMI nr. 55592
190cm	4166 05 .. HMI nr. 55593

På grund af sin U-form er denne pude yders velegnet til at give brugeren en god kropstøtte ved ryglejrning. Puden placeres bagved eller rundt om brugeren.







Produktliste, Lejringspuder mm.

Ekamed lejringspuder.

Forhandler: Surcon.

Tlf.: 86 55 70 45



Fax.: 86 55 71 45

Type.	Mål.	Bestillingsnr./HMI nr.	Beskrivelse																
 ØREPUDE	27 x 15 x 6cm.	4181 6503.- HMI nr. 65057	Ørepude med ovalt hul for at undgå tryk på selve øret.																
 Arm-/Hælpude Kileformet	18 x 40 x 8/0cm.	4169 0503.- HMI nr. 69442	Puden har to anvendelses muligheder. Puden kan anvendes til at løfte hælen i forbindelse forebyggende behandling af tryksår. Puden kan også anvendes til lejrning af en arm ved halvsidse lammelse.																
 Hoftepude Kileformet	36 x 30 -10/12cm.	4172 0503.- HMI nr. 69443	Hofte pude/ Abduktionkile anvendes til at støtte hoften samt spredning af ben så risikoen for Hoftelukation reduceres.																
 Hælpude med velcro strop (Skumfyldt pude)	25 x 20 x 5cm.	5830 1503.- HMI nr. 65055	En lille og praktisk hælpude med en bred elastikstrop så puden kan fikses til foden. Puden er skumfyldt og har som standard PU betræk med lynlås																
 Knæpude med velcro strop (Skumfyldt pude)	25 x 20 x 5cm	2018 1402.- HMI nr. 69441	Knæpuden er skumfyldt og har en elastisk velcro strop så puden kan fikses rundt om knæet. Bemærk: Stroppen må ikke strammes så den laver mærker i huden																
 Innovativ personbeskytter til montering på sengehest (Skumfyldt)		<table border="1"> <tbody> <tr><td>L= 60 cm, h= 35cm</td><td>97090004 HMI nr. 69377</td></tr> <tr><td>L= 60 cm, h= 40cm</td><td>4500 7503 HMI nr. 55588</td></tr> <tr><td>L= 80 cm, h= 35cm</td><td>97090007 HMI nr. 69378</td></tr> <tr><td>L= 80 cm, h= 40cm</td><td>4510 7503 HMI nr. 55589</td></tr> <tr><td>L= 90 cm, h= 35cm</td><td>97090001 HMI nr. 69379</td></tr> <tr><td>L= 90 cm, h= 40cm</td><td>4511-7503 HMI nr. 69380</td></tr> <tr><td>L= 110 cm, h= 35cm</td><td>97090036 HMI nr. 113237</td></tr> <tr><td>L= 110 cm, h= 40cm</td><td>97090008 HMI nr. 87032</td></tr> </tbody> </table>	L= 60 cm, h= 35cm	97090004 HMI nr. 69377	L= 60 cm, h= 40cm	4500 7503 HMI nr. 55588	L= 80 cm, h= 35cm	97090007 HMI nr. 69378	L= 80 cm, h= 40cm	4510 7503 HMI nr. 55589	L= 90 cm, h= 35cm	97090001 HMI nr. 69379	L= 90 cm, h= 40cm	4511-7503 HMI nr. 69380	L= 110 cm, h= 35cm	97090036 HMI nr. 113237	L= 110 cm, h= 40cm	97090008 HMI nr. 87032	Brugeren beskyttes effektivt mod slag, klemning, gnidnings-skader og shear. Man minimerer eventuelle opståede tryk-mærker på arme og ben og giver desuden en god beskyttelse, når man sidder på sengekanten. Beskytterne kan anvendes på både enkelt og <u>forhøjede sengeheste</u> .
L= 60 cm, h= 35cm	97090004 HMI nr. 69377																		
L= 60 cm, h= 40cm	4500 7503 HMI nr. 55588																		
L= 80 cm, h= 35cm	97090007 HMI nr. 69378																		
L= 80 cm, h= 40cm	4510 7503 HMI nr. 55589																		
L= 90 cm, h= 35cm	97090001 HMI nr. 69379																		
L= 90 cm, h= 40cm	4511-7503 HMI nr. 69380																		
L= 110 cm, h= 35cm	97090036 HMI nr. 113237																		
L= 110 cm, h= 40cm	97090008 HMI nr. 87032																		


Produktliste, Lejringspuder mm.

Ekamed lejringspuder.

Forhandler: Surcon. Tlf.: 86 55 70 45 Fax.: 86 55 71 45

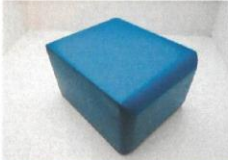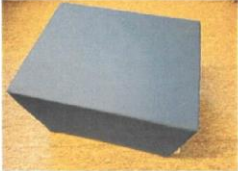Type.	Mål.	Bestillingsnr./HMI nr.	Beskrivelse
 Hygiejnepude	25 x 20 x 15 cm	97060246- HMI nr. 104859	Hygiejne pude anvendes ved intim vask. Puden er velegnet til personer som abducerer eller indadroterer meget i hoften. Puden er udført i hård koldskum med afrundet kanter. Overfalden er behandlet med PUR-Hud. Så betræk undgås.
 Rygstøttepude	50 x 40 x 35 cm	97060247- HMI nr. 104860	Rygstøtte puden anvendes til personer der har behov for rygstøtte, når de sidder på sengekanten. Størrelsen af puden medfører at den ligger meget stabilt, især når sengehesten i modsatte side anvendes som ekstra stabilisering af puden. Dermed kan personen trygt læne sig op af puden. Puden udført i koldskum med aftageligt PU- betræk.

- Surcon Care line ApS har i samarbejde med firmaerne ADL og *EKAMED* i Tyskland fået en stor ekspertise indenfor bl.a. udvikling, produktion- og salg af produkter til forebyggelse og behandling af tryksår, dynamiske madrasser, skum madrasser, lejringspuder og det sidste nye, et innovativt automatisk patient vende/tilt system **ekamove**.
- Kontakt os venligst på 8655 7045 for yderligere information vedrørende vore produkter

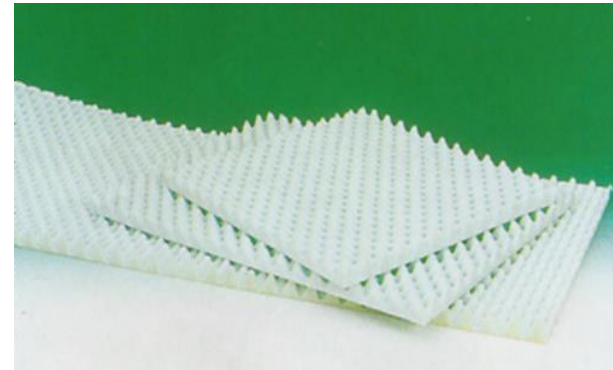

Forhandler :

Surcon care line ApS
Baunevej 7, Nim · 8740 Brædstrup

Tlf. 86 55 70 45 · Fax 86 55 71 45

E-mail: mail@surcon.dk ·

www.surcon.dk