

Brugsanvisning Blue Line badekarssæde



Vejledning:

- 1) Løsn de 4 fingerskruer **(A)** under sædet, og indstil sædet så det passer til badekarrets bredde - spænd efterfølgende de 4 fingerskruer igen
- 2) Placér badekarssædet i badekarret, hvor det ønskes
Skal hænge/ligge med bærearmene **(B)** på badekarrets kanter i hver side
- 3) Før brug bør det kontrolleres, at badekarssædet ligger sikkert og korrekt anbragt på badekarrets kanter
- 4) Den optimale anvendelse af badekarssædet opnås ved samtidig anvendelse af støttehåndtag og evt. badekarstrin



Vedligeholdelse:

Kontrollér jævnligt stel og sæde for skader og korrissionsangreb
Badekarssædet tåler rengøring med almindelige ikke-ætsende og ikke-ridsende rengøringsmidler
Den efterfølgende aftørring sker bedst med en tør blød klud

Maks. belastning: 135 kg.