

# Brugervejledning Toiletforhøjer


## Formål

Robust og rengøringsvenlig toiletforhøjer med stel af pulverlakeret, rustfrit stål, og opklappeligt toiletsæde. De skridsikre gummidupper, gør, at toiletforhøjeren altid står fast og stabilt.



## Tilpasningsmuligheder

Toiletstolen kan indstilles i højden ved hjælp af de grå plastic clips monteret på hvert teleskop ben, og kan indstilles til en siddehøjde på 43-60 cm.

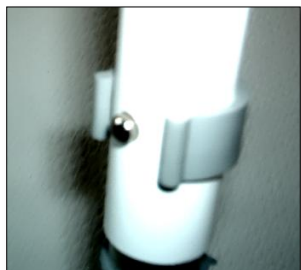

På hvert ben udtages den grå clips, benet trækkes til den ønskede længde, og clipsen påsættes igen.

**HUSK** at påsætte alle fire clips igen før brug!

## Rengøring og vedligeholdelse

Rengør toiletstolen med danske rengøringsprodukter, som ikke indeholder grove eller ætsende kemikalier. Benyt ikke opløsningsmiddel og klorin til rengøring!

## Advarsel!

Max. Brugervægt 130 Kg.



Faaborg Rehab Technic  
Smedemestervej 9, DK-5600 Faaborg.  
Tlf. + 45 70 20 55 53

E-mail: [fr@faaborg-rehab.dk](mailto:fr@faaborg-rehab.dk) [www.faaborg-rehab.dk](http://www.faaborg-rehab.dk)