

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion

Art. nr. 302024

Montage- og brugervejledning

(Og med montering af 24" hjul art. nr. 302017 som ekstra tilbehør)



Fabrikant:
MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danmark
www.mobilex.dk

1. Indledning

Kære kunde

Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger for at sikre en korrekt anvendelse. Før ibrugtagning er det vigtigt at læse brugervejledningen grundigt igennem. Det er særligt vigtigt at læse sikkerhedshenvisninger og følge disse.

Vi videreudvikler løbende vore produkter, og forbeholder os derfor ret til uden varsel at ændre produkterne.

Formålsbeskrivelse

Produktet er et medicinsk produkt som anvendes af ældre eller handicappede personer, der har brug for støtte og siddemulighed i forbindelse med bad og toiletbesøg. Anden anvendelse end beskrevet i formålsbeskrivelsen er ikke tilladt.

Ved spørgsmål bedes De henvende dem til forhandleren eller til Mobilex A/S direkte.

Mobilex A/S

Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex-care.com

2. Sikkerhedshenvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Der må ikke laves konstruktive ændringer på produktet uden producentens skriftlige tilladelse.
- I forbindelse med justeringer, sammenklapning m.m er der risiko for at klemme fingrene.
- Produktet må kun anvendes på et plant og stabilt underlag
- Produktet må ikke anvendes til at stå på.
- Alle hjul **SKAL** hele tiden være i kontakt med underlaget uden brug. Dette sikrer at produktet er i balance hvorved uheld undgås.
- Når produktet anvendes i stationære situationer skal hjulene låses.

Advarsel!

Hvis brugerne læner sig langt fremover f.ex for at nå et objekt, eller rykker frem på sædet f.ex i forbindelse med en forflytning **SKAL** fødderne placeres på gulvet, og derved fjerne noget af vægten fra stolen.

Fødderne må **IKKE** placeres på fodstøtterne når man ikke sidder i stolen, idet der derved opstår en risiko for at stolen tipper forover.

I forbindelse med forflytninger skal bremserne aktiveres.

3. Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Bade- toiletstolen har alle de normale funktioner som en standard badestol, og kan derudover bruges i forbindelse med toiletbesøg. Den er designet til brugere der har brug for siddestøtte under bad og toiletbesøg. Stolen kan tiltes så der kan opnås en aflastende og stabil siddestilling, og der er monteret en hovedstøtte. Stolen er fremstillet af aluminium og er derfor korrosionsbestandig.

Stolen leveres i en kasse, adskilt, for at spare plads under transport.

Indholdet er:

- 1 ramme med sæde
- 1 ryg
- 1 hovedstøtte
- 2 fodstøtter
- 4 hjul med bremse
- 4 bolte og møtrikker for montering af hjul
- 1 spand med lås
- 1 PU lås for at dække sædets udkæring
- 1 brugervejledning



Montagebeskrivelse

Bade- toiletstolen monteres som på billedet overfor. Vi anbefaler følgende rækkefølge:

Start kontrol

- Tag alle dele ud af kassen og check at alle dele er der. Hvis der mangler noget skal der tages kontakt til forhandleren øjeblikkeligt.

Hovedramme

- Vend rammen på hovedet og sæt den på gulvet. Nu ses de 4 huller til montering af hjul.

Hjul

- Indsæt hjulenes monteringsrør i hver rørende.
- Der er boret 2 huller (A & B) i såvel monteringsrøret på hjulet og i rammen. Hjulene kan monteres i 3 forskellige højder.
- Sørg for at alle hjul er monteret til samme højde. Fastspænd boltene forsvarligt.
- Nu vendes rammen om.



Bremser

- Lås hjulenes bremser før der fortsættes. Bremserve aktiveres ved at træde ned på trædepladen på den foreste del af hjulet.
- For senere at låse bremsen op løftes trædepladen igen med foden.



- Lås altid hjulenes bremser når stolen ikke benyttes.
- Lås altid hjulenes bremser ved ind- og udstigning af stolen.

Ryglæn

- Monter ryggens rør i de 2 montagehuller på bagsiden af rammen.
- Fastgør ryggen ved at dreje på grebene.

Hovedstøtte


- Monter hovedstøttens vertikale rør med beslaget på skubbe-bøjlen.
- Juster hovedstøtten til den ønskede højde og skru grebet fast.

Toiletspand


- Monter låget på spanden (Bill. 1)
- Skub det ind i skinnerne monteret under sædet. Gøres fra bagsiden af stolen (Bill. 2)
- Læg det sorte PU afdækningslåg på plads (Bill. 3)



Bill. 1

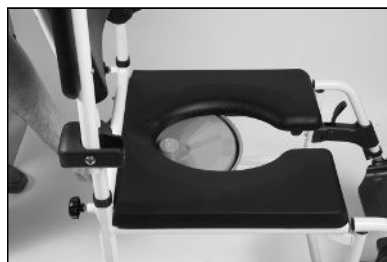

Bill. 2

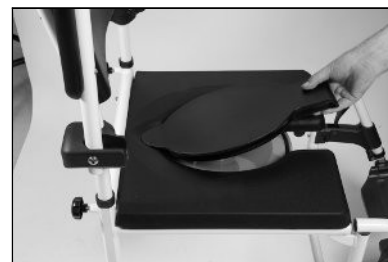

Bill. 3

Benstøtter


- Monter fodstøtterne ved at isætte plastproppen i toppen af fodstøtterne i rørenderne i rammefronten
- Drej derefter fodstøtten til den låser
- For at afmontere fodstøtten igen drejes den 90° udad og løftes opad.

Armlæn

- Armlænene kan let klappes op til lodret position.
- For at få dem tilbage, trykkes de let nedad igen.

Tippefunktionen

- Stolen er udstyret med en tippefunktion der gør det muligt at tippe sædet -5 til +25°.
- Sidde vinklen kan reguleres ved at betjene grebet på kørebøjlen. Når grebet er aktiveret kan stolen bevæges op og ned. Se billede til højre.
- Brugeren må ikke sidde i stolen ved maximal vinkelindstilling frem eller tilbage uden opsyn.

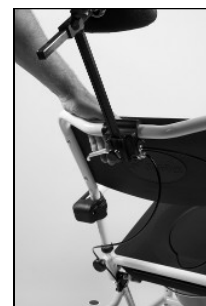

Transport beskrivelse

Bade-toiletstolen er ikke beregnet til hyppig transport. Hvis det er nødvendigt at transportere den og der ikke er tilstrækkelig plads til rådighed til at transportere den usamlet, anbefales det at adskille den omvendt af montagebeskrivelsen.

Tilbehør - Ekstra udstyr

Montering af sikkerhedssele (ekstra tilbehør)

Det er muligt at montere en sikkerhedssele på stolen. Det er vigtigt at sikkerhedssele har løkker i enderne, som eksempelvis sikkerhedssele fra Mobilex art. nr. 233012. Løkkerne anbringes på rammen af stolen ved at løfte ryglænet op som på billede 6.

Vær opmærksom på at vende selet så spændet vender fremad inden ryglænet igen påsættes og selet er monteret som på billede 7.



Bill. 6: Åbent ryglæn




Bill. 7: Sele monteret

Montering af 24" baghjul (ekstra udstyr)

Det er muligt at udskifte de 2 bageste 5" hjul med 24" hjul. Alle dele, inkl. monteringsbeslag og bremsesystem findes i tilbehørssættet art. nr. 302017.

- Aftag de 2 bageste 5" hjul ved at løsne boltene.
- Placer monteringsbeslagene som vist på billede 8.
- Der er boret flere huller i rammen for at muliggøre højdejustering. Vælg en højde og isæt og fastgør monteringsboltene med de tilhørende bolte og skiver.
- Tryk på quick release akslen der er placeret i midten af hjulene. Isæt akslen i beslagene så langt ind den kan komme og slip trykknappen (bill. 9).
- Tag fat i hjulene og kontroller at de sidder helt fast.
- For at aftage hjulene trykkes på trykknappen samtidig med at der rykkes i hjulet med den anden hånd.
- Efter montage af 24" hjul kan det være nødvendigt at justere de forreste hjul så stolen står vandret.
- Når 24" hjul monteres er det nødvendigt at montere normale kørestols bremsesystemer.
- Bremsesystemet består af montageklammer, selve bremsen og 2 fixeringsbolte.
- Indsæt bremsens justeringsprofil i bremseklammens mindste åbning.
- Placer montageklammen på stolen horisontale rør som vist på billede 11.
- Flyt bremsen indtil friktionsbolten næsten rører dækket.
- Fastfør boltene så bremsen sidder stabilt.
For at aktivere bremsesystemet skubbes bremsehåndtaget fremad. For at slippe bremsen trækkes håndtaget bagud.

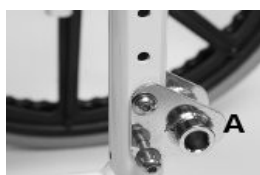

Bill. 8: Hjulophæng monteret på rammen



Bill. 9: 24" hjulet med quickrelease aksel



Bill. 10: Afdækningskappe på 24" hjul.



Bill. 11: Montering af bremsesystem på rammen.






Bill. 12: Kontrol om bremsesystem griber fat i dækket på hjulet.

4. Tekniske data

Bade- toiletstol	302024	302024 med 24" hjul tilbehørs kit 302017
Total højde (justerbar):	90 - 95 cm (i 25 mm trin)	90 - 95 cm (i 25 mm trin)
Sæde bredde:	48 cm	48 cm
Total bredde:	60 cm	68 cm
Max. bredde mellem armlæn	49,5	49,5
Sæde dybde	43 cm	43 cm
Sæde højde (justerbar)	49-54 cm (i 25 mm trin)	49-54 cm (i 25 mm trin)
Ryg højde	47 cm	47 cm
Total vægt:	15,9 kg	18,8 kg
Max. belastning	130 kg	130 kg

Type skilt

Typeskiltet er placeret nederst på rammen

	Shower chair with tilt
MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK - 8660 Skanderborg Tel: +45 87 93 22 20 www.mobilex.dk	 ↓ Max. 130 kg
 Produced <input type="text"/>	Serial no. <input type="text"/>

5. Vedligeholdelse og pleje

Pleje:

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler, og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

Produktet er normalt vedligeholdelsesfrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der foretages af en fagmand.

Advarsel!

Ved anvendelse af stolen under meget kalkholdigt vand, kan en kalkbinding på hjullejer og andre bevægelige dele forekomme. I dette tilfælde kan der rengøres med et kalkopløsende middel og derefter smøres med smørreolie.

Advarsel!

Ved anvendelse i meget klorholdige omgivelser vil ekstra stærk korrosion forekomme, og garantien vil bortfalde.

6. Generel problemafhjælpning

Hvad er der sket?	Hvad kan være grunden?	Hvad skal jeg gøre?
Badestolen er ikke stabil	Hjulene er justeret til forskellige højder.	Juster alle hjulene til samme højde.
Hjulene drejer ikke let.	Der har samlet sig skidt på hjulenes aksler.	Rengør hjulenes aksler for skidt.
Tilt funktionen virker ikke	Mulig fejl i gascylinderen	Kontakt forhandleren

7. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

8. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktive ændringer på produktet uden vores skriftlige accept bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte.

Garantien omfatter ikke erstatning for manglende benyttelse under reparation, og der ydes ikke erstatning for skader der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

9. Konformitetserklæring

Mobilex A/S, Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg, Danmark, erklærer hermed, at

Bade- Toiletstol med tilt 302024

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:

- **Retningslinjer 93/42/EWG for medicinsk udstyr,
Del I fra 14 Juni 1993**

Lars Nygaard
Adm. Direktør
Mobilex A/S



Skanderborg, den 5/8-2009

.....
Underskrift

•