

PD 6A Hjælpemotor

Spar hjælperens kræfter, og lad PD 6A skubbe kørestolen.

Der monteres beslag på den manuelle kørestol, således PD 6A nemt kan af- og påmonteres efter behov.

- Enkel betjening
- Kan monteres på de fleste manuelle kørestole
- Nem at transportere i bil/bus/tog
- Nem afmontering af batteri
- Speederen er placeret ergonomisk korrekt, hvilket minimerer belastning af hjælper
- Køre-/skubbe knap på venstre og højre håndtag
- Indstillelig hastighed
- Batteriindikator
- Højde indstilleligt styr
- Kan køre fremad og baglæns



Tekniske specifikationer:

Vægt, total:

Med 7 Ah batterier: 22 kg

Med 12 Ah batterier: 27 kg

Vægt uden batterier: 14 kg

Vægt batterier, 7 Ah: 8 kg

Vægt batterier, 12 Ah: 13 kg

Hastighed: op til 5,8 km/t

Vægt som kan skubbes: 115 kg

Rækkevidde (teoretisk): 10 km

Stigeevne: 3° (= 5%)

Max. forhindrings højde: 5 cm

Dæk: Punkterfrie, PU, 200x50

Varenr. 100632

HMI nr. 64479



BRUGSANVISNING PD 6A HJÆLPEMOTOR

Inden du kører ud med PD 6A hjælpemotoren - venligst læs denne vejledning nøje igennem.

PD 6A hjælpemotoren er en batteridrevet hjælpemotor, der kan monteres på en manuel kørestol. Hjælpemotoren er nem at af- og påmontere. Monteringsbeslaget er fastmonteret på den manuelle kørestol.

Monteringsbeslaget forhindrer ikke, at en sammenklappelig kørestol, kan klappes sammen.

PD 6A hjælpemotoren er beregnet til at blive betjent af et voksent menneske med kræfter i arme og ben til sikkert at kunne styre hjælpemotor og kørestol.


PD 6A hjælpemotoren er beregnet til indendørs brug eller udendørs brug på fortove eller lignende faste gangarealer.

PD 6A har ikke lys eller reflekser påmonteret.

Start med at øve kørsel af hjælpemotor og kørestol uden bruger, således der opnås følelse med styringen af kørestolen.

Klar til at køre:

Inden du starter hjælpemotoren – skal du gøre dig bekendt med instrumentbordet på styret.

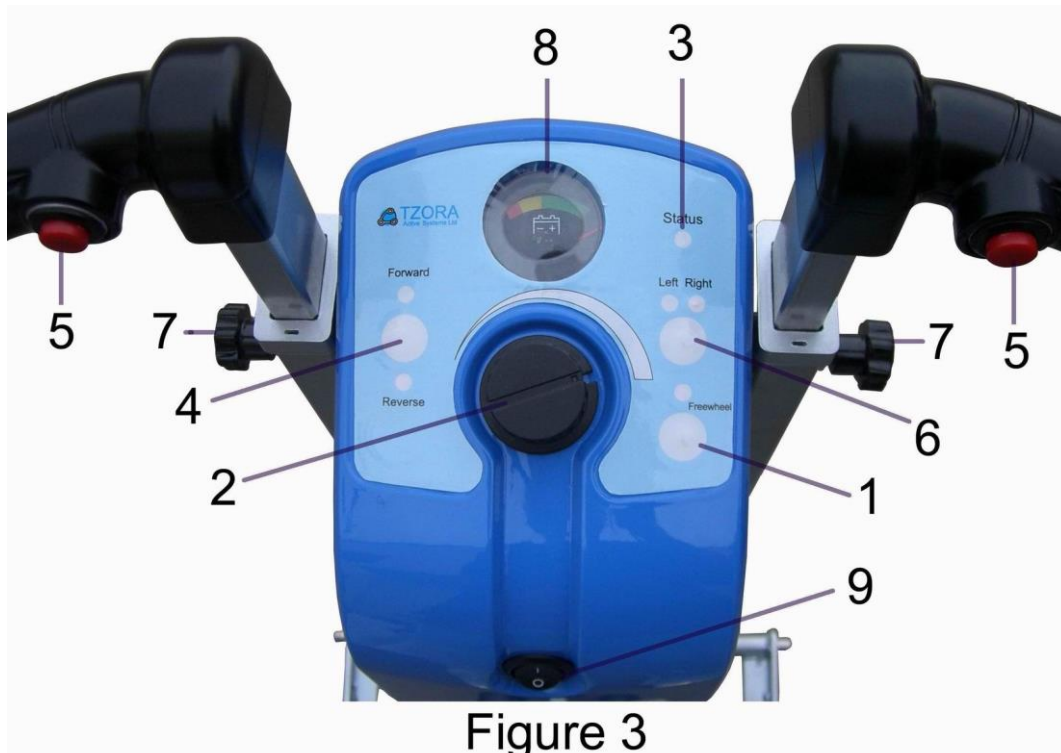

Markeringerne på billedet af instrumentbordet:

1. Friløbs trykknop (freewheel)
2. Drejeknap for hastighedsregulering
3. Indikatorlampe for tændt hjælpemotor og status
4. Fremad (forward) – baglæns (reverse) kørsels vælger
5. Køre-/skubbe knap (venstre/højre)
6. Knap for valg af højre (right) eller venstre (left) hånds betjening
7. Håndskruer for justering af højde på styr
8. Batterimåler
9. Tænd/sluk knap

Inden du tænder for hjælpemotoren, drej hastighedsregulatoren mod laveste hastighed (mod venstre, mod uret).

Vælg forlæns (forward) eller baglæns (reverse) kørsel.

Sørg for, at kørestolsbrugeren har benene placeret på fodstøtterne eller har benene løftet fra jorden, samt at kørestolsbrugeren ikke har hænderne placeret på de drivende hjul på kørestolen.

Hastigheden kan reguleres op ved at dreje på hastighedsreguleringsknappen (mod højre, med uret).

Vær opmærksom på omgivelserne, når du kører. Vælg den hastighed, der passer til det underlag du kører på.

Ved kørsel indendørs anbefales, at man kører med lav hastighed.

Sæt farten ned, når der drejes.

Når hjælpemotoren er i fart, må der ikke pludseligt slukkes på tænd/sluk knappen.

Når køre-/skubbe knappen (venstre/højre) slippes, vil farten gradvist tages af kørestolen, og bremsen vil automatisk slå til.

Når hjælpemotoren ikke anvendes bør den slukkes.

Batteripakken:

Batteripakken på hjælpemotoren ser således ud:

1. Låse pinde
2. Håndtag
3. Batteri skjold
4. Batteri ladestik
5. Hoved sikring (halv automatisk)



Figure 4

Hjælpemotoren:



Figure 2

1. Kontrol panel
2. Håndtag
3. Pedal til afmontering/adskillelse
4. Håndskrue for justering af højde på styr
5. Tænd/sluk knap
6. Ladestik
7. Monterings arm
8. Lader

Monterings- og afmonterings vejledning:

Batteripakken skal være opladet inden PD 6A anvendes.

Montering:

1. Tænd for hjælpemotoren på tænd/sluk knappen. Check, at der er lys i batteri indikator lampen.

2. Check at bremserne er slået til på kørestolen, og at kørestolsbrugeren sidder godt.

3. Placér hjælpemotoren bag ved kørestolen, mellem baghjulene. Tag fat i håndtagene på hjælpemotoren og træk den skråt bagud.

4. Tryk på friløbs knappen – friløbs lampen vil da lyse. Tryk på køre-/skubbe knappen (venstre/højre) for at få bremsen til at slippe og rul hjælpemotoren fremad, således monterings armen på hjælpemotoren tager fat i beslaget på kørestolen. Fortsæt indtil monterings armen falder i hak med beslaget på kørestolen.

5. Fortsæt med at have friløbet slået til og rejs hjælpemotoren til stående position, indtil monterings armen er på plads. Slå friløbet fra.

6. Bremsere på kørestolen kan nu slås fra, og der kan køres.

Afmontering:

1. Inden afmontering af hjælpemotoren, skal kørestolen med brugeren parkeres på et fladt underlag, og kørestolens bremser skal være slået til.

2. For at afmontere, vælg baglæns kørsel (reverse), tryk på friløbsknappen (freewheel), træd pedalen for afmontering ned med foden og læn hjælpemotoren baglæns. Slip pedalen for afmontering og tryk på køreknappen, træk hjælpemotoren bagud indtil den er fri af kørestolen.

Opladning:

Sørg altid for at hjælpemotoren er fuldt opladet, inden udkørsel.

Man kan oplade batterierne i batteripakken enten når de sidder fastmonteret på hjælpemotoren (se illustration under afsnit Hjælpemotoren, punkt 6), eller man kan afmontere batteripakken og oplade batterierne direkte i batteripakken (se illustration under afsnit Batteripakken, punkt 4)

Batteripakken kan afmonteres ved træk i håndtaget. Ved montering af batteripakken skal man sikre, at låsepindene kommer rigtigt på plads, når håndtaget slippes igen.

Hjælpemotoren skal altid være slukket, når man fjerner eller påsætter batteripakken.



Opladning foregår ved hjælp af medfølgende oplader.

1. Hvis der lades op via ladestikket på hjælpemotoren, skal hjælpemotoren være slukket under opladning.
2. Laderens netledning isættes stikkontakten. Check at der er lys i laderen, og at stikkontakten virker og er tændt.
3. Tilslut laderens stik til ladestikket på hjælpemotoren/batteripakken. Vær opmærksom på, at ladestikket fra laderen skal vendes, så benene i stikket passer med hullerne i ladestikket på hjælpemotoren/batteripakken.
4. Sæt hjælpemotoren/batteripakken til opladning natten over, hver gang den har været i brug. Bruges den ikke i en længere periode, skal batterierne holdes opladet.
5. Ved afbrydelse af opladningen, sluk for strømmen inden stikket fjernes fra hjælpemotoren/batteripakken.
6. Når der er slukket for strømmen, **SKAL** stikket fjernes fra hjælpemotoren/batteripakken, idet der ellers vil foregå afladning.

Man kan ikke overoplade batterierne.

Batterimåleren:

Batterimåleren viser hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet. Viseren bevæger sig fra højre mod venstre (grøn-gul-rød) efterhånden som strømmen på batterierne forbruges. Når batterimålerens viser er i det grønne felt, er der fuld strømkapacitet på batterierne. Når batterimålerens viser er i det gule felt, er der nogen strømkapacitet på batterierne. Når batterimålerens viser er i det røde felt, skal batterierne genoplades.

Lyset i batterimåleren vil blinke langsomt, når batterikapaciteten på hjælpemotoren er lav.

Sikker kørsel:

Kørestolen skal være forsynet med anti-tip hjul.

Når man vil køre op/ned af bump, rampe eller kantstens op-/nedkørsler slippes kørselsknappen, og friløbsknappen anvendes for manuel kørsel og fuld kontrol.

Ved kørsel op/ned (bump, rampe, kantstens op-/nedkørsler o.l.) altid lige op - og altid begge baghjul op/ned samtidig. Skæv vinkel kan medføre tipning!

Undgå tipning - skift ikke pludselig retning ved kørsel i fuld fart.

Huller i belægningen, græstotter og sten på fortovet kan medføre, at kørslen ikke kan ske ubesværet. I sådanne situationer skal køreknappen slippes, således motoren deaktiveres.

Friløb:

Friløbsknappen anvendes, når det er nødvendigt at slå hjælpemotorens bremses fra, og flytte kørestolen uden brug af hjælpemotorens kraft.

Friløbsknappen må kun aktiveres på et fladt underlag. Vær opmærksom på at aktivere bremsene på den manuelle kørestol, således denne ikke ved en fejl kommer i drift.

Friløbsknappen kan kun aktiveres når hjælpemotoren er helt stoppet.

Sørg altid for, at friløbsknappen er deaktiveret og hjælpemotoren dermed er bremses, inden kørestolsbrugeren sætter sig i kørestolen.

Vedligeholdelse:

PD 6A er praktisk taget vedligeholdelsesfri. Batterierne er lukkede og kræver ingen vedligeholdelse.

PD 6A bør holdes ren og pæn ved regelmæssig aftørring af skjold og stel med en hårdt opvredet klud. Ved rengøring undgå vand og fugt på de elektriske komponenter og ledninger. PD 6A må ikke spules eller overhældes med vand.

Praktiske råd:

Skulle et servicebehov opstå - venligst kontakt din Kommune, hvis der er bevilget herfra. Har du købt selv - kan du kontakte **BEK** direkte.