

Falck 5700 Kari StyringsBoks ver.3

Varenr. 402 002



ABILIA


GEWA AB | FALCK IGEL

Innholdsfortegnelse

Montering av Kari StyringsBoks	3
Sikkerhetsprosedyre	4
Nå kan du koble til	4
Slik bruker du Kari StyringsBoks	5
Valg av Funksjoner	5
Å låse/ låse opp den valgte funksjonen	5
AV/PÅ-funksjonen	5
Slik virker AV/PÅ funksjonen	5
Å låse/ låse opp AV/PÅ funksjonen	5
Skjelvefilter	6
Nå kan du stille inn ønsket tid	6
Slik virker skjelvefilteret	6
Å låse/ låse opp denne funksjonen	6
HOLD - funksjon	7
Slik virker hold- funksjonen	7
Å låse/ låse opp HOLD-funksjonen	7
TID - funksjon	8
Nå kan du stille inn ønsket tid	8
Slik virker TID- funksjonen	8
Å låse/ låse opp TID funksjonen du har valgt	8
TRYKK – funksjon (bevisst valg)	9
Nå kan du stille inn ønsket tid	9
Slik virker TRYKK- funksjonen	9
Å låse/ låse opp TRYKK- funksjonen	9
IR-funksjonen	10
IR-programmering.....	12
Slik slettes IR- koder på Kari.....	12
Tekniske spesifikasjoner	13
Virker/virker ikke	13
Vedlikehold	13
Funksjoner.....	14
Tilbehør	15
Sikkerhet	15

Falck 5700 Kari StyringsBoks er et hjelpemiddel for personer med funksjonshemninger som har behov for å forenkle betjening av elektrisk utstyr, batteridrevne gjenstander eller IR-styrte apparater.

Montering av Kari StyringsBoks

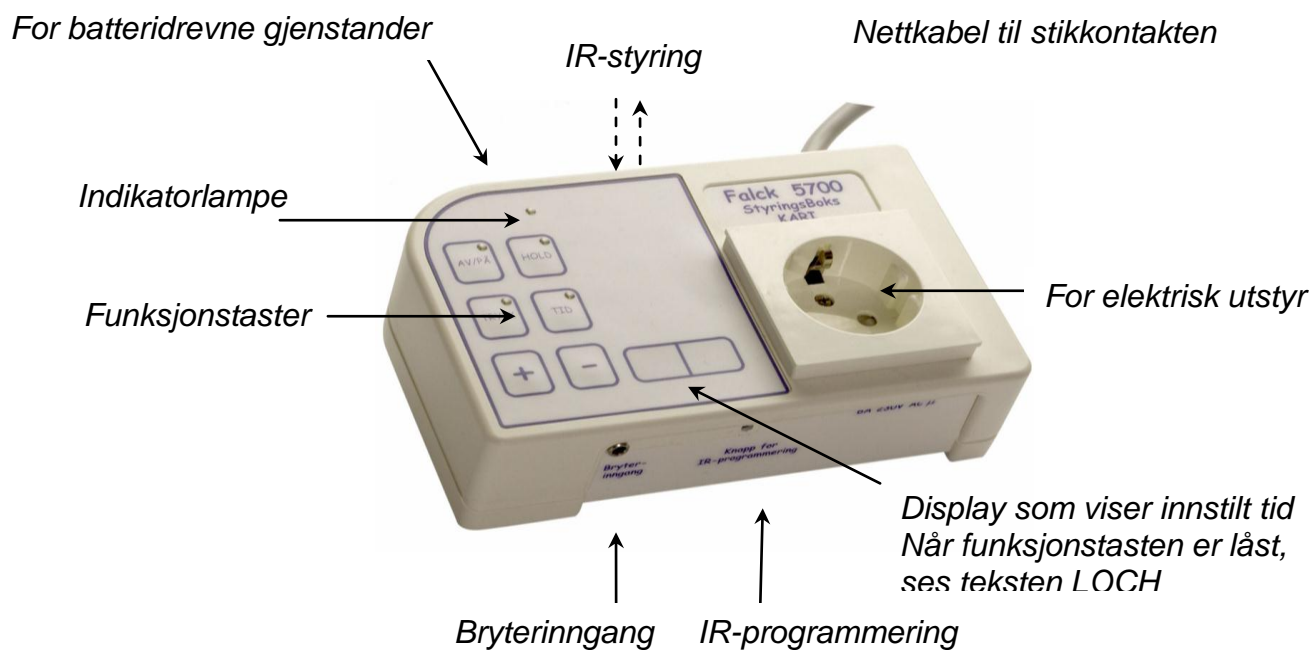

Slik monterer du Kari

Inngangen:

1. Koble en hvilken som helst bryter, f.eks. en JellyBean, til inngang merket «Bryterinngang» på forsiden av boksen.
2. Koble boksens nettkabel til stikkkontakten i veggen.
Når du trykker på bryteren vil den grønne indikatorlampen lyse hvis Styringsboksen er aktiv. Indikatorlampen vil slukke når du igjen trykker på bryteren. Da er Styringsboksen avslått.
3. La Kari være avslått før du går videre.

Utgangene:

Det er 3 utganger på Styringsboksen:

- 1 for batteridrevne gjenstander
- 1 for elektriske utstyr (230 volt)
- 1 for bryterstyring av IR betjent apparater

Alle utgangene slår seg av/på samtidig.

Sikkerhetsprosedyre

- Sørg for at den grønne indikatorlampen er slukket (Styringsboksen er avslått) før du kobler utstyr til noen av utgangene. Om indikatorlampen lyser, slås den av ved å trykke en gang på bryteren.

Dette er en sikkerhet i tilfelle du er i ferd med å koble en mixmaster eller lignende til styringsboksen. Dersom lampen lyser idet du kobler utstyret til, vil det starte umiddelbart og kunne forårsake skade.

- Den funksjonen som er valgt vil hele tiden være markert med et grønt lys.

Du kan låse den funksjonen du har valgt.

Framgangsmåten finner du under punktet: *Slik bruker du Kari StyringsBoks*, og under *den funksjonen du har valgt*. Når en funksjonstast er låst, ses teksten LOCH i displayet på Kari. Kari må låses på nytt igjen etter sletting av IR- kodene.

- Kari StyringsBoks er ikke laget for bruk i våtrom.

- IR-styrte apparater (f.eks. TV) bør av sikkerhetsmessige årsaker være avslått med hovedbryteren om natten.

Nå kan du koble til

- En batteridrevet gjenstand, f.eks. en kassettspiller, radio eller leke.
- Elektrisk utstyr (230Volt), f.eks. en lampe, vifte, radio, kassettspiller, foodprosessor, massasjepute, hårføner etc.
- Programmere Kari til å betjene IR-betjent apparater, f.eks. CD spiller, Video, TV, div leker.

Slik bruker du Kari StyringsBoks

Valg av Funksjoner

- Ved oppstart vil den funksjonen som er valgt være markert med et grønt lys.
- Den valgte funksjon vil lyse hele tiden, slik at du alltid vet hvilken innstilling som er foretatt.
- Dersom du har satt opp et tidsintervall, vil dette være synlig i displayet idet du kobler til strøm og når du trykker på (+)/(-) tasten eller en annen tast som er forbundet med tid.

Å låse/ låse opp den valgte funksjonen

Trykk og hold inne valgt funksjonstast og (+) tasten samtidig i 4 sek til det står Loch i displayet. Lås opp på samme måte og Loch forsvinner fra displayet.

AV/PÅ-funksjonen

Trykk på tasten for AV/PÅ.

Lyset i tasten viser at AV/PÅ- funksjonen er valgt. Samtidig vil TidsDisplayet vise 00-00. Dette vil slås av etter ca. 10 sek dersom ingen taster betjenes i tidsrommet, eller det slukkes straks du trykker på den tilkoblede bryteren.

Slik virker AV/PÅ funksjonen

Det første brytertrykket vil slå på utgangene og det neste vil slå av

Å låse/ låse opp AV/PÅ funksjonen

Trykk og hold samtidig inne AV/PÅ tasten og (+) tasten i 4 sek til det står Loch i displayet.

Hvis Kari StyringsBoks har vært frakoblet strømmettet, og du tar den i bruk igjen, vil det i 2 sek stå 00-00 i displayet før det står Loch i displayet.

Lås opp på samme måte: Trykk og hold tastene inne til teksten Loch forsvinner fra displayet.

Skjelvefilter

Trykk på tasten AV/PÅ.

Lyset i tasten viser at AV/PÅ- funksjonen er valgt. Samtidig vil du se at TidsDisplayet viser 00-00.

Nå kan du stille inn ønsket tid

- Trykk og hold (+) eller (–) tasten og tallene endres.
- Still inn ønsket tid ved å trykke på (+) eller (–) tasten.
- Trykk ett og ett trykk til ønsket tid er satt.

TidsDisplayet slukker etter ca. 10 sek hvis ingen taster betjenes i tidsrommet, eller det slukkes straks du trykker på den tilkoblede bryteren.

Slik virker skjelvefilteret

Det første brytertrykket vil slå utgangene PÅ, og indikatorlampen lyser. Neste trykk (AV) vil ikke la seg gjennomføre før den innstilte tiden er utløpt. Dermed ignoreres raske og ukontrollerte (skjelvende) trykk på bryteren som ellers ville bidratt til å slå av utgangene ufrivillig.

Å låse/ låse opp denne funksjonen

Trykk og hold samtidig inne AV/PÅ tasten og (+) tasten i 4 sek til det står Loch i displayet.

Hvis Kari StyringsBoks har vært frakoblet strømmettet, og du tar den i bruk igjen, vil du i 2 sek se hvor mye tid funksjonen er satt til før det står Loch i displayet.

Lås opp på samme måte: Trykk og hold tastene inne til teksten Loch forsvinner fra displayet.

HOLD - funksjon

Trykk på tasten HOLD, og lyset i tasten viser at HOLD-funksjonen er valgt.

Slik virker HOLD- funksjonen

Så lenge bryteren holdes inne vil utgangene være aktiv (Indikatorlampen vil lyse).

Så fort du slipper bryteren vil utgangene slås av (Indikatorlampen slukkes).

Å låse/ låse opp HOLD-funksjonen

Trykk og hold samtidig inne HOLD- tasten og (+) tasten i 4 sek til det står Loch i displayet.

Hvis Kari StyringsBoks har vært frakoblet strømmettet, og du tar den i bruk igjen, vil det ta 2 sek før det står Loch i displayet.

Lås opp på samme måte: Trykk og hold tastene inne til teksten Loch forsvinner fra displayet.

TID - funksjon

Trykk på tasten TID, og lyset i tasten viser at TID- funksjonen er valgt. Samtidig vil TidsDisplayet vise 00-01.

Nå kan du stille inn ønsket tid

- Trykk og hold (+) eller (–) tasten og tallene endres.
- Still inn ønsket tid ved fortsatt å trykke på (+) eller (–) tasten.
- Tellingen vil gå hurtigere etter at du har trykket ca. 2 sek.

For å senke farten igjen trykkes ett og ett trykk til ønsket tid er satt. TidsDisplayet slukker etter ca. 10 sek hvis ingen taster betjenes i tidsrommet, eller det slukkes straks du trykker på den tilkoblede bryteren.

Slik virker TID- funksjonen

Det første brytertrykket vil slå på utgangene. Etter at den innstilte tiden er utløpt, vil utgangene slås automatisk av (lampen slukker).

Om Tidsinnstillingen

Tidsinnstillingen er eksakt.

Tidsinnstillingen kan settes fra 1 sek til 99 minutter og 59 sek.

Å låse/ låse opp TID funksjonen du har valgt

Trykk og hold samtidig inne TID-tasten og (+) tasten i 4 sek til det står Loch i displayet.

Hvis Kari StyringsBoks har vært frakoblet strømmettet, og du tar den i bruk igjen, vil du i 2 sek se hvor mye tid funksjonen er satt til før det står Loch i displayet.

Lås opp på samme måte: Trykk og hold tastene inne til teksten Loch forsvinner fra displayet.

TRYKK – funksjon (bevisst valg)

Trykk på tasten TRYKK, og lyset i tasten viser at Trykkfunksjonen er valgt.

Samtidig vil TidsDisplayet vise 00-01.

Nå kan du stille inn ønsket tid

- Trykk og hold (+) eller (–) tasten og tallene endres.
- Still inn ønsket tid ved fortsatt å trykke på (+) eller (–) tasten.
- Tellingene vil gå hurtigere etter at du har trykket ca. 2 sek.

For å senke farten igjen trykkes ett og ett trykk til ønsket tid er satt. TidsDisplayet slukker etter ca. 10 sek hvis ingen taster betjenes i tidsrommet, eller det slukkes straks du trykker på den tilkoblede bryteren.

Slik virker TRYKK- funksjonen

Funksjonen er lik På/Av funksjonen, men har en forsinkelse.

Om en benytter denne innstillingen må bryteren holdes nede i den innstilte tiden for at den skal aktiveres.

Å låse/ låse opp TRYKK- funksjonen

Trykk og hold samtidig inne TRYKK-tasten og (+) tasten i 4 sek til det står Loch i displayet.

Hvis Kari StyringsBoks har vært frakoblet strømmettet og du tar den i bruk igjen, vil du i 2 sek se hvor mye tid funksjonen er satt til før det står Loch i displayet.

Lås opp på samme måte: Trykk og hold tastene inne til teksten Loch forsvinner fra displayet.

IR-funksjonen

IR-funksjonen til Kari StyringsBoks er programmerbar, dvs at IR-signaler fra en ordinær fjernkontroll kan overføres til Kari.

Du kan bryterstyre TV, Video, CD-spiller og annet IR-utstyr. Vær oppmerksom på at enkelte leker har en forhåndsbestemt lengde på IR-signalet som ikke kan overstyres med funksjonene TID og HOLD. Dette må testes ut i forhold til hver enkelt leke.

Kari fungerer da som en forenklet fjernkontroll som kan bryterstyres.

Plasser Kari slik at ledning eller gjenstander ikke hindrer IR signalene i å nå fram.

Slik overføres IR- signaler til Kari StyringsBoks:

Før du starter programmeringen:

- En valgfri bryter må være tilkoblet "Bryterinngang", og Kari tilkoblet strømmettet.
- Legg den ordinære fjernkontrollen ca. 10 cm fra og vendt mot "vindu for IR" (bak på Kari StyringsBoks) -se illustrasjon side 12.
- Dersom du har opphold i programmeringen lengre enn 10 sek, eller trykker på en annen tast før du overfører IR signalene, vil programmeringen bli avbrutt, og du må starte på nytt.
- Overfør 2 IR signaler fra en ordinær fjernkontroll.
- IR-styrte apparater som skal bryterstyres tilkobles strømmettet, ikke til Kari.
- Sjekk at ingen ledning eller gjenstander er i veien for overføring av IR-signaler.
- Dersom samme signal (eks PÅ / AV eller play / pause) skal overføres for både PÅ og AV på Kari, må det gjøres med **to påfølgende trykk** fra originalkontrollen. Et mellomliggende trykk på samme eller en annen tast på originalfjernkontrollen kan medføre feil i programmeringen. Ved feil, prøv fra start igjen.
- Sterkt lys fra sol eller lysstoffrør kan gi IR- støy og forårsake feil i programmeringen.

Skjerm området mellom fjernkontrollen og IR vinduet på Kari mens du programmerer, dersom det er mye slikt lys i rommet: Hold hånden over som en tunnel, dekk området med et lokk, en boks eller lignende for å skjerme mot uønsket IR-lys.

Programmering

Slik programmeres Kari til å bryterstyre en TV.

1. Trykk og hold en spiss gjenstand (f.eks. en penn) i hullet merket "Knapp for IR programmering" (foran på Kari StyringsBoks)
2. Hold pennen inne til to streker lyser i TidsDisplayet
3. Trykk på Bryteren. TidsDisplayet vil da vise P(å)- A(v).
4. Trykk på (+) for å legge inn det første IR signalet. Da vil P-(å) være synlig i TidsDisplayet.
5. Trykk et *kort* trykk på fjernkontrollen for å legge inn ønsket TV-kanal.
6. Så lenge IR-overføringen pågår, vil signalet "løpe" i TidsDisplayet. Når signalet er overført, slukkes TidsDisplayet og det lyser i funksjonstasten du har valgt.
7. For å legge inn den andre funksjonen starter du på nytt fra pkt 1. Når du kommer til pkt 4, trykker du (-) tasten. Da vil A-(v) være synlig i TidsDisplayet. Trykk på funksjonen du ønsker å overføre fra den ordinære fjernkontrollen, f.eks AV. Når lyset i TidsDisplayet slokker og det lyser i funksjonstasten, er overføringen avsluttet, og Kari kan tas i bruk.

Dersom Kari's funksjonstast AV/PÅ lyser, vil det første brytertrykket slå på TV-kanalen som er valgt og det neste brytertrykket vil slå av TV.

Du kan velge blant funksjonstastene på Kari for å tilpasse bryterstyringen slik det er ønskelig.

Velger du f.eks. å sette TID til 30 sek, blir TV slått av etter innstilt tid.

Velger du HOLD, vil TV være på så lenge bryteren holdes nede.

Tips: Dersom en CD-spiller skal styres, kan det være lurt å velge signalene (Play) og (Pause), eller (Play/ Pause) fra den ordinære fjernkontrollen. Da vil musikken fortsette der den slapp.

IR-programmering

- Se til at ingen gjenstander hindrer overføring av IR-signaler.



Slik slettes IR- koder på Kari

- Hold programmeringsknappen inne i ca. 10 sek til du ser 8 streker (4 i hvert felt) i tidsdisplayet.
- Trykk og hold tastene: (Trykk), (AV/PÅ) og (HOLD) samtidig til du ser 00 00 i tidsdisplayet. IR kodene er nå slettet og lampen i den funksjonstasten som er i bruk (eks. AV/PÅ) slås på.
- **NB! Ønsker du fortsatt at den funksjonen du har valgt skal være låst? Etter sletting av en IR- kode, må du låse den valgte funksjonen på nytt.**

Tekniske spesifikasjoner

Nett tilkobling

- 230 VAC / 6A 50Hz

Bryter- inngang

- Hvilken som helst momentanbryter med Ø 3,5mm Jack-plugg (mono)

Utganger

- 230Volt utgang
- Sikring:6A (Maksimum belastning: 1320 Watt)
- Spenningsfri utgang for batteridrevne gjenstander (0Volt, NO)
- IR- utgang med mulighet for 2 signaler

Indikatorlampe:

Lyser grønt når utgangene er aktive.

Mål og vekt

(bxhxd) 160 x 100 x 45 mm

607 g

Virker/virker ikke

Kari StyringsBoks virker sammen med de fleste IR- styrte apparater, men ikke med alle. Dette gjelder alle Bang Olufsen og flere Salora apparater. Det kan også gjelde for andre. Er du i tvil, ta kontakt med oss.


Vedlikehold

Hjelpemiddelet kan rengjøres med en klut lett fuktet i lunkent såpevann, men må ikke nedsenkes i væske.

NB! Ta ut stikkontakten før rengjøring.

Funksjoner

- Av / På
- Hold
- Tid
- Trykk & IR

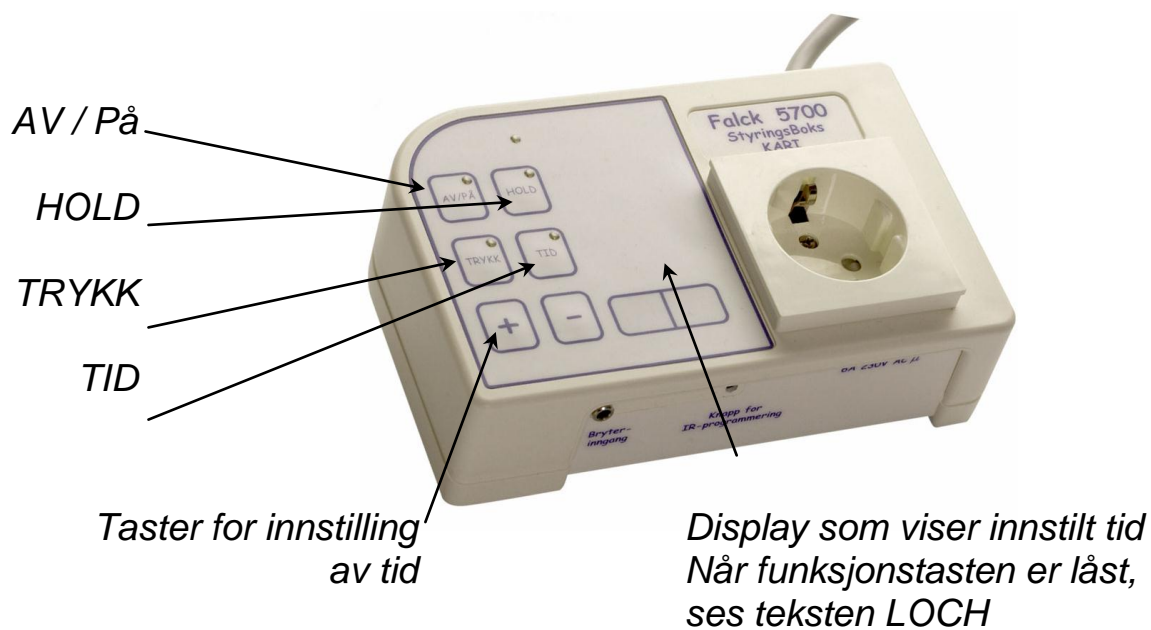

Tilbehør

Falck 5725 Fjernbetjening, sender/mottaker (sender i BigRed bryter)

Falck 5701 Lydbryter

Falck 6708 Duett

BigRed bryter

JellyBean bryter

Slim Armstrong Monteringsarm til brytere

Universal Festestativ til brytere

Monteringsplater

Snap

Ultrastik

Batteridrevne apparater

Vifte

Batterileke med kabel

Lekekabel for tilpasning av batterileker

Sikkerhet

Abilia har utarbeidet risikoanalyse for produktet i henhold til NS-EN 1441 for Medisinsk utstyr. Produktets brukerveiledning og tekniske spesifikasjon er utarbeidet med tanke på sikkerhetsvurderingene som er gjort i dette dokument.

Ved idriftsettelse og daglig bruk av produktet er det alltid viktig å tenke på sikkerheten. Det er i en brukerveiledning ikke mulig å beskrive alle måter man ikke må bruke produktet på.

Hvis du er i tvil om du har satt i drift eller innstilt produktet korrekt anbefaler vi at du tar kontakt med din leverandør.

Abilia AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tap som følge av bruk, feil bruk, manglende oppfølging, feil innstilling, feil oppkobling eller lignende. Abilia AS` økonomiske ansvar er i alle tilfeller begrenset til verdien av selve produktet.

