

Brugsanvisning Butler metalstativ Til armstrømper



Påtagning:

- 1) Placér strømpepåtageren på et skridsikkert underlag (f.eks. Posey skridsikkert underlag)
- 2) Rul armstrømpen med vrangen ud over den halvrunde cylinder - sørg for, at sømmen ikke løber mod midten, men at den flyttes lidt
- 3) Læg stativet ned
Til stabilisering lægges den forreste vinkel an mod bordkanten (armstrømper til højre arm mod højre og armstrømper til venstre arm mod venstre)



- 4) Før armen ensartet - uden at dreje den - ind i armstrømpen
- 5) Kontrollér endnu en gang, at armstrømpen sidder korrekt og smøg evt. silikonebåndet eller lignende op



Kan rengøres med almindelige rengørings- eller desinfektionsmidler

Mål

Butler metalstativ Til armstrømper

Butler metalstativ til armstrømper M **(A)**

Højde/længde **(A1)** = 25 cm.

Bredde **(A2)** = 24 cm.

Dybde **(A3)** = 22 cm.

Bredde strømpeareal **(A4)** = 11 cm.

Vægt: 700 gram

Butler metalstativ til armstrømper L **(B)**

Højde/længde **(B1)** = 25 cm.

Bredde **(B2)** = 26 cm.

Dybde **(B3)** = 22 cm.

Bredde strømpeareal **(B4)** = 12,5 cm.

Vægt: 700 gram

