


YDUN-badebænke



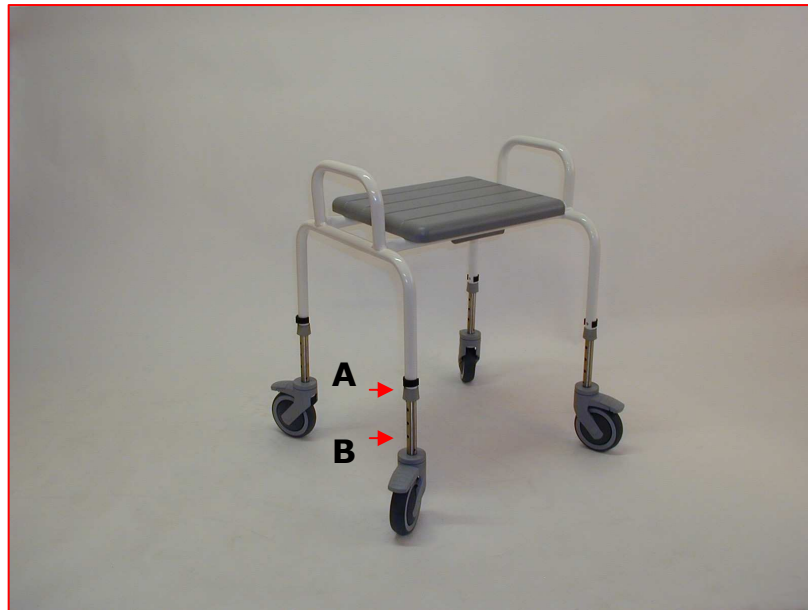

Indstil badebænkens ben, **før brugeren tager plads !**
Brugeren skal siddende kunne støtte fladt på gulvet med sine fødder:


1. Træk benets låseclip (A) ud.
2. Træk/ skub teleskopbenet (B), indtil den ønskede længde nås.
3. Sæt benets låseclip i igen. **SØRG FOR, at alle låseclips sidder forsvarligt fast.**
4. På **YDUN 5** låses hjulene. Sørg for, at de ikke "peger" indunder badebænken.

Stående ved siden af, foran eller bag badebænken bør man ikke belaste **badebænkens sidehåndtag** med hele sin vægt, da tipningsfare kan opstå herved.

Stående ved siden af, foran eller bag badebænken bør man heller ikke anvende **ryglænet** – hvis et ryglæn er monteret – som ståstøtte, da tipningsfare kan opstå herved.



Max. belastning: 150 kg.

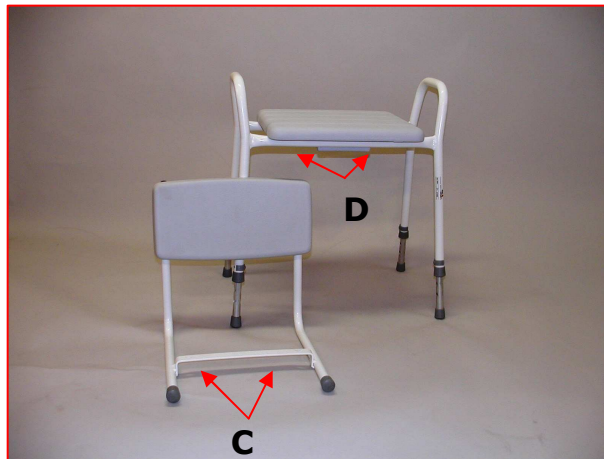

Montering af ryglæn model URD – HMI-nr. 25482:

1. Læg badebænken på siden – fx på en bademåtte.
2. Placér ryglænet således, at de to huller (C) i ryglænets tværgående bøjle glider ind over de to bolte (D), som er monteret under badebænkens sæde.
3. Skru derefter ryglænet fast med de to medfølgende håndhjul.
4. Rejs badebænken op og kontrollér, at ryglænet sidder forsvarligt.

Vedligeholdelse:

- Kontrollér jævnligt håndhjulene (ved ryglænsmontering) – efterspænd om nødvendigt.
- Kontrollér regelmæssigt sæde, låseclips, teleskopben og gummidupper for skader – udskift om nødvendigt. Hellere én gang for meget end én for lidt.
- Ved skråtstilling må forskydningen fra den ene side til den anden max. være to huller (i teleskopbenene).
- Hjulene på model **YDUN 5** checkes regelmæssigt og efterspændes om nødvendigt. De skal holdes fri af hår og snavs for at bevare maksimal køreevne.
- Badebænken tåler rengøring med almindelige (ikke-ætsende) rengøringsmidler.

dan-rehab a/s , Messingvej 13-15, DK-8940 Randers SV, erklærer på eget ansvar, at **YDUN 1, 2, 3, 4, 5 og 6**, som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med EU-Direktiv 2007/47/EC, DIN EN ISO 12182