

LASAL

Favner

Brugsanvisning

Maj 2018

CE



www.lasal.dk

Indholdsfortegnelse

Kære kunde	2
Generel information	3
Før ibrugtagning	3
Produktbeskrivelse	3
Materialer	3
Mærkning	4
Anvendelse	4
Rengøring	4
Vedligeholdelse og opbevaring	5
Sikkerhedsinformation	5
Bortskaffelse	6
Reklamation og returnering	6
Levetid og reklamationsret	6
Symbolforklaring	7
Kontaktoplysninger	8

Kære kunde

Vi vil gerne takke dig for købet af LASAL Favner. Vi er overbeviste om, at de vil blive til daglig glæde for dig og dine omgivelser.

Denne brugermanual omhandler nyttige oplysninger omkring produktet, så som beskrivelse, vedligeholdelse, sikkerhedsrisiko og tekniske data.

Vi beder dig læse manualen grundigt igennem inden produkterne tages i brug og gemme den til senere brug.

Med venlig hilsen

LASAL A/S

Generel information

LASAL Favner anvendes som hjælpemiddel ved rehabilitering og opfylder kravene for CE- mærkning for produkter i Klasse 1. Puderne er produceret i overensstemmelse med EU Direktiv 93/42/EEC 1993 og standard EN 12182: 2012 samt EN ISO 14971: 2012.

Før ibrugtagning

Kontrollér altid, at alle produkter er intakte og ikke beskadigede. Anvend ikke skadede eller defekte produkter. Kontakt leverandøren og informér om skadens omfang.

Produktbeskrivelse

LASAL Favner findes i én facon i tre størrelser. Kombinationen af de små polystyrenkugler i et fleksibelt betræk, samt yderbetræk i bomuld gør, at puderne former sig individuelt efter brugeren og underlaget. LASAL Favner er ikke eftergivelig, men i formbar og glider derfor ikke som en almindelig pude kan gøre. Det medfølgende bælte bruges til at holde favneren på plads i kørestol/stol. Til alle størrelser fås et kulørt betræk i bomuld og som ekstra tilbehør fås også et hygiejnebetræk.

Materialer

Fyld: Brandhæmmede EPS perler (ekspanderet polystyren)

Inderpude: PU –belagt flammehæmmet polyestertekstil. Mug og svamp resistent. Allergitestet.

Yderbetræk: 100% ÖKO tex certificeret perlebomuld– Materialet er ikke flammehæmmet.

Hygiejnebetræk: PU-belagt flammehæmmet polyestertekstil. Mug og svamp resistent. Allergitestet.

Betrækket på inderpuden samt hygiejnebetrækket er begge PU belagt, hvilket vil sige at det er vandafvisende og åndbart.

Mærkning

Produktet er mærket i henhold til gældende lovgivning om medicinsk udstyr jf. EU Direktiv 93/42EEC 1993. Etiket med information om fabrikant, varemærke, advarsler, artikelnummer, årstal for fremstilling, råvarer og vaskeanvisning er monteret på inderpuden og indvendigt i betrækkene. Symbolforklaring på label: Der henvises til punktet **symbolforklaring**.

Anvendelse

LASAL Favner kan anvendes af både børn og voksne og bruges til at støtte og aflaste personer i forskellige situationer, eksempelvis i kørestolen, stolen eller sengen. Pudens formbarhed giver lejringsen en større overflade, hvilket føles komfortabelt og er aflastende for brugeren. Kombineret med LASALs store og varierede sortiment af lejringspuder i forskellige størrelser og faconer er det muligt at skabe en individuel stilling for den enkelte bruger. Pudens tætte berøring ind til kroppen er ligeså medvirkende til at skabe en følelse af ro og tryghed. Det er nemt og enkelt at ændre på stillingen, ligesom det er en nødvendighed for at skabe afveksling og hindre komplikationer, forårsaget af immobilitet, i at opstå. Se endvidere LASAL produktguide for yderligere anvendelse.

Trods høj komfort og maksimal trykfordeling er LASAL Favner ikke et antidecubitus produkt.

Rengøring

Yderbetræk (100% bomuld): Vask anbefales ved 60° C for kulørt betræk. Ved højere varmegrader vil det påvirke farven, som vil bleges med tiden. Det anbefales at kulørt betræk vaskes separat.

Husk at fjerne bæltet før vask.

Inderpuden (Polyester PU): Aftørres med vand tilsat rengøringsmiddel, klor éngangsklude (max. 1000 ppm) eller sprit.

Må ikke maskinvaskes. Polystyrenkuglerne smelter ved varmegrader over 71° C. Polystyrenkugler, der kommer i kontakt med varmeelementerne i en vaske- eller tørremaskine, kan derfor skade sådanne maskiner.

Vær opmærksom på, at pH-værdien på det anvendte desinficeringsmiddel ikke bør være højere end 11,4.

Undgå skyllemidler og andre tilsætningsstoffer, som indeholder opløsningsmidler.

Hygiejnebetræk (Polyester PU): Tåler vask og tørretumbler ved max. 95° C. Tåler sprit og alle industrielle vaskepulvere, herunder Virkon samt éngangsklude med klor (max. 1000 ppm).

Vær opmærksom på, at pH-værdien på det anvendte desinficeringsmiddel max bør være 11,4.

Det anbefales at vaske belagte tekstiler sammen med ubelagte tekstiler i forholdet 1:1, således at der sikres tilstrækkelige kanaler til transport af vandet, når tekstilerne presses sammen.

Undgå skyllemidler og andre tilsætningsstoffer, som indeholder opløsningsmidler.









Vedligeholdelse og opbevaring

Udover almindelig rengøring, kræver LASAL Favner ingen særlig vedligeholdelse.

Puden skal opbevares tørt og ved almindelig rumtemperatur. Undgå at puden kommer i berøring med skarpe eller spidse genstande eller bliver revet på ru overflader. Undgå direkte sollys i længere tid.

Sikkerhedsinformation

Læs altid brugsvejledningen inden ibrugtagning af produktet! Produktet må kun anvendes til det som er beskrevet i denne manual.

-  Det er vigtigt at brugeren positioneres således at luftvejene holdes frie. Vær ekstra opmærksom på børn under 3 år og personer som ikke kan forflytte sig af egen hjælp eller tage vare på sig selv.
-  Placér aldrig produktet således, at det kan blokere luftvejene.
-  Undgå skarpe og ru genstande mod produktet, da dette ville kunne gøre skade og i værste fald rive hul på produktet. Som eksempel; Undgå at få klemt puderne i sengehesten eller fx hjul og andre dele på kørestolen.
-  Fyldet må ikke spises eller puttes i mund, øre, næse eller øjne.
-  Anvend ikke puder der er gået i stykker.
-  Produktet må ikke anvendes i nærheden af eller i kontakt med brandkilder eller varme overflader, såsom åben ild, brændeovne, cigaretter eller varmelamper. Fyld og inderpuden er behandlet med flammehæmmer og er brandtestet på Dansk Teknologisk Institut (ISO 12952-1:2012 og ISO 12952-2:2012).
-  Anvend ikke puderne i kombination med varmetæpper, da det formodentligt vil føles for varmt og blive til ubehag for brugeren.
-  Anvend ikke computer eller andet elektrisk udstyr i eller på favneren, da udstyret ikke kan komme af med varmen og derfor kan blive overophedet og i værste fald antænde.

Bortskaffelse

Puderne bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald (brandbart affald).

Sker der lækage på inderpuden, således at fyldet løber ud, kan dette med fordel fjernes med en støvsuger og derefter destrueres.

Reklamation og returnering

Reklamationer skal meldes til producenten hurtigst muligt og med beskrivelse af problemet. Returnering kan kun ske efter aftale og direkte til producenten. Transportskade skal meldes til transportfirmaet straks ved modtagelsen.

Levetid og reklamationsret

Produktet har en forventet levetid på 3 år.

Levetiden er baseret på korrekt brug, rengøring, pleje og vedligehold. Produkter som anvendes udover ovennævnte levetid, skal vurderes for fremtidig anvendelse. Det er brugerens ansvar løbende at vurdere om produktet kan anvendes udover den angivne levetid.

Produktet er omfattet af 2-årig reklamationsret jf. Dansk Købelov. Dette gælder ikke for normalt slid eller forringelse af produktet. Producenten påtager sig intet ansvar for skader på produktet eller brugeren, der er opstået pga. transport, misbrug, uagtsom brug af produktet, forkert håndtering eller pleje. Ej heller tilpasninger foretaget af andre end producenten.

Symbolforklaring - vask og vedligehold

LASAL Favner er mærket med følgende symboler:



Må ikke vaskes



Vaskes ved max. 60° C



Vaskes ved max. 95° C



Må ikke bleges



Må ikke tørretumbles



Må gerne tørretumbles ved max. 60° C



Må ikke stryges



Tåler strygning ved høj temperatur



Må ikke renses



Advarsel - se brugsanvisning, sikkerhedsinformation



Må ikke anvendes i nærheden af åben ild



Undgå kontakt med skarpe genstande



Bortskaffes som almindeligt affald (brændbart)



CE-mærket iht. 93/42/EEC 1993

Eksempel på mærkning af henholdsvis pude og betræk:

LASAL
 Lejringspude
 Positioning Cushion
Betræk Favner, L
Cover Embracer, L
 Varenr. / Item No. 6403
 100% bomuld
 100% Cotton

Vaskes med lignende farver.
 Wash with similar colours.

⚠ Sørg for at holde luftvejene frie.
 Be sure to keep the airways free.

🔥 Undgå brug af ild i nærheden af puderne.
 Keep away from fire.

✂ Undgå kontakt m/skarpe/spidse genstande.
 Avoid contact with sharp/pointed items.

♻ Bortskaffes som almindeligt affald.
 To be disposed of as ordinary waste.

Producent / manufacturer
 CE LASAL A/S
 Industrivej 15, DK-8881 Thorsø
 Tlf.: +45 8696 6666
 www.lasal.dk

2017

Produktionsår

LASAL
 Lejringspude
 Positioning Cushion
Favner, L
Embracer, L
 Varenr. / Item No. 6401

PU-belagt polyester
 PU coated Polyester

Fyld af brandhæmmede EPS-perler.
 Filling from flame retarded EPS beads.

⚠ Sørg for at holde luftvejene frie.
 Be sure to keep the airways free.

🔥 Undgå brug af ild i nærheden af puderne.
 Keep away from fire.

✂ Undgå kontakt m/skarpe/spidse genstande.
 Avoid contact with sharp/pointed items.

♻ Bortskaffes som almindeligt affald.
 To be disposed of as ordinary waste.

Producent / manufacturer
 CE LASAL A/S
 Industrivej 15, DK-8881 Thorsø
 Tlf.: +45 8696 6666
 www.lasal.dk

2017

Favneren produceres af:

LASAL A/S

Kontaktinformationer:

LASAL A/S

Industrivej 15

DK- 8881 Thorsø



Tlf.: +45 8696 6666

e-mail: info@lasal.dk

Internet: www.lasal.dk



LASAL A/S, Industrivej 15, DK-8881 Thorsø

E-mail: info@lasal.dk  +45 8696 6666  www.lasal.dk

CVR Nr. DK 1437 8677