



SOFTLOO

Before use / Før brug

1.

Inflate the Softloo until firm using the pump.

Pust Softlooen op ved hjælp af pumpen til det er godt spændt ud.

2. Fold the edge over the inflated ring.

Fold overkanten ned over bækkenet.

3. Place the into the Softloo.

Læg indlægget ned i Softlooen.

Aften use / Efter brug

4. Deflate the Softloo by releasing the sealing tape.

Luk luften ud ved at trække i udluftningsventilen

5. Remove the blue adhesive.

Fjern den blå tapestrimmel

6. Seal the Softloo and deflate it.

Tape kanten sammen og luk luften ud.