


SEAGULL®

Pilleboks med 4 timere

Specielt designet til at hjælpe med at huske at tage medicinen på de rigtige tidspunkter.

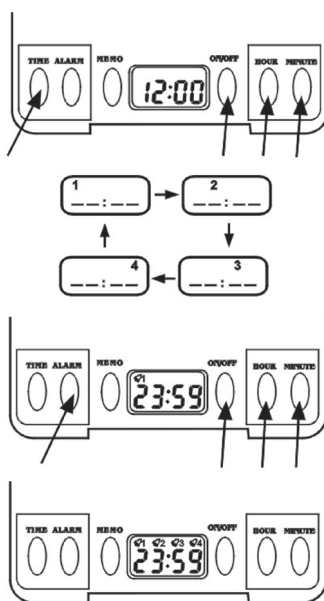


Brugervejledning

Indstil ur

Tryk TIME og tallene blinker
Tryk på HOUR for at indstille timer, MINUTE for at indstille minutter
Tryk ON/OFF for at gemme indstillingen
TRYK ON/OFF for at skifte imellem 12 og 24 timers ur

Indstil alarm

Metode 1: Anvendes såfremt medicinen skal tages på bestemte tidspunkter hver dag.

Tryk ALARM indtil det ønskede alarmnummer blinker.
Tryk HOUR og MINUTE til det ønskede tidspunkt står i displayet
Tryk på ON/OFF indtil alarmsymbolet  lyser for at aktivere alarmerne.
Tryk på ALARM igen for at skifte til næste alarmnummer og gentag indstillingen.
Tryk TIME for at skifte til klokkeslæt på uret

Metode 2: Såfremt medicinen skal tages hver 24. time, kan MEMO anvendes. Et tryk på denne knap sætter alarm til præcis 24 timer senere.


Alarmerne lyder

Det lille symbol ved alarmnummeret blinker, når det er den alarm, som bipper. Ligeledes er der forskel på lydene, så man kan høre hvilken alarm, der bipper. Tryk på ON/OFF for at slå alarmerne fra

Glemt alarm

Snooze funktionen minder dig om, at du har glemt at tage pillerne. Den bipper hvert 3. minut i 30 minutter, indtil du trykker på en knap.

Afbryd alarm, så den ikke bipper om 1 døgn

Tryk ALARM indtil den ønskede alarm blinker
Tryk ON/OFF indtil alarmsymbolet  forsvinder.
Tryk ALARM igen for at deaktivere den næste alarm.

Udskift batterier

Åben batterihuset på bagsiden af pilleboksen med din negl
Udskift 3V (CR2025) batteriet. Husk at + skal vende op

Anvendelse

Låget skal åbnes i begge sider, før det kan skubbes op.
Låget knækker, hvis det trykkes helt bagover (mere end 100°).

Indhold: pilleboks og prøvebatteri.

