



Danish **CARE** Supply  
- fremtidens hjælpemidler

# SLIP-FOD

Beregnet til på- og aftagning af korte og lange kompressionsstrømper med åben og lukket tå.

Vi anbefaler brug af handsker sammen med slip i forbindelse med på- og aftagning af kompressionsstrømper. Slip-Fod findes i to bredder.

SÆT X	HMI-nr.	Varenr.	Varetekst	Lægomkreds i cm	Mål på slip	
					Bredde i cm	Længde i cm
	72623	3010	SLIP - FOD	Op til 40	19	95
	72624	3011	SLIP - FOD - BRED	Over 40	36	95



[www.danishcaresupply.dk](http://www.danishcaresupply.dk)

Danmarks største udvalg af strømpe på- og aftagere



## > Påtagning

**1.** Sæt benet over kors eller buk dig ned til foden.



**A.** Åben tå: luk velcroen så der bliver dannet en lille fold, som du sætter på tæerne.



**B.** Lukket tå: Sæt slippen mellem tæerne.



**2.** Sæt strømpen på foden og træk strømpen op ad benet.



**3.** Tag handsker på og gnid med flad hånd strømpen rundt om hælen.



**4.** Træk strømpen helt op.



**4.** Åben velcroen og træk i den del af slippen, der vender væk fra huden og træk slippen ud.



## > Aftagning



**1.** Lav en løkke af glidestykket rundt om anklen, så hælen er dækket. Hold godt fast i glidestykket.



**2.** Fold strømpekanten ud over glidestykket og træk strømpen ned om hælen.



**3.** Tag handsker på. Gnid med flad hånd strømpen af hælen og træk strømpen af.



**4.** Tag handsker på og glid strømpen rundt om hælen til strømpen kommer af.

## > Hvis det kniber med på- og aftagning?



Hvis det kniber med at få strømpen rundt om hælen i på- og/eller aftagning af kompressionsstrømper, kan vi anbefale at anvende en blå friktionsplade.



**Rengøring:** Vaskes i hånden ved max 30° C.

**Materiale:** Blød spilderdug



Youtube  
Video





Vi har markedets største sortiment og know-how indenfor på- og aftagning af kompressionsstrømper. Vi hjælper dig gerne med at udvælge det rette hjælpemiddel, som passer bedst til dine behov.

Kontakt os på telefon: 221 1 8616 eller på mail: [dcs@danishcaresupply.dk](mailto:dcs@danishcaresupply.dk)

#### ➤ På- og aftagere



#### ➤ Doff N' Donner



#### ➤ Glidestykker - på/af



#### ➤ Elektrisk aftager



#### ➤ Handsker



#### ➤ Spilerdug



Få mere inspiration på vores webshop [www.danishcaresupply.dk](http://www.danishcaresupply.dk) eller besøg gerne vores fysiske butik i Randers på Agerskallet 1 – 8920 Randers NV. Vi har et stort program indenfor småhjælpemidler, som kan gøre hverdagen lidt lettere.

**På gensyn...**

### Danish CARE Supply

Agerskallet 1

8920 Randers NV

Telefon: +45 2211 8616

E-mail: [dcs@danishcaresupply.dk](mailto:dcs@danishcaresupply.dk)

[www.danishcaresupply.dk](http://www.danishcaresupply.dk)



Følg os på  
**facebook**

[facebook.com/danishcaresupply](https://facebook.com/danishcaresupply)